

QUICKSTART SEDEO PRO ZITKUSSENS



WELK ZITSTEEEM?

Gebruik de voorgesloten gaten in het zitkussen die geschikt zijn voor het zitstelsel dat op de rolstoel zit.

ZITDIEPTE SEDEO PRO Q-SERIE

SEDEO PRO ZITDIEPTE	EFFECTIEVE ZITDIEPTE		SEDEO PRO Q-SERIE ZITDIEPTE	EFFECTIEVE ZITDIEPTE
48 cm	44 - 52 cm	→	50 cm	44 - 52 cm
54 cm	47 - 56 cm	→	56 cm	50 - 59 cm
58 cm	51 - 60 cm	→		

VAN SEDEO PRO Q-SERIE NAAR SEDEO PRO


Plaats de Sedeo Pro klemmen op de juiste positie.

LOSSE ONDERDELEN

De Sedeo Pro Q-Serie zitkussens worden standaard geleverd met Sedeo Pro klemmen voor montage op de Breezy Ibis en Puma 20/40.

Los te bestellen:

1010953 SEDEO PRO zitkussens montage set
1014587 SEDEO ORIGINAL bevestigingsset zitting

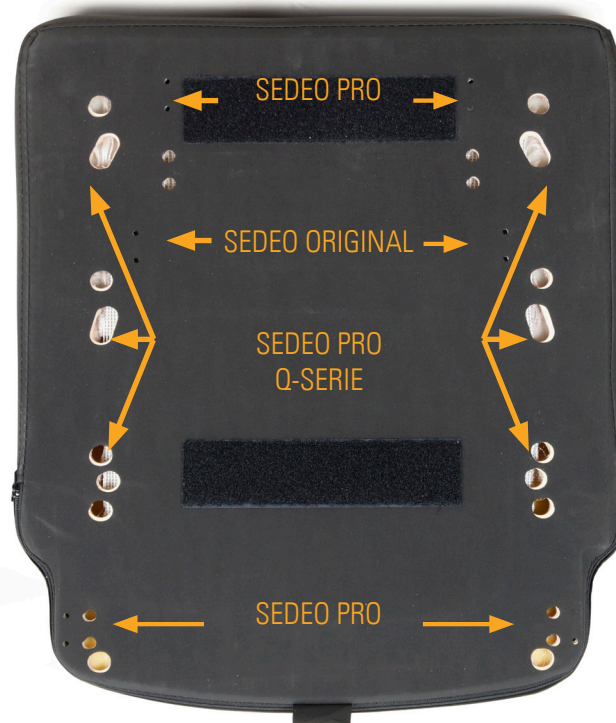

SEDEO PRO Q-SERIE



SEDEO PRO
IBIS EN PUMA 20/40



QUICKSTART SEDEO PRO RUGKUSSENS



VAN SEDEO PRO Q-SERIE NAAR SEDEO PRO

Verwijder de hoogte verstellersrail, de gaten zitten al in de rugleuning. Plaats de Sedeo Pro klemmen.

LOSSE ONDERDELEN

De Sedeo Pro Q-Serie rugkussens worden standaard geleverd met klemmen voor montage op de Breezy Ibis en Puma 20/40.

Los te bestellen:

1010889 SEDEO PRO rugkussen montageset
1014586 SEDEO ORIGINAL bevestigingsset rug



SEDEO PRO Q-SERIE



SEDEO PRO
IBIS EN PUMA 20/40

