

# QUICKSTART SEDEO PRO COUSSINS D'ASSISE



## QUEL SYSTÈME D'ASSISE ?

Utilisez les trous pré-perçés dans les coussins d'assise qui conviennent au système d'assise du fauteuil roulant.

## PROFONDEUR D'ASSISE SEDO PRO Q-SERIE

| SEDEO PRO PROFONDEUR D'ASSISE | PROFONDEUR D'ASSISE UTILE |   | SEDEO PRO Q-SERIE PROFONDEUR D'ASSISE | PROFONDEUR D'ASSISE UTILE |
|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 48 cm                         | 44 - 52 cm                | → | 50 cm                                 | 44 - 52 cm                |
| 54 cm                         | 47 - 56 cm                | ↔ | 56 cm                                 | 50 - 59 cm                |
| 58 cm                         | 51 - 60 cm                | → |                                       |                           |

## DE SEDEO PRO Q-SERIE À SEDEO PRO


Placez les pinces Sedeo Pro dans la bonne position.

## PIÈCES DÉTACHÉES

Les coussins d'assise de la Sedeo Pro Q-Serie sont fournis par défaut avec les pinces Sedeo Pro pour montage sur Ibis et Puma 20/40

## À commander séparément :

1010953 kit de montage pour coussins d'assise SEDEO PRO  
1014587 kit de fixation du siège SEDO ORIGINAL

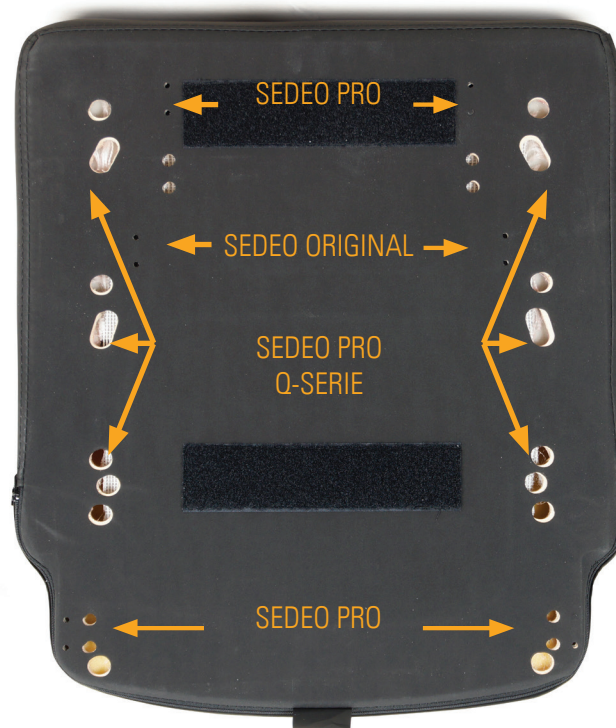

SEDEO PRO Q-SERIE



SEDEO PRO  
IBIS ET PUMA 20/40



# QUICKSTART SEDEO PRO COUSSINS DE DOSSIER



## DE SEDEO PRO Q-SERIE À SEDEO PRO

Retirez le rail de réglage en hauteur, les trous sont déjà pré-perçés dans le dossier. Placez les pinces Sedeo Pro.

## PIÈCES DÉTACHÉES

Les coussins de dossier de la Sedeo Pro Q-Serie sont fournis par défaut avec les pinces Sedeo Pro pour montage sur Ibis et Puma 20/40.

## À commander séparément :

1010889 kit de montage pour coussins de dos SEDEO PRO  
1014586 kit de fixation du dossier SEDO ORIGINAL



SEDEO PRO Q-SERIE



SEDEO PRO  
IBIS ET PUMA 20/40

