


▷ **QUICKIE** GPV-LIJN

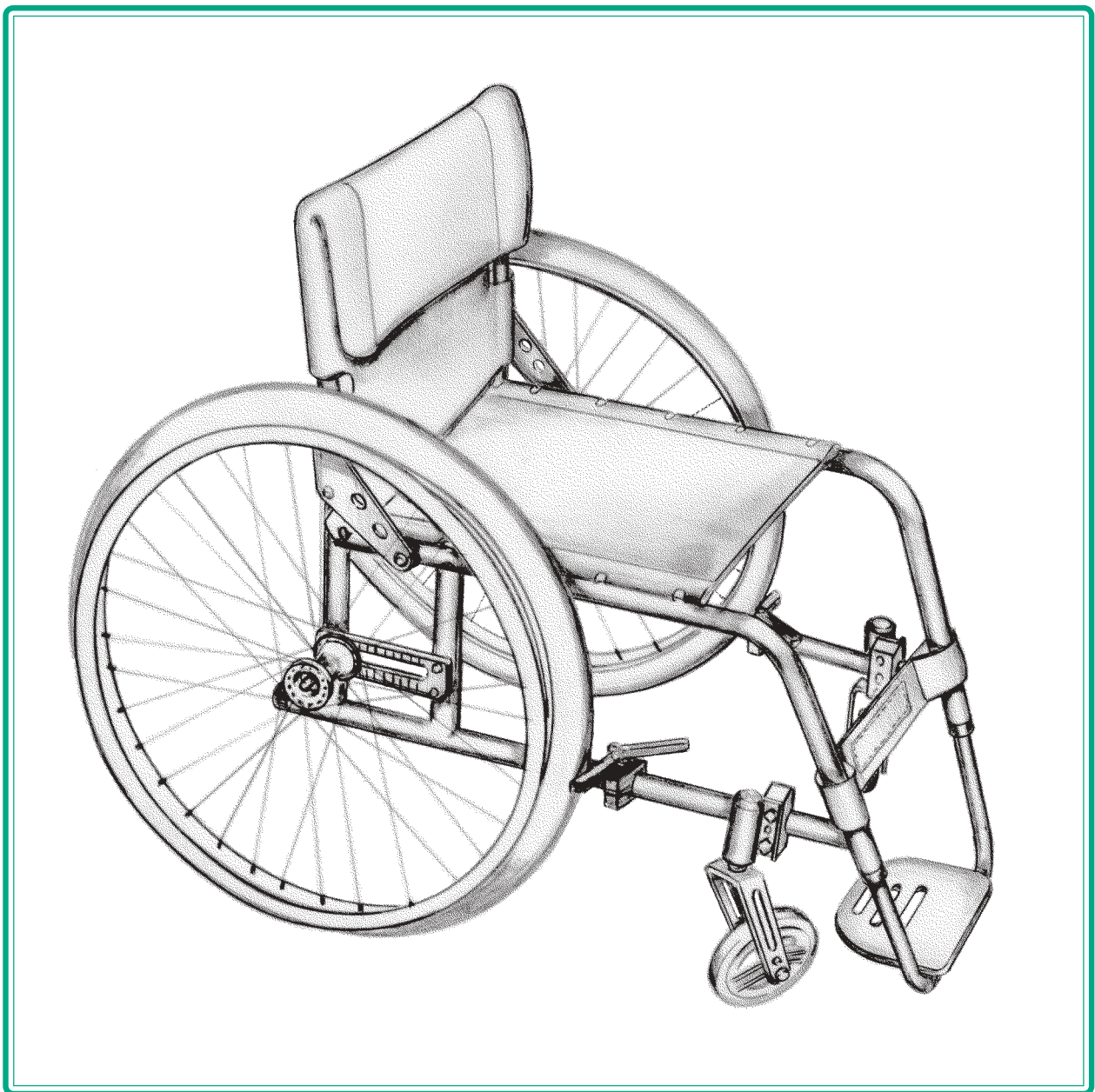


Gebruikershandleiding



NEDERLANDS



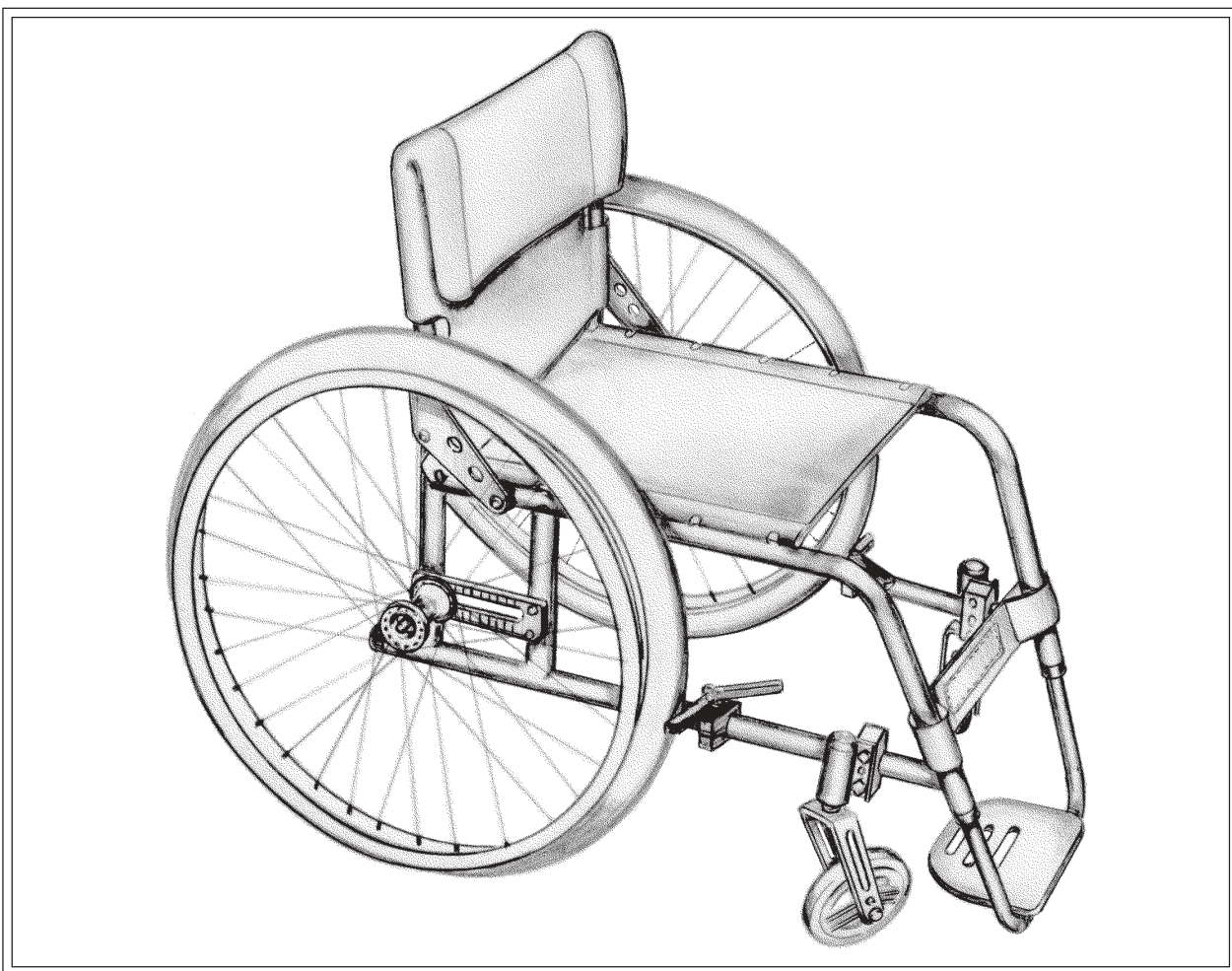

Het gebruik van de handleiding

Hartelijk bedankt dat u voor een Sunrise Medical QUICKIE GPV-LIJN rolstoel heeft gekozen. Onder de GPV-LIJN vallen de volgende types: GPV, GPV Competition en de GPV SA. De GPV SA wordt alleen in België geleverd.

Bij Sunrise Medical willen we dat u het beste haalt uit uw QUICKIE GPV-LIJN.

Deze gebruikershandleiding zal u bekend maken met uw rolstoel en zijn eigenschappen. De handleiding bevat informatie over het dagelijks gebruik en de algemene verzorging van de rolstoel. Het geeft verder informatie over de hoge kwaliteitseisen waar wij bijzonder veel waarde aan hechten en over de garantie. Er zijn vele onderdelen verkrijgbaar en afstellingen mogelijk op de QUICKIE GPV-LIJN. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u zich wenden tot de geautoriseerde dealer of tot degene die u de rolstoel heeft voorgeschreven.

De rolstoel is persoonlijk geïnspecteerd, voordat deze de fabriek verlaten heeft. Door het opvolgen van de richtlijnen voor onderhoud en verzorging, kunt u uw rolstoel in eerste klas conditie houden, zodat u steeds tevreden kunt zijn

▲ over uw rolstoel.

Inhoud

Introductie	1
Garantie	2
Eigenschappen en opties	3
Veiligheidstips	4
Het gebruik van uw rolstoel	5 - 17
Kenmerken van de rolstoel	18 - 22
Het afstellen van de rolstoel	23 - 35
Transport	36
Storingen en onderhoud	37
Schoonmaak richtlijnen en accessoires	38
Technische gegevens	39
Sunrise Medical	40

Introductie

Sunrise Medical streeft er naar om producten te leveren van zeer hoge kwaliteit, die volledig voldoen aan alle op het product van toepassing zijnde eisen en veilig zijn voor het bedoelde gebruik.

Deze rolstoel is bedoeld om mensen te helpen die een beperkte, of geen mobiliteit hebben. De QUICKIE GPV-LIJN is zowel voor binnen- als buiten gebruik bedoeld.

De maximale belasting van deze rolstoel bedraagt 113 kg.

Sunrise is ISO 9001 geaccrediteerd, welke de internationaal erkende standaard is voor kwaliteitsmanagement systemen. Deze goedkeuring verzekert u ervan dat wij op alle gebieden kwaliteit leveren, vanaf de ontwikkeling van de rolstoel tot aan de uiteindelijke aflevering.

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de medische richtlijn 93/42/EEC voor CE. 

De QUICKIE GPV-LIJN heeft de crashtest ondergaan in overeenstemming met ISO 7176/19. De testen worden uitgevoerd met een vierpuntsbevestigingssysteem. Sunrise Medical adviseert dat u, indien mogelijk, gebruik maakt van een goedgekeurde zitplaats in het voertuig en dat de rolstoel veilig in de kofferruimte van het voertuig opgeborgen wordt.

Indien u vragen heeft over het gebruik, onderhoud en veiligheid van uw rolstoel, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke, geautoriseerde Sunrise Medical dealer. Als u geen geautoriseerde dealer in uw omgeving weet, of wanneer u andere vragen heeft, dan kunt u schrijven of telefoneren naar:

Sunrise Medical B.V., Importeur

Groningenhaven 18 -20
3433 PE NIEUWEGEIN
Nederland

Tel: 0031 (0) 30 6082100

E-mail: info@sunrisemedical.nl

Sunrise Mobility, Fabrikant

Highstreet, Wollaston
West Midlands, DY8 4PS
England

Tel: 0044 138 444 6688
www.sunrisemedical.co.uk

Serienummer:

Gecontroleerd door:

Uw geautoriseerde dealer:

Uw geautoriseerde dealer:

Garantie

Het garantieformulier bevindt zich in het Sunrise Medical pakket. Vul de relevante details in en retourneer het naar ons, zodat wij uw gegevens kunnen registreren. Sunrise Medical geeft levenslange garantie op het frame en de asplaten. De overige onderdelen hebben 1 jaar garantie op fabrikagefouten.

Garantie condities

1. Reparaties en vervangingen zullen uitgevoerd worden bij een geautoriseerde Sunrise Medical dealer/servicedealer.
2. Om in aanmerking te komen voor de garantiecondities, dient u de volgende stappen te ondernemen. Verwittig de betreffende Sunrise Medical servicedealer onmiddellijk, door het geven van volledige informatie, incl. het serienummer van de rolstoel, over de aard van het probleem. Indien u de rolstoel gebruikt buiten het gebied van de aangewezen Sunrise Medical dealer die de garantie uit dient te voeren, dan kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden bij iedere andere, door de importeur aangewezen, servicedealer.
3. Wanneer een onderdeel van de rolstoel, binnen 12 maanden vanaf de aankoopdatum, reparatie nodig heeft of vervangen moet worden, ten gevolge van een fabrieks- of materiaalfout, dan zal het betreffende onderdeel of de onderdelen, kosteloos bij de geautoriseerde dealer gerepareerd of vervangen worden.
4. Ieder vervangen of gerepareerd onderdeel zal onder dezelfde garantievoorwaarden vallen als die van toepassing is op de totale garantieperiode van de rolstoel. Dit geldt voor het resterende gedeelte van de garantieperiode.
5. Onderdelen die vervangen worden nadat de originele garantieperiode vervallen is, vallen onder een volgende garantieperiode van 3 maanden.
6. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn vallen normaal gesproken niet onder de garantie, tenzij deze onderdelen geleden hebben door slijtage als een direct resultaat van een origineel fabricage-defect. Onder deze onderdelen vallen bijvoorbeeld bekleding, banden, binnenbanden en dergelijke onderdelen.
7. Bovenstaande garantiecondities omschrijven alle rolstoelonderdelen, en gelden voor die modellen welke gekocht zijn voor de normale verkoopprijs.
8. Onder normale omstandigheden wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd wanneer de rolstoel vervanging of reparaties nodig heeft als direct resultaat van:
 - a) Het niet onderhouden van de rolstoel en de onderdelen in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, of het niet gebruiken van gespecificeerde originele onderdelen.
 - b) Het beschadigen van de rolstoel of de onderdelen door onachtzaamheid, ongeval of verkeerd gebruik.
 - c) Het aanpassen van de rolstoel of de onderdelen, afwijkend van de fabrieksspecificaties, of reparaties die gedaan zijn voordat de servicedealer gewaarschuwd is. Noteer de adresgegevens van uw plaatselijke servicedealer. In het geval de rolstoel uitvalt, dient u met hem contact op te nemen en alle relevante gegevens door te geven, zodat u snel geholpen kunt worden.

De rolstoel die beschreven en getoond wordt in deze handleiding kan in detail iets afwijken van uw eigen model. Echter, alle instructies zijn relevant, onafhankelijk van detailverschillen.


De fabrikant houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen in gewicht, afmeting of andere technische gegevens zoals beschreven in deze handleiding. Alle tekeningen, afmetingen en capaciteiten welke in deze handleiding getoond worden, zijn niet op ware grootte en hoeven niet in overeenstemming te zijn met de gegeven specificaties.



Sunrise Medical Limited

High Street, Wollaston, West Midlands DY8 4PS England
Tel 01384 44 66 88 Fax 01384 44 66 99
www.sunrisemedical.co.uk

Eigenschappen en opties (GPV)

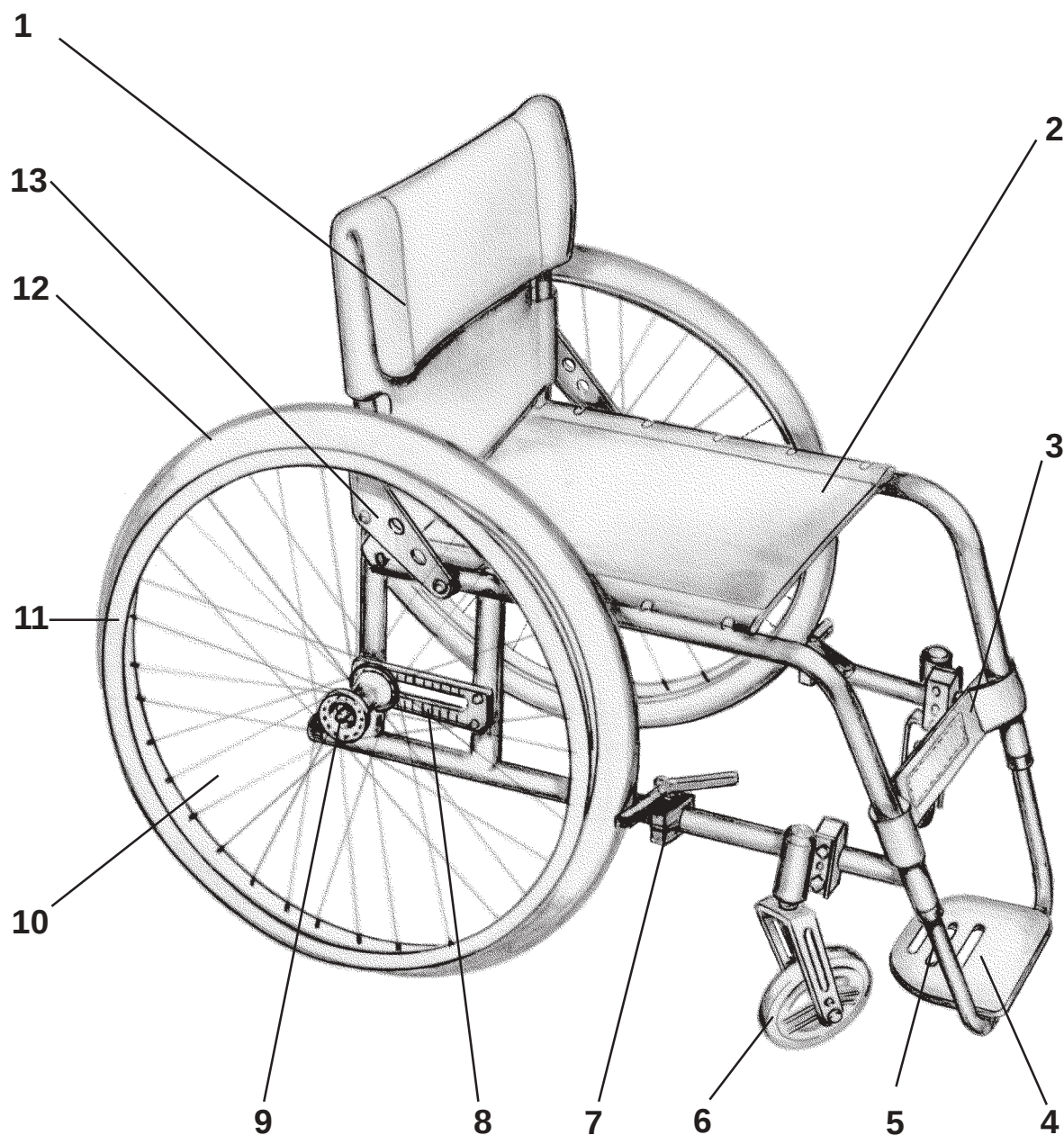

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Rug | 8 Meervoudig instelbare asplaat |
| 2 Zitting | 9 Quick release assen |
| 3 Kuitband | 10 Kruis gespaakt wiel |
| 4 Voetenplank | 11 Aluminium hoepel |
| 5 In hoogte verstelbare beensteun | 12 Band |
| 6 Voorwiel | 13 Rughoekverstelling |
| 7 Remmen | |

Veiligheidstips

Anti-tip systeem (optioneel)

Bij normaal gebruik verhindert het anti-tip systeem het achterover kiepen van de rolstoel. Anti-tip systemen zijn verkrijgbaar bij uw rolstoeldealer. Sunrise Medical adviseert een anti-tip systeem aan voor beginnende en minder ervaren rolstoelgebruikers.

Bandenspanning

Zorg ervoor dat luchtbanden tot de juiste waarde opgepompt zijn. De juiste banden druk is 450 kilopascals/4.5 bar (65 psi) voor de lucht gevulde achterbanden. Bij een te lage bandendruk kunnen de remmen slippen.

Armsteunen (optioneel)

Vergrendel altijd de wegzwenkbare armsteunen voordat u de rolstoel gaat gebruiken. Til de rolstoel nooit aan de armsteunen op. Deze delen zijn verwijderbaar en het optillen van de rolstoel aan deze delen kan schade aan de rolstoel en/of letsel bij de gebruiker veroorzaken.

Het verplaatsen

De richtlijnen voor het zijwaarts verplaatsen in en uit de rolstoel, staan in deze handleiding, dit is echter maar één methode. U kunt het beste met uw rolstoeldealer een techniek ontwikkelen die voor uw mogelijkheden het meest geschikt is.

'Wheelies'

Het doen van een 'wheelie' (het achterover kantelen van de rolstoel tot het balanspunt) is gevaarlijk, de stoel kan dan achterover kiepen. Het doen van een 'wheelie' mag alleen gedaan worden door zeer ervaren rolstoelgebruikers. Probeer of oefen geen 'wheelie' zonder de hulp van een begeleider.

Voetenplank

Het laagste punt van de voetenplank moet tenminste 63 mm van de grond zijn, dit om te voorkomen dat de voetenplank de grond raakt tijdens het rijden. Ga nooit op de voetenplank staan, hierdoor kan de rolstoel voorover kiepen.

Stoepranden, hellingen en obstakels

Oefen het op-en afrijden van een stoeprand, helling of obstakel altijd met een gekwalificeerde begeleider, voordat u het alleen probeert. Het is van groot belang dat u een veilige, voor uw mogelijkheden geschikte, techniek ontwikkelt. Rij geen hellingen op of af groter dan 10 % (1 op 10).

Het gebruik van uw rolstoel

Water, sneeuw en ijs

Het in contact komen met water, sneeuw of ijs kan het presteren van uw rolstoel beïnvloeden.

1. Gebruik uw rolstoel nooit in een zwembad of andere watermassa's.
2. Als uw rolstoel nat wordt, of wanneer u water gebruikt om de rolstoel te reinigen, droog de rolstoel dan weer zo goed mogelijk af.

Wanneer u hulp nodig heeft

Waarschuwing:

Het niet opvolgen van onderstaande waarschuwingen kan resulteren in omkiepen of vallen, en letsel veroorzaken bij de gebruiker of de begeleider.

Voor de gebruiker: Verzekert u ervan dat de persoon die u begeleidt, alle waarschuwingen en instructies, die van toepassing zijn, gelezen heeft en opvolgt. Voordat de begeleidende persoon u gaat helpen moet deze weten wat hij/zij moet doen, dit om de veiligheid te garanderen.

Voor de begeleiders:

1. Zorg ervoor dat de rolstoelgebruiker goed zit. Vertel de gebruiker wat u van plan bent te doen en leg uit wat u van de gebruiker verwacht.
2. Ontwikkel samen met de dokter, de verpleegkundige of de therapeut van de gebruiker een veilige methode, die het meest geschikt is voor uw mogelijkheden en voor die van de gebruiker.
3. Gebruik altijd goede lichaamstechnieken. Wanneer u de gebruiker optilt of steunt, buig dan licht door uw knieën en houd uw rug zo recht mogelijk.
4. Ontgrendel en draai het anti-tip systeem omhoog, om struikelen te voorkomen en zodat ze niet in de weg zitten wanneer u de rolstoel van de achterzijde bedient.
5. Zet de rolstoel altijd op de rem en plaats altijd het anti-tip systeem naar beneden wanneer u de rolstoelgebruiker alleen moet laten, ook al is het maar voor even. Door dit te doen verkleint de kans op achterover kiepen en controleverlies over de rolstoel.

Het gebruik van uw rolstoel

Het balanspunt

⚠ Waarschuwing:

Het punt waar deze rolstoel voorover, achterover of zijwaarts kiept, is afhankelijk van het balanspunt en de stabiliteit. Het niet nakomen van onderstaande waarschuwingen kan resulteren in omkiepen of vallen, en ernstig letsel veroorzaken:

1. De belangrijkste afstelling van uw rolstoel is de positie van de achterassen. Hoe verder u de assen naar voren verplaatst, hoe beter de stoel manoeuvreert, maar hierdoor wordt ook het risico dat u met uw rolstoel achterover kiept groter.
 - ⇒ Neem contact op met uw medisch specialist of therapeut om te bepalen welke aspositie voor u de meest geschikte is.
2. Het veranderen van de afstelling van deze rolstoel verhoogt het risico van vallen of omkiepen. Wees uitermate voorzichtig wanneer u veranderingen aanbrengt in het onderstaande:
 - ⇒ De positie van de achterassen, de afstand tussen de achterwielen of de hoeveelheid achterwielvlucht.
 - ⇒ De afstand tussen het middelpunt van de voorwielen en de achterwielen en de hoek van de voorwielen. (Hoek afstelling van het balhoofdhuis).
3. Om vallen of omkiepen te voorkomen dient u:

- ⇒ Een begeleider te hebben totdat u de balanspunten van uw rolstoel kent en weet hoe u omkiepen moet voorkomen.

- ⇒ Anti-tip systemen gebruiken totdat u er zeker van bent dat u niet meer zo eenvoudig omkiept.

4. Het balanspunt en de stabiliteit van uw rolstoel worden ook beïnvloed door:

- ⇒ Een verandering van de lichaamspositie, het postuur of gewichtsverdeling.

- ⇒ Het rijden met uw rolstoel op een hellend vlak.

- ⇒ Geplaatste zitsystemen (optioneel).

Raadpleeg onderstaande hoofdstukken om te leren hoe u de risico's van vallen en/of omkiepen, door goed gebruik van de rolstoel, kunt verkleinen.

Het aankleden en verwisselen van kleding

⚠ Waarschuwing:

Uw gewicht kan verplaatsen wanneer u zich aan- of omkleedt, terwijl u in uw rolstoel zit. Dit kan vallen of omkiepen veroorzaken en resulteren in ernstig persoonlijk letsel. Om dit te voorkomen dient u als volgt te handelen:

1. Draai de voorwielen naar voren.
2. Vergrendel het anti-tip systeem, wanneer de rolstoel deze heeft, in de neerwaartse positie.
3. Plaats uw rolstoel met de achterwielen tegen een muur en vergrendel beide remmen.

Het gebruik van uw rolstoel

'Wheelies' (Balanceren op de achterwielen)

Een 'wheelie' wordt uitgevoerd door het balanceren op de achterwielen van uw rolstoel, terwijl de voorwielen vrij van de grond staan. Wanneer dit veilig wordt gedaan, kan het u helpen om stoepranden en andere obstakels eenvoudig op of af te rijden.

▲ Waarschuwing:

Het is gevaarlijk een 'wheelie' uit te voeren, omdat u kunt vallen of achterover kunt kiepen, met als gevolg ernstig letsel. Volg onderstaande waarschuwingen altijd op:

1. Neem contact op met uw medisch specialist of therapeut om uit te vinden of u lichamelijk geschikt bent om een 'wheelie' te leren.
2. Probeer niet om een 'wheelie' uit te voeren, als u geen ervaren rolstoelrijder bent, of wanneer u geen hulp heeft.
3. Overtuig u ervan dat het anti-tip systeem omhoog gedraaid is, zodat ze niet in de weg zitten.
4. Wanneer u een 'wheelie' gaat leren, verzeker u er van dat de rolstoel duwhandvatten heeft. De begeleider heeft veilige steunpunten nodig, om de achterzijde van de rolstoel vast te kunnen houden, om te voorkomen dat de rolstoel met de gebruiker erin achterover kiept.

Volg deze stappen op om met behulp van een begeleider een 'wheelie' te leren:

1. De begeleider dient aan de achterzijde van de rolstoel te staan, en moet in staat zijn om mee te bewegen met de rolstoel, om achterover kiepen te voorkomen.
2. De handen van de begeleider dienen onder de duwhandvatten of de duwbeugel te zijn, klaar om u op te vangen wanneer u te ver achterover gaat kiepen.
3. Wanneer de begeleider in de goede positie staat, plaats dan uw handen voorbij het midden, in voorwaartse richting, op de omtrek van de hoepels.
4. Maak een snelle achterwaartse beweging van de achterwielen, onmiddellijk gevolgd door een harde voorwaartse duw. Hierdoor kantelt de rolstoel achterover en tilt de voorwielen van de grond. Probeer het balanspunt te vinden, waarbij u niet naar voren of naar achteren valt.
5. Houd uw rolstoel in balans door kleine bewegingen van de hoepels.

Het gebruik van uw rolstoel

Deur doorgangen en obstakels

⚠ Waarschuwing:

1. Verzeker u er zoveel mogelijk van dat de ondergrond waar u uw rolstoel gebruikt, vlak en vrij van obstakels is door:
 - ⇒ Het verwijderen of bedekken van drempels tussen de kamers.
 - ⇒ Het installeren van een rolstoelhelling bij in- en uitgangen.
2. Als uw rolstoel een anti-tip systeem heeft, verzekert u er dan van dat zij in de naar beneden gedraaide positie vergrendeld zijn, voordat u over een obstakel gaat.
3. Houd beide handen op de hoepels. Wanneer u dit niet doet, kunt u de controle over uw rolstoel verliezen en omkiepen.
4. Verplaats uw rolstoel niet door deze vooruit te trekken of achteruit te duwen aan een ander voorwerp. Trek u zelf nooit door een deurkozijn, door het kozijn met één of beide handen vast te houden.
5. Om u te helpen het balanspunt van de rolstoel te corrigeren:
 - ⇒ Leun met uw bovenlichaam iets naar voren als u over een obstakel rijdt.
 - ⇒ Duw uw bovenlichaam naar achteren wanneer u vooruit van een hoger naar een lager vloeroppervlak gaat.

Het reiken of leunen

⚠ Waarschuwing:

Het reiken of leunen heeft invloed op het balanspunt van de rolstoel. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan resulteren in vallen of omkiepen en ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

1. Voorkom reiken of leunen wanneer u uw zwaartepunt moet wijzigen om dit te doen. Voorover leunen kan het voorover kantelen van de rolstoel veroorzaken. Houd altijd het onderste gedeelte van uw rug in contact met de rugleuning. Vraag hulp, of gebruik een hulpmiddel om uw reikwijdte te vergroten.
2. Reik nooit met beide handen. Wanneer u dit doet bent u misschien niet in staat om u zelf op te vangen wanneer de stoel voorover kiept.
3. Leun nooit achterover, om naar een voorwerp te reiken, tenzij uw rolstoel een anti-tip systeem heeft en dit in de naar beneden stand vergrendeld is.
4. Wanneer u moet reiken of leunen buiten uw rolstoel:
 - ⇒ Draai de voorwielen in de voorste positie. Om dit te doen rijdt u uw rolstoel voorbij het object, waarna u achteruit rijdt tot naast het object.
 - ⇒ Plaats uw rolstoel zo dicht mogelijk bij het object wat u wenst te bereiken.

Het gebruik van uw rolstoel


- ⇒ Stabiliseer u zelf door het stevig vastpakken van een armsteun met één hand. Dit helpt voorkomen dat u uit de rolstoel valt als de rolstoel kantelt.
- ⇒ Voorkom dat u druk uitoefent op de voetsteunen terwijl u reikt. Dit kan de oorzaak zijn dat de rolstoel naar voren kantelt.
- ⇒ Zet de achterwielen niet op de rem. Hierdoor creëert u een kantelpunt, waardoor de kans op vallen of omkiepen groter wordt

Heuvels en hellingen

⚠ Waarschuwing


Door het op of af rijden van een helling (Fig. 1) of door het dwars op een helling rijden (Fig. 2) zal het zwaartepunt van uw rolstoel wijzigen. Het niet nakomen van deze waarschuwingen kan de oorzaak zijn van ernstige verwondingen door het omkiepen van de rolstoel, of het verliezen van controle over de rolstoel:

1. Leun of duw uw lichaam in de richting van de top van de heuvel om het balanspunt van de rolstoel te verplaatsen.
2. Voorkom keren op een helling of dwars op een helling rijden, het kantelen van de rolstoel is dan zeer waarschijnlijk. Ga, indien mogelijk, altijd rechtuit een helling op of af.

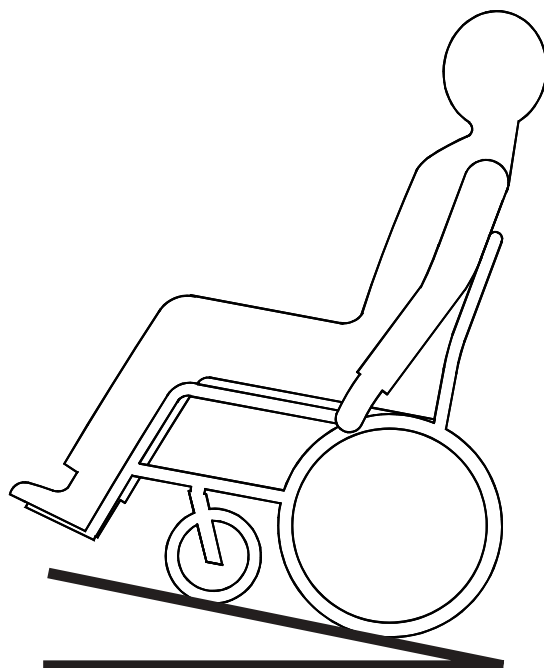

10% Maximale hellingshoek

Fig. 1

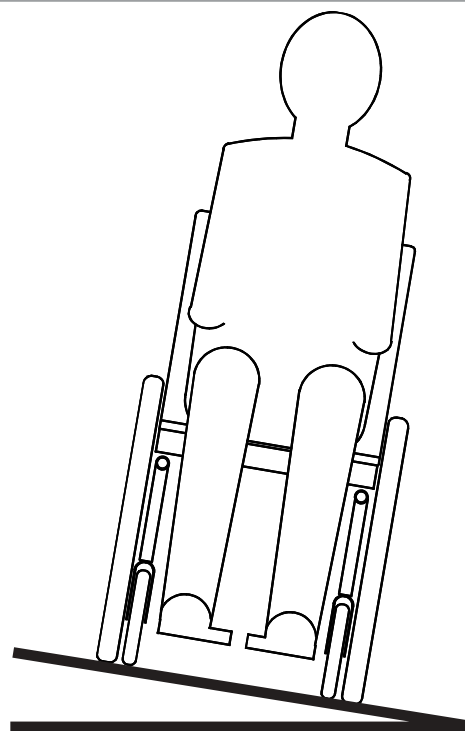

10% Maximale hellingshoek

Fig. 2

Het gebruik van uw rolstoel

Heuvels en hellingen

⚠ Waarschuwing

3. Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u een helling die groter is dan 10% (1 op 10) op of af rijdt. Vraag hulp wanneer u denkt dat de helling die u op of af moet rijden buiten uw mogelijkheden ligt.
 - ⇒ Anti-tip systemen kunnen op een steile helling niet voorkomen dat u achterover kiept.
 - ⇒ Het kan zijn dat u op een steile helling, zonder te stoppen, de top niet kunt bereiken. Wanneer u moet stoppen, dient u in dit geval met de rolstoel dwars op de helling te stoppen, anders loopt u de kans de controle over de rolstoel te verliezen, waardoor u achterover kunt kiepen.
4. Houd altijd uw snelheid onder controle wanneer u een heuvel afrijdt. Wanneer u te snel gaat, kunt u de controle over uw rolstoel verliezen. Vraag hulp wanneer u niet zelf in staat bent de heuvel op of af te rijden.
 - ⇒ U kunt uw snelheid onder controle houden door constant druk uit te oefenen op de hoepels.
 - ⇒ Gebruik nooit de handremmen om de snelheid te verlagen of om te stoppen. Wanneer u dit doet is het mogelijk dat u de controle over de rolstoel verliest of kantelt.

Het verplaatsen

⚠ Waarschuwing:

Wanneer u deze waarschuwingen niet opvolgt kan dit resulteren in vallen of omkiepen, waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.

1. Het verplaatsen vereist een goede balans en behendigheid, en kan zeer gevaarlijk zijn. Denk eraan, dat er gedurende het verplaatsen een moment is dat de rolstoel niet onder u is.
2. Om vallen te voorkomen dient u:
 - ⇒ te leren hoe u uw lichaam dient te positioneren en hoe u zich zelf moet ondersteunen tijdens het verplaatsen.
 - ⇒ met uw medisch specialist of therapeut een methode voor veilig verplaatsen te leren.
 - ⇒ iemand bij u te hebben die u kan helpen, totdat u er zeker van bent dat u veilig zelf kunt verplaatsen.
3. Positioneer uw rolstoel, indien mogelijk, zoals getoond in Fig. 3.
4. Zet de achterwielen altijd op de rem voordat u gaat verplaatsen, zodat de rolstoel niet kan gaan rollen tijdens het verplaatsen. Het op de rem zetten van de achterwielen voorkomt niet altijd dat de rolstoel wegglijdt of kantelt tijdens het verplaatsen.

Het gebruik van uw rolstoel

5. Draai de voorwielen naar voren voor meer stabiliteit van de rolstoel.
6. Wanneer uw rolstoel armsteunen heeft, verzeker u er dan van dat de armsteunen weg geklapt zijn en niet in de weg zitten bij het verplaatsen.
7. Wees voorzichtig met de beensteunen/voetenplank. Om te voorkomen dat u struikelt of valt wanneer u verplaatst dient u:
 - ⇒ zich ervan te verzekeren dat uw voeten niet blijven haken of hangen achter de voetenplank/beensteunen.
 - ⇒ te voorkomen dat u gewicht op de voetenplank plaatst, de rolstoel kan hierdoor voorover kantelen.
 - ⇒ wanneer dit mogelijk is dient u de beensteunen te verwijderen of weg te draaien.Zie Fig. 3 en 4.

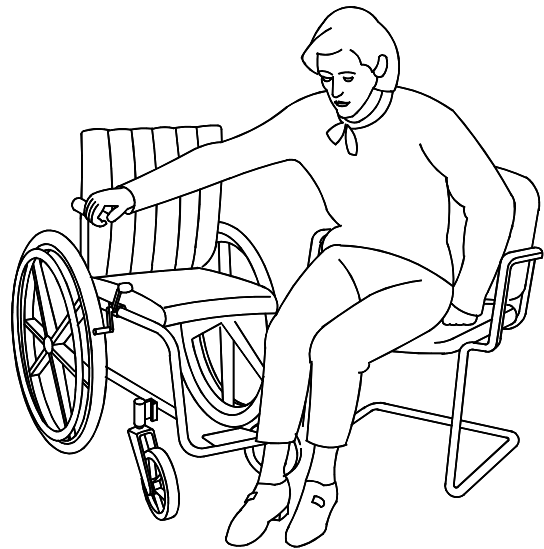


Fig. 3

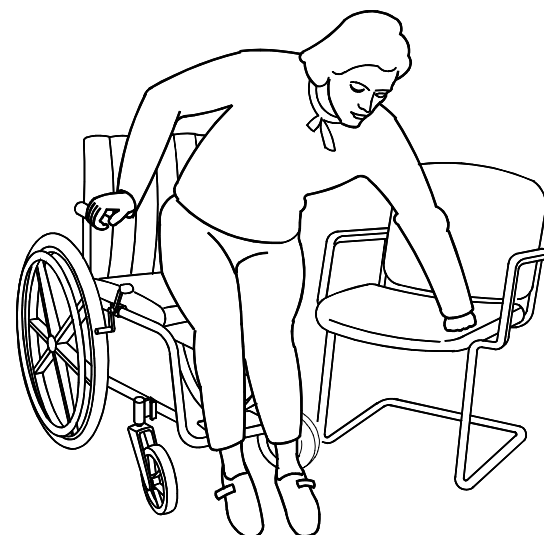


Fig. 4


Het gebruik van uw rolstoel

Stoepranden en opstapjes

⚠ Waarschuwing:

Wanneer u deze waarschuwingen niet opvolgt kan dit resulteren in vallen of omkiepen, waardoor ernstig letsel bij u of andere mensen kan ontstaan.

1. Rij nooit alleen een stoeprand of opstapje op of af (Fig. 5) tenzij u een geoefende rolstoelgebruiker bent en:
 - ⇒ veilig een 'wheelie' kunt maken;
 - ⇒ u er zeker van bent dat u hiervoor over de benodigde kracht van het bovenlichaam beschikt.
2. Ontgrendel en draai het anti-tip systeem omhoog, zodat het niet in de weg zit en de grond raakt.
3. Probeer niet om een hoge stoeprand of opstapje (hoger dan 10cm) zonder hulp op te rijden, uw rolstoel kan over zijn balanspunt komen en achterover kiepen.
4. Wanneer u een begeleider heeft, overtuig u er dan van dat de rolstoel duwhandvatten heeft. De begeleider dient punten te hebben om de achterkant van de rolstoel vast te houden.

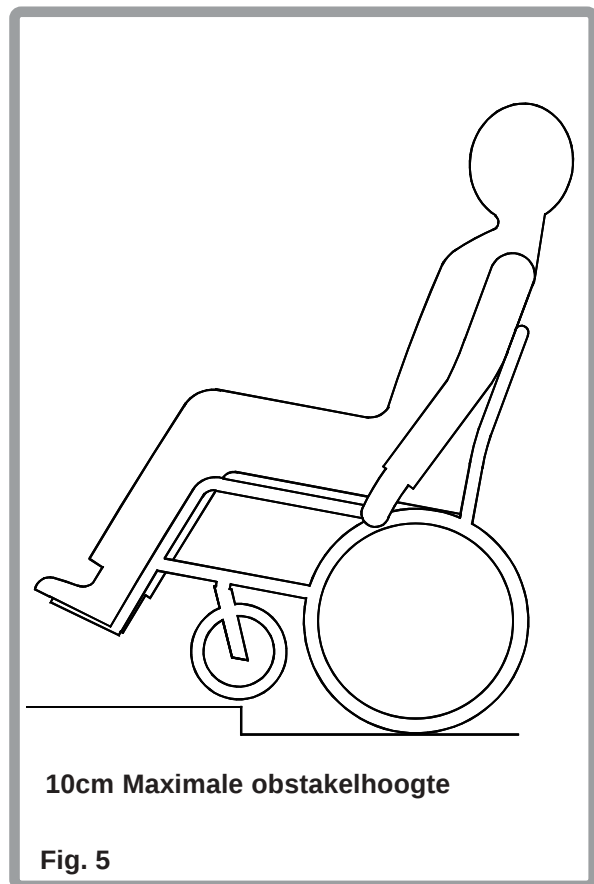


Het gebruik van uw rolstoel

Tips voor het met hulp afrijden van een stoeprand of een opstapje


Lees en volg de waarschuwingen voor begeleiders op. Om de rolstoelgebruiker te helpen bij het afrijden van een stoeprand of een opstapje, in achterwaartse richting:

1. Overtuig u er dan van dat de duwhandvatten niet rond kunnen draaien of eraf getrokken kunnen worden (Fig. 6).
2. Sta altijd achter de rolstoel.
3. Voordat u de hoek van de stoeprand of het opstapje bereikt, draait u de rolstoel rond en trek hem achteruit.
4. Terwijl u over uw schouder kijkt, stapt u voorzichtig achteruit totdat u van de stoeprand of het opstapje af bent en op de vlakke ondergrond staat.
5. Trek de rolstoel achteruit naar u toe, totdat de achterwielen de hoek van de stoeprand of het opstapje (Fig. 6) bereiken. Laat dan de wielen van de rolstoel langzaam over de rand naar beneden rollen totdat deze op de vlakke ondergrond staan (Fig. 7).
6. Wanneer de achterwielen weer veilig op de vlakke ondergrond staan, kantel de rolstoel dan terug naar het balanspunt. Hierdoor worden de voorwielen van de stoeprand of het opstapje getild.
7. Houd de rolstoel in balanspositie en doe een paar stapjes achteruit. Draai de rolstoel weer om en laat de voorwielen voorzichtig op de grond zakken.

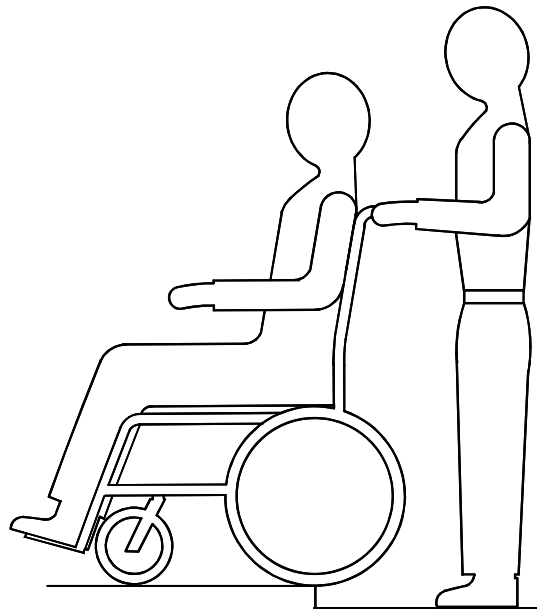

10cm Maximale obstakelhoogte

Fig. 6

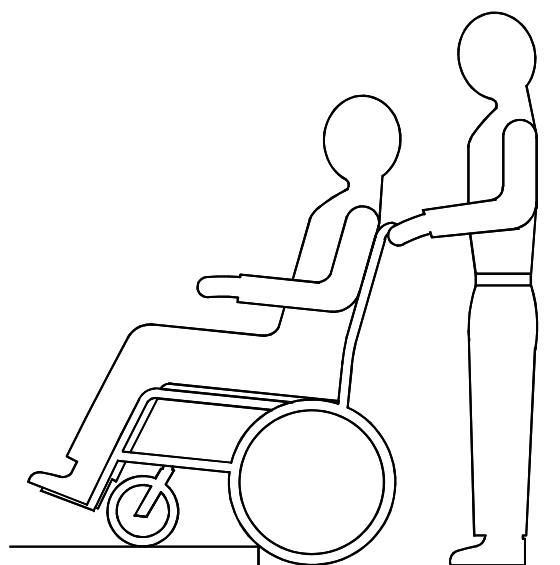

10cm Maximale obstakelhoogte

Fig. 7


Het gebruik van uw rolstoel

Tips voor het met hulp oprijden van een stoeprand of een opstapje

Lees en volg de waarschuwingen voor begeleiders op.


Om de rolstoelgebruiker te helpen bij het oprijden van een stoeprand of opstapje in voorwaartse richting:

1. Sta altijd achter de rolstoel.
2. Sta met uw gezicht in de richting van de stoeprand of het opstapje, kantel de rolstoel op de achterwielen, zodat de voorwielen vrij blijven van de stoeprand of het opstapje (Fig. 8).
3. Rij vooruit en zet de voorwielen op de stoeprand of het opstapje, zodra u er zeker van bent dat zij de rand gepasseerd zijn.
4. Blijf vooruit rijden totdat de achterwielen in contact komen met de stoeprand of het opstapje (Fig. 9). Til de rolstoel op en rij de achterwielen tot de bovenkant van de stoeprand of het opstapje.

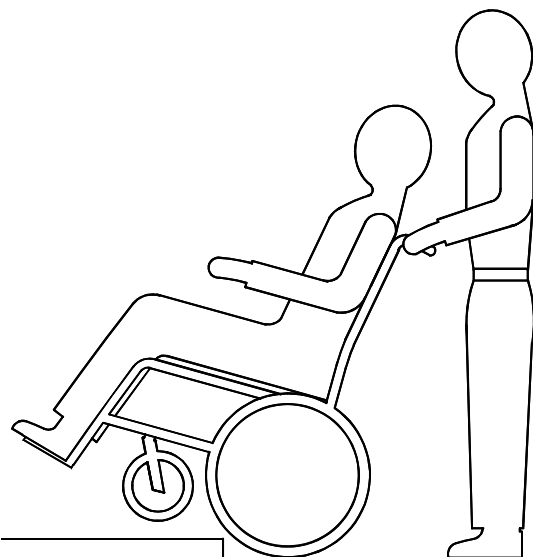

10cm Maximale obstakelhoogte

Fig. 8

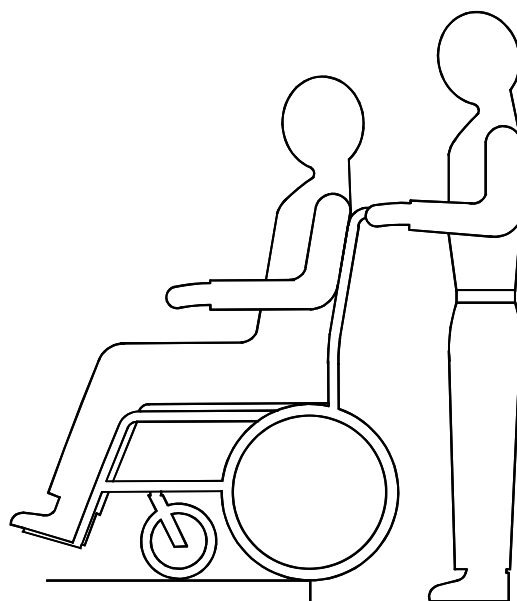

10cm Maximale obstakelhoogte

Fig. 9

Het gebruik van uw rolstoel

Het naar boven of beneden verplaatsen van de rolstoel en de gebruiker op een trap

⚠ Waarschuwing:

Indien mogelijk, dient u het uitvoeren van deze handeling te voorkomen, om letsel bij de begeleider te voorkomen. Lees en volg de waarschuwingen voor begeleiders op. Wanneer u deze waarschuwingen niet opvolgt, kan dit resulteren in vallen of omkiepen, en ernstig letsel tot gevolg hebben voor de rolstoelgebruiker en/of de begeleider.

1. Maak altijd gebruik van twee of meer helpers wanneer u een rolstoel met de gebruiker erin, een trap op of af verplaatst (Fig. 10).
2. Overtuig u ervan dat de rolstoel duwhandvatten heeft en dat de handvatten niet rond kunnen draaien of eraf getrokken kunnen worden. De begeleider aan de achterzijde heeft goede handvatten nodig om het gewicht van de rolstoel met de gebruiker erin te kunnen dragen.
3. Gebruik alleen niet verwijderbare delen van het frame om de rolstoel vast te houden.
4. Overtuig u ervan dat de gebruiker stevig in de stoel zit, met zijn/haar armen, benen of handen veilig uit de weg van obstakels.



Het gebruik van uw rolstoel

Tips voor het met hulp opgaan van een trap

Lees en volg de waarschuwingen voor begeleiders op. Volg onderstaande stappen op wanneer u de gebruiker helpt tegen een trap op te gaan.

1. Verplaats de rolstoel en gebruiker achterwaarts tegen de trap op.
2. De begeleider aan de achterkant heeft de leiding. Hij of zij kantelt de rolstoel achterover tot het balanspunt (Fig. 11).
3. Een tweede begeleider aan de voorzijde pakt stevig een niet verwijderbaar deel van de voorzijde van het frame vast en tilt de rolstoel trede voor trede op.
4. De begeleiders repositioneren zichzelf bij elke trede en herhalen dezelfde procedure voor elke trede. Wanneer de bovenzijde is bereikt, plaatst u de rolstoel weer op de vier wielen.



Het gebruik van uw rolstoel

Tips voor het met hulp afrijden van een trap

Lees en volg de waarschuwingen voor begeleiders op. Volg onderstaande stappen op, wanneer u de rolstoelgebruiker helpt een trap af te rijden.


1. Verplaats de rolstoel en gebruiker voorwaarts van de trap (Fig.12).
2. De begeleider aan de achterzijde heeft de leiding, hij of zij kantelt de rolstoel tot het balanspunt van de achterwielen en rijdt de rolstoel tot de rand van de bovenste trap trede.
3. Een tweede begeleider staat stevig op een lagere trede en heeft het frame van de rolstoel stevig vast. Beide begeleiders rollen de rolstoel trede voor trede naar beneden waarbij ze de achterwielen over de hoek van de traptrede naar beneden laten rollen.
4. De begeleiders verplaatsen de rolstoel naar de volgende trede en herhalen dezelfde procedure voor elke trede. Wanneer de onderzijde van de trap is bereikt, plaats dan de rolstoel weer met alle vier de wielen op de grond.



Kenmerken van de rolstoel


Wegzwenkbare beensteunen

Uw Quickie GP Swing Away is uitgerust met wegzwenkbare beensteunen (Fig. 13). Hierdoor is het voorwaarts in en uit uw rolstoel verplaatsen eenvoudiger uit te voeren. Voor het ontgrendelen van een beensteun, duwt u de ontgrendelhendel (1) naar het frame toe, en draait u de beensteun naar buiten. Voor het verwijderen van de beensteun, tilt u de beensteun verticaal uit de geleider.

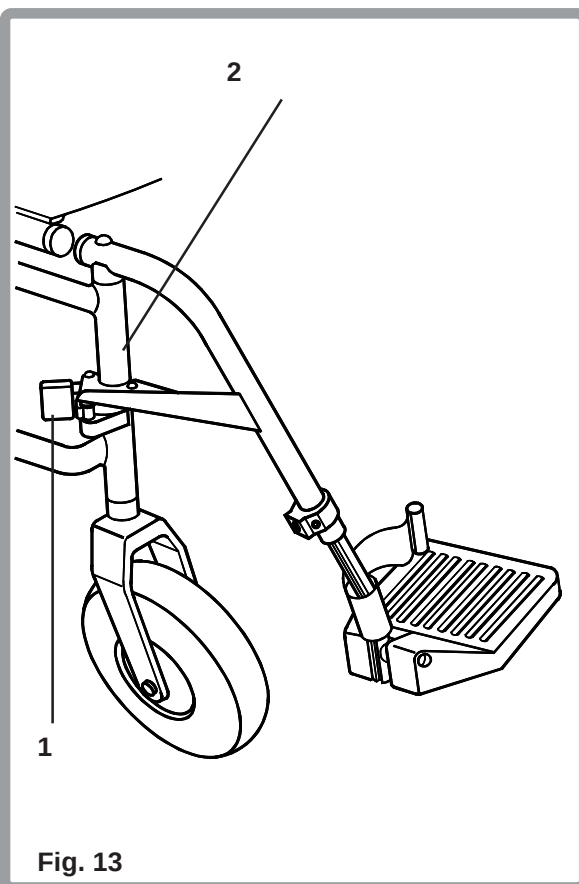

Het terugplaatsen van de beensteun

Voor het terugplaatsen van de beensteun (Fig. 14), plaatst u de bovenste scharnierpen (3) in de geleider (4) van het frame (2) met de beensteun naar de buitenzijde van het frame. Draai de beensteun naar binnen totdat deze in positie vergrendelt op de vergrendelpen (5).

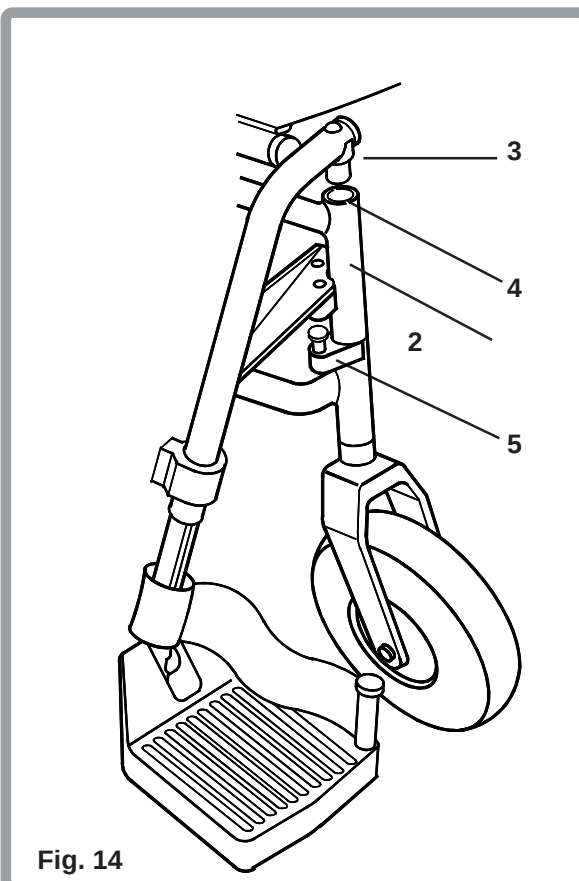

Kenmerken van de rolstoel

Gefixeerde voetenplank

De Quickie GPV-LIJN wordt geleverd met een in hoogte verstelbare gefixeerde voetenplank (Fig. 15).

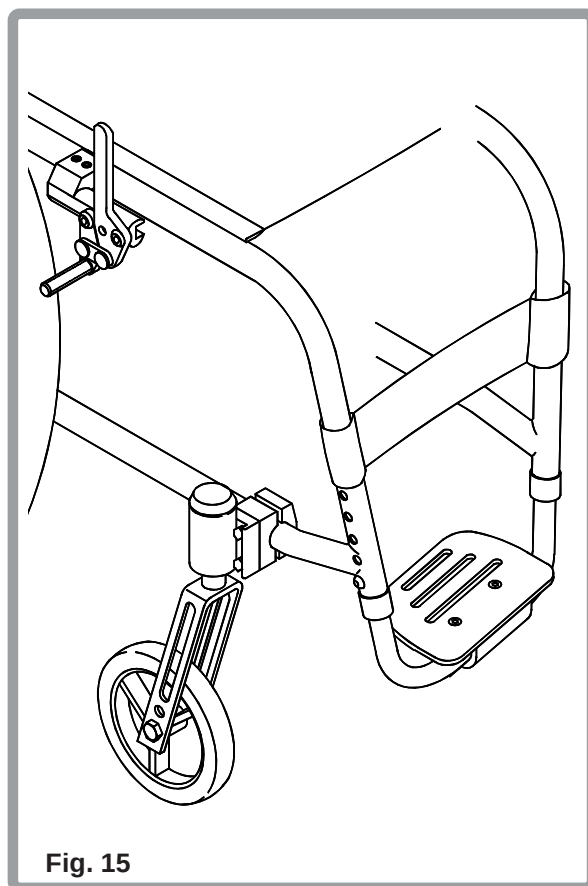


Fig. 15

Wegzwenkbare armsteunen (optioneel)

Wegzwenkbare armsteunen kunnen verwijderd worden of wegdraaien, om het zijwaarts verplaatsen eenvoudiger te maken. Voor het verwijderen van de armsteun (1), trekt u deze omhoog totdat de armsteun vrij komt uit de geleider (2), zoals getoond in Fig. 16. Voor het weer monteren van de armsteun plaatst u deze in de geleider totdat u voelt dat de armsteun de bodem van de geleider raakt. Voor het draaien van de armsteun trekt u de armsteun ongeveer 25mm omhoog en draait u de armsteun van u weg. Voor het, in de normale positie, terug plaatsen van de armsteun, draait u de armsteun naar u toe totdat u voelt dat de armsteun iets naar beneden zakt en in positie vergrendelt.

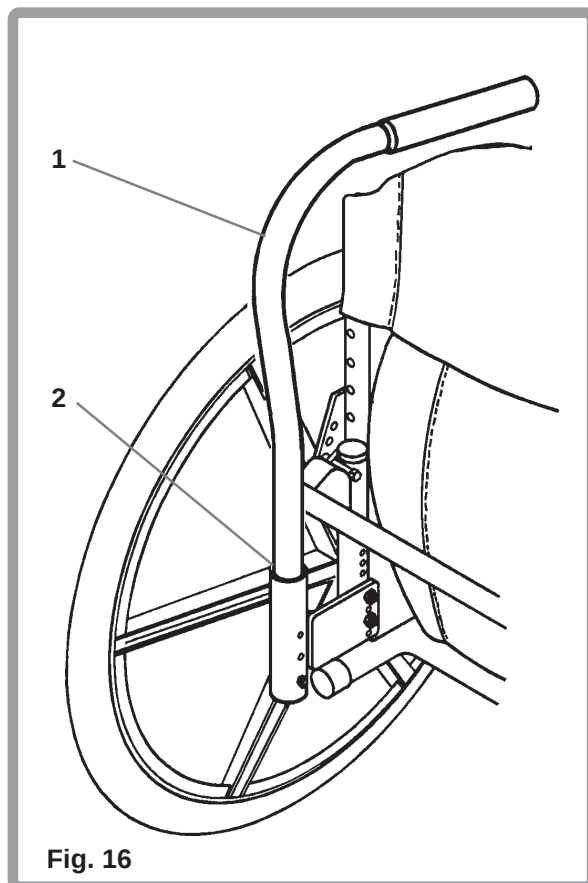


Fig. 16

Kenmerken van de rolstoel

In hoogte verstelbare armsteunen (optioneel)

Voor het installeren van de armsteunen, schuift u de buitenste armsteunbuis (1) in de geleider (2). De armsteun zal automatisch in positie vergrendelen (Fig. 17).

Voor het afstellen van de armsteun hoogte, draait u de ontgrendelhendel (3) tot de tweede blokkering (Fig. 17B). Schuif het armsteunkussentje (4) omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte bereikt is en draai de hendel terug in de vergrendelde positie. Duw het armsteunkussentje naar beneden totdat de armsteunbuis stevig in positie vergrendelt.

Voor het verwijderen van de armsteun, draait u de ontgrendelhendel tot de eerste blokkering (Fig. 17C) waarna u de armsteun verwijdert. Voor het terugplaatsen van de armsteun, schuift u de armsteun terug in de geleider (2) en draait u de ontgrendelhendel terug in de vergrendelde positie (Fig. 17).

De armsteun kan afgesteld worden om de speling in de geleider en de binnenste armsteunbuis te verkleinen (Fig. 17). Om het vastzitten van de buitenste buis in de geleider kleiner of groter te maken, draait u de vier bouten (5) aan de zijkanten van de geleider met een 10mm sleutel los. Oefen druk uit op de geleider, met de armsteun in de geleider, om de gewenste afstelling te verkrijgen, draai dan de vier bouten weer vast

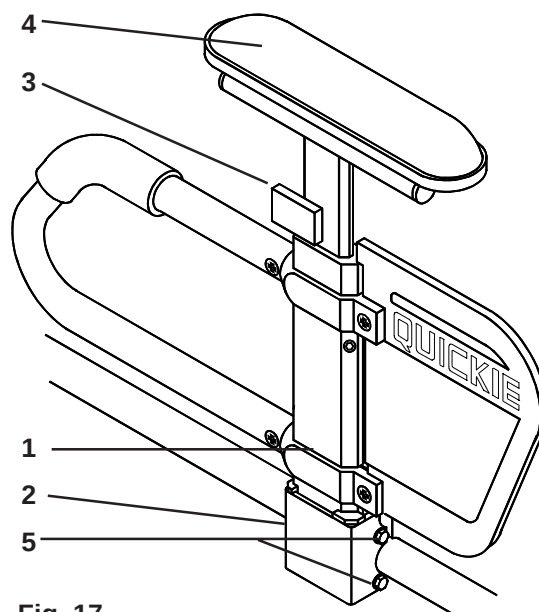


Fig. 17

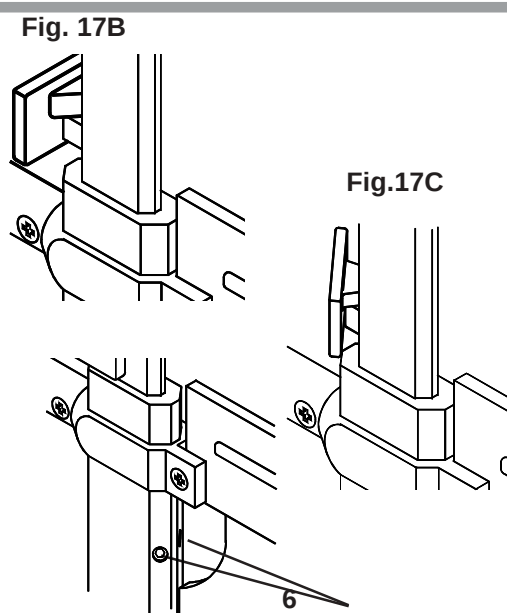


Fig. 17 D

op een aanhaalmoment van 8-10 Nm. Voor het afstellen van de speling van de binnenste armsteunbuis (Fig. 17D), zijn twee afstelschroeven (6) geplaatst in de buitenste armsteunbuis. Draai de schroeven naar binnen of naar buiten om de gewenste afstelling te verkrijgen, gebruik een 3/32" inbussleutel.

Kenmerken van de rolstoel

Het vouwen van de rug

Voor het vouwen van de rug (Fig. 18), trekt u het koord (1) omhoog, totdat de vergrendelhendels (2) ontgrendelen. Klap de rug neer in de gevouwen positie. Om de rug terug te plaatsen in de normale zit positie, trekt u de rug omhoog totdat de vergrendelhendels op de vergrendelpennen vergrendelen (3).

Quick release assen

Om de quick release assen (Fig. 19) te verwijderen, drukt u de quick release knop (1) op de as met uw duim in, terwijl u het wiel, door de spaken (2) heen, aan de naaf (3) vasthoudt. Met de quick release knop ingedrukt en het terwijl u het wiel stevig vasthoudt, trekt u de as en de naaf uit elkaar. Voor het terugplaatsen van het wiel op de rolstoel, drukt u de quick release knop (1) op de as in en schuift u, terwijl u het wiel stevig vasthoudt, de as in de geleider totdat deze vergrendelt. Verzekeer u ervan dat de twee vergrendelpennen (4) te zien zijn aan de buitenkant van de geleider (5).

⚠ Waarschuwing:

De as is niet geborgd totdat de buitenste quick release knop (1) volledig naar buiten springt.

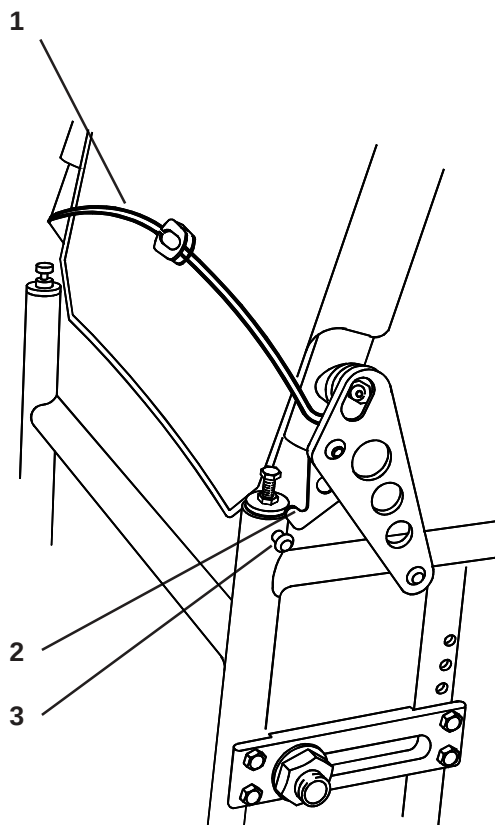


Fig. 18

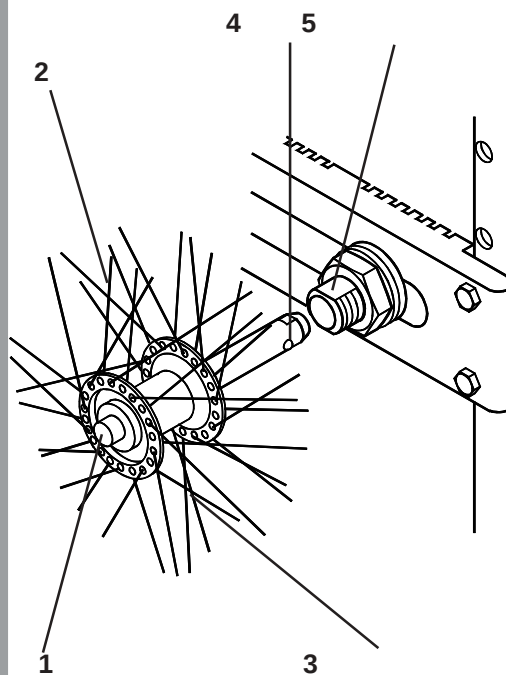


Fig. 19


Kenmerken van de rolstoel

Handremmen

De Quickie GPV-LIJN kan worden geleverd met, naar wens, hoog gemonteerde of laag gemonteerde handremmen. Als opties zijn mogelijk duw-trek- of schaar remmen.

Hoog gemonteerd

De handrem (Fig. 20) is gemonteerd op een klemsysteem (1) en wordt correct afgesteld voordat de rolstoel de fabriek verlaat. Voor het vergrendelen van de handremmen duwt u de bedieningshendels (2) naar voren totdat u ze over het middelpunt voelt gaan en voelt dat de rempen (3) in de band (4) vergrendelt.

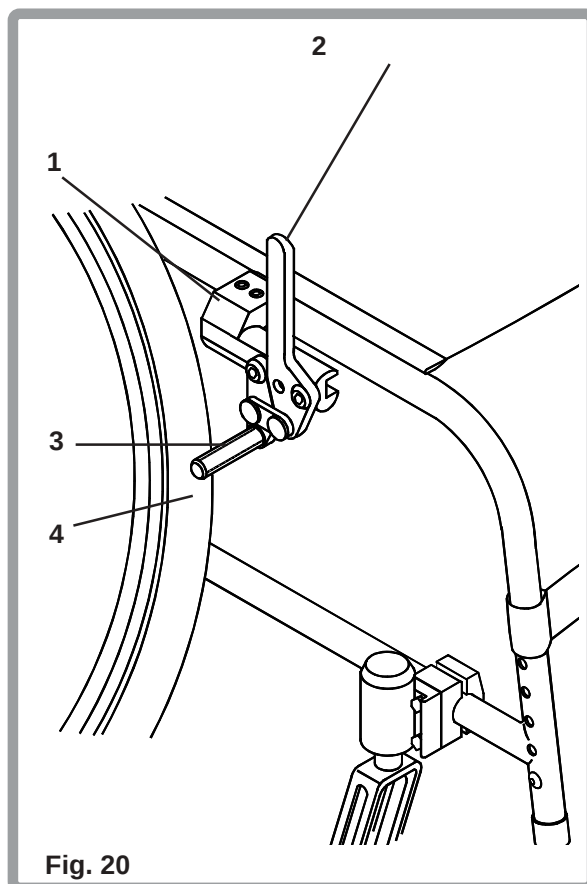


Handremmen, laag gemonteerd

De handrem (Fig. 21) is gemonteerd op een klemsysteem (1) en wordt correct afgesteld voordat de rolstoel de fabriek verlaat. Voor het vergrendelen van de handremmen duwt u de bedieningshendels (2) naar achteren totdat u ze over het middelpunt voelt gaan en voelt dat de rempen (3) in de band (4) vergrendelt.

⚠ Waarschuwing:

Handremmen zijn niet bedoeld om de rolstoel af te remmen als deze in beweging is. Handremmen, indien juist gemonteerd, voorkomen dat de achterwielen gaan rollen als de rolstoel stilstaat.

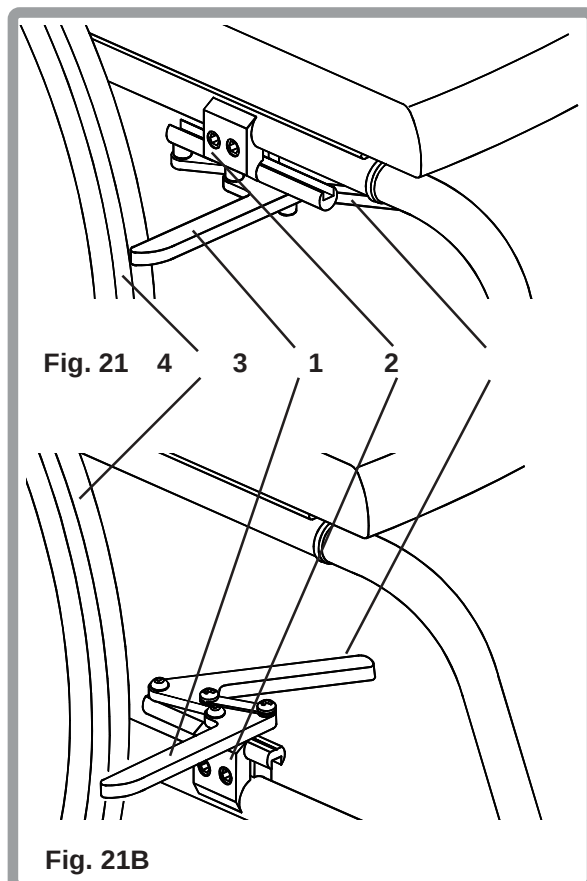

Het afstellen van de rolstoel

Beensteun, wegzwenkbaar

Voor het afstellen van de hoogte (Fig. 22) van de wegzwenkbare beensteunen (1), draait u de schroef (2), met behulp van een 4mm inbussleutel, die geplaatst dient te worden zoals getoond in Fig. 21, los en stelt u de beensteun hoogte in de gewenste positie af. Draai de schroef weer vast op een aanhaalmoment van 8-10Nm.

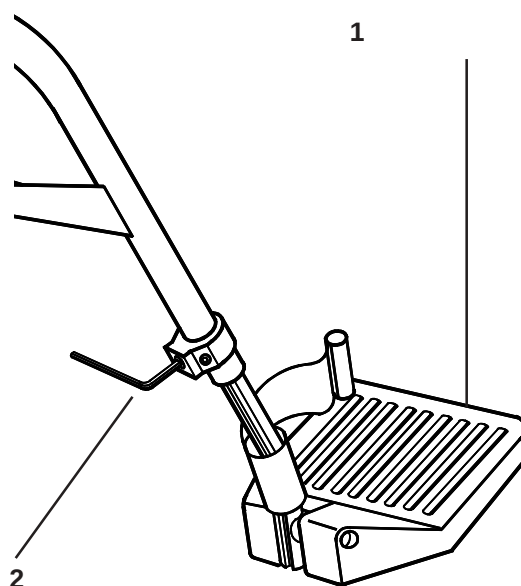


Fig. 22

Voetenplank, gefixeerd

Voor het afstellen van de hoogte (Fig. 23) van de gefixeerde voetenplank (1) verwijdert u de twee kruiskop schroeven (2) aan beide zijden van de voorkant van het frame van de rolstoel (3) en plaatst u de voetsteun in de gewenste positie, plaats de kruiskop schroeven in de juiste gaten en draai de schroeven weer vast op een aanhaalmoment van 5Nm.

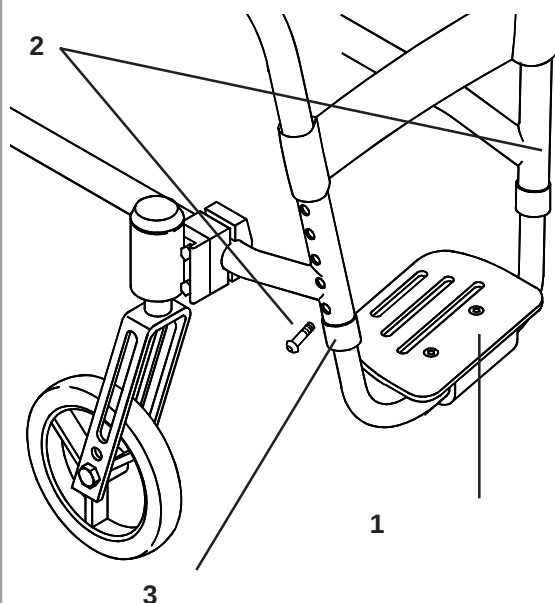


Fig. 23

Het afstellen van de rolstoel

Achteras posities, zithoogte

De zithoogte (Fig. 24) kan afgesteld worden door het naar boven of beneden verplaatsen van de asplaat (1) binnen een bereik van 50mm. De vier bouten (3) en de moeren (4) per asplaat dienen verwijderd te worden, in de gewenste positie gemonteerd te worden en vastgedraaid te worden op een aanhaalmoment van 8-10Nm, door gebruik te maken van twee 10mm dopsleutels. Beide asplaten moeten op dezelfde hoogte gemonteerd worden, om er zeker van te zijn dat de rolstoel aan beide zijden even hoog staat.


Notitie:

Controleer na het verstellen van de zithoogte altijd:

De toe- en uitspoor (Fig. 28, pagina 28)

De hoek van het balhoofdhuizen (Fig. 36, pagina 34)

Dat beide assen in dezelfde positie staan.

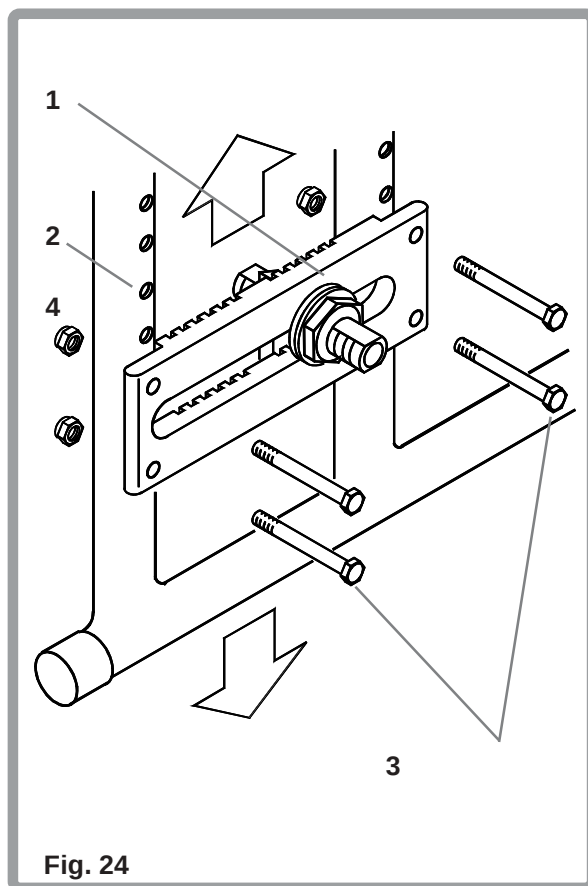


Het afstellen van de rolstoel

Breedte van de wielbasis

De breedte van de wielbasis (Fig. 25) is de afstand tussen de wielen en wordt afgesteld door het losdraaien van de binnenste (1) en de buitenste (2) asbuismoer, met behulp van twee 28mm ringsleutels. Positioneer het ashuis (3) wanneer dit nodig is. De moeren dienen vastgedraaid te worden met een momentsleutel, op een aanhaalmoment van 45Nm.

Notitie:

Om de smalste wielbreedte te bereiken, kunnen de asplaten aan binnenkant van de framebuizen gemonteerd worden. Beide assen dienen identiek gemonteerd te worden.

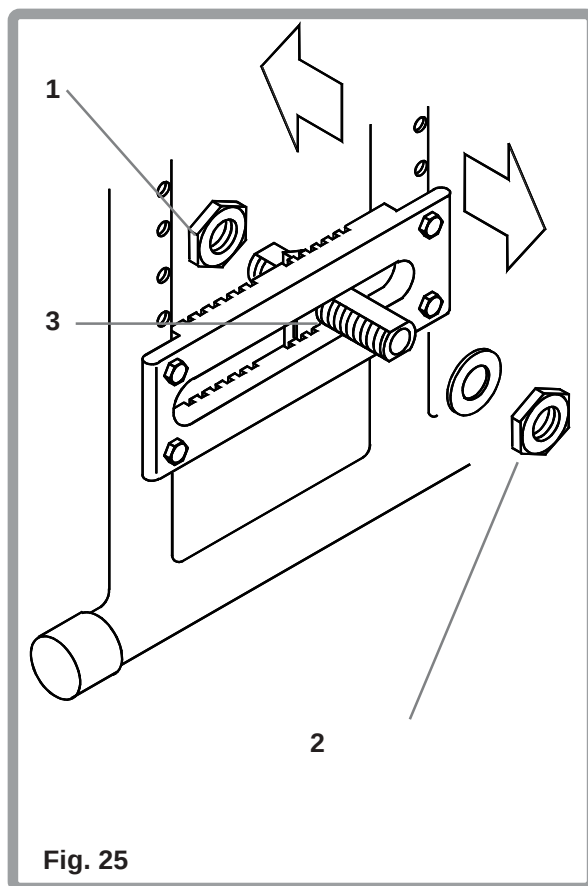


Het afstellen van de rolstoel

Zwaartepunt

Het afstellen van het zwaartepunt (Fig. 26), kan uitgevoerd worden door middel van het naar voren of naar achteren verschuiven van het ashuis (1) in de asplaat (2). Om het ashuis in de asplaat te verschuiven verwijdert u de buitenste asmoer (3) zover dat de vergrendelplaat (4) aan de achterzijde uit zijn vergrendeling komt en het ashuis in de gewenste groef (5) kan verschuiven. Draai de moeren vast op een aanhaalmoment van 45Nm.

Notitie:

Nadat u het zwaartepunt gewijzigd heeft, controleer dan altijd:
De toe- en uitspoor (Fig. 28, pagina 28)
De hoek van de balhoofdhuizen (Fig. 36, pagina 34)
Dat beide assen in dezelfde positie staan.

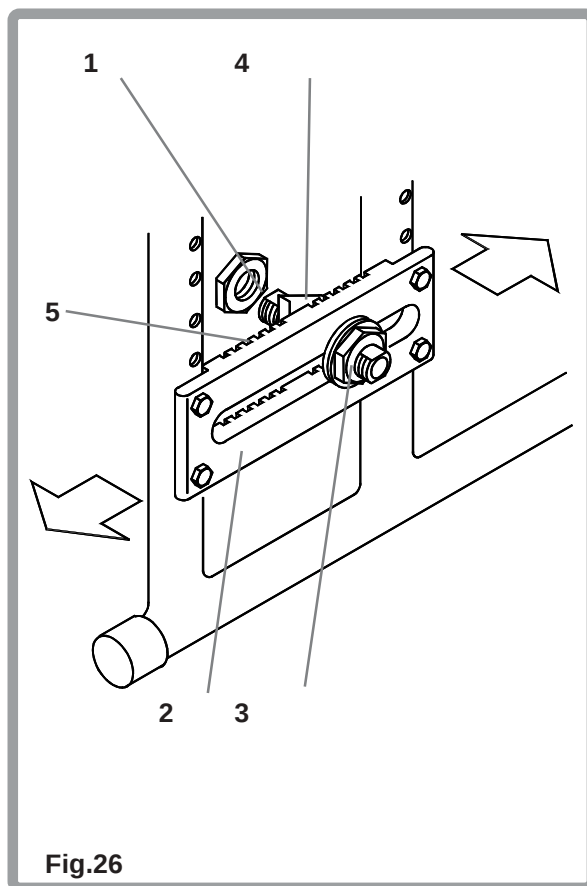

Het afstellen van de rolstoel

De camberstand

De camberstand is op de fabriek op 2° afgesteld (Fig. 27). Meer of minder camberstand kan bereikt worden door het meer of minder monteren van het aantal camberringen (1). De ringen zijn geplaatst tussen de onderkant van de asplaat (2) en het frame (3). De bouten (4) en moeren (5) dienen verwijderd te worden (gebruik 10 mm ringsleutels). Monteer het vereiste aantal camberringen en draai de bevestigingsbouten en moeren vast op een aanhaalmoment van 8-10Nm.

Notitie:

Nadat u de camberstand veranderd heeft, controleer dan altijd:

De toe- en uitspoor (Fig. 28, pagina 28)

De hoek van de balhoofdhuizen (Fig. 36, pagina 34)

Dat beide assen in dezelfde positie staan.

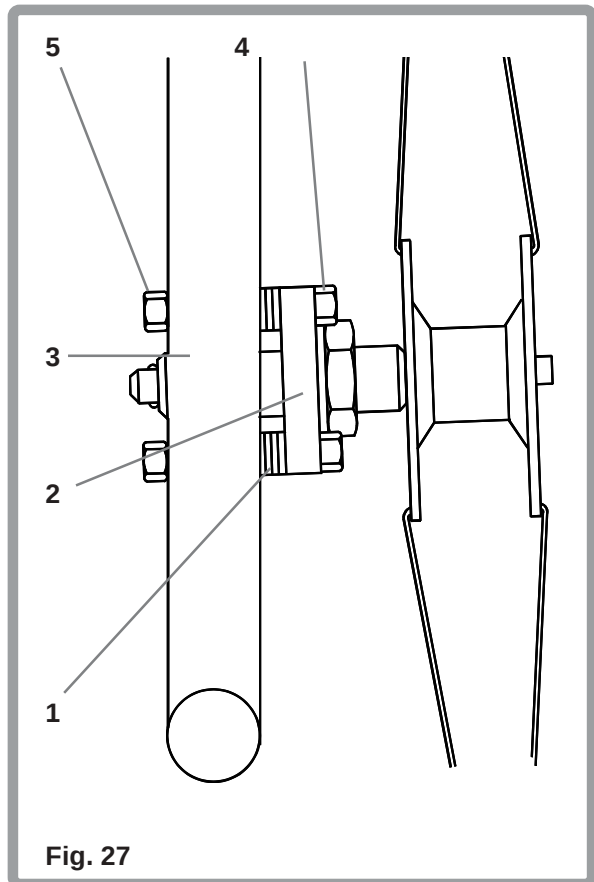


Fig. 27



Het afstellen van de rolstoel

Achteras, toe- en uitspoor

De toespoor is afgesteld in de fabriek (Fig. 28B). Wanneer u meer toe- of uitspoor (Fig. 28) wenst, vermeerder of verminder dan het aantal ringen (1) aan de voor of achterzijde van de wielplaat (2). Meer ringen aan de voorzijde verkleint de toespoor en vergroot de uitspoor. Meer ringen aan de achterzijde vergroot de toespoor en verkleint de uitspoor. Verwijder de vier 10mm asplaatmoeren (3) en bouten (4), vermeerder of verminder het aantal ringen zoals gewenst, en monteer de bouten en moeren weer en draai ze vast op een aanhaalmoment van 8-10Nm.

⚠ Waarschuwing:

Verzeker u er altijd van dat de toe- of uitspoor minder is dan 15mm. Excessieve toe- of uitspoor kunnen een hogere slijtage aan de banden veroorzaken en weerstand geven tijdens het rechthout rijden met de rolstoel.

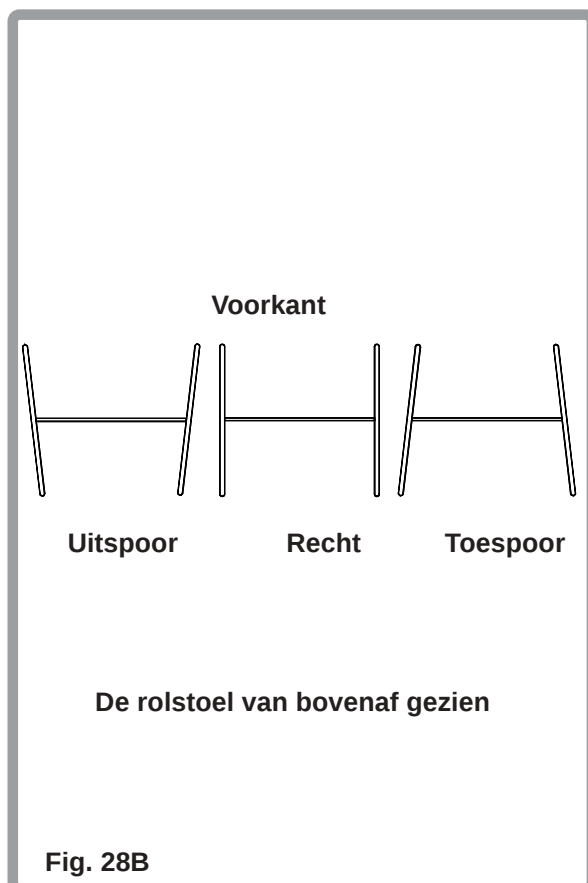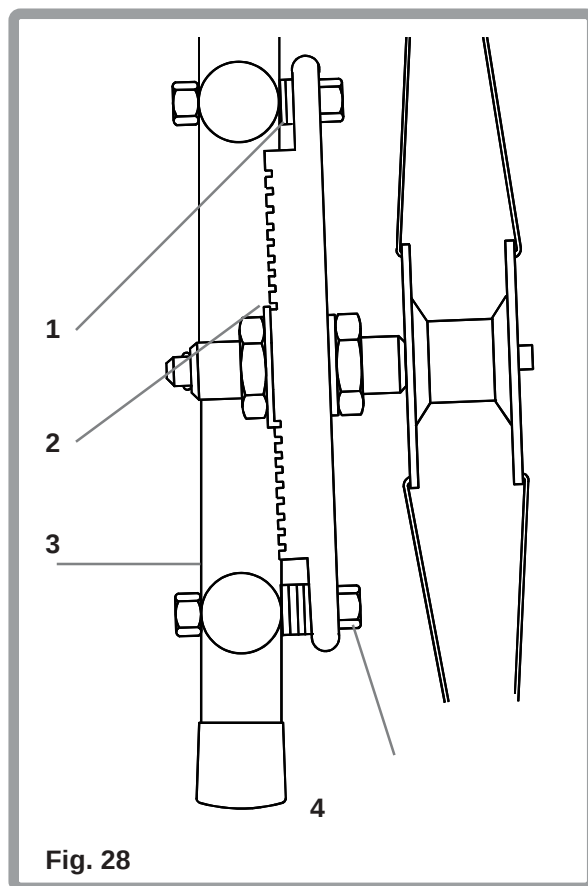

Het afstellen van de rolstoel

Vouwbare rug, hoogte afstelling

De rug heeft een afstelling van 100mm (Fig. 29). U verwijdt de rugbekleding van het frame, door het losmaken van de Velcro klittenbandstrips en de bekleding van de rugbuizen te schuiven. U ziet nu dat de rugbuis in het rugstframe past en bevestigd is met een schroef (1) aan de zijkant van het rugframe (2). Er zijn vier gaten (3), met een onderlinge afstand van 25 mm, hieruit kunt u kiezen om de rughoogte af te stellen. Na het kiezen van de gewenste hoogte, bevestigt u de schroef (1) in het juiste gat en draait u de schroef vast op een aanhaalmoment van 8-10Nm, gebruik makend van een 4mm inbussleutel. Schuif de rugbekleding weer over de rugbuizen, met het overlap gedeelte onbevestigd. Bevestig de Velcro klittenbandstrips om de rugbuizen en vouw het resterende overlap gedeelte naar voren over de rug.

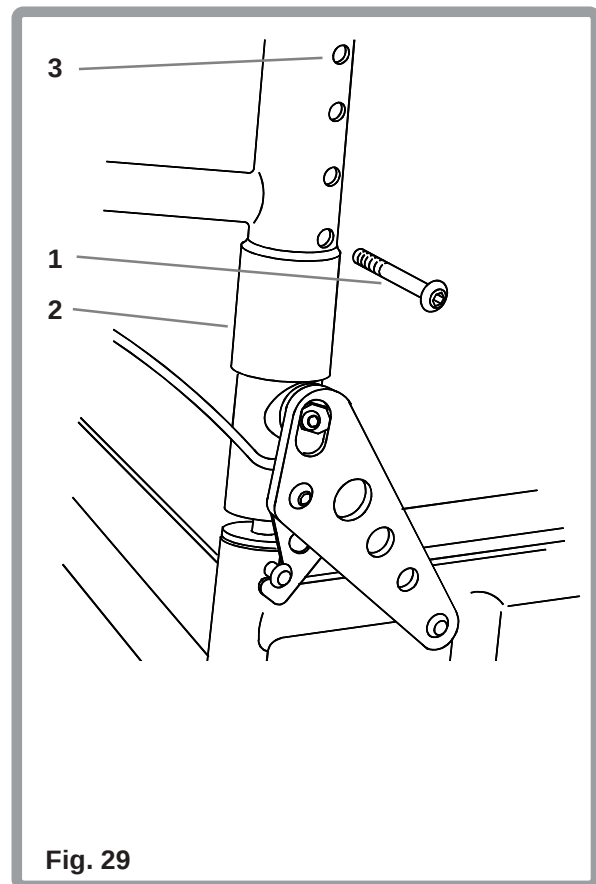


Fig. 29

Het afstellen van de rolstoel

Vouwbare rug-hoek afstelling

Een hoek afstelling van 8° is standaard gemonteerd op de QUICKIE GPV-LIJN rolstoelen (Fig. 30). Om de hoek af te stellen, draait u de onderste schroef (1) iets los en verwijdt u de bovenste schroef (2). Draai de excentrische ring in de gewenste positie, om de rugsteun in de juiste stand af te stellen. Plaats de ring, de bovenste bout en de zelfborgende moer weer terug en draai beide bouten vast met een aanhaalmoment van 8-10Nm.


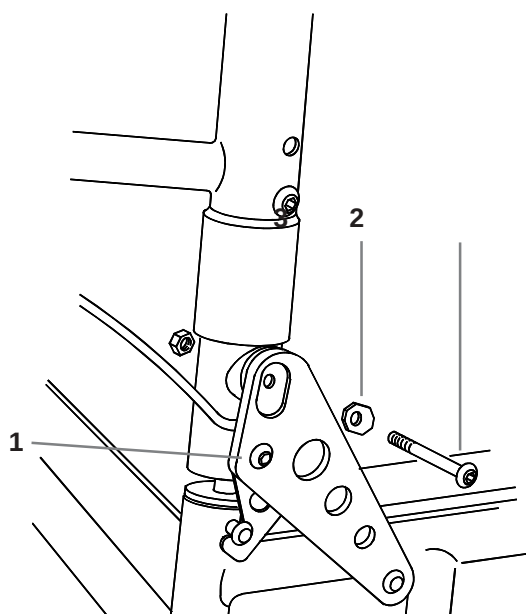


Fig. 30

Het afstellen van de rolstoel

Handremmen

Om de handremmen af te stellen, draait u de schroeven (1) aan de bovenzijde van de klembeugel (2), met behulp van een 5mm inbussleutel iets los. Draai de schroeven een $\frac{1}{4}$ slag tegen de klok in los. Herhaal dezelfde procedure met de andere van de twee schroeven (Fig. 31). Draai de schroeven zover los tot de klem vrij kan schuiven. Schuif de klem in de richting van het achterwiel totdat de rempen (3) in vergrendelde toestand ongeveer 4mm in de band (4) drukt. Draai de schroeven weer vast met een aanhaalmoment van 15Nm. Sommige afstellingen van de handrem kunnen uitgevoerd worden zonder de klem te verplaatsen. Om af te stellen, draait u de twee schroeven, als boven beschreven los. Schuif de montage pen (5) voorwaarts of achterwaarts, en draai de pen in de correcte hoekpositie. De rempen moet in vergrendelde toestand ongeveer 4mm in de band drukken. Draai de schroeven weer vast met een aanhaalmoment van 15Nm.

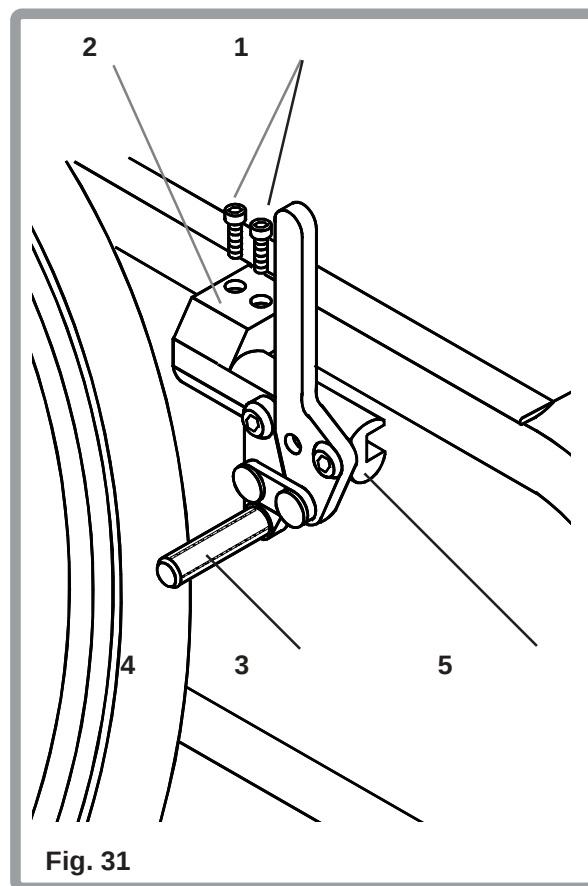

⚠ Waarschuwing:

Als de handremmen goed afgesteld zijn, voorkomen zij dat de achterwielen gaan draaien wanneer de rolstoel stilstaat. Stel de handremmen altijd opnieuw af wanneer u veranderingen aangebracht heeft aan de positie van de achteras, zodat de rempen, in vergrendelde positie, ongeveer 4mm in de band drukt.

Het afstellen van de rolstoel

Laag gemonteerde handremmen

Schaar handremmen (Fig. 32) zijn gemonteerd op de onderste framebuis (2). Ze vergrendelen goed op de wielen maar zitten niet in de weg in de ontgrendelde positie. Voor het afstellen van de remmen, draait u de twee 8mm schroeven (1), aan de onderkant van iedere klem los. Verplaats de rem zover naar voren of naar achteren op de frame buis, dat de rempen, in vergrendelde positie, ongeveer 4mm in de band drukt. Plaats de onderste delen van de klemmen terug draai de schroeven, met een 10mm sleutel vast, op een aanhaalmoment van 15Nm.

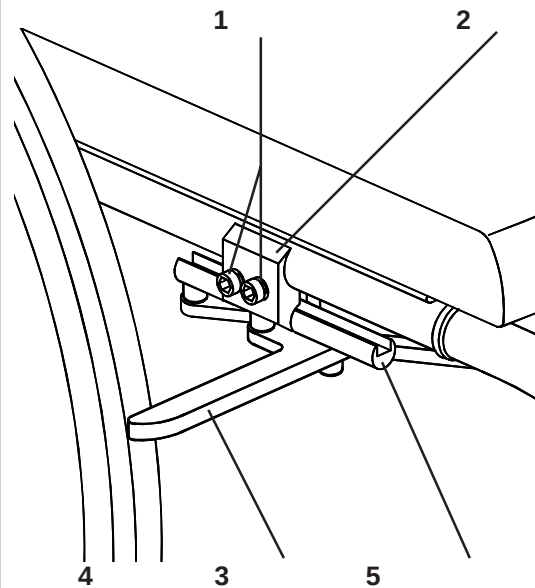


Fig. 32

Afstellen van de zitbekleding

De zitbekleding kan opnieuw afgesteld worden door middel van de Velcro® klittenbandstrips aan de onderzijde van de zitting (Fig 33). Verwijder de zes kruiskop schroeven (1) die de linkerzijde van de zitbekleding vast houden met een kruiskop schroeven-draaiër. Stel de klittenbandstrips af op de gewenste spanning en monteer de kruiskop schroeven weer. Draai de kruiskop schroeven vast op een aanhaalmoment van 5-8Nm.

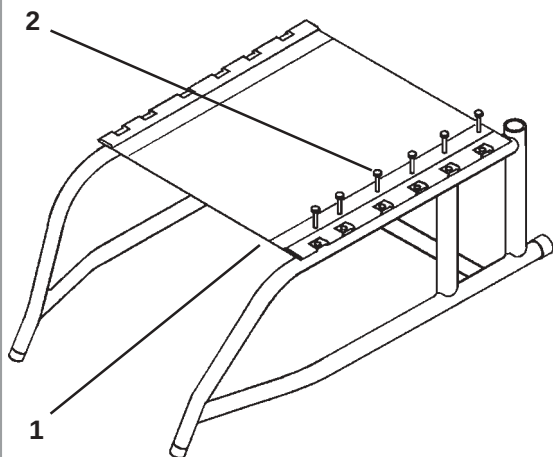


Fig. 33

Het afstellen van de rolstoel

Het afstellen van de balhoofden

Om de speling uit de balhoofdas te verwijderen (Fig. 34), verwijdert u de stofkap (1) door deze op te lichten. Draai de moer (2) met een 19mm dopsleutel aan tot alle speling verwijderd is, maar zo dat de balhoofdas nog steeds zonder weerstand rond kan draaien. Monteer de stofkap door deze weer op zijn plaats te drukken.

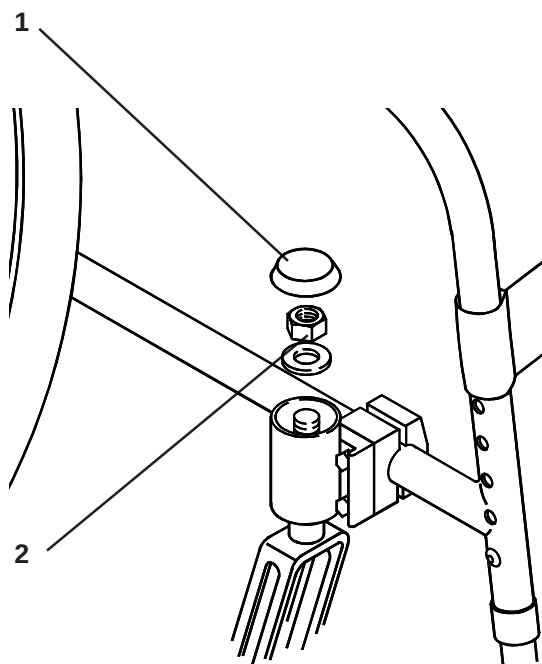


Fig. 34

Zithoogte afstelling

De twee-gats voorvorken geven u de mogelijkheid tot het verwisselen van 125mm, 200mm en 150mm voorwielen om zo de zithoogte te verstellen (Fig. 35). Om te verstellen verwijdert u de asbout (1) en moer (2) met een 13mm ringsleutel waarna het voorwiel (3) verwijderd kan worden. Ofwel u verandert de voorwiel grootte en/of de positie van voorwiel naar boven of beneden in de gewenste voorgeboorde gaten (4) die op een onderlinge afstand van 25mm voorgeboord in de voorvork (5) zitten. Monteer de bout en moer weer en draai ze vast op een aanhaalmoment van 27Nm.

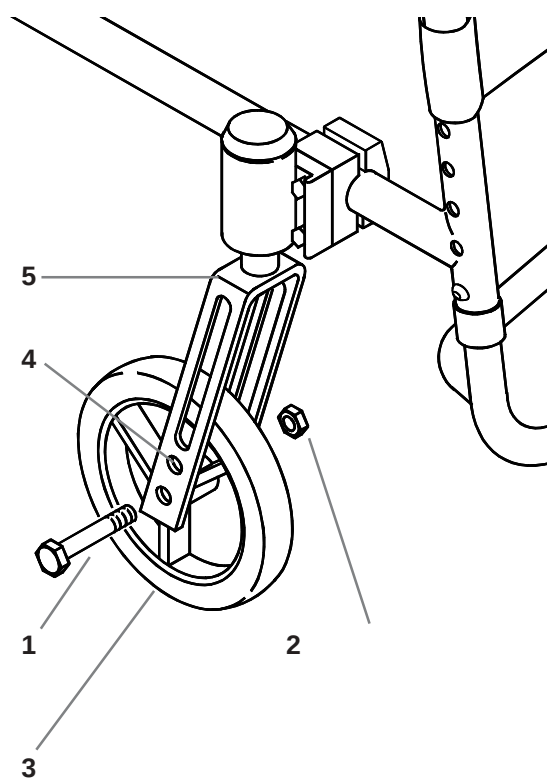


Fig. 35


Het afstellen van de rolstoel

Hoek afstelling

Plaats de rolstoel op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafel). Draai de twee excentrische bouten (1) en de 10mm moeren (2) los die het balhoofdhuus (3) op zijn plaats houden, verwijder de scharnierpen (4) niet. Gebruik een grote rechthoekige driehoek (5) welke op een vlakke ondergrond en tegen de voorkant van het balhoofdhuus geplaatst is, lijk het balhoofdhuus uit, loodrecht met de vlakke ondergrond. Wanneer de uitlijning correct is, dienen de twee excentrische bouten weer vastgedraaid te worden op een aanhaalmoment van 8-10Nm (Fig. 36). Herhaal dit proces voor het andere balhoofdhuus.

⚠ Waarschuwing:


Een verkeerde balhoofdhoek veroorzaakt wrijving wanneer u de rolstoel wilt draaien.

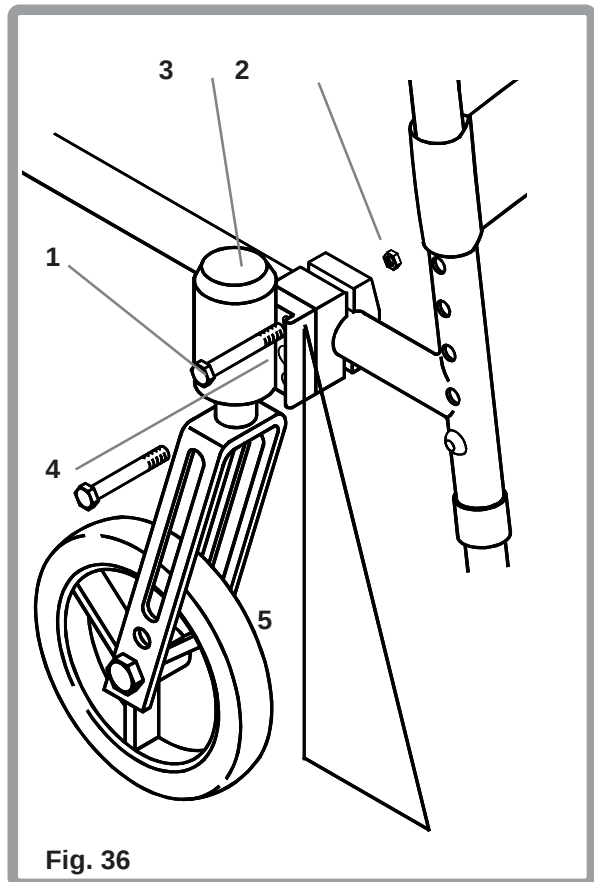

Het afstellen van de rolstoel


Het voorwaarts en achterwaarts verplaatsen van het balhoofdhuys

Draai de twee excentrische bouten (1), door gebruik te maken van een 10mm ringsleutel zover los dat het balhoofdhuys soepel over het frame kan bewegen (Fig. 37). Verwijder de scharnierpen (2) door het verwijderen van de borgveer (3). Schuif het balhoofdhuys naar voren of naar achteren en plaats de scharnierpen in één van de voorgeboorde frame-gaten (4) en monteer de scharnierpen borgveer. Volg de instructies op pagina 34 voor het afstellen van de balhoofdhuishoek op.

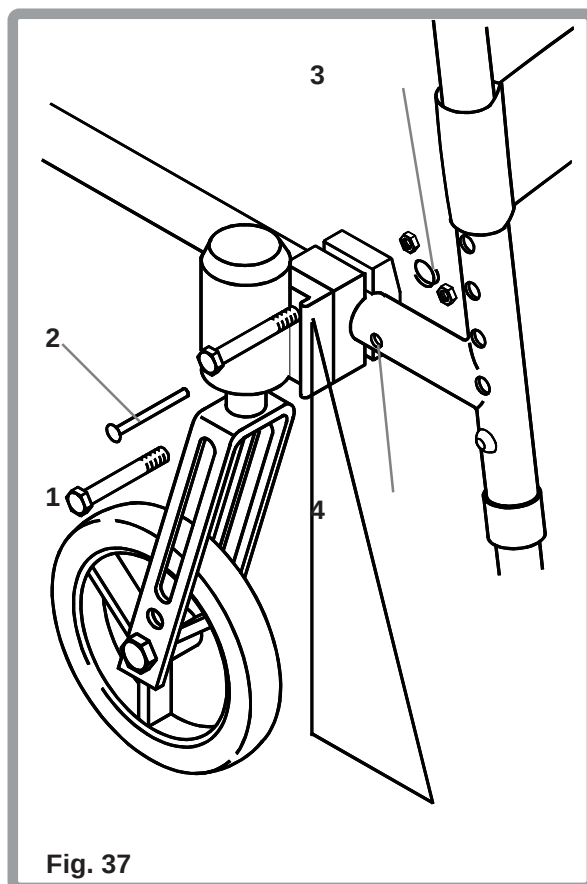

Aan de binnenzijde gemonteerde balhoofdhuizen

Om de balhoofdhuizen aan de binnenzijde van het frame te monteren verplaatst u de balhoofdhuizen in de tegenovergestelde positie (Fig. 38). Verwijder de balhoofdunits (1) van het frame (noteer de positie). Monteer aan de binnenzijde van het frame de rechter balhoofdunit aan de linkerzijde, en de linker balhoofdunit aan de rechterzijde. Volg voor correcte montage de instructies de aanwijzingen op van pagina 34, Fig. 36 en 37 (hoek afstelling en/of voorwaarts/achterwaarts verplaatsen).

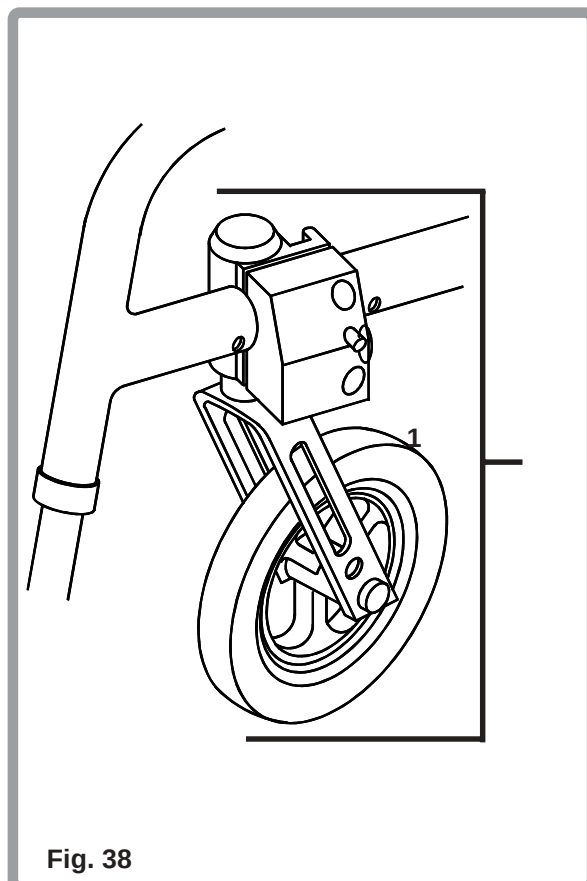

Transport

Transport in wagens

Gebruikers mogen niet in de rolstoel zitten terwijl ze worden vervoerd in om het even welk transportmiddel.

Enkel vast opgestelde autozetels en veiligheidsgordels bieden voldoende bescherming in gevaarlijke situaties. Wanneer een voertuig in beweging is, moet de onbemande rolstoel op een degelijke manier worden beveiligd.

Storingen en onderhoud

Alle QUICKIE GPV-LIJN rolstoelen verlaten de fabriek, geïnspecteerd en afgesteld voor direct gebruik. Continu gebruik vereist regelmatig onderhoud en afstelling, in het bijzonder wanneer de originele afstellingen zijn gewijzigd. De eerste afstellingen, welke uitgevoerd zijn door uw medisch specialist, dienen in overeenstemming te zijn met uw lichaamsbouw en uw persoonlijke voorkeur.

De volgende tabel geeft een indicatie wanneer het routine onderhoud uitgevoerd dient te worden, hetgeen u zal helpen de levensduur en de efficiëntie van uw rolstoel te verlengen.

Quickie GPV-LIJN Controlelijst				
	WEEK	KWARTAAL	6 MAANDEN	JAAR
1. Bandenspanning- 450 kilopascal/4.5 bar (65psi) (achterwielen). Voorwielen 250 kilopascal 2.5 bar.	●			
2. Handremmen controleren op losse bevestigingen.		●		
3. Voorwielen en beensteun- bevestigingspunten van de voorwielen en de balhoofdas, controleren op goed draaien.		●		
4. Sporing van de rolstoel- controleren, of de rolstoel in een rechte lijn rijdt, zonder extra duwen of bijremmen.		●		
5. Kruisframe en het vouwmechanisme controleer of de rolstoel gemakkelijk opent en vouwt, controleer op losse verbindingen. Controleer het kruisframe op verbogen of versleten delen.		●		
6. Armsteunen (opklapbaar, wegzwenkbaar, in hoogte verstelbaar) controleer of alle verbindingen goed vast zitten en controleer op goede werking.		●		
7. Zit- en rugbekleding- controleren op slijtage en uitgerekte bekleding.			●	
8. Complete inspectie, veiligheidstest en onderhoud dient door een geautoriseerde Sunrise Medical dealer uitgevoerd te worden.				●

Schoonmaak richtlijnen en accessoires

Schoonmaak richtlijnen

In aanvulling op het voorgaande routine onderhoud, dienen zowel het frame als de bekleding regelmatig gereinigd te worden. Lichte vervuiling kan verwijderd worden met een oplossing van een mild reinigingsmiddel en warm water, veeg in de richting van de textielvleug. Naspoelen met schoon water voordat u de bekleding laat opdrogen.

▲ STOP DE BEKLEDING VAN DE ROLSTOEL NOOIT IN EEN DROOGTROMMEL.

Gebruik geen bleekmiddelen of oplosmiddelen. Wanneer het vuil in de bekleding gedrongen is, kunt u de bekleding voorzichtig met een zachte borstel afschrobben. Het frame dient regelmatig gereinigd te worden met een niet schurende reiniger, waarna u het frame in een niet schurende autowas zet.

Gereedschap

Voor het onderhoud van uw rolstoel heeft u de volgende gereedschappen nodig:

- verstelbare sleutel
- 2, 3, 4, 5, 6 en 7mm inbussleutels
- 3/32" inbussleutels
- een spaaksleutel
- 10, 13, 17, 19 en 28mm ringsleutels
- Kruiskop op nr. 2 schroevendraaier

Accessoires

Draagtas.
Stokhouder.
Anti-tip systeem.
Rugzak.
Kuitband.
Kuitband, dubbel.
Positioneer band,
Type: Velcro® klittenband
Lang, 170cm.
Kort, 145cm.
Type: gesp
Lang, 163cm.
Kort, 137cm.
Frametasje.
Gereedschapset.
Spaakbeschermers.
Trapdop, links.
Trapdop, rechts.

Lakstiften.
Rolstoelwerkblad.
Extra klein, 26-30cm.
Klein, 33-36cm.
Middel, 38-41cm.
Groot, 46-51cm.

Technische gegevens

Quickie GPV-LIJN

Totale lengte met beensteun	880mm min.- 955mm max.
Totale breedte	683mm
Lengte in opgevouwen toestand	813mm
Breedte in opgevouwen toestand	456mm
Hoogte in opgevouwen toestand	500mm
Totaal gewicht	11kg - 10.5kg (GP SA)
Massa zwaarste deel	8kg
Statische stabiliteit helling af	1° min.-27° max.
Statische stabiliteit helling op	1° min.-13.5° max.
Zijwaartse stabiliteit	1° min.-21° max.
Zithoek	5°
Effectieve zitdiepte	420mm
Effectieve zitbreedte	430mm
Hoogte voorzijde zitting tot vloer	443mm
Rughoek	15°
Rughoogte	345mm min.-445mm max.
Afstand voetsteun tot zitting	397mm min.-467mm max.
Beensteunhoek ten opzichte van de zitting	104.6°
Afstand armsteun tot zitting	Not applicable
Voorzijde armsteun tot frame	Not applicable
Diameter hoepel tot achterkant	532mm
Horizontale locatie van de as	45mm to front-45mm to rear
Minimum draaistraal	606mm

Sunrise Medical

Uw nieuwe Quickie GPV-LIJN is vervaardigd in de West Midlands (Engeland) bij Sunrise Medical.

Met meer dan 30 jaar ervaring, zijn wij één van de langst bestaande fabrikanten van mobiliteitsproducten in Engeland. Al onze fysieke rolstoelen, elektrische rolstoelen, scootermobielen en trapliften ondergaan zeer strenge tests om er zeker van te zijn dat alle producten voldoen aan onze comfort, veiligheids- en duurzaamheidseisen. Ons succes is gebaseerd op sterke kwaliteitstradities, waar voor uw geld garantie, en de oprechte zorg voor onze klanten.

Wij zijn niet alleen trots op het ontwerpen en bouwen van de meest geïnnoveerde producten, maar ook op onze excellente klantenservice, zowel tijdens als na de verkoop van ons product.



Naast uw nieuwe Quickie GPV-LIJN, is Sunrise ook de fabrikant van zuurstof concentrators, vernevelaars, liften en trapliften. Wij hebben een enorme reeks dagelijkse hulpmiddelen waaronder de Merlin badlift, bedaccessoires en loophulpmiddelen.

Wanneer u informatie wenst over onze volledige reeks van producten kunt u bellen met of schrijven naar:

Sunrise Medical B.V., Importeur

Groningenhaven 18 -20
3433 PE NIEUWEGEIN
Nederland

Tel: 0031 (0) 30 6082100

Sunrise Mobility, Fabrikant

Highstreet, Wollaston
West Midlands, DY8 4PS
Engeland

Tel: 0044 138 444 6688









Sunrise Medical Limited

High Street, Wollaston, West Midlands DY8 4PS England

Tel 01384 44 66 88 Fax 01384 44 66 99

www.sunrisemedical.co.uk