

Kombinationsübersicht R90



11/2024

Kompatibilitätsprüfung für starre und faltbare Rollstühle

6-Schritt-Kompatibilitäts-Check

Die Empulse R90 ist mit starren und faltbaren Rollstühlen mit integrierten oder abnehmbaren Fußstützen kompatibel. Um die Kompatibilität des Empulse R90 mit Ihrem Rollstuhl sicherzustellen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Hinweise zur Kompatibilitätsprüfung. Bitte beachten Sie, dass für faltbare Rollstühle eine erweiterte Prüfung erforderlich ist.

1 - Kombinationserklärung - Bitte prüfen Sie, ob die Kombination zwischen der Empulse R90 und Ihrem speziellen Rollstuhl zugelassen ist. Die Kombinationsübersicht finden Sie auf www.sunrisemedical.de.

2 - Größe Antriebsrad - Die R90 ist kompatibel mit Rollstühlen mit einer Antriebsradgröße von:

- 24"
- 25"

Bitte wählen Sie auf dem Bestellformular Ihre Rückradgröße aus.

3 - Radsturz - Die R90 ist kompatibel mit Rollstühlen mit einem Sturz von:

- 0°
- 1°
- 2°
- 3°

Die R90 ist nur mit starren Stühlen kompatibel, die eine gerade Achse haben. Wenn die Achse nicht gerade ist und eine „V“-Form hat, ist der R90 nicht kompatibel.

Kompatibilitätsprüfung für starre und faltbare Rollstühle

4 - Sitzhöhe hinten - Bitte überprüfen Sie Ihre Kombination von Schwerpunkt und Rückenhöhe in der untenstehenden Matrix und messen Sie den Abstand von der Sitzbespannung bis zur Mitte der Achse

Hintere Sitzhöhe in mm	24" Antriebsräder			25" Antriebsrad		
	CG			CG		
	0 - 80 mm	92 mm	104 mm	0 - 80 mm	92 mm	104 mm
N/A	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
N/A	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
N/A	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
370	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
380	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
390 - 400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
410	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
420	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
430	Go	Go	NoGo	Go	NoGo	NoGo
440	Go	Go	NoGo	Go	NoGo	NoGo
450	Go	Go	NoGo	Go	Go	NoGo
460	Go	Go	Go	Go	Go	NoGo
470	Go	Go	Go	Go	Go	Go
480	Go	Go	Go	Go	Go	Go
490	Go	Go	Go	Go	Go	Go
500	Go	Go	Go	Go	Go	Go
N/A	Go	Go	Go	Go	Go	Go
N/A	Go	Go	Go	Go	Go	Go
N/A	Go	Go	Go	Go	Go	Go
N/A	Go	Go	Go	Go	Go	Go

*Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Radgrößen in allen Regionen verfügbar sein werden.

Um dies zu überprüfen, können Sie auch den Abstand von der Mitte der Achse zur Sitzbespannung Ihres Rollstuhls messen. Der gemessene Abstand muss in dem unten angegebenen Bereich liegen.

- Für COG kleiner oder gleich 76 mm, 70 mm Mindestabstand zwischen Achse und Sitzbespannung
- Für COG größer oder gleich 76 mm, 118 mm Mindestabstand zwischen Achse und Sitzbespannung

5 - Allgemeine NoGo's - Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Rollstuhl mit einem der folgenden Teile ausgestattet ist, da diese ein NoGo darstellen


- Hintere Federung
- 4 Link Suspension
- Einarm Antrieb
- Achten Sie auf genügend Platz am Vorderrahmen des Rollstuhls, um die Halterung der R90-Steereinheit anzubringen (30 mm).

Erweiterte Kompatibilitätsprüfung nur für faltbare Rollstühle

6 - Empfehlungen - Die folgenden Punkte führen weder zu einem Go noch zu einem NoGo, aber wir empfehlen, die Hinweise zu befolgen, um eine optimale Geräteleistung ohne Einschränkungen zu gewährleisten.



- 3" & 4" Lenkräder sollten nicht mit dem R90 kombiniert werden
- Es wird empfohlen, den Rollstuhl in Kombination mit dem Empulse R90 mit Sicherheitsrädern zu versehen

6 - Faltrollstuhl Breite - Für Faltrollstuhlrahmen messen Sie bitte den Abstand von der inneren Achsplatte zur inneren Achsplatte und wählen Sie die richtige Größe der Faltachse auf dem Bestellformular. Wenn der gemessene Abstand nicht in die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Minimal- bis Maximalmaße passt, bedeutet dies, dass die R90 nicht für diesen Rollstuhl geeignet ist (NoGo).

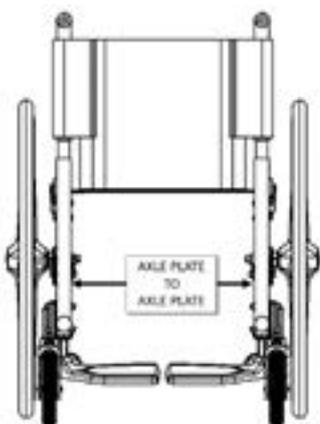

Abstand Achsplatte zu Achsplatte in mm	Achse für faltbare Rollstühle			
	XS	S	M	L
300 - 330	X			
330 - 400		X		
400 - 450			X	
450 - 530				X

6 - Faltrollstuhl Achsplattengröße - Für Faltrollstuhlrahmen messen Sie bitte die Breite der Achsplatte wie auf den Bildern unten gezeigt und wählen Sie die richtige Halterungsgröße auf dem Bestellformular. Wenn der gemessene Abstand nicht in die in der Tabelle unten genannten Minimal- bis Maximalmaße passt, bedeutet dies, dass die R90 nicht zu diesem Rollstuhl passt (NoGo).

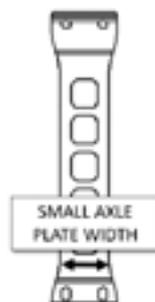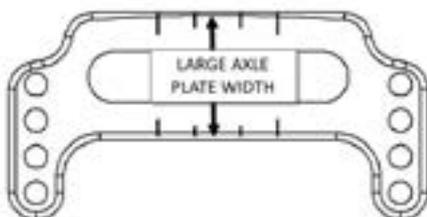

Größe Achsplatte in mm	Achsplatten Adapter		
	S	M	L
25 - 38	X		
38 - 50		X	
50 - 60			X