


E | F35

TRIN-FOR-TRIN AFKOBLING

- Sørg altid for, at enheden er slukket, før den til- og afkobles docken
- Aktiver altid kørestolens bremses
- Sørg for, at kørestolen er fuldt forbundet med trækanordningen før brug
- Som med alle bevægelige dele er der risiko for, at fingre og/eller tøj kan komme i klemme
- Vær ekstra forsigtig, når du betjener dockingklemmerne

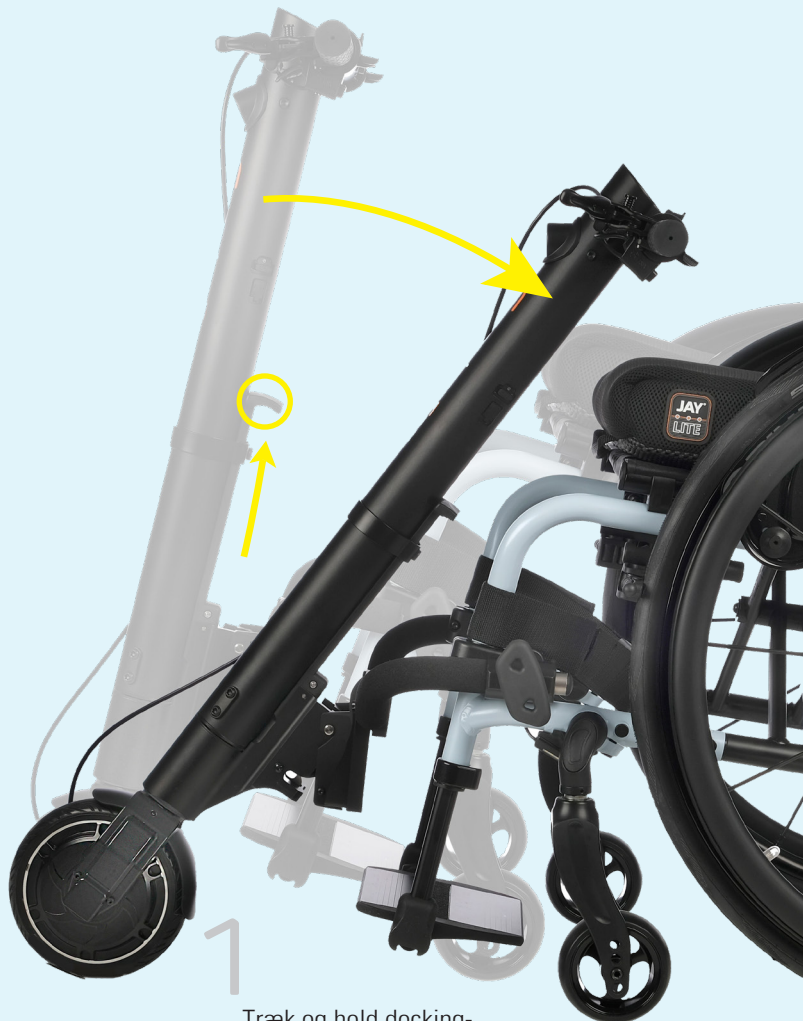

1
Træk og hold docking-udløserhåndtaget på hovedrøret. Træk nu styret forsigtigt bagud/nedad.



2
Sænk nu hjælpemotoren langsomt, indtil kørestolens svinghjul rører gulvet.

For kun at fjerne F35 fra underammen, kan trin 1 og 2 udføres uafhængigt af trin 3 og 4.



3
Undo the tommy screws of the clamps on both sides and pull the subframe until the tubes of the intermediate sub-frame have been pulled completely out of the clamps.



4
Take out the subframe from the docking clamps.



Scan QR koden for at se Service Videoerne.