




Se brugervejledning til Empulse® R90® før anvendelse for at sikre, at du forstår alle tilhørende sikkerhedsadvarsler og brugsanvisninger. Instruktionsbladet er en vejledning til anvendelsen og opsætningen af den tilhørende app. Appen giver mulighed for yderligere opsætning og tilpasning af din Empulse R90. Hvis du har spørgsmål, bedes du ringe til Sunrise Medical Support på +45 70 22 43 49.

DOWNLOAD

SUNRISE INTELLIGENCE™ APPEN


Sunrise Intelligence-appen er at finde i Apples App store eller til Android-brugere på Google Play Butik.

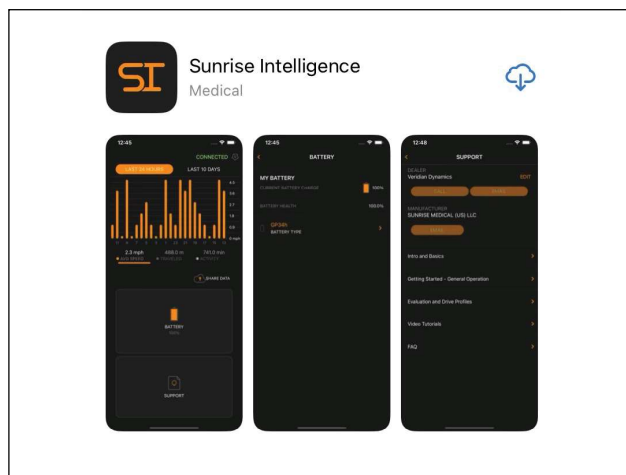

TILSLUTNING TIL DIN R90

1. Når du åbner appen for første gang, vil du blive bedt om at gennemgå vilkårene for brug. Du skal vælge Accepter for at bruge appen.
2. Sørg for, at din telefons Bluetooth er aktiveret, og vælg "Connect" (Opret forbindelse) for at begynde at scanne efter enheder i nærheden.






Når der trykkes på knappen "CONNECT" (OPRET FORBINDELSE), begynder appen at scanne efter R90-enheder i dit område.

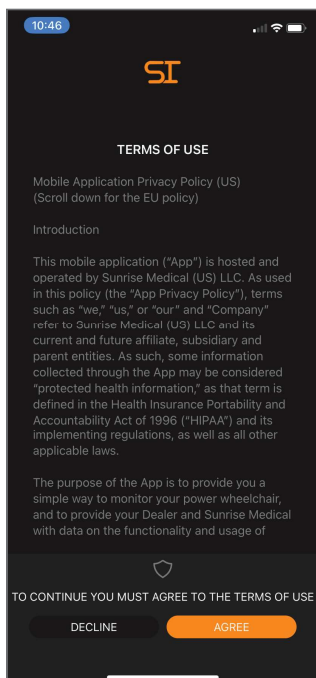

ADVARSEL FRA FORHANDLER/TEKNIKER:

Vær opmærksom på, at du ikke må betjene denne enhed, før du har læst brugervejledningen. Hvis du ikke forstår instruktionerne og advarslerne i denne brugervejledning, bedes du kontakte Sunrise Medicals tekniske serviceafdeling, før du betjener og/eller servicerer Empulse-enheden. I modsat fald er der risiko for skader på kørestolen og/eller personska-

3. Når scanningen efter enheden er fuldført, vises en liste over mulige enheder. Vælg den Empulse R90, du vil oprette forbindelse til. Bemærk: Sørg for at bruge det korrekte id-nummer, hvis PCB eller kontrolboks er blevet udskiftet.
4. Når du har forbindelse til R90, bliver du bedt om at indtaste din vægt og kalibrere enheden. For at kunne kalibrere enheden skal R90 være monteret korrekt og fastgjort til din kørestol. For at forhindre kørestolen i at bevæge sig under kalibreringen skal den fastgøres eller hjullåsene aktiveres, og kørestolen stilles på et plant underlag, inden kalibreringen påbegyndes. Brugervægt og kalibrering kan altid opdateres under indstillinger.

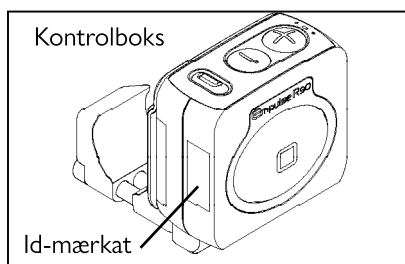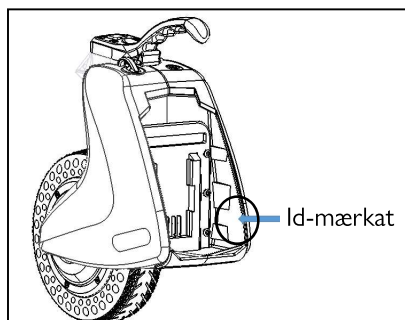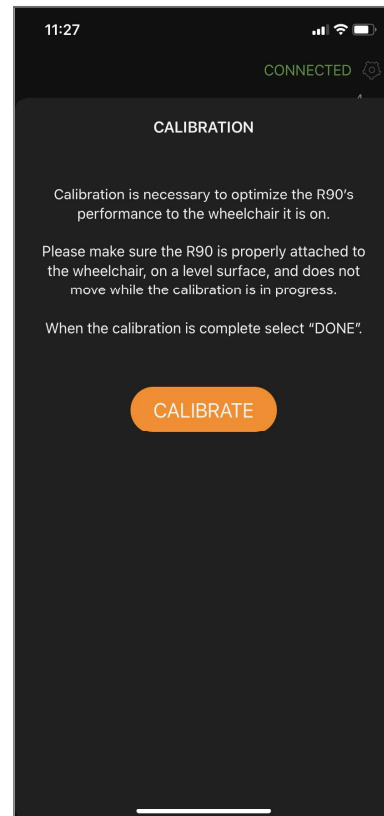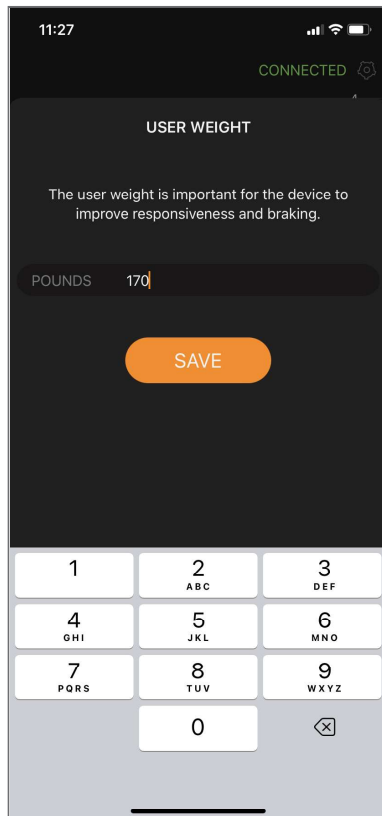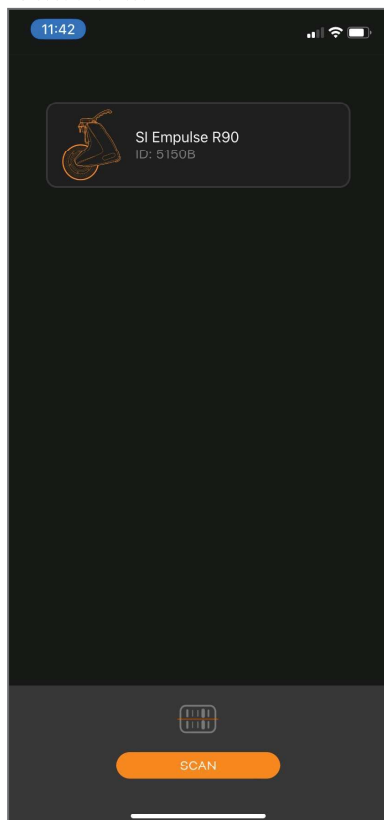


BRUG AF SUNRISE INTELLIGENCE-APP MED DIN R90

1. Diagrammer:


R90-appens hovedskærm vises nedenfor. Den har flere dele, som du bør blive bekendt med.

Diagrammerne øverst på skærmen viser din hastighed, kørte afstand og tid for de sidste 9 sessioner. En session defineres som tiden fra når R90-hjulet aktiveres, til næste gang det hæves.

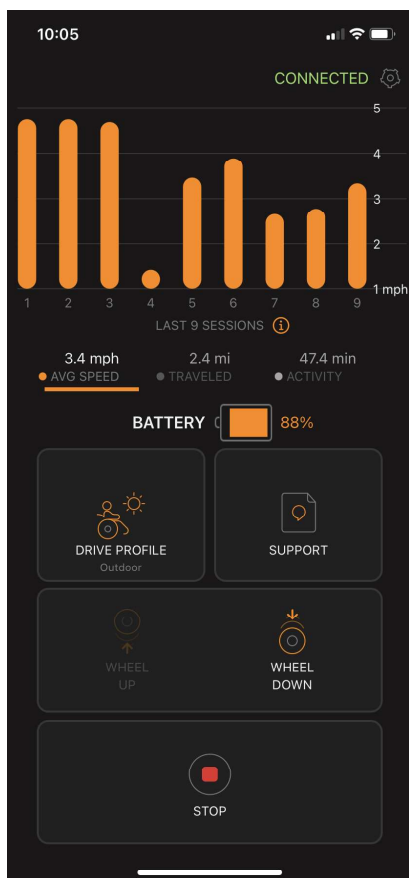


2. Batteri:

Det næste afsnit på hovedskærmen viser batteriets resterende opladningsniveau. På skærmen nedenfor er det resterende opladningsniveau 88 %. Det betyder, at 12 % af batterikapaciteten er blevet brugt, siden batteriet sidst blev opladet.

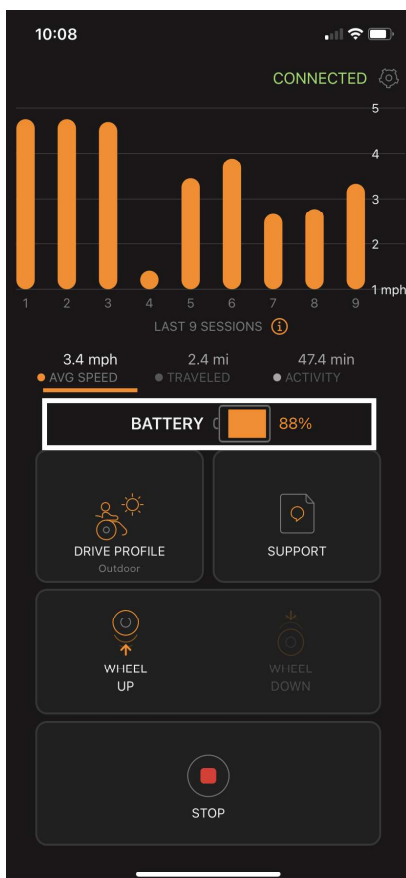

3. Kørselsprofiler:

Den næste del af hovedskærmen giver dig mulighed for at vælge den ønskede kørselsprofil. R90 leveres som standard med to forudindstillede kørselsprofiler, der hver især kan tilpasses. Væg knappen "DRIVE PROFILE" (KØRSELSPROFIL) for at få adgang til disse.

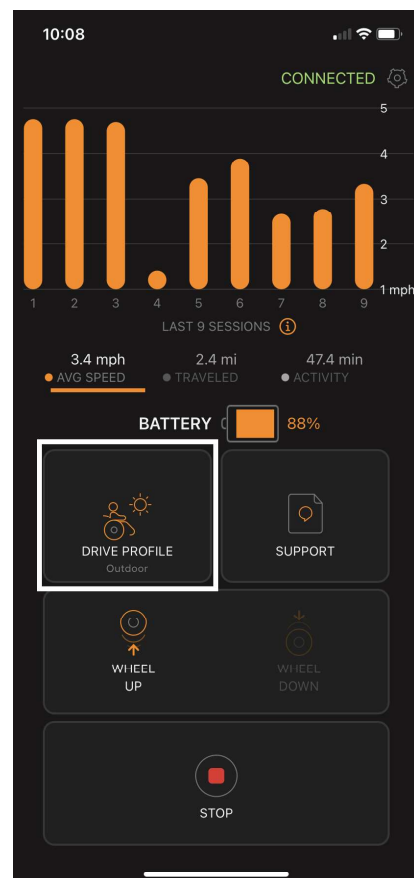

3. Kørselsprofiler (fortsat)


De to kørselsprofiler, som vises på skærmen nedenfor, er:

- **Indoor (Indendørs):** Velegnet til kørsel i indendørs omgivelser, hvor trange rum kræver langsommere acceleration og en skarpere drejevinkel.
- **Outdoor (Udendørs):** Velegnet til kørsel i udendørs omgivelser, hvor åbne områder giver mulighed for hurtigere acceleration.
- **Maks. hastighed:** Indstiller grænsen for den maksimale, opnåelige hastighed for R90. Den maksimale, opnåelige hastighed er 9 km/t. Både indendørs og udendørs hastighedsindstillinger kan opnå en maksimal hastighed på 9 km/t.


Sådan justeres den maksimale hastighed under en kørselsprofil:

1. Vælg en kørselsprofil.
2. Bevæg den fremhævede orange bjælke. Bjælken viser den maksimale hastighed for den pågældende kørselsprofil. Feks. på billedet, skærm 2: Kørselsprofilen Outdoor er indstillet til en maks. hastighed på 9 km/t.
3. For at gemme kørselsprofilindstillingen skal du vælge "SAVE" (GEM) (bekræftet, når "profile updated" (profil opdateret) vises på skærmen). R90-enhedens drivhjul vil vende tilbage til sin startposition.

Skærm 1: Indendørs

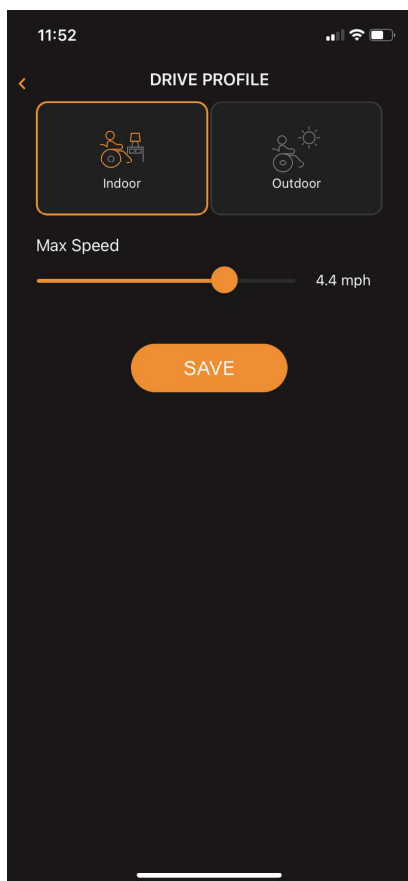


Skærm 2: Udendørs

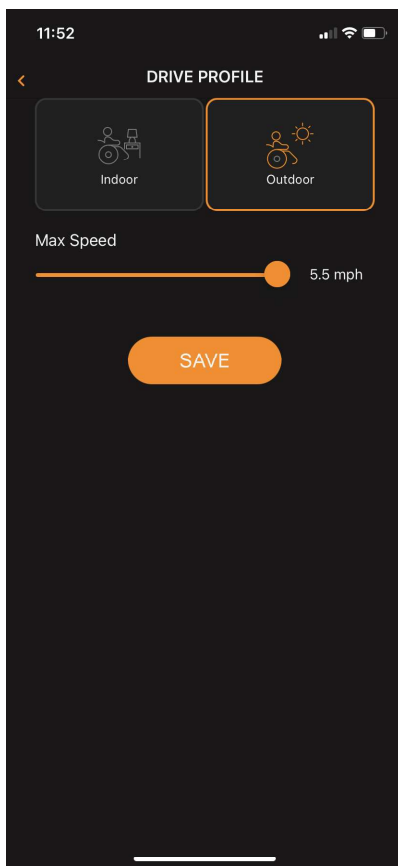

4. Support:

Vælg knappen "SUPPORT" for at få adgang til R90-supportvideoer, R90-websiden og virksomhedssupport til R90.

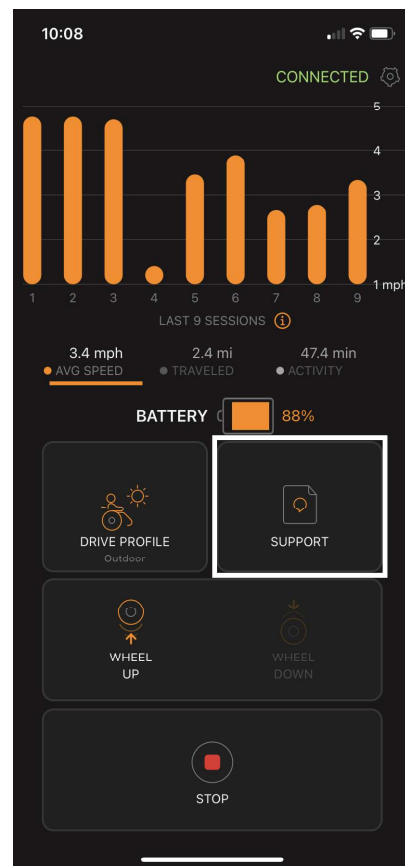

5. Hjul op og Hjul ned


R90-enheden har to betjeningsfunktioner: Hjul op og Hjul ned. Der er to måder at aktivere hver funktion på:

1. R90-enhedens kontrolboks, som beskrevet i brugervejledningen til R90, gør det muligt at hæve og sænke drivhjulet.
2. Appen vil, ved hjælp af knappen "WHEEL UP" (HJUL OP) eller "WHEEL DOWN" (HJUL NED), aktivere hver funktion. Hjulets position vil være gråtonet, mens den tilgængelige handling fremhæves med orange.

Hjul op: Knappen "WHEEL UP" løfter drivhjulet op over jorden. Dette muliggør fremdrift af en manuel kørestol, ligesom det er tilfældet uden hjælp fra R90, men uden at skulle tage enheden af din kørestol. Hjulet skal også være hævet, når du monterer eller genmonterer R90 på din kørestol.

Hjul ned: Knappen "WHEEL DOWN" sænker drivhjulet til jorden og placerer det der, så det kan hjælpe med at drive kørestolen frem.

Skærm 1: Knappen HJUL OP (frihjulsfunktion)

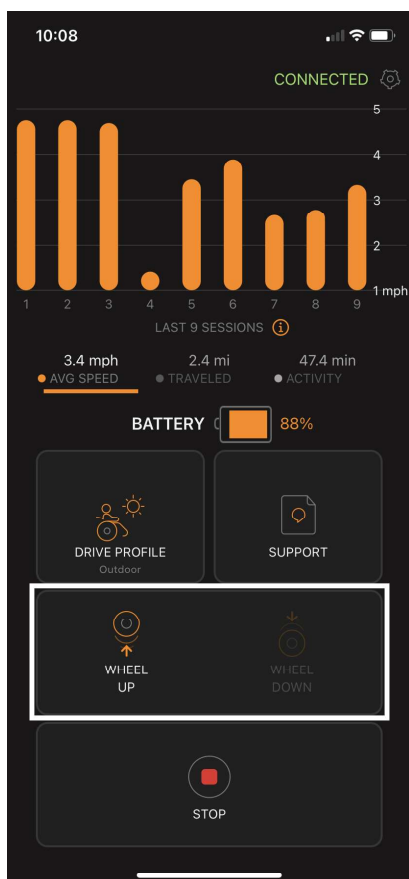


Skærm 2: Knappen HJUL NED (kørselstilstand)



6. Stop:

Den største knap på startskærmen er knappen "STOP" og kan bruges til at stoppe R90-enhedens drivhjul, mens R90 køres. Den bedste praksis er at bruge R90-enhedens kontrolboks til at stoppe R90.

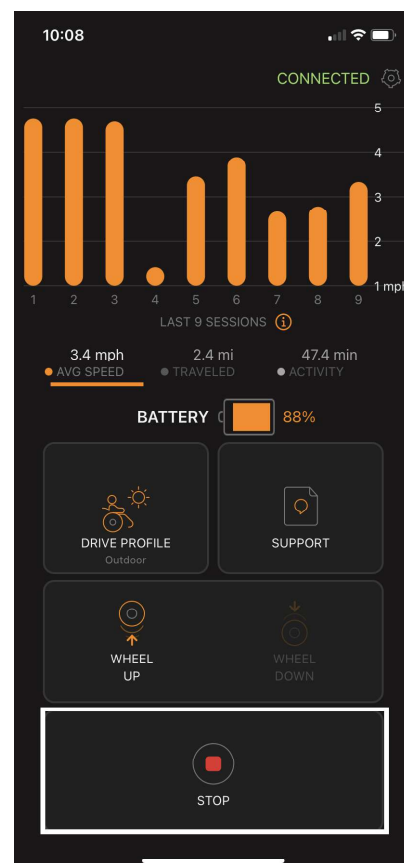

7. Indstillinger

Indstillingerne kan tilgås ved at vælge tandhjulet i øverste højre hjørne af startskærmen (skærm 1 nedenfor).

Under Indstillinger kan du:

- Se, hvilken R90-enhed appen er forbundet til. Du kan afbryde appen fra R90 ved at vælge "Connected Device" (Tilsluttet enhed) og derefter vælge "Disconnect" (Afbryd).
- Juster R90's brugervægt ved at vælge fanen "User Weight" (Brugervægt). Indtast den nye brugervægt, og vælg "Save" (Gem).
- Kalibrer R90 igen ved at vælge fanen "Calibrate" (Kalibrér). Følg instruktionerne under kalibrering, og vælg "Save" (Gem) for at kalibrere R90.
- Få adgang til R90's privatlivspolitikker ved at vælge fanen "Consent To Liability" (Accept af ansvar ved anvendelse).
- Under afsnittet "Om" vises appens firmware og version.

Skærm 1:

Sådan finder du Indstillinger



Skærm 2:

Indstillinger

