




Consulte el manual de instrucciones del Empulse® R90® antes de utilizar el dispositivo para asegurarse de que comprende todas las advertencias de seguridad e instrucciones de uso. Esta página de instrucciones proporciona orientación sobre el uso y la configuración de la aplicación que la acompaña. La aplicación permite una configuración y personalización más avanzadas del Empulse R90. Si tiene alguna pregunta, contacte con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirió el producto.


CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN SUNRISE INTELLIGENCE™

La aplicación Sunrise Intelligence se puede descargar de la tienda de Apple o, para los usuarios de Android, en Google Play.

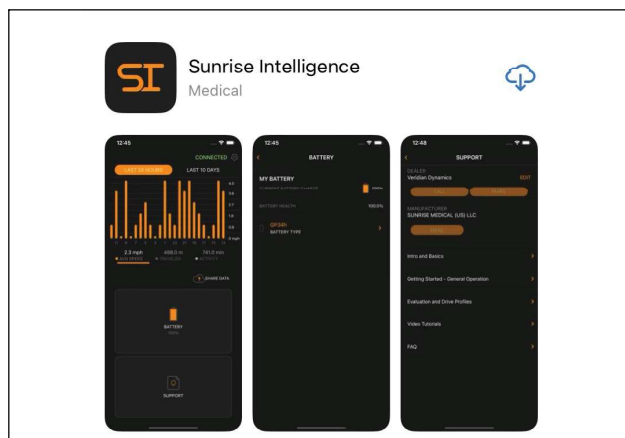

CÓMO CONECTAR CON EL DISPOSITIVO R90






1. Al abrir la aplicación por primera vez, se le pedirá que revise los Términos y Condiciones de uso y deberá seleccionar Aceptar para poder utilizar la aplicación.
 2. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado y seleccione "Conectar" para empezar a buscar dispositivos cercanos.
- Una vez que toque el botón "CONECTAR", la aplicación empezará a buscar dispositivos R90 en su zona.

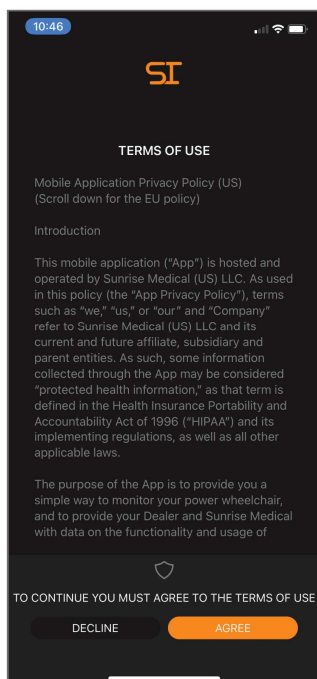

ADVERTENCIA PARA EL DISTRIBUIDOR/TÉCNICO

Atención distribuidores y técnicos cualificados: no utilizar o reparar este dispositivo sin antes de haber leído el manual de instrucciones. Si no entiende las instrucciones y advertencias de este manual de instrucciones, comuníquese con el departamento de servicio técnico de Sunrise Medical antes de utilizar o realizar tareas de mantenimiento en el dispositivo Empulse. De lo contrario, podría ocasionar lesiones o daños. **Para obtener más información y advertencias importantes, consulte el manual de instrucciones del dispositivo o visite: www.SunriseMedical.es**

3. Una vez finalizada la búsqueda de dispositivos, se muestra una lista de los más cercanos posibles. Seleccione el Empulse R90 al que desea conectarse.
Nota: asegúrese de utilizar el número de identificación correcto si ha sustituido la placa de circuito o la caja de control.
4. Una vez conectado al R90, se le solicitará que introduzca su peso y calibre el dispositivo. Para la calibración, el R90 debe estar correctamente instalado y acoplado a la silla de ruedas. Para evitar que la silla se mueva durante la calibración, asegure la silla o active los frenos de las ruedas y coloque la silla en un terreno llano antes de iniciar la calibración. El peso del usuario y la calibración pueden actualizarse en cualquier momento desde la página de ajustes.

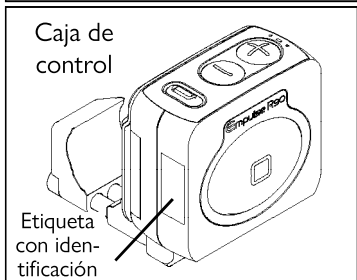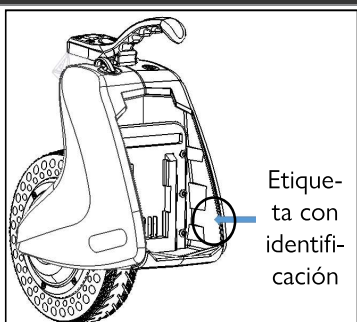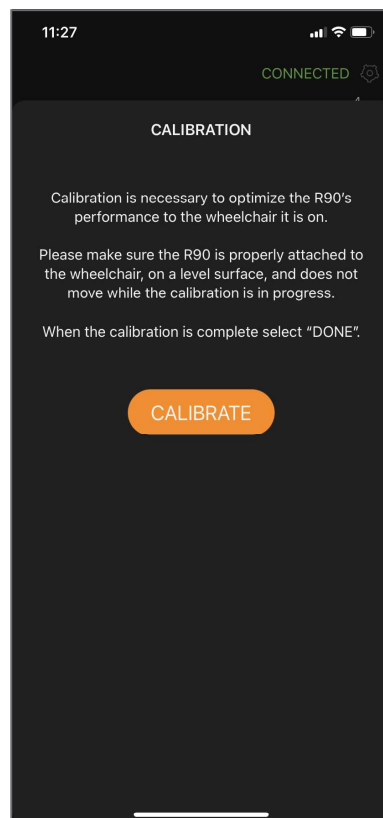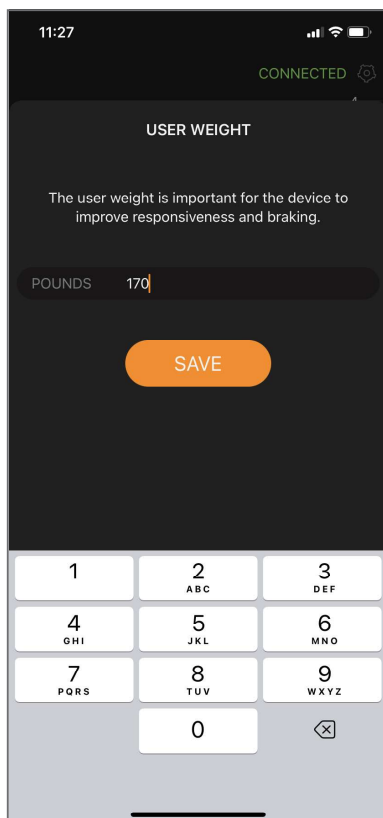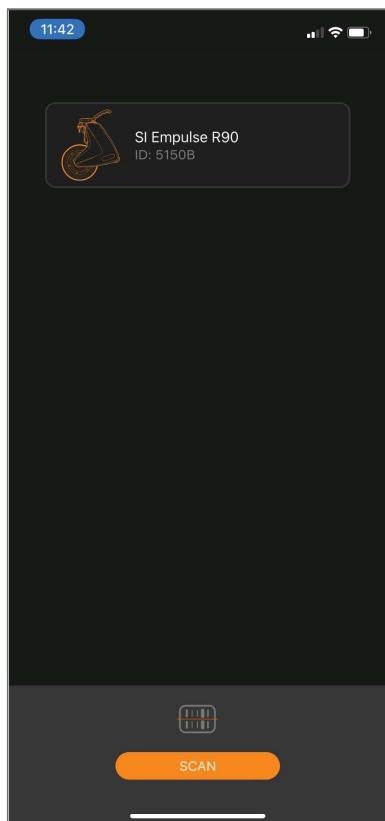

CÓMO USAR LA APLICACIÓN SUNRISE INTELLIGENCE CON SU R90

1. Gráficas:

A continuación se muestra la pantalla principal de la aplicación R90. Consta de varias partes con las que debe familiarizarse.




Los gráficos de la parte superior de la pantalla muestran la velocidad, distancia y tiempo de las últimas 9 sesiones. Una sesión se define como el tiempo transcurrido desde que la rueda del R90 hace contacto con el suelo hasta la siguiente vez que se eleva.

2. Batería:

La siguiente sección de la pantalla principal proporciona una indicación del nivel de carga restante de la batería. En la pantalla de abajo, el nivel de carga restante sería del 88%. Esto significa que se ha utilizado el 12% de la capacidad de la batería desde la última vez que se cargó.

3. Perfiles de accionamiento:

La siguiente sección de la pantalla principal le permite seleccionar el perfil de accionamiento deseado. El R90 viene de fábrica con dos perfiles de accionamiento preestablecidos que pueden personalizarse. Seleccione el botón "PERFIL DE ACCIONAMIENTO" para acceder a los perfiles de accionamiento.

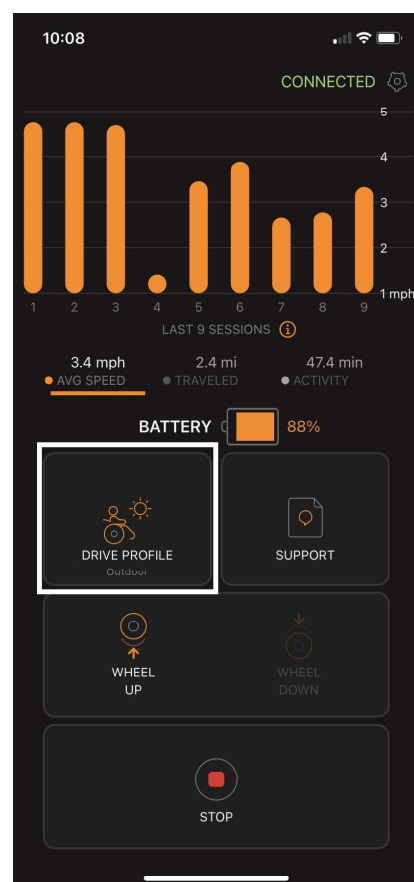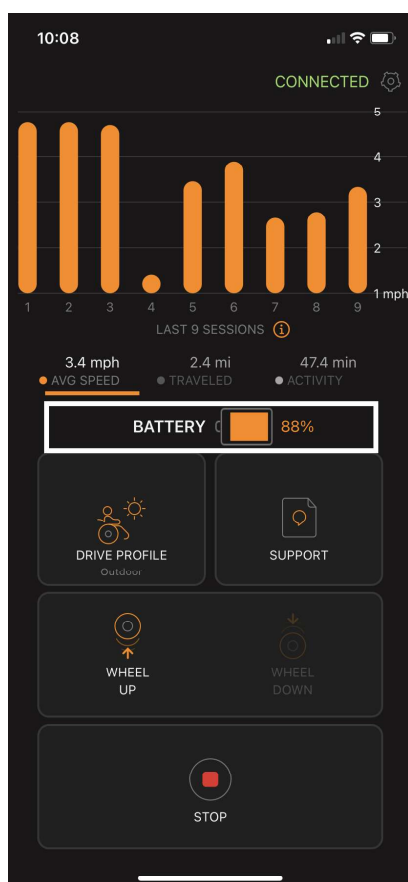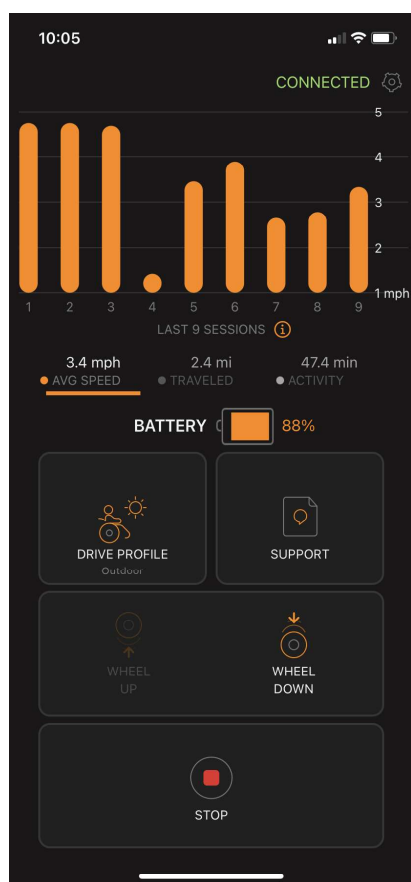

3. Perfiles de accionamiento (continuación)


Los dos perfiles de accionamiento, como se muestra en la pantalla de abajo, son:

- **Espacio cerrado:** apto para funcionar en interiores, donde los espacios reducidos requieren una aceleración más lenta y un umbral de giro más cerrado.
- **Exteriores:** apto para funcionar en exteriores, donde las zonas abiertas permiten una aceleración más rápida.
- **Velocidad máxima:** Establece el límite de la velocidad máxima posible para el R90. El máximo posible es de 9 km/h. Tanto en espacios cerrados como en exteriores, puede alcanzar una velocidad máxima de 9 km/h.


Para ajustar la velocidad máxima en un perfil de accionamiento:

1. Elija un perfil de accionamiento.
2. Desplace la barra naranja resaltada. La barra mostrará la velocidad máxima para ese perfil de accionamiento. Por ejemplo, en la imagen Pantalla 2: Exteriores, el perfil de accionamiento Exteriores está establecido en una velocidad máxima de 9 km/h.
3. Para guardar la configuración del perfil de accionamiento, seleccione "GUARDAR" - se confirma cuando aparece el "perfil actualizado" en la pantalla; la rueda del R90 rodará y volverá a su posición inicial.

Pantalla 1: Espacio cerrado

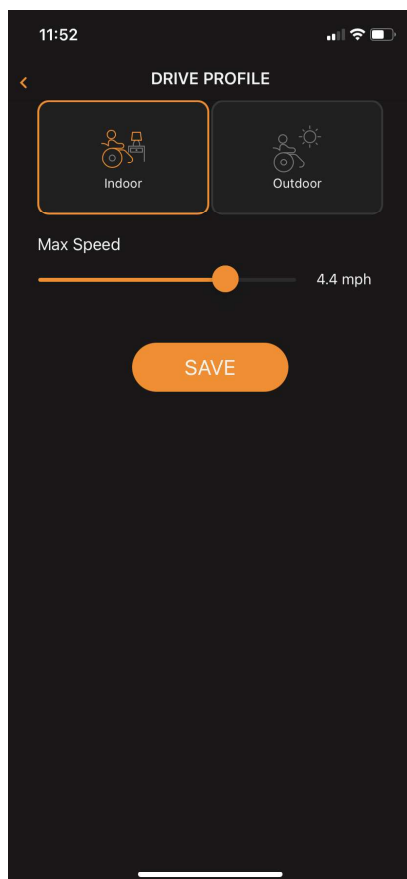


Pantalla 2: Exteriores

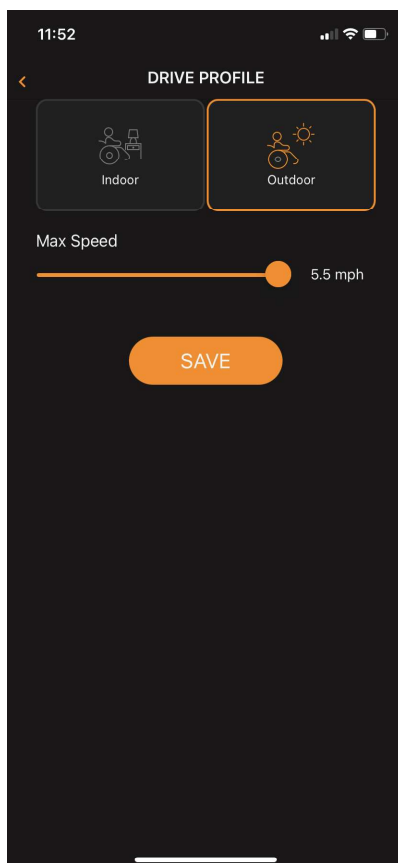

4. Soporte:

Seleccione el botón de "SOPORTE" para acceder a los vídeos de soporte del R90, a la página web del R90 y al servicio de soporte de la empresa para el R90.

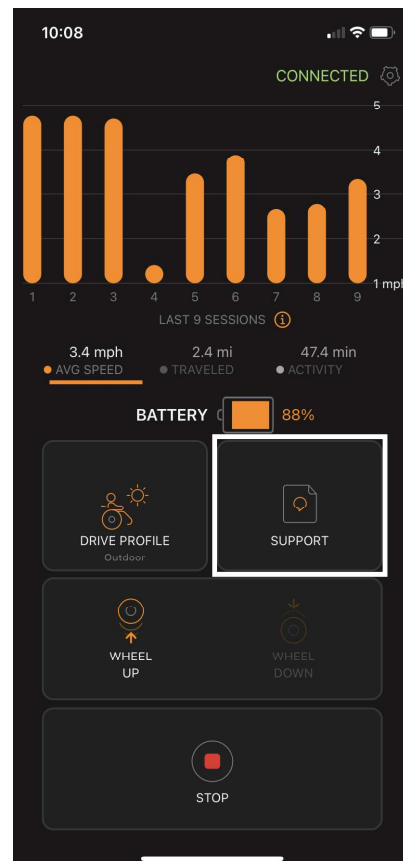

5. “Rueda arriba” (elevada) y “Rueda abajo” (descendida)


El R90 incorpora dos modos de funcionamiento: “Rueda arriba” y “Rueda abajo”. Existen dos maneras de acceder a cada uno de estos modos.

1. La caja de control del R90, tal y como se describe en el Manual de instrucciones del R90, permite subir y bajar la rueda.
2. La aplicación, mediante el botón de selección de subir y bajar la rueda, “RUEDA ARRIBA/RUEDA ABAJO”, activará el modo correspondiente. La posición de la rueda se muestra en gris mientras que la acción disponible se resaltará en naranja.


“Rueda arriba” (elevada): El botón correspondiente a la acción de subir la rueda “RUEDA ARRIBA” eleva la rueda del suelo. Esto permite la propulsión manual de una silla de ruedas, como lo haría sin la asistencia del R90, pero sin tener que desmontarlo de la silla de ruedas. El modo de “rueda arriba” es también el modo que necesita activar cuando acopla o vuelve a instalar el R90 a su silla de ruedas.

“Rueda abajo” descendida: El botón correspondiente con la acción de descender la rueda, “RUEDA ABAJO”, desplaza la rueda del R90 hacia el suelo para proporcionar asistencia en la propulsión de la silla de ruedas.

**Pantalla 1:
Botón RUEDA ARRIBA
(Rueda elevada)**

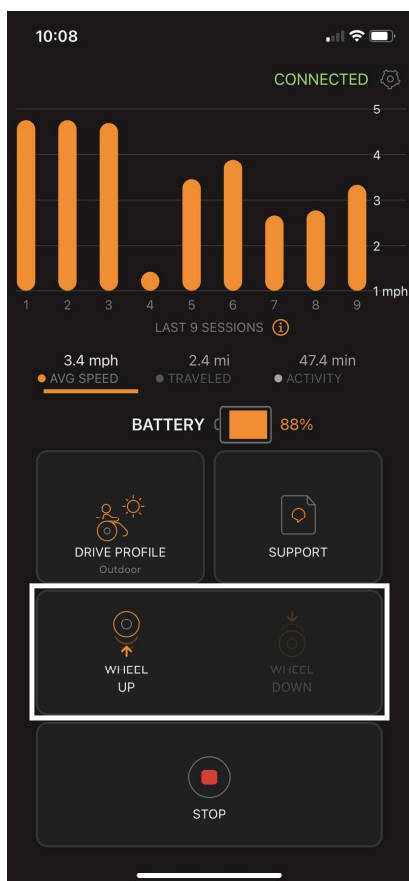


**Pantalla 2:
Botón RUEDA ABAJO
(Rueda descendida - modo de propulsión)**

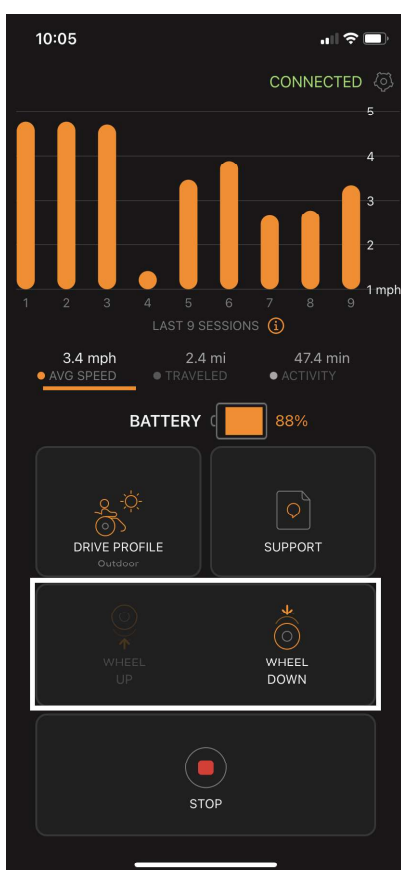

6. Detención:

El botón más grande de la pantalla de inicio es el botón “STOP” y se puede utilizar para detener la rueda del R90 mientras conduce el dispositivo. La mejor práctica es utilizar la caja de control del R90 para detener el dispositivo.

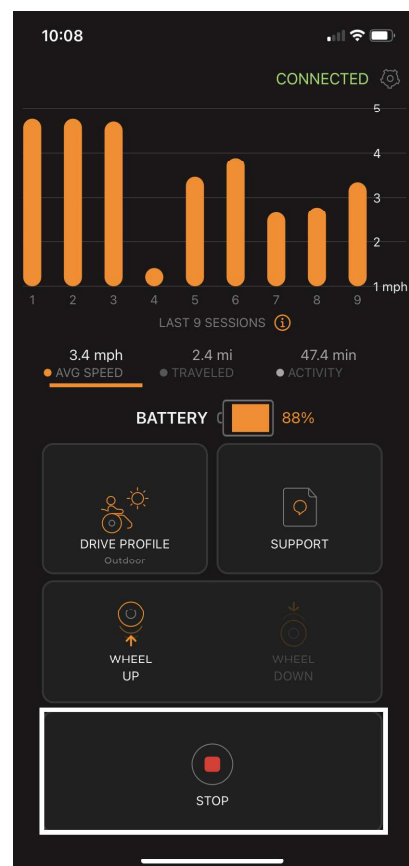


7. Configuración

La configuración de ajustes se encuentra en el engranaje ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio (pantalla 1 abajo).

En la página de Ajustes puede:

- Ver a qué dispositivo R90 está conectada la aplicación. Puede desconectar la aplicación del R90 seleccionando "Dispositivo conectado" y luego "Desconectar".
- Ajustar el peso de usuario del R90 seleccionando la pestaña "Peso del usuario". Introduzca el nuevo peso de usuario y seleccione "Guardar".
- Recalibrar el R90 seleccionando la pestaña "Calibrar". Siga las instrucciones de la página de calibración y seleccione "Guardar" para calibrar el R90.
- Acceder a las políticas de privacidad del R90 seleccionando la pestaña "Consentimiento de responsabilidad".
- En la sección "Acerca de" se muestra el firmware y la versión de la aplicación.

Pantalla 1:
Ubicación de la página de ajustes

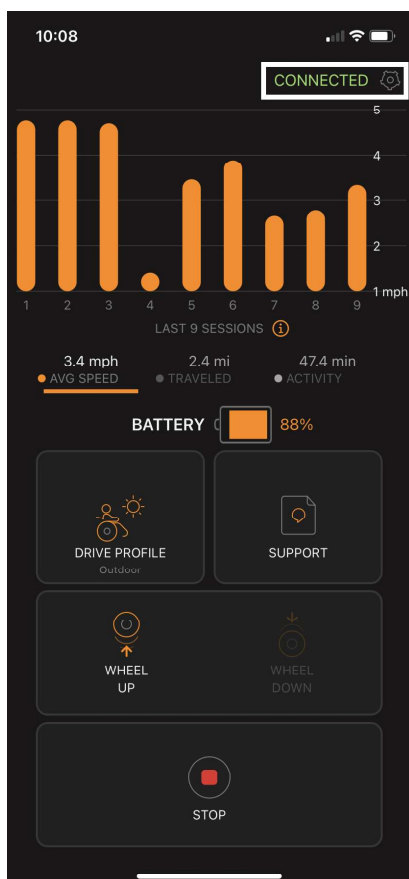

Pantalla 2:
Página de ajustes

