




Lees voor gebruik de gebruikershandleiding van uw Empulse® R90® door, en verzekert u ervan dat u alle gerelateerde veiligheidsmaatregelen en gebruiksinstructies begrijpt. In dit instructieblad wordt het gebruik en de set-up van de bijbehorende app uitgelegd. Via deze app kunt u uw Empulse R90 verder aanpassen en personaliseren. Neem bij vragen contact op met de Technische ondersteuning van Sunrise Medical.

DOWNLOADEN VAN DE SUNRISE INTELLIGENCE™ APP.

De Sunrise Intelligence™ app kan vanuit de Apple App Store of de Google Play Store worden gedownload.

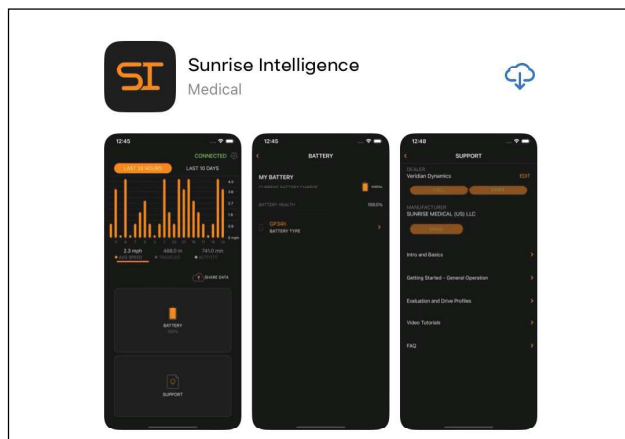

KOPPELEN MET UW R90

1. Als u de app voor het eerst opent, wordt u gevraagd de Gebruiksvoorwaarden door te lezen en hiermee akkoord te gaan. U moet "Akkoord" selecteren om de app te kunnen gebruiken.

2. Controleer of de Bluetooth-functie op uw telefoon is geactiveerd en selecteer "Verbinden" om te beginnen met zoeken naar apparaten in de buurt.






Nadat op de knop "VERBINDEN" is gedrukt, zal de app zoeken naar R90-apparaten in uw omgeving.



WAARSCHUWING AAN MONTEUR/DEALER

Let op! Dealers en erkende monteurs: gebruik dit apparaat niet en voer geen onderhoud uit zonder eerst deze gebruikershandleiding te hebben gelezen. Als u de instructies en waarschuwingen in deze gebruikershandleiding niet begrijpt, neem dan contact met de Technische Afdeling van Sunrise Medical voordat u dit systeem in gebruik neemt en/of onderhoud uitvoert. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade en/of persoonlijk letsel. **Meer informatie en belangrijke waarschuwingen vindt u in de gebruikershandleiding van dit apparaat, of op www.SunriseMedical.nl**

- Nadat de zoekopdracht is voltooid, wordt een overzicht met potentiële apparaten weergegeven. Kies de Empulse R90 waarmee u wilt verbinden. Let op: zorg ervoor dat u het juiste ID-nummer gebruikt als de printplaat of bedieningskast is vervangen.
- Eenmaal verbonden met de R90, wordt u gevraagd uw gewicht in te vullen en het apparaat te kalibreren. Voor de kalibratie dient de R90 op de juiste wijze aan de rolstoel van de gebruiker te zijn geïnstalleerd en bevestigd. Zet de rolstoel op de rem om ervoor te zorgen dat de rolstoel tijdens de kalibratie niet beweegt. Ook moet de stoel op een vlakke, effen vloer staan voordat de kalibratie kan beginnen. Het gebruikersgewicht en de kalibratie kunnen in de Instellingen altijd weer worden aangepast.

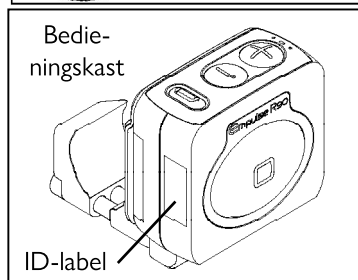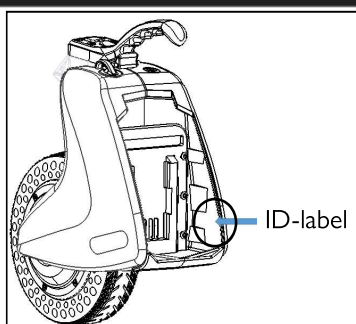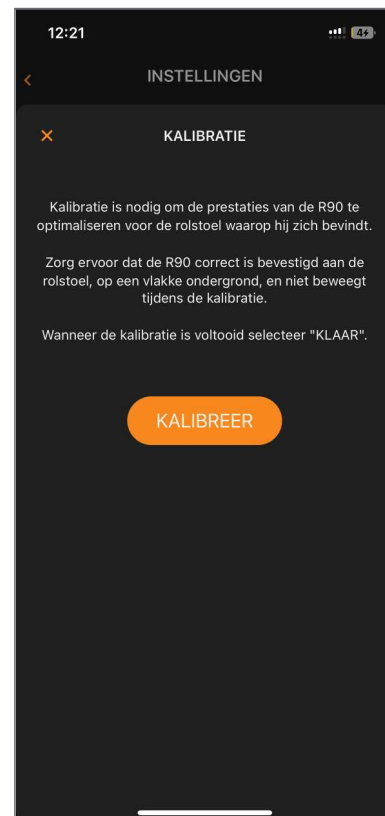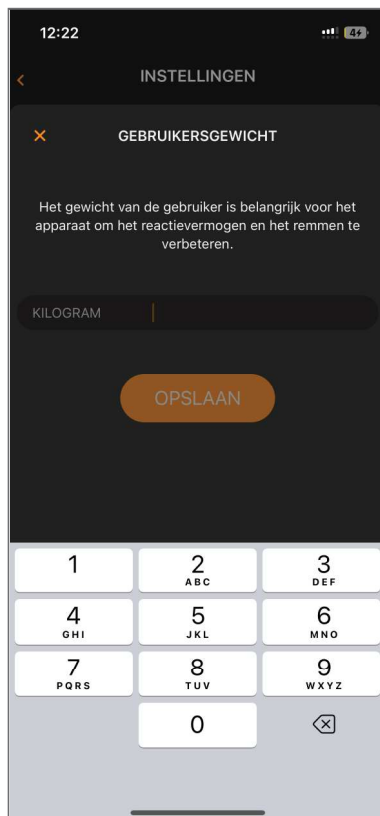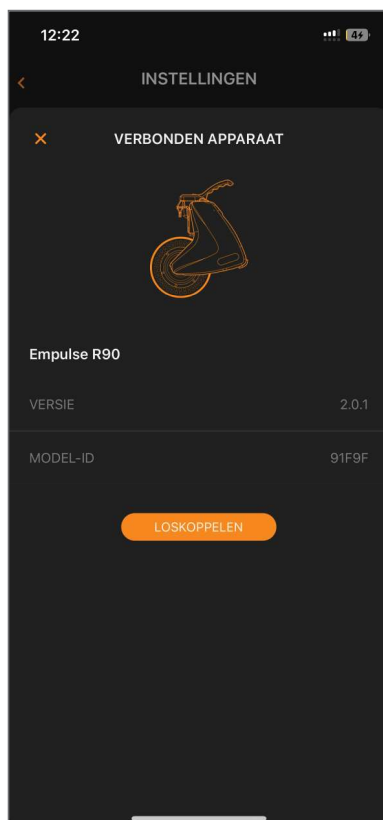

HET GEBRUIK VAN DE SUNRISE INTELLIGENCE APP MET UW R90

1. Grafieken:

Hieronder wordt het hoofdscherm van de R90 app getoond. Er zijn verschillende opties die bekeken kunnen worden.



De grafieken bovenaan het scherm laten uw snelheid, afstand en tijdsduur van de laatste 9 sessies zien. Een sessie wordt gestart vanaf het moment dat het wiel van de R90 wordt ingeschakeld totdat het wordt opgetild.

2. Accu:

Het volgende deel van het hoofdscherm geeft informatie over het stroomniveau van uw accu. In het hieronder getoonde scherm, is de accuspanning 88%. Dit betekent dat 12% van de accucapaciteit is gebruikt sinds de accu voor het laatst werd opgeladen.

3. Rijprofielen:

In het volgende hoofdstuk van het hoofdscherm kunt u het gewenste rijprofiel selecteren. Standaard wordt de R90 geleverd met twee vooraf ingestelde rijprofielen die beide kunnen worden gepersonaliseerd. Selecteer de knop "RIJPROFIEL" om toegang te krijgen tot de rijprofielen.

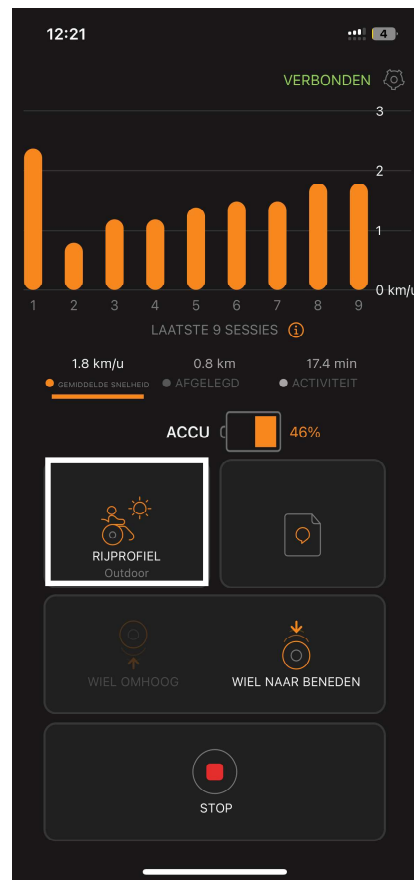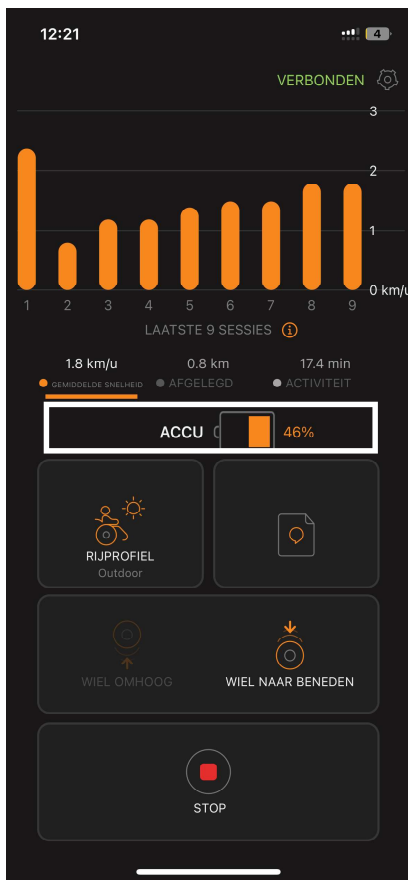

3. Rijprofielen (vervolg)

De twee rijprofielen, zoals getoond in het onderstaande scherm, zijn:

- **Indoor:** geschikt voor gebruik binnenshuis, waar in krappere ruimtes een lagere acceleratie en kleinere draaicirkel gewenst zijn.
- **Outdoor:** geschikt voor gebruik buitenshuis, waar in open ruimtes sneller geaccelereerd kan worden.
- **Max. snelheid:** Bepaalt de maximaal haalbare snelheid van de R90. De maximaal haalbare snelheid is 9 km/u (5,5 m/u). Zowel de instelling voor binnenshuis als buitenshuis kan een maximale snelheid van 9 km/u (5,5 m/u) bereiken.


Om de max. snelheid in een rijprofiel aan te passen:

1. Kies een rijprofiel.
2. Verschuif de geaccentueerde oranje balk. De balk toont de maximale snelheid voor dat rijprofiel. Bijvoorbeeld, in de afbeelding Scherm 2: Outdoor, het Outdoor-rijprofiel is ingesteld op een max. snelheid van 9 km/u (5,5 m/u).
3. Om de instelling van het rijprofiel op te slaan, kies OPSLAAN (dit wordt bevestigd wanneer "profiel geüpdatet" op het scherm verschijnt); het R90-aandrijf wiel start opnieuw op en keert terug naar de start positie.


4. Meer Info:

Selecteer de knop "ONDERSTEUNING" voor toegang tot ondersteunende video's over de R90, de website van de R90 en fabrieks ondersteuning voor de R90.

Scherf 1: Indoor

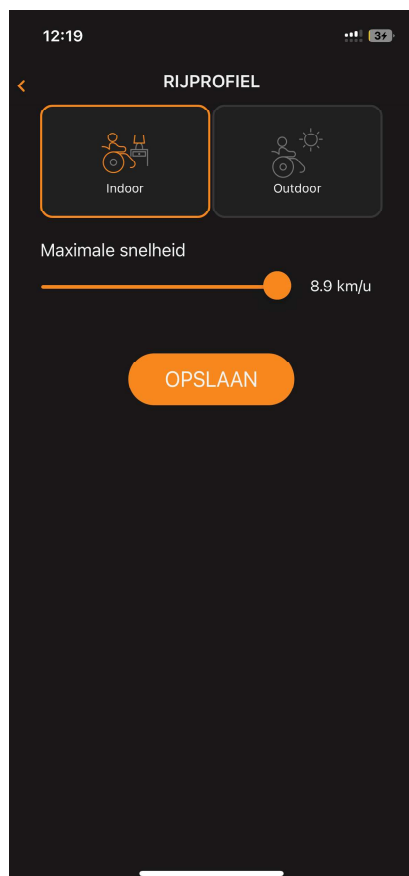

Scherf 2: Outdoor

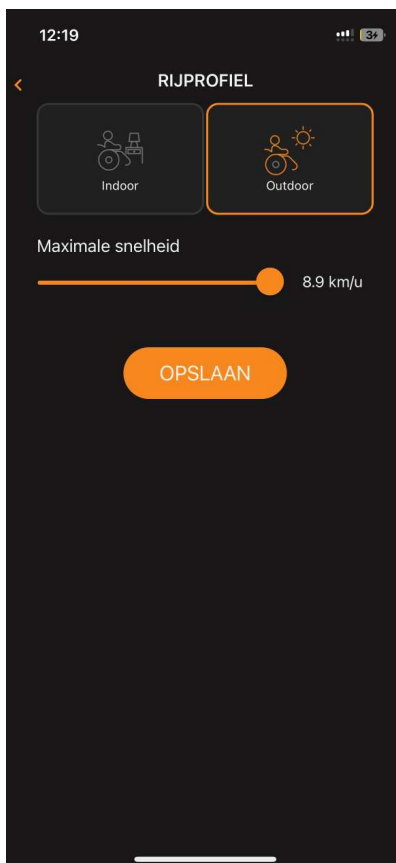

5. Wiel omhoog en Wiel naar beneden


De R90 heeft twee standen: Wiel omhoog en Wiel naar beneden. Er zijn twee manieren om deze te activeren:

1. Met de R90 Bedieningskast kunt u, zoals omschreven in de gebruikershandleiding van de R90, het aandrijf wiel omhoog laten komen en laten zakken.
2. In de app kunt u de gewenste stand activeren door de knop "WIEL OMHOOG" of "WIEL NAAR BENEDEN" te selecteren. De positie van het wiel wordt in grijs getoond, terwijl de actie die gekozen kan worden, in oranje wordt geaccentueerd.

Wiel omhoog: Met de knop "WIEL OMHOOG" wordt het aandrijf wiel van de grond afgetild. Hierdoor kan de rolstoel handmatig worden aangedreven zoals dit ook gebeurt zonder de ondersteuning van de R90, maar het apparaat hoeft hiervoor niet van de rolstoel te worden verwijderd. Ook moet het aandrijf wiel in de stand "WIEL OMHOOG" worden gezet wanneer de R90 (opnieuw) aan de rolstoel wordt bevestigd.

Wiel naar beneden: De knop "WIEL NAAR BENEDEN" zorgt ervoor dat het aandrijf wiel op de grond wordt gezet, zodat het ondersteuning kan bieden bij het voortbewegen van de rolstoel.

Scherf 1: Knop WIEL OMHOOG (Vrijloopmodus)

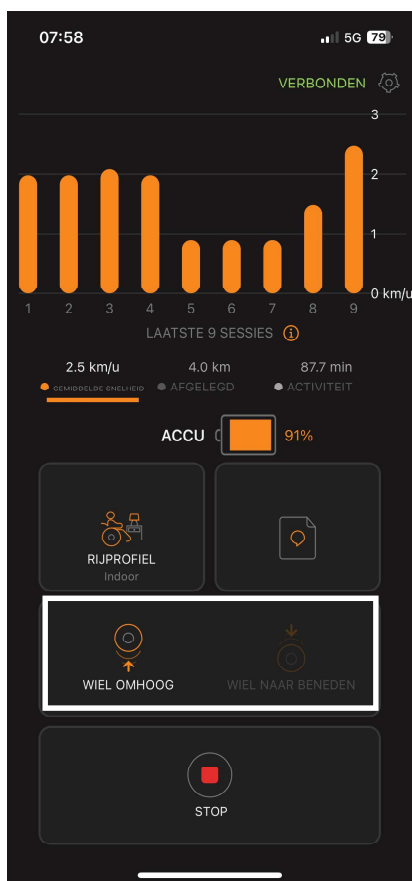

Scherf 2: Knop WIEL NAAR BENEDEN (Rijmodus)



6. Stoppen:

De grootste knop op het startscherm is de STOP-knop; deze kan worden gebruikt om de stroomtoevoer naar het R90 aandrijf wiel tijdens het rijden met de R90 te onderbreken. Maar het is het beste om de R90 via de R90 bedieningskast te stoppen.



7. Instellingen

De instellingen vindt u door het icoontje Instellingen (tandwiel) in de rechterbovenhoek van het startscherm te selecteren (onderstaand scherm 1).

Op de pagina Instellingen kunt u:

- Zien met welk R90 apparaat de app is gekoppeld; De app van de R90 loskoppelen door “VERBONDEN APPARAAT” te selecteren en vervolgens “LOSKOPPELEN” te selecteren;
- Het gebruikersgewicht van de R90 aanpassen door het tabblad “GEBRUIKERSGEWICHT” te selecteren; Een nieuw gebruikersgewicht invoeren en “OPSLAAN” selecteren;
- De R90 opnieuw kalibreren door het tabblad “KALIBREREN” te selecteren. Volg de gebruiksaanwijzing op de kalibratiepagina en selecteer “OPSLAAN” om de R90 te kalibreren.
- Het privacybeleid van de R90 bekijken door de tab “TOESTEMMING VOOR AANSPRAKELIJKHEID” te selecteren.
- In het hoofdstuk “OVER” worden de firmware en versie van de app weergegeven.

Scherf 1:
Naar de pagina Instellingen gaan



Scherf 2:
Pagina Instellingen

