

R90

Guida alla compatibilità



Rev3

Controllo per la compatibilità con Carrozze Rigide e Pieghevoli

Controllo per la Compatibilità in 6 passi

Empulse R90 è compatibile con le carrozzine rigide e pieghevoli della linea Quickie e RGK, dotate di pedane sia integrate che estraibili. Per essere sicuri che Empulse R90 sia compatibile con una carrozzina, si prega di seguire la guida per il controllo per la compatibilità qui riportata. Si prega di ricordare che per le carrozzine pieghevoli è necessario un controllo ulteriore.

1 - Combination agreement - Controllare se la combinazione tra Empulse R90 e una carrozzina specifica è stata approvata. Le combinazioni possibili possono essere visionate sul nostro sito, nella sezione Supporto, alla pagina <https://www.sunrisemedical.it/support/combination-agreement>.

2 - Dimensione delle ruote posteriori - R90 è compatibile con carrozzine dotate di ruote posteriori da:

- 24"
- 25"

Selezionare le dimensioni delle ruote posteriori sulla scheda d'ordine della carrozzina.

3 - Campanatura - R90 è compatibile con carrozzine con campanatura di:

- 0°
- 1°
- 2°
- 3°

In caso di carrozzine rigide, R90 è compatibile solo se l'asse posteriore è perfettamente diritto. Se l'asse posteriore non è diritto, ma ha una forma a "V", R90 non è compatibile.

Controllo per la compatibilità con Carrozze Rigide e Pieghevoli

4 - Altezza posteriore della seduta - Controllare la combinazione di COG e altezza posteriore della seduta nella matrice qui sotto riportata e assicurarsi che la distanza tra telo della seduta e parte centrale dell'asse sia compatibile.

Altezza posteriore della seduta in pollici	Altezza posteriore seduta in cm	Ruote posteriori 24"			Ruote posteriori 25"			Ruote posteriori 26"		
		COG			COG			COG		
		0-3"/(0-80mm)	3.5"/92mm	4"/104mm	0-3"/(0-80mm)	3.5"/92mm	4"/104mm	0-3"/(0-80mm)	3.5"/92mm	4"/104mm
13	N/A	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
13.5	N/A	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
14	N/A	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
14.5	370	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
15	380	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
15.5	390-400	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
16	410	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
16.5	420	GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
17	430	GO	GO	NO GO	GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
17	440	GO		NO GO	GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
17.5	450	GO		NO GO	GO		NO GO	NO GO	NO GO	NO GO
18	460	GO		GO	GO		NO GO	GO	NO GO	NO GO
18.5	470	GO		GO	GO		GO	GO		NO GO
19	480	GO		GO	GO		GO	GO		NO GO
19.5	490	GO		GO	GO		GO	GO		GO
20	500	GO		GO	GO		GO	GO		GO
20.5	N/A	GO		GO	GO		GO	GO		GO
21	N/A	GO		GO	GO		GO	GO		GO
21.5	N/A	GO		GO	GO		GO	GO		GO
22	N/A	GO		GO	GO		GO	GO		GO

*Disclaimer: Non tutte le dimensioni di ruote posteriori sono disponibili in tutti i Paesi.

Per essere completamente sicuri, è possibile misurare la distanza tra la parte centrale dell'asse e il telo seduta della carrozzina. La distanza misurata deve essere compresa nelle misure qui sotto specificate.

- PER COG minori o uguali a 3"/76 mm, distanza minima tra la parte centrale dell'asse e il telo seduta 2,75"/70 mm
- PER COG maggiori di 3"/76 mm, distanza minima tra la parte centrale dell'asse e il telo seduta 4,63"/118 mm

5 - NoGo generali - Controllare se la carrozzina è equipaggiata con gli accessori qui elencati dato che potrebbero essere causa di NoGo


- Sospensioni sul telaio
- Monoguida
- Assicurarsi che sul telaio anteriore della carrozzina ci sia spazio sufficiente per applicare il morsetto per agganciare l'unità di comando di R90 (30 mm)

6 - Raccomandazioni - Le opzioni seguenti non sono causa di Go o NoGo, ma si raccomanda di seguire le indicazioni per ottenere sempre le prestazioni migliori nella guida con R90, senza limitazioni.

- Ruote anteriori da 3" e 4" non dovrebbero essere utilizzate in combinazione con R90
- Si raccomanda di utilizzare le routine antiribaltamento qualora la carrozzina sia utilizzata con R90



Ulteriori controlli per la compatibilità solo per Carrozze Pieghevoli

6 - Larghezza della carrozzina - Per misurare la larghezza di una carrozzina pieghevole, si prega di misurare la distanza tra la parte interna delle piastre posteriori e scegliere la misura corretta dell'asse pieghevole addizionale sulla scheda d'ordine. Se la distanza misurata non è menzionata nella tabella qui sotto riportata, significa che R90 non può essere montato su quella specifica carrozzina (NoGo).

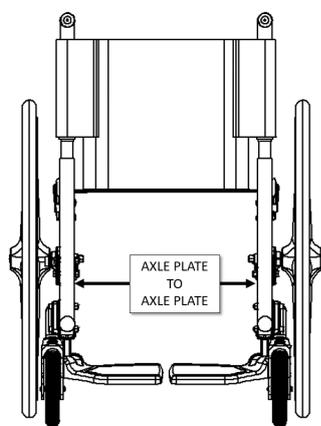

AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (in)	AXLE PLATE TO AXLE PLATE WIDTH (mm)	FOLDING AXLE ASY			
		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
12.0-13.0	300-330	x			
13.1-16.0	330-400		x		
16.1-18.0	400-450			x	
18.1-21.0	450-530				x

6 - Dimensione della piastra posteriore - Per le carrozzine con telaio pieghevole, si prega di prendere le misure dell'asse posteriore, come mostrato nella figura seguente, e scegliere la piastra della misura corretta sulla scheda d'ordine. Se la misura rilevata non è menzionata nella tabella qui sotto riportata, significa che R90 non può essere montato su quella specifica carrozzina (NoGo).

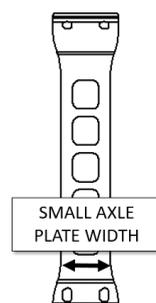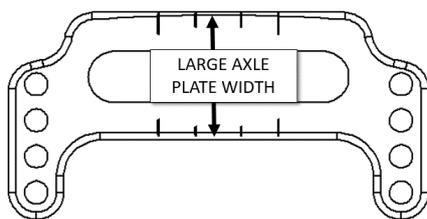

AXLE PLATE SIZE (in.)	AXLE PLATE SIZE (mm.)	AXLE PLATE ADAPTER		
		SMALL	MEDIUM	LARGE
1.0-1.5	25-38	x		
1.5-2.0	38-50		x	
2.0-2.25	50-60			x