

# Kombinationsübersicht

## R90



## Kompatibilitätsprüfung für Starr- und Faltrahmenrollstühle

### 6-Schritt-Kompatibilitäts-Check

Der Empulse R90 ist mit Starr- und Faltrahmenrollstühlen, mit integrierten oder abnehmbaren Fussrasten, kompatibel. Um die Kompatibilität des Empulse R90 mit Ihrem Rollstuhl sicherzustellen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Hinweise zur Kompatibilitätsprüfung. Bitte beachten Sie, dass für faltbare Rollstühle eine erweiterte Prüfung erforderlich ist.

**1. Kombinationserklärung** – bitte prüfen Sie, ob die Kombination zwischen dem Empulse R90 und Ihrem Rollstuhl zugelassen ist. Diese Info finden Sie auf [www.sunrisemedical.ch/support/kombinationsvereinbarungen](http://www.sunrisemedical.ch/support/kombinationsvereinbarungen).

**2. Grösse Antriebsrad** – der R90 ist kompatibel mit Rollstühlen, mit einer Antriebsradgrösse von:

- 24"
- 25"
- 26"

Bitte wählen Sie auf dem Bestellblatt Ihre Antriebsradgrösse aus.

**3. Radsturz** – der R90 ist kompatibel mit Rollstühlen, mit einem Radsturz von:

- 0°
- 1°
- 2°
- 3°

Der R90 ist nur mit Starrrahmenrollstühlen kompatibel, die eine gerade Achse haben. Wenn die Achse nicht gerade ist und eine «V»-Form hat, ist der R90 nicht kompatibel.

# Kompatibilitätsprüfung für Starr- und Faltrahmenrollstühle

**4. Sitzhöhe hinten** – bitte überprüfen Sie die Kombination von Schwerpunkt und hintere Sitzhöhe in der untenstehenden Matrix und messen Sie den Abstand von der Sitzbespannung bis zur Mitte der Achse.

Hintere Sitzhöhe in mm	24" Antriebsräder			25" Antriebsräder			26" Antriebsräder		
	COG in mm			COG in mm			COG in mm		
	0-80	92	104	0-80	92	104	0-80	92	104
n/a									
n/a									
n/a									
370									
380									
390-400									
410									
420	✓								
430	✓	✓		✓					
440	✓	✓		✓					
450	✓	✓		✓	✓				
460	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
490	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Radgrößen in allen Regionen verfügbar sind.

Um dies zu überprüfen, können Sie auch den Abstand von der Mitte der Achse zur Sitzbespannung Ihres Rollstuhls messen. Der gemessene Abstand muss in dem unten angegebenen Bereich liegen:

- für COG kleiner oder gleich 76 mm, 70 mm Mindestabstand zwischen Achse und Sitzbespannung
- für COG grösser oder gleich 76 mm, 118 mm Mindestabstand zwischen Achse und Sitzbespannung

**5. Allgemeine NoGo's** – bitte überprüfen Sie, ob Ihr Rollstuhl mit einem der folgenden Teile ausgestattet ist, da diese ein NoGo darstellen:

- **hintere Federung**
- **gefederte Radhalteplatten**
- **Einarm-Antrieb**


Achten Sie auf genügend Platz am Vorderrahmen, um die Halterung der R90-Steuereinheit anzubringen (30 mm).

# Erweiterte Kompatibilitätsprüfung nur für Faltrahmenrollstühle

**6. Empfehlungen** – die folgenden Punkte führen weder zu einem Go noch zu einem NoGo, aber wir empfehlen, die Hinweise zu befolgen, um eine optimale Geräteleistung ohne Einschränkungen zu gewährleisten:



- **3" & 4" Lenkräder sollten nicht mit dem R90 kombiniert werden**
- **es wird empfohlen, den Rollstuhl in Kombination mit dem Empulse R90 mit Sicherheitsrädern zu versehen**

**6. Breite Faltrahmenrollstuhl** – messen Sie bitte den Abstand von der inneren Achsplatte zur inneren Achsplatte und wählen Sie die richtige Grösse der Faltachse auf dem Bestellblatt. Wenn der gemessene Abstand nicht in die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Minimal- bis Maximalmasse passt, bedeutet dies, dass der R90 nicht für diesen Rollstuhl geeignet ist (NoGo).

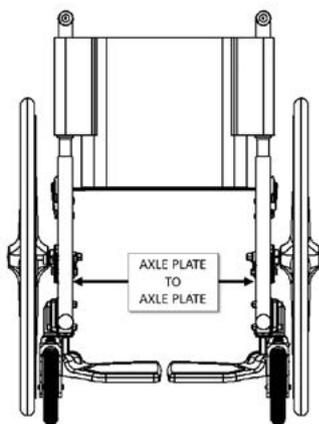

Abstand Achsplatte zu Achsplatte in mm	Achse für Faltrahmenrollstühle			
	XS	S	M	L
300–330	✓			
330–400		✓		
400–450			✓	
450–530				✓

**6. Achsplattengrösse Faltrahmenrollstuhl** – messen Sie bitte die Breite der Achsplatte wie auf den Bildern unten gezeigt und wählen Sie die richtige Halterungsgrösse auf dem Bestellblatt. Wenn der gemessene Abstand nicht in die in der Tabelle unten genannten Minimal- bis Maximalmasse passt, bedeutet dies, dass der R90 nicht zu diesem Rollstuhl passt (NoGo).

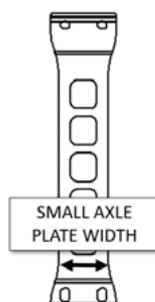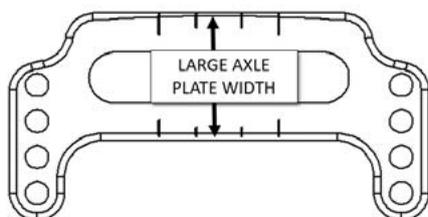

Grösse Achsplatte in mm	Achsplatten-Adapter		
	S	M	L
25–38	✓		
38–50		✓	
50–60			✓