



# BRUKER - OG MONTERINGSINSTRUKSJON FOR DOKKING - TILPASNINGSSATS 502961

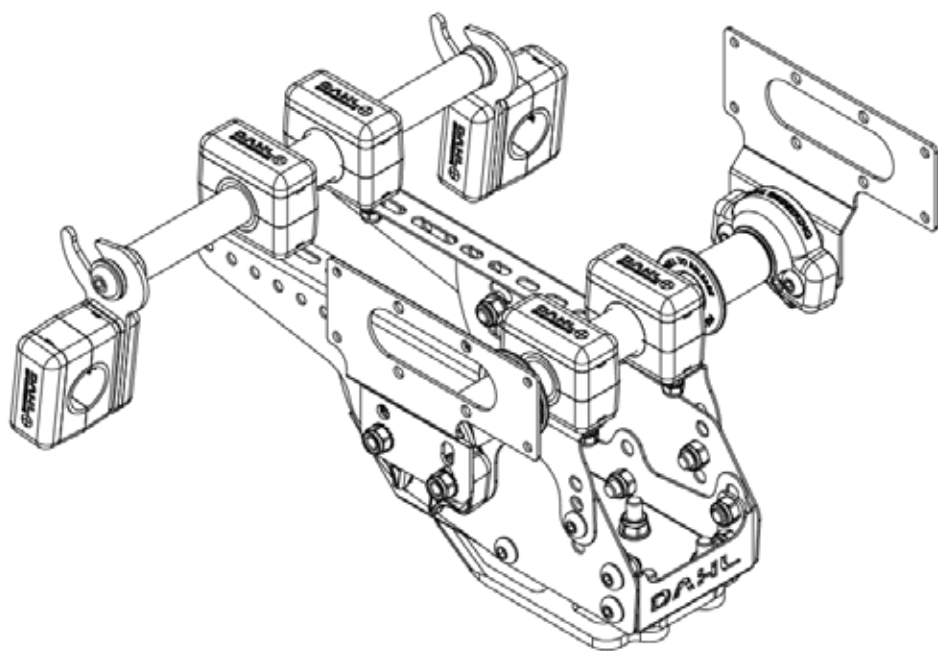


**Fig.52**

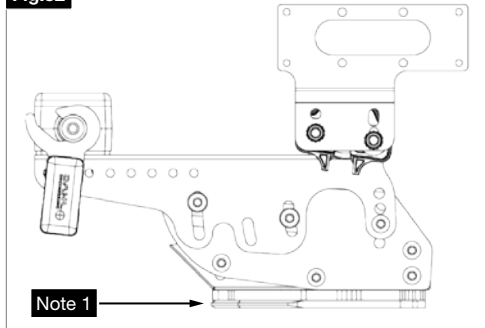

**Figur 52 - 53**

For at dokkingstasjonen skal fungere riktig, må låseplaten monteres horisontalt.

**Fig.53**

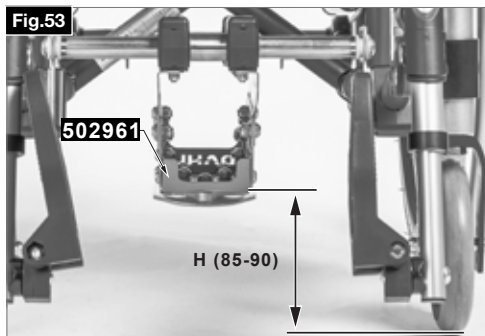

**Figur 53**

Når hele monteringsprosessen er fullført, måle høyden H med brukeren sittende i rullestolen.

Sørg for at dekktrykket er korrekt på forhånd!


**Fig.54**




**Figur 54 - 55**

Noter den målte høyden H minus 2 mm på den medfølgende klistremerket 503653, og plasser det som vist.


**Fig.55**

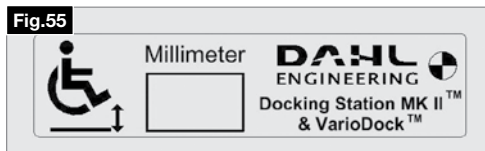

# MONTERING BRUKT FOR SETEBREDDE 42-51 CM.

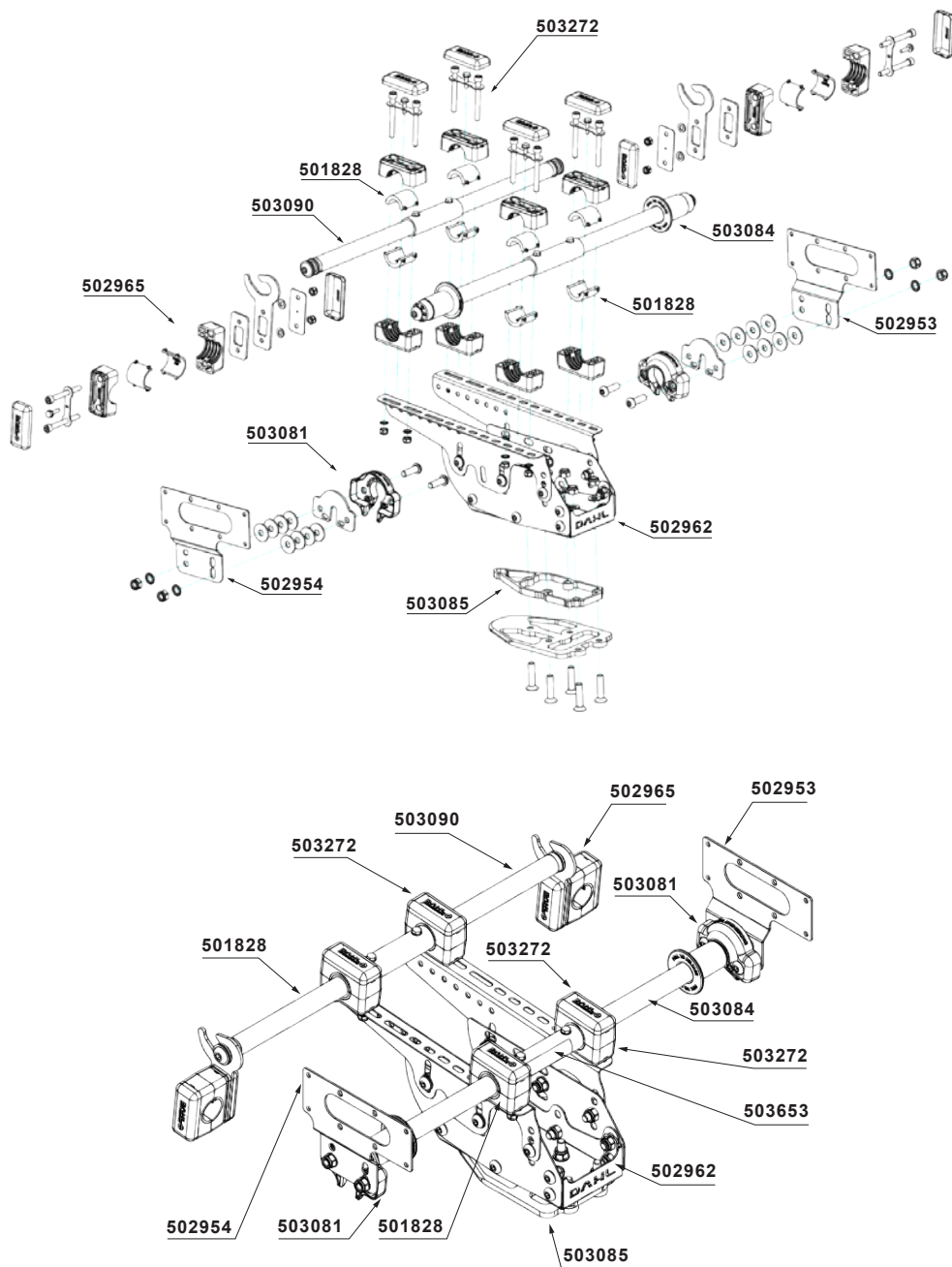


# MONTERING BRUKT FOR SETEBREDDE 36-39 CM.

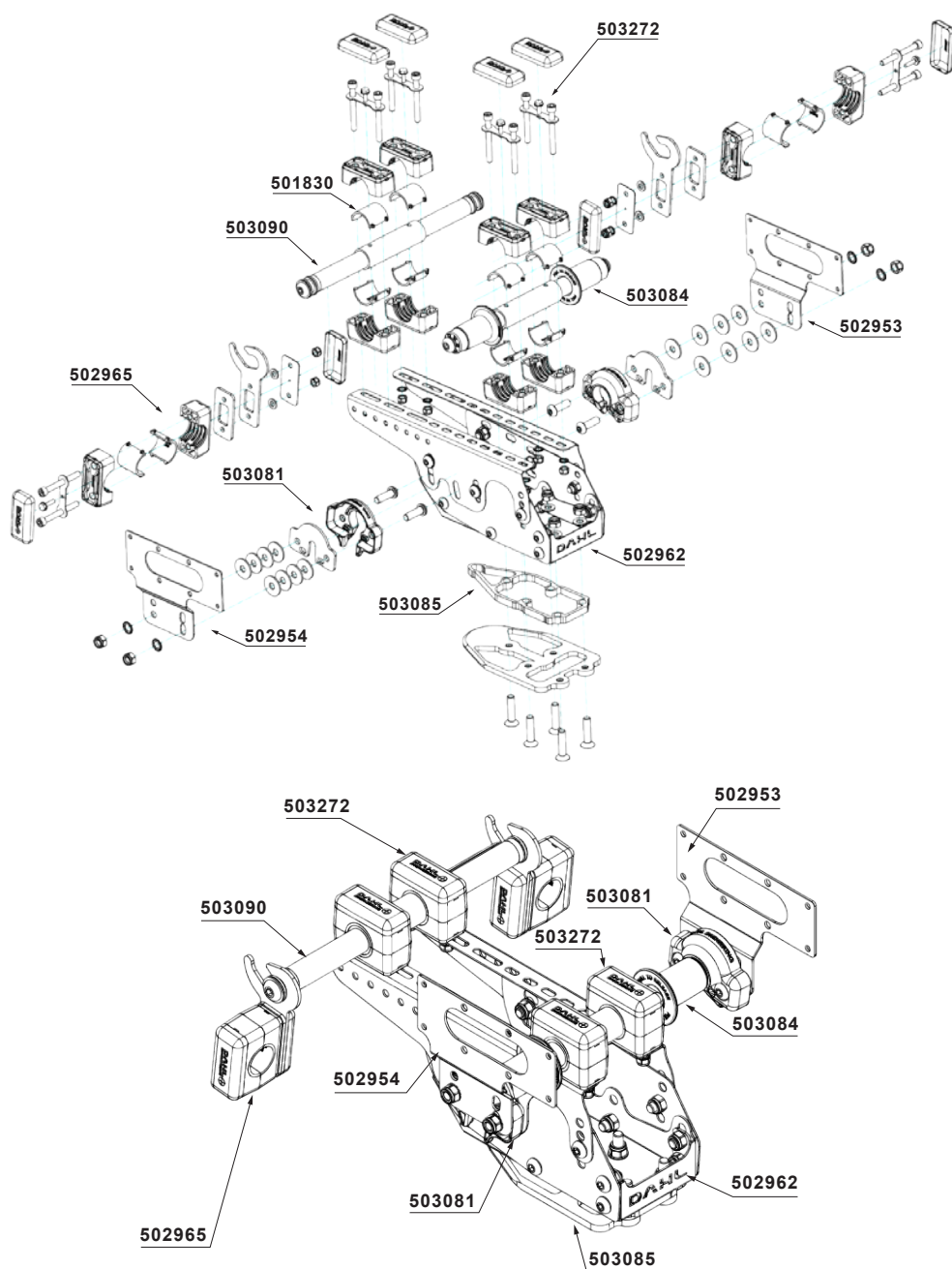


MONTERING FOR SETEBREDDE 42-51 CM.

Vinklede profiler  
peker utover

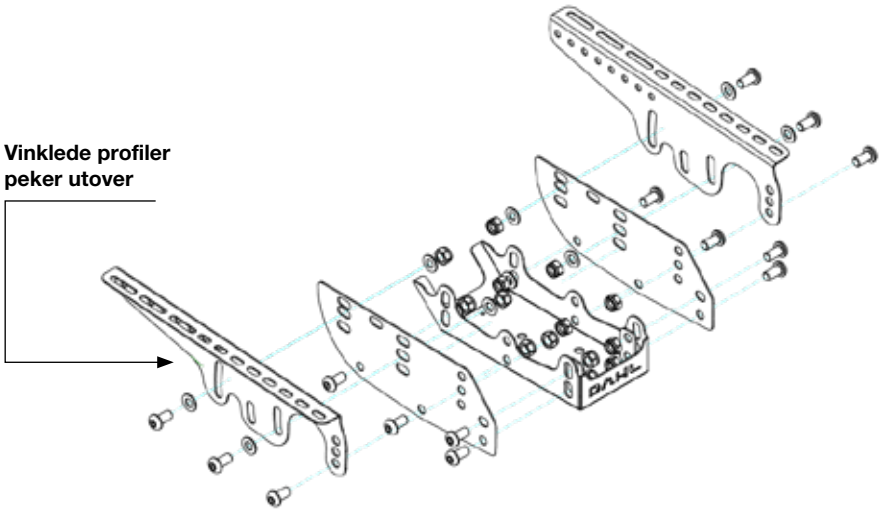


MONTERING FOR SETEBREDDE 36-39 CM.

Vinklede profiler  
peker innover

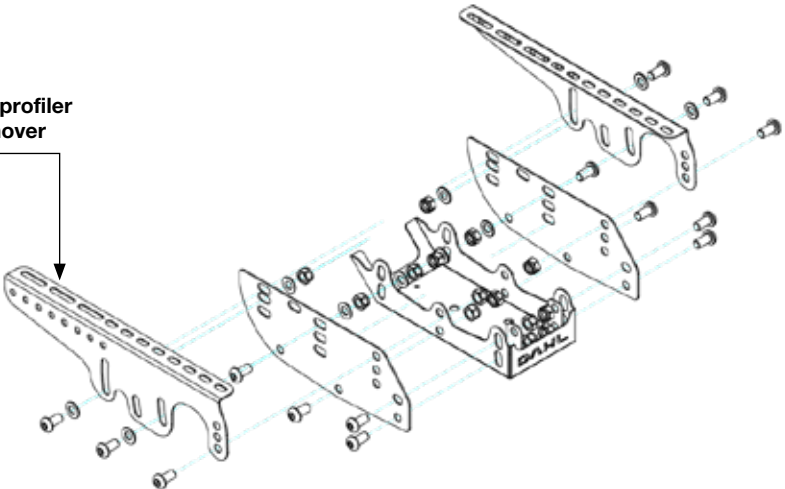

**Fig.56**

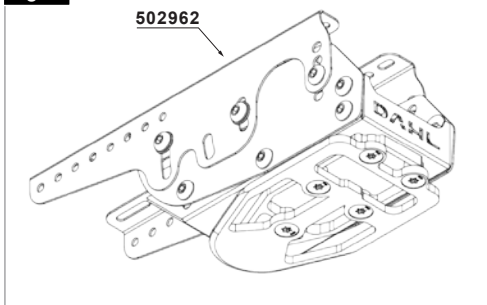


**Figur 56**

Med tanke på rullestolens konfigurasjon og den resulterende bakkeklaringen for låseplaten, monter 502962 og 503085 – se 501553 og 502961. Stram ikke skruene helt før den endelige justeringen er bestemt.

Moment for tilstramming: 20-25 Nm.

**Fig.57**

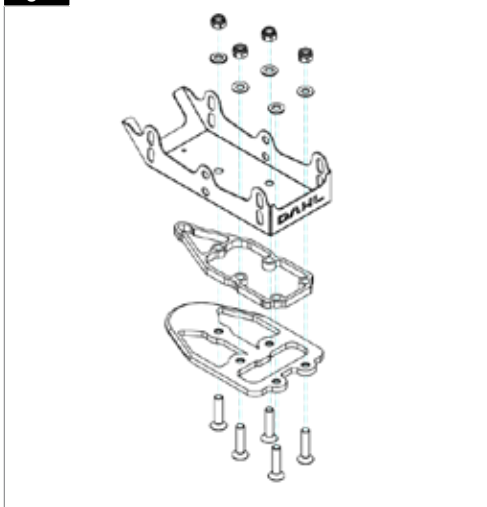


**Figur 57**

*Moment for tilstramming: 16-18 Nm,  
(se 501553.)*


**Advarsel:**

Bruk ikke andre bolter for låseplaten enn de som leveres av Dahl Engineering (delsnummer 502800, kvalitet 14.9, torx nøkkelstørrelse 27). Standard senkede M8-bolter vil ikke være sterke nok ved en kollisjon.

En kvalifisert og erfaren tekniker må utføre installasjonen av Dahl MADSTM tilpasningssystem på din rullestol.

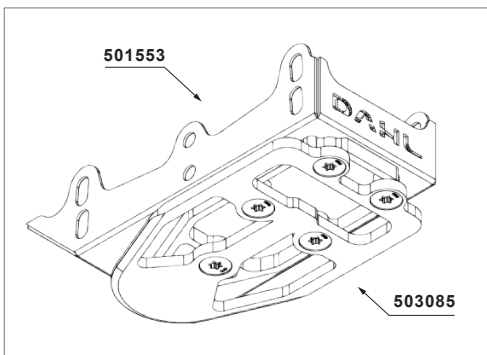

**Fig.58**

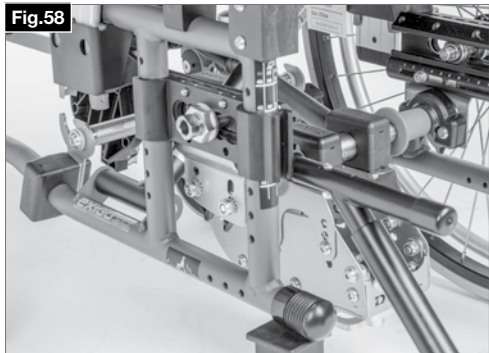

**Figur 58**

Delene monteres speilvendt på motsatt side.

**Fig.59**




**Figur 59 - 60**

503081 monteres med braketter 502953 og 502954.

Moment for tilstramming: 5 Nm.

**Fig.60**

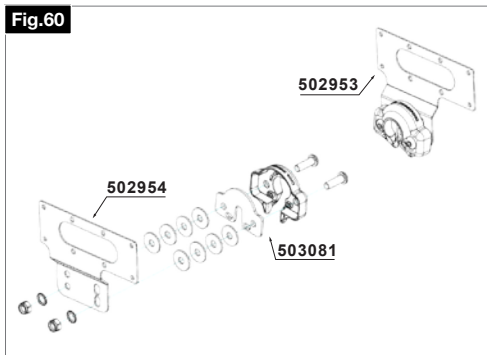


**Figur 60**

De slissede hullene på brakettene 502953 og 502954 brukes for finjustering av braketten 503081.

Dette er viktig for å sikre at de røde stemplene og boltene på rørlåsen glir jevnt inn og ut av brakettene 502953 og 502954. Stram skruene med 5 Nm.

**Fig.61**

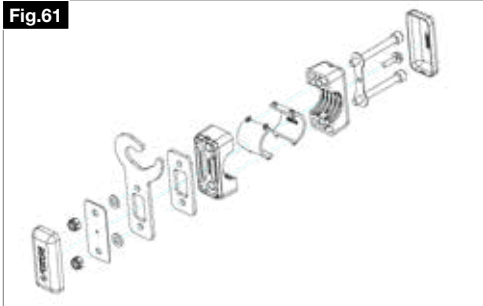


**Figur 61**

Gjengeformende skruer 502729 (M5x16 mm) må installeres som lås mot rotasjon.


Dette er den SISTE STEPPET i monteringsprosessen!

Etter at alle elementer er montert og justert, utfør en slutfunksjonstest, hvorefter Ø4 mm hull må bores gjennom plastklemmene og rullestolens metaltube. Stram skruene med 4 Nm.


**Fig.62**

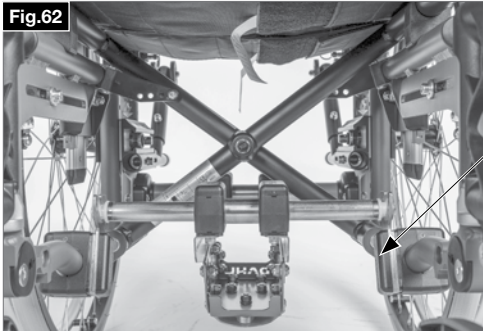

**Fig.63**

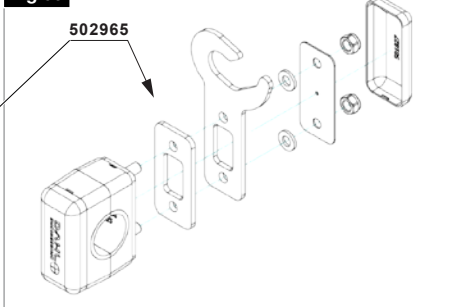


**Fig.64**


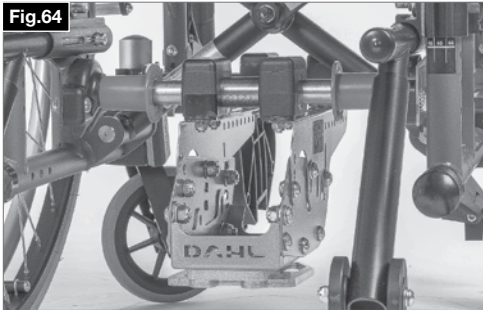


**Figur 64 - 65**

Kapp rørene 502991 for å tilpasses låsehusene 503081 – se 503084.


**Fig.65**

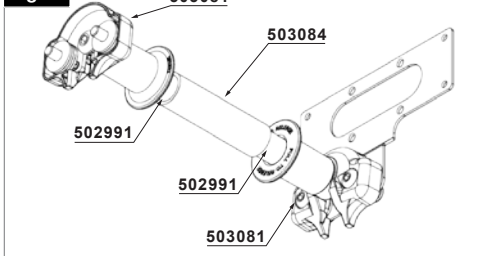

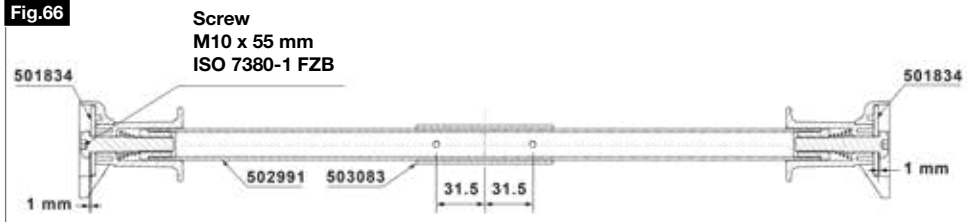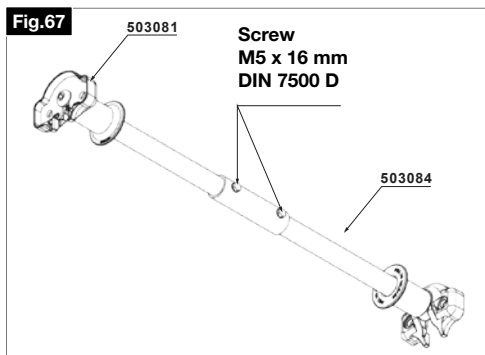**Fig.66****Fig.67****Figur 66**

Kapp rørene 502991 for å passe til den spesifikke rullestolen, slik at skruene som er montert i begge ender av 503084 passer til den totale ytre målingen mellom brakettene 501834, etter at disse er installert på rullestolen.

Legg til 2 mm til den målte totale ytre avstanden mellom brakettene 501834 for å sikre at skruene kan gli lett inn i brakettene.

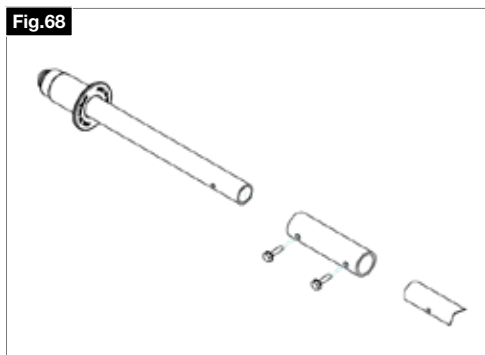**Fig.68****Figur 68**

Etter at rørene er kappet, bor Ø4 mm hull i dem, slik at de passer med posisjonene for festehullene i koblingstuben 503083.

Monter selvskruende skruer 502729 (M5 x 16 mm DIN 7500 D) og stram disse med moment 4 Nm.

## MONTERING FOR SETEBREDDE 36-39 CM.


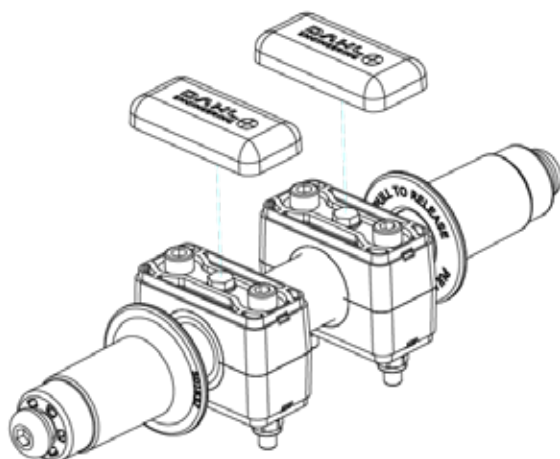




Fig.69

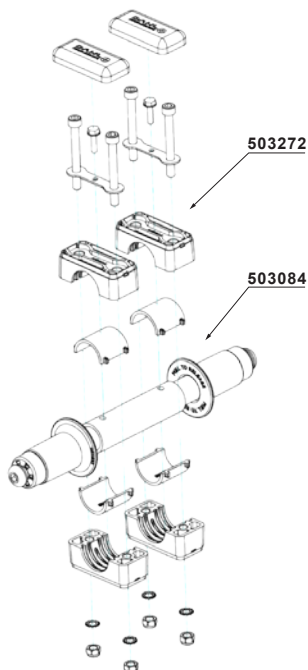


De gjengeformede skruene 502729 (M5x16 mm) må installeres som lås mot rotasjon. Dette er den SISTE STEPPET i monteringsprosessen!

Etter at alle elementer er montert og justert, utfør en slutfunksjonstest, hvorefter Ø4 mm hull må bores gjennom plastklemmerne og rullestolens metalltube. Stram skruene med 4 Nm.


Etter at rørene er kappet, bor Ø4 mm hull i dem, slik at de passer med posisjonene for festehullene i koblingstuben 503084.

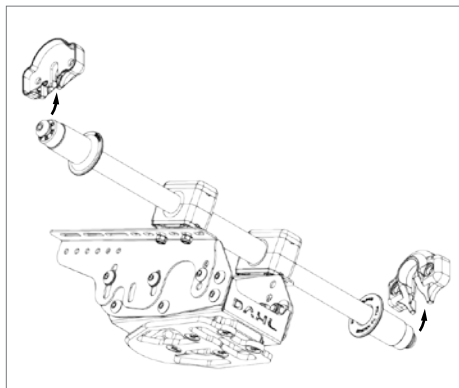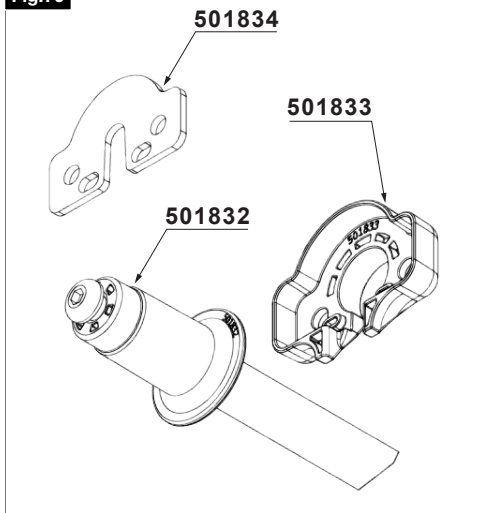**Fig.70****Figur 70**

Skruehodene på låsemekanismen 501832 vil bli ført inn i sporene på metalbrakettene 501834, som er installert på innsiden av låsehusene 501833 på begge sider.

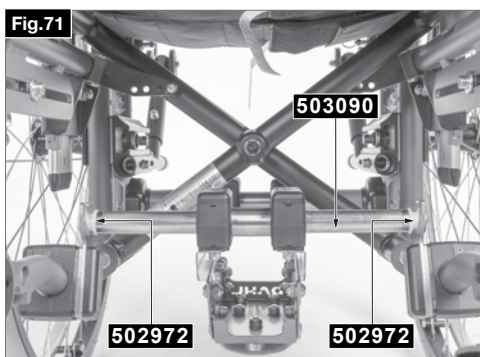
**Fig.71****Figur 71**

Krysstuben 503090 plasseres med sporene på plastrollene 501839 i krokene 502972. Før dette kan gjøres, kapp rørene 502990 slik at sporene på plastrollene passer til avstanden mellom krokene 502972.

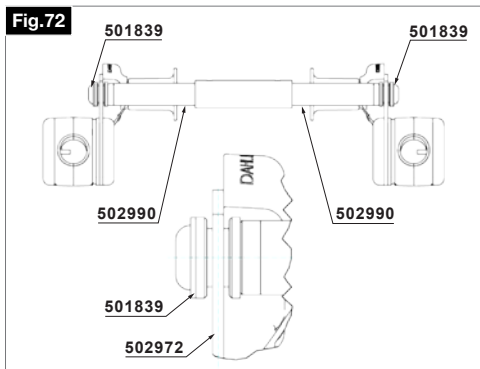
**Fig.72****Figur 72**

Avstanden mellom krokene 502972 og lengden på krysstuben avhenger av bredden på rullestolen. Sporene på plastrollene 501839 må være sentrert på krokene 502972.

## MONTERING BRUKT FOR SETEBREDDE 42-51 CM.

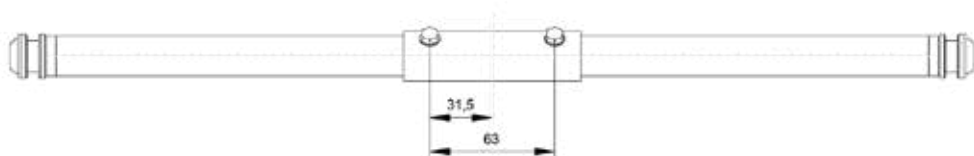

**Fig.73**

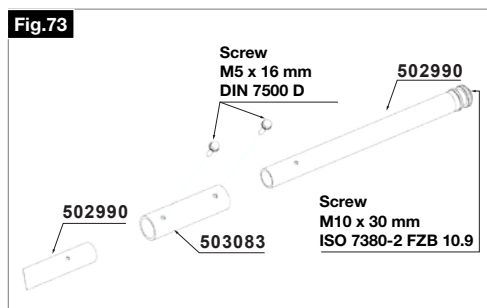


**Figur 73**


Etter at rørene er kappet, bor Ø4 mm hull i dem, slik at de passer med posisjonene for festehullene i koblingstuben 503083.

Monter selvskruende skruer 502729 (M5 x 16 mm DIN 7500 D) og stram disse med moment 4 Nm.

## MONTERING BRUKT FOR SETEBREDDE 36-39 CM.

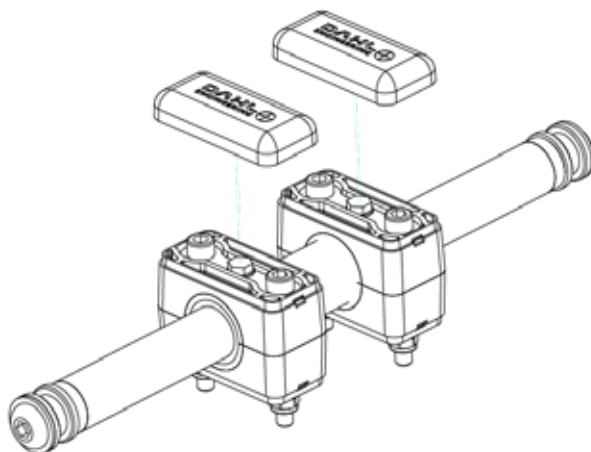

**Fig.74**

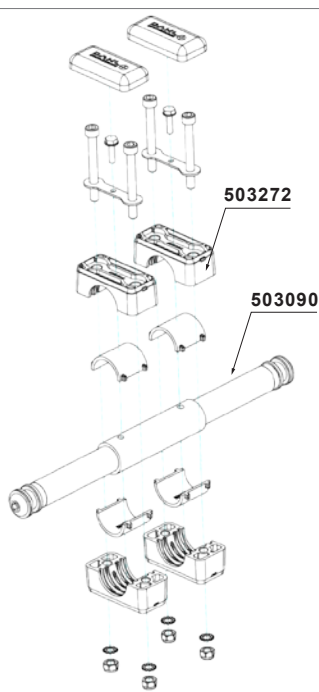


**Figur 74**

De gjengeformede skruene 502729 (M5x16 mm) må installeres som lås mot rotasjon. Dette er den SISTE STEPPET i monteringsprosessen!


Etter at alle elementer er montert og justert, utfør en sluttfunksjonstest, hvorefter Ø4 mm hull må bores gjennom plastklemmerne og rullestolens metaltube. Stram skruene med 4 Nm.

Etter at rørene er kappet, bor Ø4 mm hull i dem, slik at de passer med posisjonene for festehullene i koblingstuben 503090.

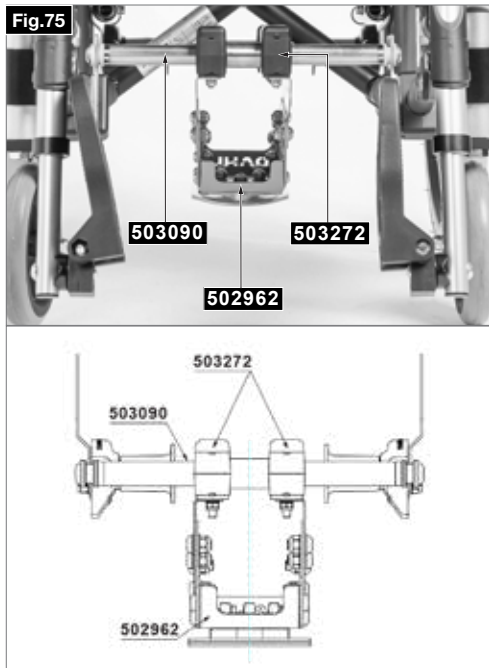

**Figur 75**

Monter krysstuben 503090 sentrert på konsollen 502962 ved å bruke klemmene 503272.

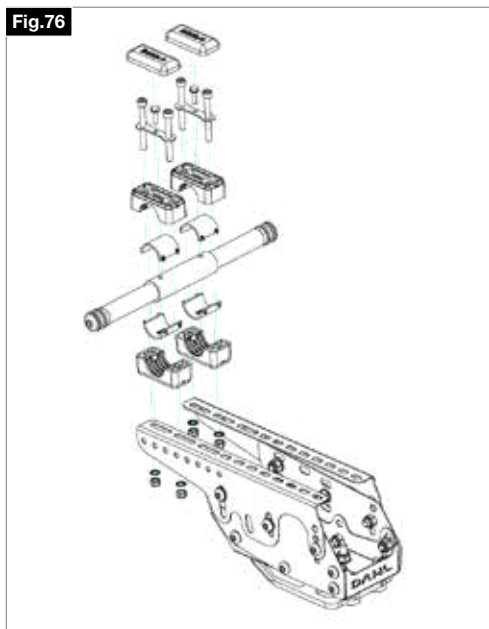


**Figur 76**

De gjengeformende skruene 502729 (M5x16 mm) må installeres som lås mot rotasjon. Dette er den SISTE STEPPET i monteringsprosessen!

Etter at alle elementer er montert og justert, utfør en slutfunksjonstest, hvorefter Ø4 mm hull må bores gjennom plastklemmene og rullestolens metaltube.


Stram skruene med 4 Nm.

**Fig.77**

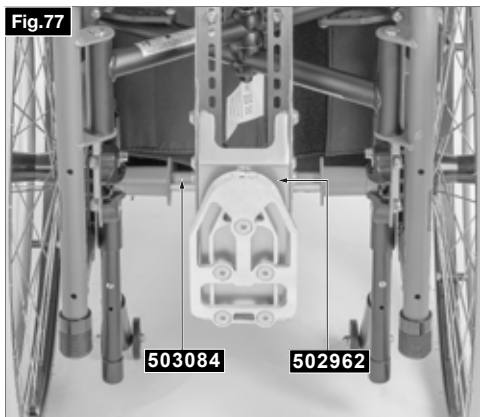


**Figur 77**

Monter krysstuben med låsene 503084 sentrert på konsollen 502962 ved å bruke klemmene 503272.

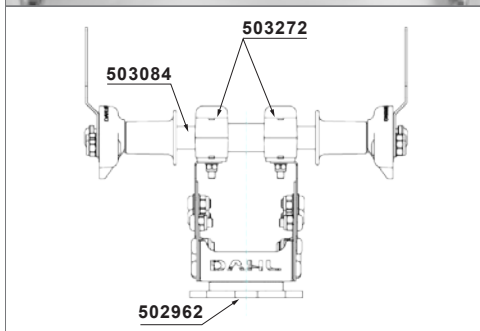

**Fig.78**

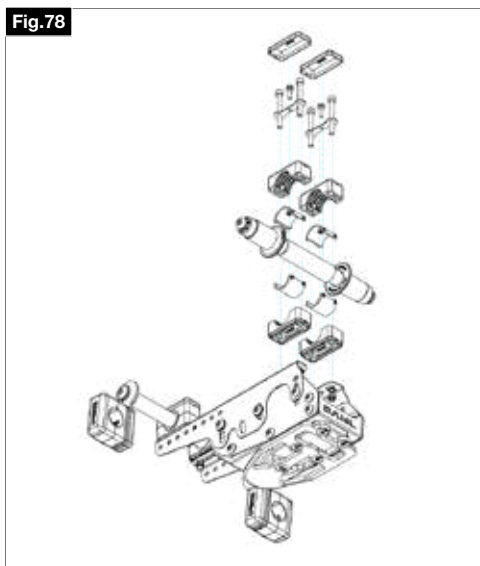


**Figur 78**


De gjengeformende skruene 502729 (M5x16 mm) må installeres som lås mot rotasjon. Dette er den SISTE STEPPET i monteringsprosessen!

Etter at alle elementer er montert og justert, utfør en slutfunksjonstest, hvorefter Ø4 mm hull må bores gjennom plastklemmene og rullestolens metaltube.

Stram skruene med 4 Nm.

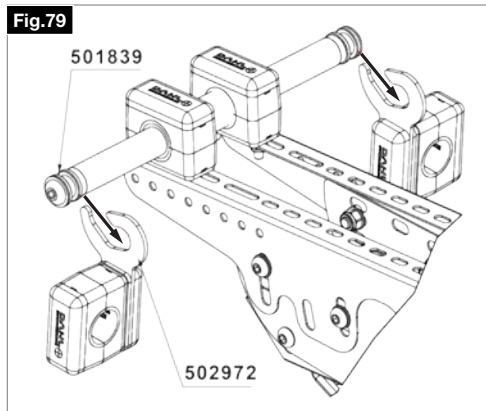
**Fig.79****Figur 79**

Plastrollene 501839, som er montert på krysstuben, plasseres med sporene i krokåpningene 502972 på begge sider.

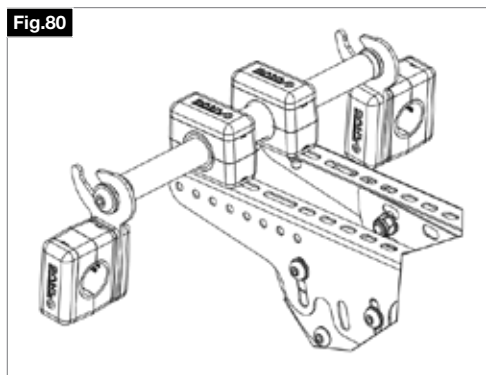**Fig.80****Figur 81**

Så snart plastrollene 501839 er riktig plassert i krokene 502972, sving opp konsollen med de to røde rørlåsene 501832 inn i låsebrakettene 501833 på begge sider.

Når skruene, som er montert i endene av de røde låseplungerne 501832, er riktig posisjonert, må de fjærbelastede røde låsemekanismene 501832 gli inn i soklene på låsebrakettene 501833. Deretter er konsollen sikret.

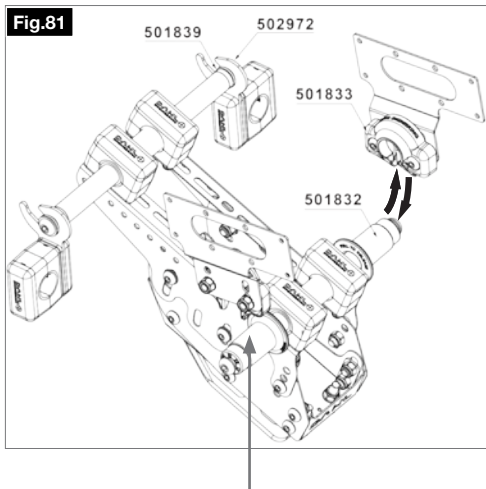**Fig.81**

For å frigjøre konsollen, følg de samme trinnene i omvendt rekkefølge, etter at de røde fjærbelastede låseplungerne 501832 er låst opp ved å skyve dem innover mot hverandre.

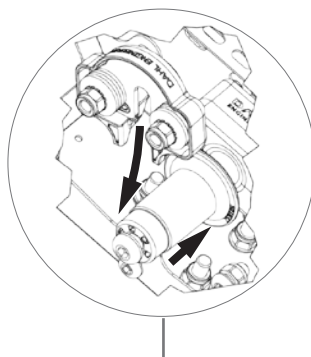


Fig.82

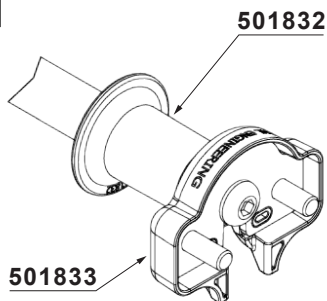


Fig.82.1


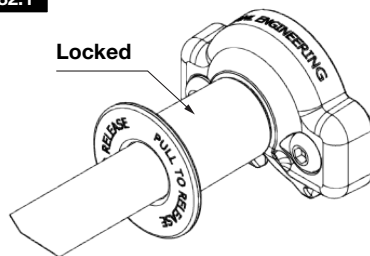


Fig.82.2

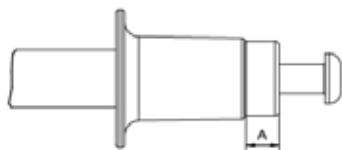

Figur 82

Låserøret 501832 er ikke låst riktig før de blanke tuppene (A) på de røde låseplungerne 501832 er helt satt inn i soklene på låsebrakettene 501833, hvoretter de blanke tuppene (A) ikke lenger vil være synlige.

Sjekk at det er låst helt ved å skyve de røde låseplungerne helt ut mot soklene 501833.

Fig.82.3

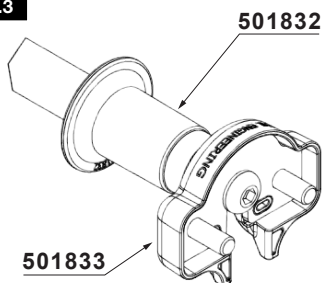
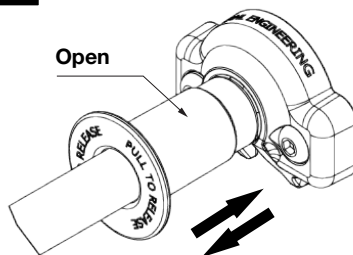


Fig.82.4

**ADVARSEL:**

Feil installasjon av MADS-tilpasningssettet på rullestolen kan forårsake alvorlige skader eller død ved en kollisjon. Sjekk alltid den spesifikke rullestolprodusentens bruker- og monteringsveiledninger for å sikre at de riktige delene er riktig installert på din spesifikke rullestol for bruk med Dahl Docking Station. Kjør ikke kjøretøyet før rullestolen og brukeren er korrekt sikret.

# BRUKSANVISNING FOR BRUK MED DAHL DOKKINGSTASJONER

Rullestolen Sunrise Exigo 30 har blitt testet og godkjent i henhold til ISO 7176-19: 2022 sammen med Dahl MADS™ tilpasningssystemet, designet for sikring i de automatiserte og elektrisk høydejusterbare rullestoldokkingstasjonene – Dahl VarioDock™ (delsnummer 503600) og den faste høyde-dokkingstasjonen Dahl MK II (delsnummer 501750).

Når den er utstyrt med Dahl MADS™ tilpasningssystemet, kan Sunrise Exigo 30 deretter sikres i kjøretøy der en Dahl dokkingstasjon er installert. Sikring med Dahl MK II krever at den installerte høyden samsvarer med den eksakte høyden på rullestolens låseplate for å fungere, mens den elektrisk høydejusterbare VarioDock™ kan justeres for å passe når den går inn i kjøretøyet.

## Transport i et kjøretøy.



### FARLIG!

Sørg for at kjøretøyet er passende utstyrt for å transportere en passasjer i rullestol, og at metoden for på- og avstigning er egnet for din rullestoltype.

Kjøretøyet bør ha tilstrekkelig gulvstyrke til å tåle den samlede vekten av både passasjer og rullestolen ved en kollisjon.

Rullestolen skal kun sikres i en fremovervendt retning. Denne rullestolen er testet i henhold til ISO 7176-19 for bruk i kjøretøy og oppfyller kravene for fremovervendt transport og kollisjoner frontalt. Rullestolen er ikke testet for andre retninger i et kjøretøy.




### FARLIG!

Endringer eller erstatninger må ikke gjøres på festepunktene / kjøretøyet festebånd på rullestolen for dokkingssystemer eller 4-punkts stroppsystemer, eller på konstruksjonselementer eller deler av rammen, uten forhåndsrådgivning fra produsenten.

## Identifikasjon av Dahl Docking-systemet


Hvis rullestolen din er utstyrt med låseplate for Dahl Docking-systemene, vil følgende etikett være til stede på rullestolen.

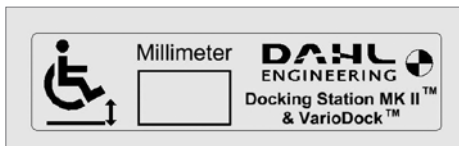

Høyden som er notert på etiketten angir verdien som den høydejusterbare VarioDock™ kontrollpanelskjermen skal stilles til. For MK II er dette høyden som dokkingenheten må installeres på.

Unnlatelse av å stille inn / installere dokkingenheten til riktig høyde kan hindre låseplaten fra å gli jevnt inn i dokkingenheten eller hindre at dokkingstasjonen og rullestolen kobles sammen.

## DAHL DOCKING STASJON MK II

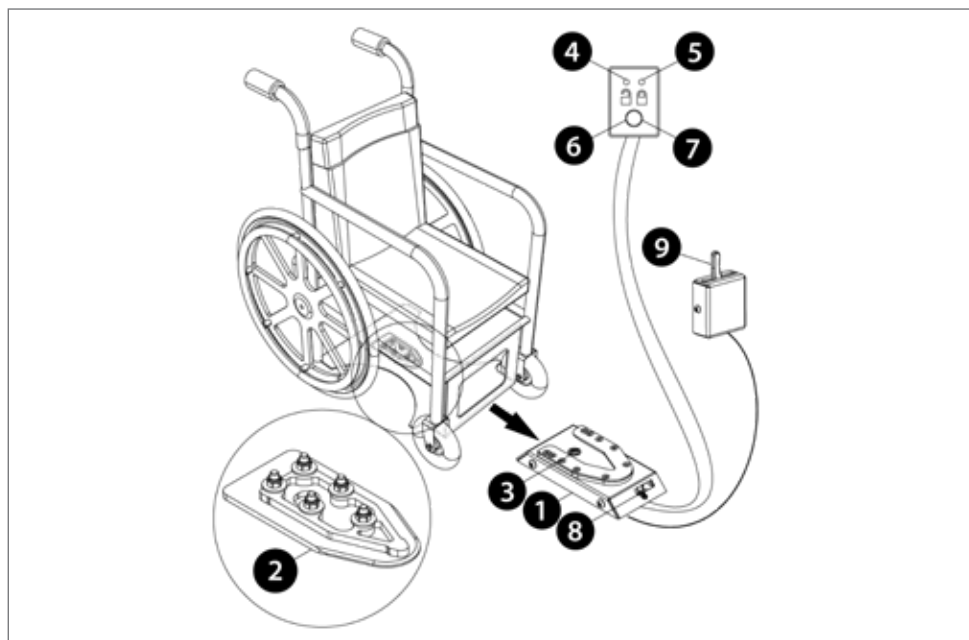

1. Dahl Docking Stasjon MK II

2. Låseplate og mellomring

3. Låsepinne

4. Rød indikator-LED

(rullestolen er ikke sikret og kan tas ut av dokkingsstasjonen)

5. Grønn indikator-LED  
(rullestolen er sikret)


6. Kontrollpanel

7. Utløserknapp (rød knapp)

8. Manuell nødsutløserhendel

9. Manuell betjeningshendel

# DAHL VARIODOCK™

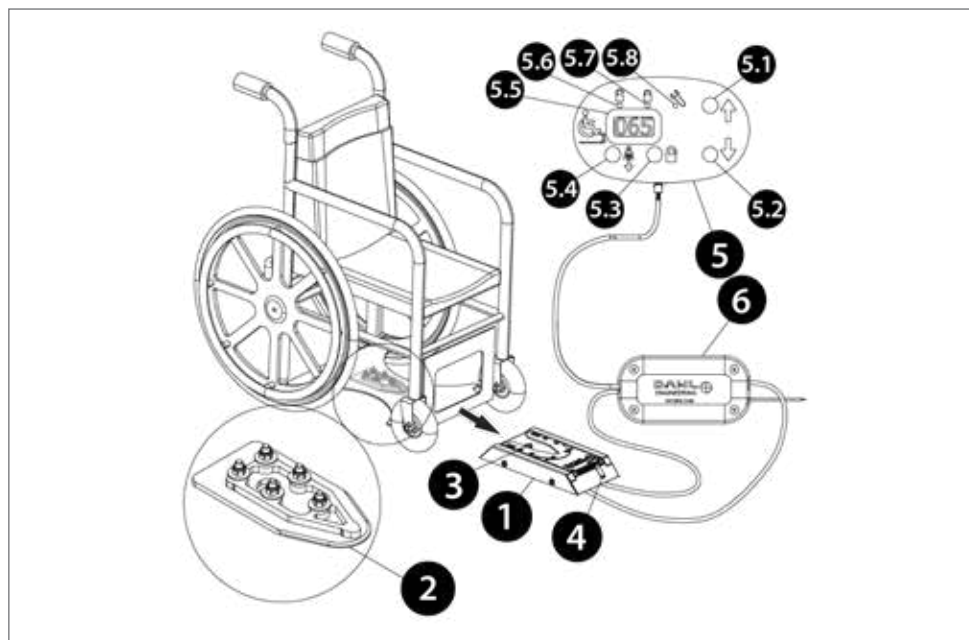

1. Dahl VarioDock™
2. Låseplate og mellomring
3. Låsepinne
4. Manuell nødsutløserhendel
5. Kontrollpanel
  - 5.1 Juster oppover (gul knapp)
  - 5.2 Juster nedover (grønn knapp)
  - 5.3 Utløserknapp (rød knapp)
  - 5.4 Trekk ned for å fjerne slakk (blå knapp)
  - 5.5 Nåværende måleverdidisplay
  - 5.6 Rød indikator-LED (rullestolen er ikke sikret og kan tas ut av dokkingsstasjonen)
  - 5.7 Grønn indikator-LED (rullestolen er sikret)
  - 5.8 Belyst når vedlikehold kreves
6. Kontrollmodul

Dokkingenhetene er designet for å holde både manuelle og elektriske rullestoler, samt Dahls setebaser, på kjøretøyets gulv. Et kontrollmodul / panel styrer og overvåker dokkingenheten, og distribuerer strøm til de ulike komponentene. Bruk opp- eller ned-knappene (5.1) og (5.2) på kontrollpanelet for å sette høyden på dokkingenheten slik at den passer med høyden på rullestolens låseplate (tilgjengelig kun på VarioDock™).

### **Sikring av rullestolen i MK II og VarioDock™ dokkingsstasjoner:**

- Manøvrer rullestolen sakte og i en jevn retning over dokkingsstasjonen. Låseplaten (2) plassert under rullestolen hjelper til med å føre rullestolen på plass i dokkingsstasjonen. Når låseplaten er fullt engasjert i dokkingsstasjonen, vil en fjærbelastet låsepinne (3) automatisk sikre låseplaten.
- Dahl dokkingsstasjoner er utstyrt med en kontrollbryter som indikerer om låseplaten er korrekt sikret i dokkingsstasjonen. Så snart låseplaten kommer i kontakt med låsepinne (3), vil en advarselstone (en høyfrekvent pipe) høres, og den røde dioden / lampen / LED-en i kontrollpanelet, MK II (4) og VarioDock™ (5.6), vil lyse opp til låseplaten enten er fullt engasjert eller rullestolen fjernes fra dokkingsstasjonen.
- Som en indikasjon på at rullestolens låseplate er fullt innsatt i dokkingenheten og riktig sikret, vil advarselstone stoppe, den røde lampen/LED-en i kontrollpanelet slukke, og den grønne lampen/LED-en, MK II (5) og VarioDock™ (5.7), vil lyse opp.



### **ADVARSEL:**

#### **Ikke flytt kjøretøyet:**

- Mens rullestolen manøvreres på plass i dokkingsstasjonen;
- Hvis rullestolen og bruker ikke er korrekt sikret;
- Hvis advarselstone høres og/eller den røde advarselslampen (LED) i kontrollpanelet blinker eller er tent!

**Kontroller alltid om låseplaten er riktig engasjert i dokkingsstasjonen ved å prøve å trekke rullestolen ut av dokkingsstasjonen før du beveger kjøretøyet.**

**Det skal ikke være mulig å trekke rullestolen ut av dokkingsstasjonen uten å trykke på den røde utløserknappen i kontrollpanelet.**

Fest setebeltet før du kjører!

### **Generelle instruksjoner for passasjerens sikkerhetssele:**



#### **FARE!**


- Bruk et 3-punkts passasjersikringssystem for å sikre passasjerens.
- Både bekken- og øvre torso beltesystemer må brukes for å restrå passasjerens og redusere muligheten for hode- og brystskader ved kollisjon med kjøretøyets komponenter.
- Eventuelle rullestolforankrede passasjersikringssystemer, f.eks. 3-punkts belte, sele eller holdestøtte (hoftebelter, livbelter) skal ikke brukes eller stole på for å sikre passasjerens i et kjøretøy i bevegelse, uansett om de er merket ISO 7176-19, ISO 10542-1, SAE J2249 eller annet. Bruk i stedet et kjøretøyforankret og sertifisert passasjersikringssystem.
- Bruk et riktig plassert holdestøtte når passasjerens transporteres.
- Øvre torso belte må være plassert over midten av skulderen og på tvers av brystet, som vist i illustrasjonen.
- Sikringsbeltene må justeres så stramt som mulig, i samsvar med passasjerens komfort.
- Sikringsbeltets webbing må ikke være vridd under bruk.
- Vær forsiktig når du plasserer passasjersikringsbeltet slik at beltespenneknappen ikke blir kontaktet av rullestolens komponenter under kjøring eller ved en kollisjon.



Passasjersikringsbelter må ikke holdes bort fra kroppen av rullestolkomponenter som armlener eller hjul.



Illustrasjon av feil plassering av sikkerhetsbelte

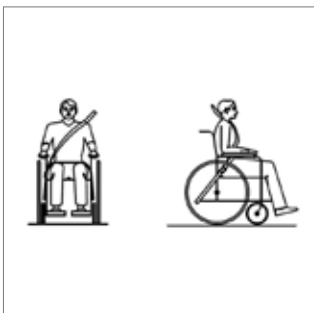

Illustrasjon av korrekt plassering av sikkerhetsbelte




Passasjersikringsbelter bør ha full kontakt med skulderen, brystet og bekkenet, og bekkenbeltet bør plasseres lavt på bekkenet nær lår-buk-krysset.

## Plassering av passasjersikringssystemet når det brukes med Dahl Docking-systemene:

### **FARE!**

Bekkenbelte skal bæres lavt over forsiden av bekkenet, slik at vinkelen på bekkenbeltet er innenfor det valgfri eller foretrukne området på 30° til 75° i forhold til horisontalen. En brattere (større) vinkel innenfor det foretrukne området på 45° til 75° er ønskelig, det vil si nærmere 75°, men aldri over 75°.

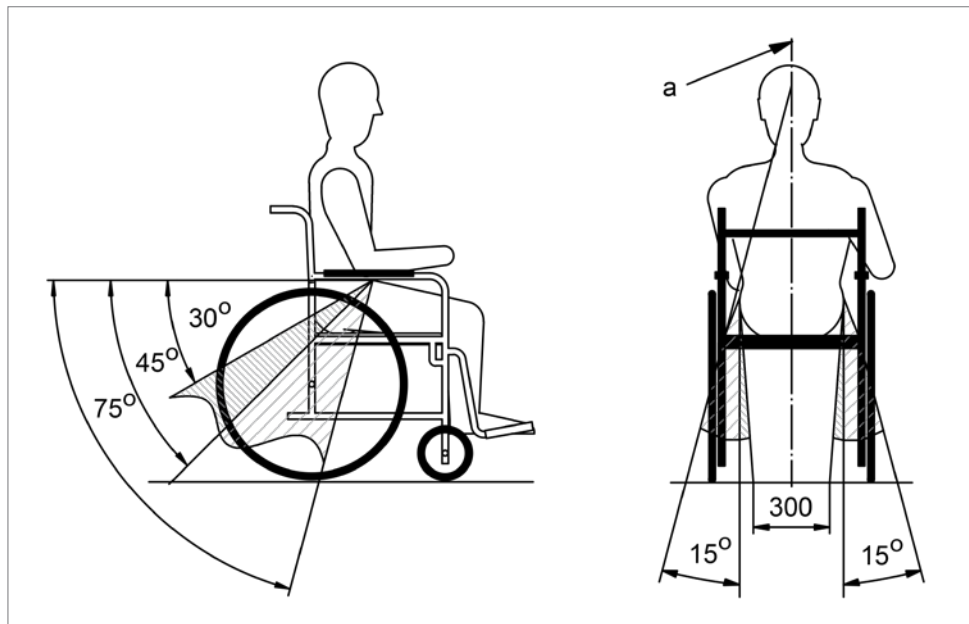

## Foretrukne og valgfri vinkler for plassering av bekkenbeltet

*(Dimensjoner i millimeter)*

### Nøkkel



## Frigjøring fra dockingstasjonen:

- Når kjøretøyet er helt stanset, fjern sikkerhetsbeltet.
- Kjør rullestolen fremover for å frigjøre trykket på låsepinnen.
- Trykk på den røde frigjøringsknappen i kontrollpanelet for VarioDock™ (5.6) eller MK II (7). Låsepinnen vil bli utløst og forbli frigjort i omtrent 5 sekunder, før den automatisk låser seg igjen.
- Flytt rullestolen bort fra dockingstasjonen innenfor de 5 sekundene. Ikke prøv å reversere ut av dockingstasjonen før den røde LED-lampen på kontrollpanelet, som indikerer at låseposisjonen er frigjort, har blitt tent.

## ADVARSEL:

**Unngå å prøve å reversere rullestolen før den røde LED-lampen er tent. Hvis du gjør dette, kan låsemekanismen i dockingstasjonen bli blokkert, noe som gjør det umulig å reversere. Hvis dette skjer, gjenta den ovennevnte frigjøringsprosedyren.**


## Manuell frigjøring ved elektrisk feil:

Manuell nødutløsningssspak for VarioDock™ (4) og MK II (8) er plassert på den fremre kanten av dockingstasjonen..

- Flytt rullestolen fremover for å fjerne trykket på låsepinnen. Trykk på nødutløsningssspaken og hold den i siden for å frigjøre låsemekanismen mens rullestolen flyttes bort fra dockingstasjonen.
- En kabelaktivert manuell betjeningsspak (9) kan også installeres (kun tilgjengelig for MK II). Trykk den røde frigjøringsarmen til siden og hold den der mens rullestolen beveges bort fra dockingstasjonen.

**Hvis de beskrevne manuelle utløsningsprosedyrene ikke fungerer, følger det med et rødt nødutløsningsverktøy til hver dockingstasjon.**

**Dahl Engineering kontaktdetaljer finner du på: [www.dahlengineering.dk](http://www.dahlengineering.dk)**

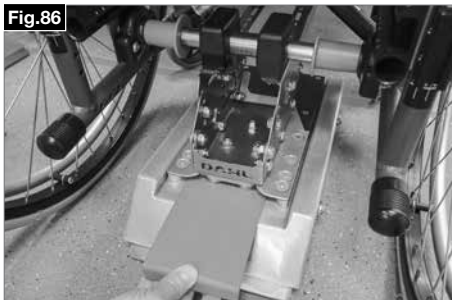

Beveg rullestolen fremover for å fjerne trykket på låsepinne.

Plasser nødutløsningsverktøyet i spalten mellom låseplaten og dockingstasjonen. Trykk på utløsningsverktøyet og beveg rullestolen fremover, til låsepinne er presset ned.

Når låsepinne er frigjort, kan rullestolen bakover og forlate dockingstasjonen.

**Vennligst se også instruksjonene for installasjon, bruk og vedlikehold av docking systemet som brukes.**

**Nedlastinger er tilgjengelige på: [www.dahlengineering.dk](http://www.dahlengineering.dk)**

## Installering av Dahl Docking stasjon i kjøretøyet:

Kun profesjonelle selskaper som driver med ombygging eller bygging av rullestoltilpassede kjøretøy kan bestille docking-systemene fra Dahl Engineering. En kvalifisert og erfaren tekniker må utføre installasjonen. Dahl Engineering kan tilby kjøretøyspesifikke installasjonsinstruksjoner for et stort utvalg av kjøretøy, som må følges av installatøren.

Vennligst kontakt Dahl Engineering for mer informasjon om godkjente kjøretøy og installasjonsposisjoner.

NOTER



NOTER



Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 – Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Norge  
Telefon: +47 66 96 38 00  
post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB  
Neogatan 5  
431 53 Mölndal  
Sweden  
Tel.: +46 (0)31 748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.  
H – Park, Herspická 1013/11d,  
639 00 Brno  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 547 250 955  
Fax: (+420) 547 250 956  
www.medicco.cz  
info@medicco.cz  
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Denmark  
+45 70 22 43 49  
info@sunrisemedical.dk  
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia  
11 Daniel Street  
Wetherill Park NSW 2164  
Australia  
Ph: +61 2 9678 6600  
E: enquiries@  
sunrisemedical.com.au  
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical  
North American Headquarters  
2842 Business Park Avenue  
Fresno, CA, 93727, USA  
(800) 333-4000  
(800) 300-7502  
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7253/980-0  
Fax: +49 (0) 7253/980-222  
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical  
Thorns Road  
Brierley Hill  
West Midlands  
DY5 2LD  
England  
Phone: 0845 605 66 88  
Fax: 0845 605 66 89  
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
Tel.: +34 (0) 902142434  
Fax: +34 (0) 946481575  
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland  
Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6,  
94-103 Łódź  
Polska  
Telefon: + 48 42 275 83 38  
Fax: + 48 42 209 35 23  
E-mail: pl@sunrisemedical.de  
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +31 (0)492 593 888  
E: customerservice@  
sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl  
www.SunriseMedical.eu  
(International)

Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00  
Email: info@sunrisemedical.fr  
www.sunrisemedical.fr

