

R90

GUIDE DE COMPATIBILITÉ



FAUTEUILS ROULANTS PLIANT	PLAQUE D'AXE	FAUTEUILS ROULANTS RIGIDE	DIAMÈTRE DU TUBE D'AXE
BREEZY Basix ²	Small	RGK HiLite	25 mm
BREEZY Rubix ²	Small	RGK HiLite XTR (centre de gravité fixe)	25 mm
QUICKIE Life T	Small	RGK HiLite XTR (centre de gravité réglable)	32 mm
QUICKIE Life RT	Small	RGK Octane	25 mm
QUICKIE Neon ²	Medium	RGK Octane FX	25 mm
QUICKIE QS5 X	Adaptateur QS5 X	RGK Octane Sub4	25 mm
QUICKIE Xenon ²	Medium	RGK Tiga	32 mm
QUICKIE Xenon ² Hybrid	Medium	RGK Tiga F2	35 mm
QUICKIE Xenon ² SA	Medium	RGK Tiga FX	32 mm
ZIPPIE Youngster 3	Small	RGK Tiga Sub4	28 mm
		QUICKIE Argon ²	32 mm
		QUICKIE Helium	32 mm
		QUICKIE Nitrum	32 mm
		QUICKIE Nitrum Hybrid	32 mm
		ZIPPIE Simba	32 mm

Remarque : la liste ci-dessus donne une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le R90 peut être monté. Cependant la forme du cadre, le réglage du centre gravité et la taille des roues ont une influence sur le montage. De plus, une partie droite de tube de châssis d'au moins 30 mm est nécessaire pour monter le boîtier de commande. C'est pourquoi il est essentiel de faire des essais et tests préalables pour être sûr à 100% sûr, ou alternativement de demander des conseils auprès de votre revendeur. La liste de produits compatibles montre uniquement les fauteuils roulants avec une clause signée. La page suivante contient des informations concernant le contrôle des combinaisons. Consultez la liste des prix pour connaître les restrictions lors de la combinaison avec les fauteuils roulants Sunrise Medical.

R90

CHÂSSIS RIGIDE ET CHÂSSIS PLIANT

VÉRIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ EN 8 ÉTAPES

L'Empulse R90 est compatible avec des fauteuils roulants à châssis fixe ou pliant, équipés d'un châssis avant fixe ou de repose-jambes escamotables. Pour garantir la compatibilité de l'Empulse R90 avec votre fauteuil roulant, suivez les étapes ci-dessous.

1: ACCORD DE COMBINAISON

Consultez le site fr.sunrisemedical.be, sous **support professionnel » accord de combinaison** pour vérifier si la combinaison entre le R90 et le fauteuil roulant est approuvée.



Un adaptateur permanent avec réceptacle sur le tube d'axe pour les fauteuils roulants rigides.



Un tube d'axe amovible avec adaptateur et réceptacle pour les fauteuils pliants et les fauteuils fixe avec cadre fermé.

2: TAILLE DES ROUES ARRIÈRE

Le R90 est compatible avec des fauteuils roulants équipés de roues arrière de 24" et 25".

3: RÉGLAGE DU CARROSSAGE

Le R90 est compatible avec des fauteuils roulants ayant un carrossage de 0°, 1°, 2° et 3°.



Le R90 est uniquement compatible avec des fauteuils roulants rigides possédant un tube d'axe droit.



Si le tube d'axe n'est pas droit et a une forme en « V », le R90 n'est pas compatible avec le fauteuil roulant.

R90

CHÂSSIS RIGIDE ET CHÂSSIS PLIANT

4: HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE

Vérifiez dans le tableau ci-dessous si la combinaison du centre de gravité et de la hauteur d'assise est possible, et vérifiez également en mesurant la distance entre le coussin d'assise et le centre du tube d'axe.

HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (MM)	ROUE ARRIÈRE 24"			ROUE ARRIÈRE 25"			HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (MM)
	CENTRE DE GRAVITÉ			CENTRE DE GRAVITÉ			
	80 MM	92 MM	104 MM	80 MM	92 MM	104 MM	
370							370
380							380
390							390
400							400
410							410
420							420
430							430
440							440
450							450
460							460
470							470
480							480
490							490
500							500

 GO  NO GO



Pour un centre de gravité **inférieur ou égal à 76 mm**, prenez en compte une distance minimale de 70 mm entre le centre du tube d'axe et le coussin d'assise.

Pour un centre de gravité **supérieur à 76 mm**, prenez en compte une distance minimale de 118 mm entre le centre du tube d'axe et le coussin d'assise.



La poignée ergonomique ne doit pas toucher le coussin d'assise, voir le cercle.

R90

CHÂSSIS RIGIDE ET CHÂSSIS PLIANT

5: NOGOS EN GÉNÉRALES

Vérifiez si le fauteuil roulant est équipé de l'un des éléments suivants, car ils constituent des interdictions :

- » Suspension arrière
- » Réglage d'inclinaison
- » One Arm Drive (conduite à un bras)

Assurez-vous d'avoir un espace suffisant, au moins 30 mm, à l'avant du châssis du fauteuil roulant pour pouvoir fixer le boîtier de commande du R90.

6: RECOMMANDATIONS

Les éléments suivants ne constituent ni une acceptation ni une interdiction, mais il est conseillé de suivre ces recommandations pour des performances optimales sans limitations :

- » Nous déconseillons la combinaison du R90 avec des fauteuils roulants équipés de roues avant de 3" ou 4".
- » Il est recommandé d'utiliser un système anti-basculement sur le fauteuil roulant en combinaison avec le R90.



R90

FAUTEUILS PLIANTS UNIQUEMENT

7: LARGEUR DU FAUTEUIL ROULANT

Mesurez la distance à l'intérieur des plaques d'axe d'un fauteuil roulant pliant et choisissez la bonne taille de tube d'axe dans la liste de prix. Si la distance mesurée ne correspond pas aux dimensions minimales et maximales indiquées dans le tableau ci-dessous, cela signifie que le R90 n'est pas compatible avec ce fauteuil roulant spécifique (NoGo).



DISTANCE PLAQUE D'AXE (MM)	TUBE D'AXE AVEC RESSORT			
	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
300 - 330				
331 - 400				
401 - 450				
451 - 530				

8: DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'AXE

Mesurez la largeur de la plaque d'axe comme indiqué sur les images ci-dessous et choisissez la bonne taille d'adaptateur de tube d'axe dans la liste de prix. Si la distance mesurée ne correspond pas aux dimensions minimales et maximales indiquées dans le tableau ci-dessous, cela signifie que le R90 n'est pas compatible avec ce fauteuil roulant spécifique (NoGo).



PLAQUE D'AXE (MM)	ADAPTATEUR DE PLAQUE D'AXE		
	SMALL	MEDIUM	LARGE
25 - 38			
39 - 50			
51 - 60			