





HeliX² - HeliX² Comfort RubiX² Plus

BRUGERVEJLEDNING


QUICKIE®

000690920.DK

www.sunrisemedical.dk

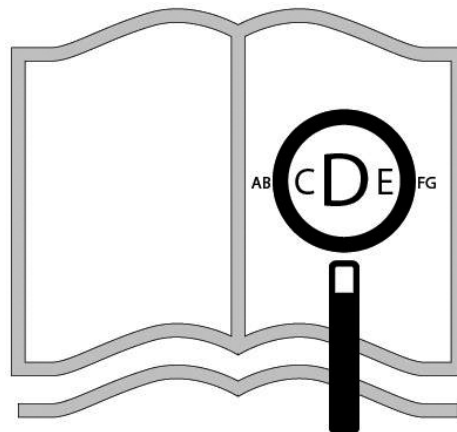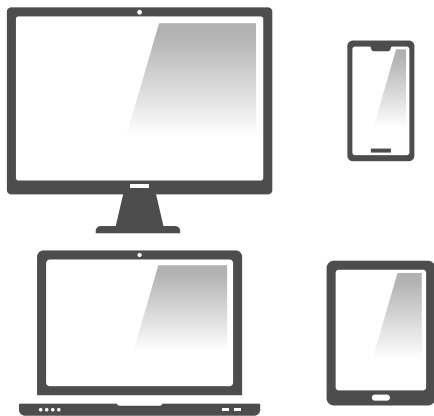

Kørestolskomponenter

DA



SUNRISE MEDICAL er godkendt i henhold til ISO 13485, som bekræfter kvaliteten af vores produkter på alle stadier fra udvikling til produktion. Dette produkt opfylder de standarder, der er angivet i EU- og UKCA-bestemmelser. Det viste ekstraudstyr eller tilbehør kan købes mod tillægspris.



07


KØRESTOLE:

1. Skubbehåndtag
2. Ryglænspolstring
3. Sidestykke
4. Sædepolstring
5. Fodstøtte
6. Svinghjul
7. Fodplade
8. Forgaffel
9. Hurtig-udløser-aksel
10. Bremses
11. Drivring
12. Baghjul






	1090 ↕ 770		850 ↕ 470		870 ↕ 800		500 ↕ 350
	530 ↕ 355		510 ↕ 410		320 ↕ 220		530 ↕ 490
	500 ↕ 350		600 ↕ 380		1090 ↕ 770		400 ↕ 320
	850 ↕ 800		340 ↕ 280		+75 ↕ -50		MAKS. mm ↕ MIN. mm
	10° ↕ 0°		10° ↕ 0°		10° ↕ 0°		MAKS. ↕ MIN.
	6° ↕ 0°		110° ↕ 75°		118° ↕ 108°		3° ↕ 0°
	11,0 ↕ 8,2		24,0 ↕ 14,0		170 ↕ 125		2,0 ↕ ---

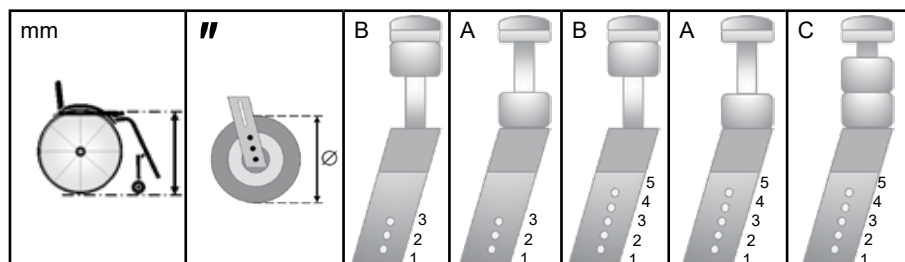











35	4"	B3				
36	4"	B2				
37,5	4"	B1	A3			
39	4"		A2			
40	4"		A1	B3		
41	4"			B2		
42,5	4"			B1	A3	
44	4"				A2	
45	4"				A1	
36	5"	B3				
37,5	5"	B2				
39	5"	B1	A3			
40	5"		A2			
41	5"		A1	B3		
42,5	5"			B2		
44	5"			B1	A3	
45	5"			A2	A2	
46,5	5"			A1	A1	
37,5	6"	B3				
39	6"	B2				
40	6"	B1	A3			
41	6"		A2			
42,5	6"		A1	B3		
44	6"			B2		
45	6"			B1	A3	
46,5	6"				A2	
48	6"				A1	
41	7"	B1	A3	B5		
42,5	7"		A2	B4		
44	7"		A1	B3	A5	
45	7"			B2	A4	
46,5	7"			B1	A3	
48	7"				A2	
49	7"				A1	
42,5	8"	B1	A3	B5		
44	8"		A2	B4		
45	8"		A1	B3	A5	
46,5	8"			B2	A4	
48	8"			B1	A3	C5
49	8"				A2	C4
50,5	8"				A1	C3
52	8"					C2
53	8"					C1

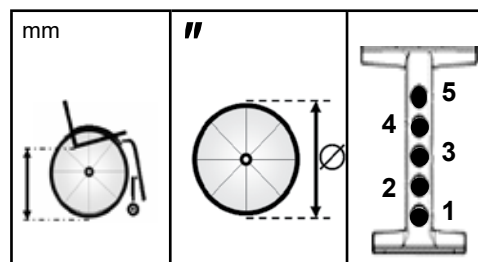

355 mm	20"	5
380 mm	20"	4
405 mm	20"	3
430 mm	20"	2
455 mm	20"	1
380 mm	22"	5
405 mm	22"	4
430 mm	22"	3
455 mm	22"	2
480 mm	22"	1
405 mm	24"	5
430 mm	24"	4
455 mm	24"	3
480 mm	24"	2
505 mm	24"	1
430 mm	26"	5
455 mm	26"	4
480 mm	26"	3
505 mm	26"	2
530 mm	26"	1



M5 = 5,0 Nm.
M6 = 7,0 Nm.
M8 = 10,0 Nm.

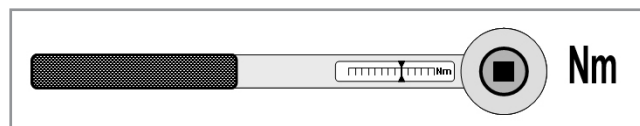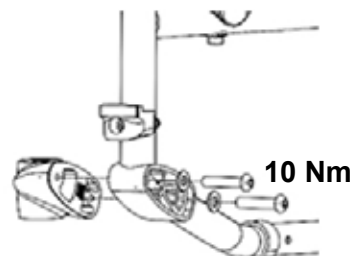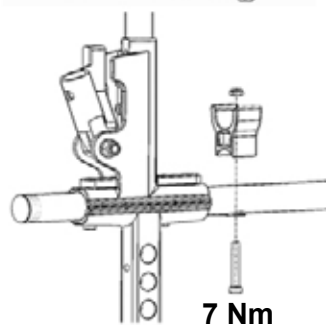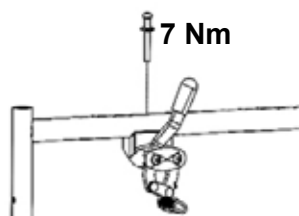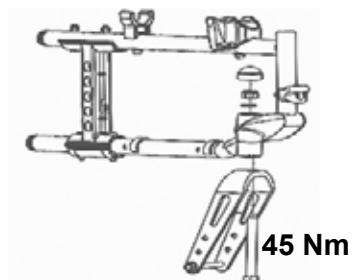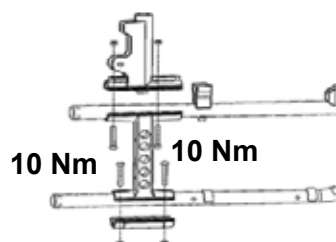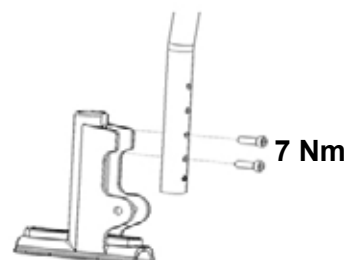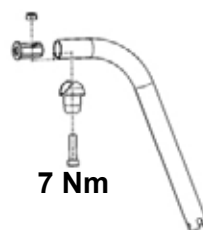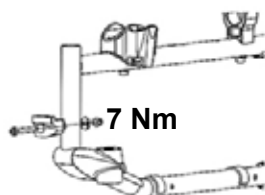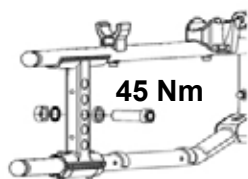

Forord

Kære kunde,

Det glæder os meget, at du har valgt et førsteklases produkt fra SUNRISE MEDICAL.

I denne brugervejledning kan du finde mange gode råd og idéer, som vil gøre din kørestol til en velkendt og pålidelig partner i dagligdagen.

Vi ser naturligvis helst, at du er tilfreds med vores produkter og services. Sunrise Medical arbejder konstant på at udvikle sine produkter, og der kan derfor forekomme ændringer i udvalget produkter hvad angår udformning, teknologi og udstyr. Som følge heraf kan der ikke rejses erstatningskrav på baggrund af oplysninger eller illustrationer i denne brugervejledning.

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til ISO 13485 og ISO 14001.



Som producent erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at dette produkt overholder bestemmelserne i Forordning om medicinsk udstyr (2017/745).

Desuden overholder de kravene til ydeevne i forbindelse med "Kollisionstest" som fastlagt i ISO 7176-19.

BEMÆRK:

Generelle brugerråd.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

B4Me særlige indretninger

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at brugeren læser og forstår alle oplysninger, der leveres sammen med B4Me produktet, før produktet anvendes første gang. Dette skal gøres for at sikre, at B4Me produktet fungerer efter producentens hensigt.

Sunrise Medical anbefaler ligeledes, at oplysningerne om produktet ikke bortskaffes, når de er blevet læst, men opbevares til fremtidig brug.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, er at finde hos www.Sunrisemedical.co.uk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, så som montering, kan findes på www.SunriseMedical.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af din kørestol, vedligeholdelse eller sikkerhed, bedes du kontakte din autoriserede SUNRISE MEDICAL-forhandler.

Såfremt der ikke findes en autoriseret forhandler i dit område, eller hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til os:

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Danmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.Sunrisemedical.dk

Skriv adresse og telefonnummer på din lokale autoriserede forhandler i feltet på denne side.

I tilfælde af funktionssvigt bør du kontakte din lokale servicerepræsentant og forsøge at give dem alle de relevante oplysninger om problemet, så de hurtigst muligt kan hjælpe dig.



VIGTIGT:
DU MÅ IKKE BRUGE KØRESTOLEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE VEJLEDNING.

Symbolforklaring



RISIKO!

Advarselsmeddelelser vedrørende mulig risiko for ulykker eller dødsfald.



ADVARSEL!

Advarselsmeddelelser vedrørende mulig risiko for ulykker.



VIGTIGT!

Advarselsmeddelelser vedrørende mulig teknisk skade.

BEMÆRK:

Oplysninger for betjening af produktet.

Indholdsfortegnelse	
Forord	7
Symbolforklaring	7
Indholdsfortegnelse	8
Anvendelse	8
Anvendelsesområde	8
Generelle oplysninger om sikkerhed og kørselsbegrænsninger	9
Garanti	11
Transportmuligheder	12
Håndtering	14
Indstillinger - Tippepedaler	14
Indstilling - Bremsen	14
Indstillinger - Fodplader	15
Indstillinger - Svinghjul	16
Indstillinger – Svinghjulsadapter	16
Indstillinger - Ryglæn	16
Indstillinger - Ryglæn	17
Indstillinger – Comfort-ryglæn	17
Indstilling – Kropsstøtte	17
Indstillinger – Sidestykker	18
Ekstraudstyr – Hemi-armlæn	19
Ekstraudstyr/Indstillinger – Antitipstøtter	19
Ekstraudstyr/Indstillinger – Hoftesele	19
Indstillinger – Sæde	20
Indstillinger – Ekstra sædedybde	20
Indstillinger – skubbehåndtag	20
Ekstraudstyr – Stokkeholder	21
Ekstraudstyr/Indstillinger - Terapibord	21
Ekstraudstyr/Indstillinger – Stabiliseringsstang	21
Ekstraudstyr/Indstillinger – Nakkestøtte	21
Indstillinger – Transithjul	21
Ekstraudstyr – Betjening med én hånd	21
Mærkeplade	22
Daglige eftersyn	23
Dæk og montering	23
Vedligeholdelse og rengøring	23
Fejlsøgning	24
Tilspændingsmomenter	24
Bortskaffelse/Genbrug af materialer	24
Tekniske data	24

Anvendelse

Letvægtskørestole er konstrueret til at anvendes af brugere, som ikke kan gå eller er bevægelseshæmmede, og er udelukkende beregnet til deres personlige brug, såvel som inden- som udendørs på en fast og plan overflade (selvpropellerende eller skubbet af en ledsager).

Den maksimale brugervægt (som omfatter brugeren og vægten af evt. tilbehør monteret på kørestolen) er angivet på det serienummertmærkat, som findes på tværrøret eller støttestangen under sædet.

Garantien gælder kun, såfremt produktet anvendes til de tilsigtede formål og under de forudsætninger, der angives i denne vejledning. Den forventede levetid for dette produkt er 5 år. Der må IKKE anvendes eller monteres nogen form for tredjepartskomponenter på kørestolen, medmindre sådanne er officielt godkendt af Sunrise Medical.

Anvendelsesområde

Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputation)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi, muskeldystrofi, hemiplegi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

Kontraindikationer

Kørestolen må ikke anvendes uden ledsager i tilfælde af:

- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- At begge arme mangler, hvis vedkommende ikke understøttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Nedsat siddefunktion

Inden man henviser til en bestemt kørestolsmodel, bør man tage hensyn til brugerens kropsstørrelse og vægt samt personens fysiske og psykiske helbred, alder, boligforhold og omgivelser.

BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel med kørestol kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og syns-evner. Brugeren skal være i stand til at vurdere følger af handlinger under betjening af kørestolen og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge heraf.

Se betjeningsvejledningen til kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.

Kørestolen er udviklet og konstrueret sådan, at den yder maksimal brugersikkerhed. Gældende internationale sikkerhedsstandarder er opfyldt.

Ikke desto mindre kan brugere komme til skade ved forkert brug af kørestolen. Af sikkerhedsmæssige grunde skal nedenstående regler overholdes.

Uautoriserede eller ukorrekte tilpasninger eller justeringer øger risikoen for ulykker. Som kørestolsbruger er du en del af den daglige trafik på veje og fortove, ligesom alle andre trafikanter. Derfor vil vi gerne minde dig om, at du dermed skal overholde alle gældende færdselsregler.

Vær forsigtig, når du anvender kørestolen første gang. Lær kørestolen at kende.

Følgende bør kontrolleres hver gang, inden kørestolen anvendes:


- Faste aksler eller quick-release aksler på baghjulene.
- Velcro på sæde og ryg
- Dæk, dæktryk og bremses.

Inden der foretages justeringer af kørestolen, er det vigtigt at læse det tilhørende afsnit i brugervejledningen.

Huller i vejen eller ujævne overflader kan forårsage, at kørestolen tipper, især ved kørsel op eller ned ad bakker. Læn kroppen forover, når du kører forlæns over et trin eller op ad en skråning.

⚠ RISIKO!

- Man må **ALDRIG** overskride den maksimale belastning på 125 kg, (XL=170 kg) for brugere, samt eventuelle ting, der transporteres på kørestolen. Hvis den maksimale belastning overskrides, kan dette medføre skader på kørestolen samt risiko for, at du falder ud, at kørestolen vælter, eller at du mister kontrollen, hvorved du selv og andre kan udsættes for alvorlige personskader.
- Når du færdes i mørke, bør du altid være iført lyst tøj eller tøj med reflekser, så du bedre kan ses. Sørg for, at reflekserne i hver side og bag på kørestolen er fuldt synlige.
- Det anbefales også, at du monterer en egentlig lygte på kørestolen.
- For at undgå, at kørestolen vælter, eller at der opstår andre farlige situationer, bør du altid øve dig i brugen af den nye kørestol på en jævn kørselsflade med godt udsyn.
- Undgå brug af fodpladerne ved ind- og udstigning af kørestolen.
- Fodpladerne bør slås op og svinges så langt ud til siden som muligt, inden du stiger ud eller ind. Sørg altid for at placere dig selv så tæt som muligt på det sted du ønsker at køre hen til.

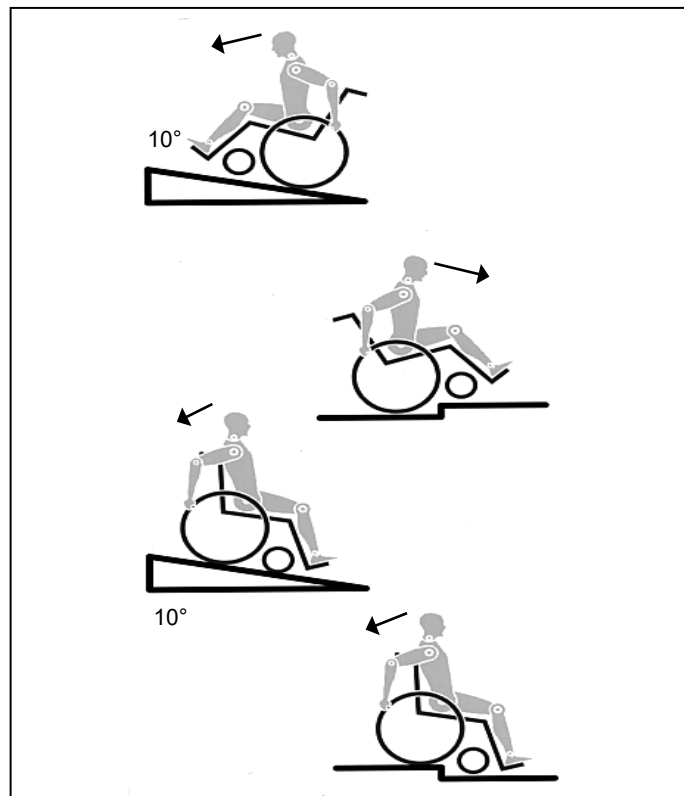

⚠ RISIKO!

- Kørestolen må kun anvendes på forsvarlig vis. F.eks. bør du altid undgå at køre ind mod eller over forhindringer (såsom trin og kantsten) uden at bremse imens, og du bør ikke køre hjulene hårdt ned i huller, mellemrum o.l.
- Bremses er ikke beregnet til at bremse en kørestol i bevægelse. De er kun monteret for at sikre, at kørestolen ikke pludselig begynder at køre af sig selv. Når du stopper på en ujævn overflade, bør du altid bruge bremses for at undgå, at den kører af sig selv. Slå altid begge bremses til, da kørestolen ellers kan tippe.
- Sørg for at afprøve hvad der sker, når ændringer af tyngdepunktet påvirker kørestolens balance, for eksempel på skrånende terræn eller ved kørsel over forhindringer. Dette bør altid udføres med hjælp fra en erfaren ledsager.
- I forbindelse med indstillinger i yderposition (f.eks. hvis baghjulene sidder i positionen længst fremme), hvor brugeren ikke har den rette kropsholdning, er der risiko for, at kørestolen vælter selv på jævne kørselsflader.
- Sørg for at læne overkroppen fremad ved kørsel op ad skrånende terræn og over trin.
- Sørg for at læne overkroppen tilbage ved kørsel ned ad skrånende terræn g ned ad trin. Kør under ingen omstændigheder skråt (diagonalt) op eller ned ad en skråning.
- Kørestolen må ikke anvendes på rulletrapper, da dette medfører risiko for alvorlige personskader, hvis kørestolen vælter.
- Kørestolen må ikke anvendes på skråninger > 10°. Den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel på skråninger er dynamisk, dvs. den afhænger af kørestolskonfigurationen, brugerens fysiske evner samt den måde, brugeren kører på. Eftersom brugerens fysiske evner og måde at køre på er forskellige fra person til person, kan den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel ikke angives her. Denne hældningsgrad skal derfor fastslås af brugeren selv med hjælp fra en ledsager for at undgå, at kørestolen tipper på skråninger. Det anbefales på det kraftigste, at uerfarne brugere får monteret antitipstøtter på kørestolen.
- Huller i vejen eller ujævne overflader kan forårsage, at kørestolen tipper, især ved kørsel op eller ned ad bakker.
- Kørestolen må ikke anvendes på mudrede eller isglatte kørselsflader.
- Kørestolen må ikke anvendes på steder, hvor der ikke er adgang for fodgængere.
- For at undgå skader på hænderne, bør man lade være med at gribe mellem egerne eller mellem baghjulet og bremsen, mens kørestolen er i bevægelse.
- Især ved brug af drivringe i letvægtsmetal er der risiko for, at man brænder fingrene ved hårde opbremsninger, eller når der bremses på lange skråninger.
- Kørsel på trapper bør kun ske med hjælp fra en ledsager. Der findes særligt udstyr til hjælp med f.eks. kørsel på ramper eller af og på kørestolslifte, og dette bør anvendes videst muligt. Hvis der ikke er egnet udstyr til rådighed, skal kørestolen tippes bagover og skubbes - men aldrig bæres - hen over forhindringen (dette kræver 2 ledsagere). Vi anbefaler at brugere, som vejer mere end 100 kg ikke køres på denne måde. Normalt bør enhver form for antitipstøtter, som er monteret på kørestolen, indstilles forud for forcering af trin o.l., så støtterne ikke kan komme i kontakt med forhindringen. I modsat fald risikerer man at komme alvorligt til skade, hvis kørestolen vælter. Efter forceringen skal tipsikringerne (anti-tip) indstilles, så de sidder i den rette position igen.
- Sørg for, at ledsageren kun holder i kørestolen ved hjælp af de dele, der sidder forsvarligt fast. Der må ikke bruges aftagelige dele (dvs. ikke på fodstøtterne eller sidestykkerne).
- Ved brug af kørestolslift skal det sikres, at eventuelle påmonterede tipsikringer (anti-tip) er placeret, så de ikke rager ud over platformen.
- Ved standsning på en ujævn overflade eller ved forflytning til og fra kørestolen (f.eks. ind og ud af en bil), skal bremses altid slås til for at sikre, at kørestolen holder helt stille.
- Ved transport i et køretøj udstyret specielt til handicapbrug skal passagererne for så vidt muligt altid bruge de fastmonterede sæder og forsvarlige sikkerhedsseler i køretøjet. Kun ved at følge denne metode kan det sikres, at passageren sikres bedst muligt i tilfælde af biluheld.

RISIKO!

- Afhængig af svinghjulenes diameter og indstilling samt kørestolens tyngdepunkt kan det forekomme, at svinghjulene begynder at slingre ved høje hastigheder. Dermed risikerer man, at svinghjulene blokeres, og at kørestolen tipper forover. Sørg derfor for, at svinghjulene er justeret korrekt (se kapitlet "Svinghjul").
- Det er desuden særlig vigtigt altid at bremse og køre med nedsat hastighed under kørsel på skråninger. Det anbefales desuden, at uerfarne brugere anvender tipsikringer (anti-tip).
- Tipsikringer (anti-tip) monteres for at forhindre, at kørestolen utilsigtet tipper bagover. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes i stedet for transithjul eller ved transport af en passager i en kørestol, hvor baghjulene er afmonteret.
- Når du rækker ud efter noget (hvad enten det befinder sig foran, ved siden af eller bag ved kørestolen), skal du altid sørge for, at du ikke læner dig for langt ud, idet en eventuel ændring af tyngdepunktet medfører risiko for, at kørestolen tipper eller vælter. Hvis der hænges ekstra vægt (f.eks. en rygsæk el. lign.) på kørestolens ryglænsrør, kan dette påvirke kørestolens stabilitet bagtil. Det gælder især, hvis kørestolen anvendes i kombination med ryglæn med tilbagelæning. Den ekstra vægt kan få kørestolen til at tippe bagover med risiko for personskade.
- Hvis brugerens ben er amputeret ved låret, skal der anvendes antitipstøtter.
- Se efter, om dæktrykket er korrekt, inden du begynder at køre. I baghjul bør det være mindst 3,5 bar (350 kPa). Det maksimale tryk er angivet på dækket. Knæledsbremserne fungerer kun, hvis der er tilstrækkelig højt dæktryk, og indstillingerne er udført korrekt (se kapitlet "Bremser").
- Hvis sædet og rygpolestringen er beskadiget, skal de udskiftes med det samme.
- Vær ekstra forsigtig i nærheden af åben ild, især glødende cigaretter. Sædet og rygpolestringen er fremstillet af materialer, som let kan antændes.
- Hvis kørestolen udsættes for direkte sollys/kolde temperaturer gennem længere tid, kan kørestolens dele (f.eks. stel, benstøtter, bremses og sidestykke) blive meget varme (>41°C) / meget varme (<0°).
- Hvis de er monterede, skal det sikres at quick-release akslerne på baghjulene er låst forsvarligt fast (låsens kuglelejer kan ses helt gennem akselbøsningen). Hvis knappen på hurtig-udløser-akslen ikke er trykket ind, kan baghjulet ikke tages af.

VIGTIGT!

- Knæledsbremsens funktion såvel som de generelle køreegenskaber afhænger af dæktrykket. Kørestolen føles betydeligt lettere og er nemmere at manøvrere, når baghjulene er pumpet ordentligt op, og der er samme dæktryk i begge hjul.
- Sørg for, at der er slidbanemønster nok på alle dækkene!
- Husk, at du til enhver tid skal overholde de gældende færdselsregler, når du færdes i offentlig trafik.
- Pas altid på når du håndterer eller justerer kørestolen!
- Justering, som kræver værktøjer, skal altid foretages af autoriserede forhandlere.
- Rengør kørestolen regelmæssigt for at undgå rust og salttætning.
- Kontroller nitterne, møtrikkerne og bolte for at sørge for at de er stramme, og at ingen af kørestolens dele bliver løse.
- Som for alle bevægelige dele, er der en naturlig risiko for at fingrene kommer i klemme. Du bedes håndtere den med forsigtighed.
- De kørestole, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, er muligvis ikke nøjagtigt magen til din egen model. Dog er alle vejledninger stadig fuldt ud relevante uanset de forskellige detaljer, der måtte være.
- Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver form for vægtangivelser, mål eller andre tekniske data indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør altså ikke tekniske specifikationer.

ADVARSEL!

KVÆLNINGSFARE – Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn.

Brugstid

Den forventede brugstid er 5 år, på betingelse af: At den udelukkende bruges til det tilsigtede formål alle service og vedligeholdelseskrav overholdes.

GARANTI**DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.**

Sunrise Medical* yder en garanti, som anført i garantibetingelserne for kørestole til sine kunder, der dækker følgende

Garantibetingelser

1. Hvis en del eller dele kørestolen har brug for reparation eller udskiftning på grund af en produktions- og/eller materialefejl inden for 24 måneder, eller for ramme og tværbeslag inden for 5 år fra levering til kunden, bliver den påvirkede del repareret eller udskiftet gratis. (Batterierne er dækket af garantien i en periode på 12 måneder, betinget af, at den korrekte vedligeholdelse for batteriet følges)
2. For at håndhæve garantien, skal du kontakte Sunrise Medical kundeservice med nøjagtige oplysninger om problemets beskaffenhed. Såfremt du anvender kørestolen udenfor din Sunrise Medical-servicerepræsentants område, skal reparationer og udskiftninger udføres af en anden part anvist af producenten. Kørestolen skal repareres af en Sunrise Medical autoriseret servicemedarbejder.
3. For dele, som er blevet repareret eller udskiftet inden for garantien, giver vi en garanti i overensstemmelse med disse garantivilkår for kørestolens resterende garantiperiode i henhold til punkt 1).
4. For originale reservedele, der er blevet monteret på kundens regning, er disse dækket af en garanti på 12 måneder, (efter monteringen), i overensstemmelse med disse garantibetingelser.
5. Forbrugsdele såsom puder, dæk, slanger og lignende dele er ikke dækket af garantien, undtagen i tilfælde af for tidlig slitage af den del, er et direkte resultat af en fabrikationsfejl.
6. Erstatningskrav fra denne garanti kan ikke forekomme, for reparationer eller udskiftninger på kørestolen nødvendiggjort som følge af, at
 - a) Kørestolen eller delen ikke er vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning.
 - b) Der er anvendt andet tilbehør end det, der er angivet som originalt tilbehør fra producentens side.
 - c) Kørestolen eller reservedelen er beskadiget som følge af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug.
 - d) Ændringer/modificeringer er blevet foretaget på kørestolen eller reservedele, der afviger fra producentens specifikationer.
 - e) Hvis der er foretaget reparationer, inden kundeservice er blevet informeret om problemerne.
7. Denne garanti er omfattet af loven i det land, hvor produktet blev købt fra Sunrise Medical"

* Betyder den Sunrise Medical forhandler hvorfra produktet blev købt.

RISIKO!

Hvis dette påbud ikke overholdes, er der risiko for alvorlige personskader eller livsfare!

Transport af kørestolen i et køretøj:

En kørestol, der er fastspændt i et køretøj, giver ikke samme sikkerhed og beskyttelse under transporten, som hvis man bruger køretøjets faste sæder og sikkerhedsseler. Det anbefales altid, at brugeren flyttes over i køretøjets faste sæder. Vi erkender imidlertid, at det ikke altid er praktisk muligt at flytte brugeren. Under sådanne omstændigheder, hvor det er nødvendigt, at brugeren transporteres siddende i kørestolen, skal følgende råd overholdes nøje:

1. Sørg for at få bekræftet, om køretøjet er monteret med det rette udstyr til transport af en passager i kørestol, og om ind- og udgangsforholdene passer til den type kørestol, du anvender. Køretøjets bund skal være kraftig nok til at bære den samlede vægt af brugeren, kørestolen og evt. tilbehør.
2. Der bør være plads nok rundt om kørestolen til, at man let kan komme til at fastgøre, stramme og løsne såvel bespændingssystemet som sikkerhedsselerne.
3. Med brugeren siddende i kørestolen skal den placeres i kørselsretningen og fastspændes ved hjælp af kørestolsbespænding samt et sikkerhedsseselsystem til brugeren (hvor både fastspændings- og sikkerhedsseselsystemet opfylder kravene i ISO 10542 eller SAE J2249) i henhold til producentens vejledning for brugen af pågældende systemer.
4. Kørestolen er ikke afprøvet til at placeres i andre retninger i et køretøj, og den må derfor under ingen omstændigheder transporteres i sidelæns retning (Fig. a).
5. Kørestolen skal spændes fast ved hjælp af et 4-punktssystem til kørestolsbespænding, som opfylder kravene i ISO 10542 eller SAE J2249. Disse systemer omfatter ikke-justerbare remme foran og justerbare remme bagpå, som normalt fastgøres ved hjælp af karabinhager eller S-kroge samt spænder med han- og hun-dele. Disse bespændingssystemer består normalt af 4 individuelle remme, som fastgøres til hvert hjørne af kørestolen.
6. Fastspændingsremmene bør monteres på selve kørestolsstellet (som illustreret på næste side) og må altså ikke føres rundt om påmonterede dele eller tilbehør såsom hjulenes eger, bremsene eller fodstøtterne.
7. Fastspændingsselerne bør monteres så nær ved en 45° vinkel som muligt og derefter spændes forsvarligt i henhold til producentens vejledning.

8. Der må ikke udføres ændringer eller udskiftninger af kørestolens fastspændingspunkter, konstruktionsmæssige komponenter eller steldele uden forudgående henvendelse til producenten. I modsat fald kan en Sunrise Medical-kørestol ikke længere betragtes som egnet til transport i et køretøj.
9. Kørestolsbrugeren skal fastspændes med såvel hofte- som skulderseler. Dermed nedsættes risikoen for, at vedkommende slår hovedet eller brystkassen mod andre dele af køretøjet samt risikoen for andre alvorlige skader på brugeren og andre personer i køretøjet. (Fig. B) Skulderselen skal monteres på B-søjlen i køretøjet - i modsat fald udsættes brugeren for øget risiko for alvorlige skader.
10. Hvis brugeren kan blive udsat for fare under transporten; ved at fjerne nogle valgmuligheder, som er beregnet for deres komfort og støtte for både hoved og krop, kan det muligvis blive nødvendigt at foretage en risikovurdering, f.eks. benstøttens hævefunktion, specielle sikkerhedsseler eller andre obligatoriske indretninger.
11. Udstyr beregnet til kropsstøtte (f.eks. hofteremme eller hofteseler) må ikke bruges til fastspænding i køretøjet og må især ikke anvendes som den eneste form for fastspænding af kørestolsbrugeren under transport i et køretøj, medmindre udstyret er godkendt og mærket i henhold til ISO 7176-19:2008 eller SAE J2249.
12. Kørestolsbrugers sikkerhed under transporten afhænger af, hvor omhyggeligt arbejdet udføres af den person, der er ansvarlig for at fastgøre kørestolsbespændingen, og de skal have modtaget relevante instruktioner og/eller oplæring i anvendelsen.
13. Man bør for så vidt muligt afmontere alt hjælpedstyr fra kørestolen og opbevare det på sikker afstand af kørestolen, f. eks.: stokke, krykker, løse puder og bordplader.
14. Benstøtter med hævefunktion eller leddelt indstilling bør ikke anvendes i hævet position under transport af kørestol og bruger, hvis der samtidig anvendes kørestolsbespænding samt et sikkerhedsseselsystem til fastspænding af kørestolsbrugeren.
15. Vinklet ryglæn med bør indstilles i opretstående position.
16. De manuelle bremsere skal slås til, så de griber forsvarligt fast i dækkene.
17. Sikkerhedsseler skal monteres på B-søjlen i køretøjet. Pas på, at selen ikke holdes væk fra kroppen på grund af kørestolskomponenter såsom armlæn eller hjul, der kan sidde i vejen for selen.

Fig. A


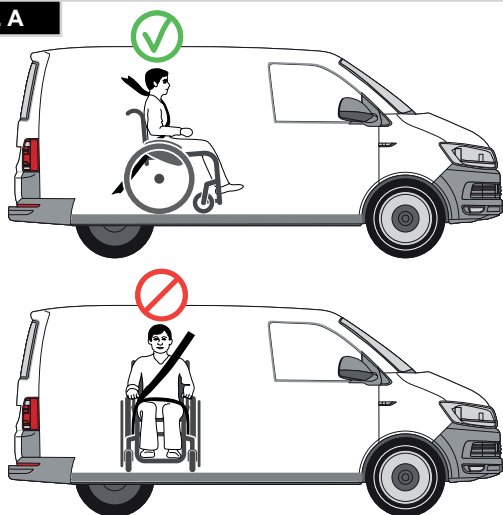


Fig. B

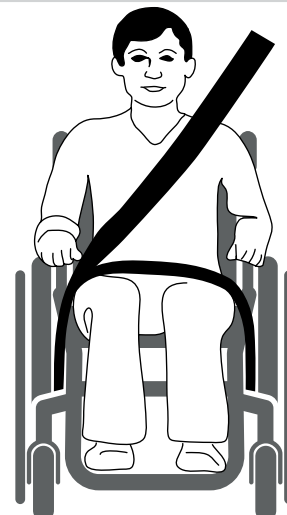

VEJLEDNING I FASTSPÆNDING AF KØRESTOLSBRUGEREN:

1. Hofteselen skal bæres lavt hen over den forreste del af bækkenet, så hoftelebens vinkel ligger inden for det optimale område på 30-75° i forhold til vandret. Ideelt bør man forsøge at opnå en mere skråtstillet (dvs. større) vinkel inden for det optimale område, dvs. tæt på, men aldrig større end 75°. (Fig. C)

2. Skuldreselen skal sidde korrekt ned over skulderen og skråt hen over brystkassen som vist på billedet (Fig. D og E). Sikkerhedsselerne skal strammes så meget, som det kan lade sig gøre uden at det føles ubehageligt for brugeren. Sikkerhedsselerne må ikke være snoet under brug. Skuldreselen skal sidde korrekt ned over skulderen og skråt hen over brystkassen som vist på billedet (Fig. D og E).

3. Kørestolens fastgøringspunkter findes på den inderste del af den forreste stel, lige over svinghjulet og den bageste sideramme. Selerne monteres rundt om sidestellene på det punkt, hvor de vandrette og lodrette stelramme krydser hinanden. (Se Fig. G - K)








4. Symbolet for fastgøring (Fig. F) på kørestolsstellet viser, hvor fastspændingsremmene skal placeres. Remmene skal strammes efter, når de forreste remme er monteret for at holde kørestolen på plads.

BRUGERVÆGT UNDER 22 KG

Når den bruger, der transporteres, er et barn, der vejer mindre end 22 kg, og det involverede køretøj har mindre end otte (8) siddende passagerer, anbefales det at de overføres til et UNCE Regulation 44-kompatibelt børnesikkerhedssystem (CRS). Denne type børnesikkerhedssystem giver passageren et mere effektivt sikkerhedssystem end det traditionelle 3-punkts sikkerhedssystem, og nogle CRS-systemer omfatter yderligere holdningsstøtte, der hjælper med at bevare barnets siddestilling. Forældre eller plejere kan i nogle tilfælde overveje muligheden for, at deres barn bliver i kørestolen under transporten på grund af barnets kropsholdningskontrol og kørestolens indstillinger. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at det professionelle sundhedspersonale og relevante kompetente personer udfører en risikovurdering.

FASTSPÆNDINGSREMMEPLACERING PÅ KØRESTOLEN:

1. Placering af de forreste og bageste fastgøringsmærkater (Fig. G-H-I).
2. Placering af kørestolens forreste (Fig. G) og bageste (Fig. H-I) fastgøringssele og fastgøringsmærkat.
3. Fastgøringsstopperne set fra siden, (Fig. J).

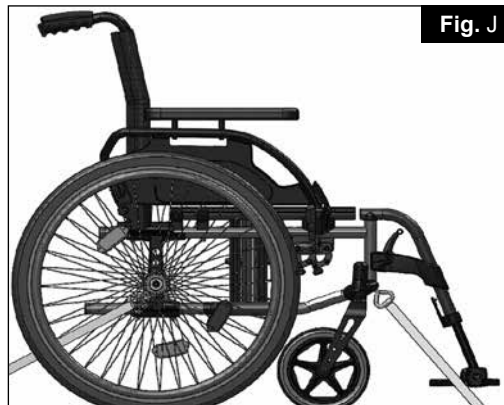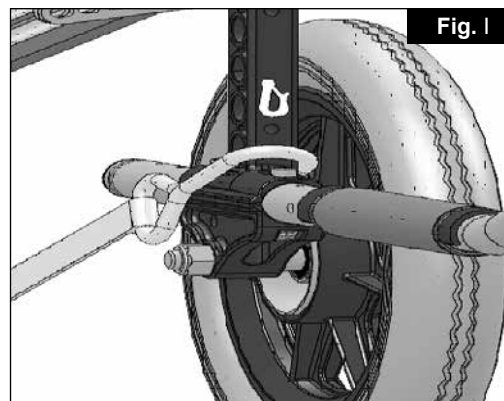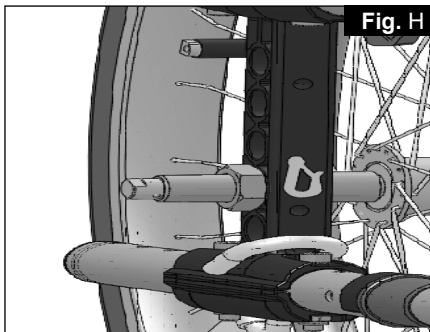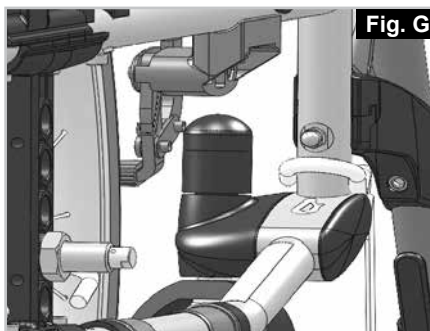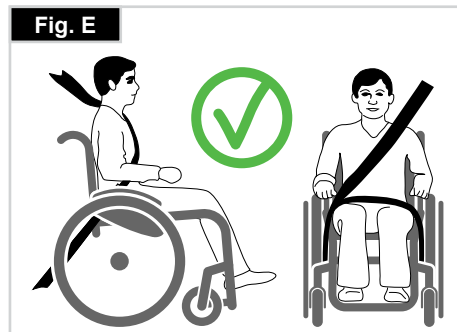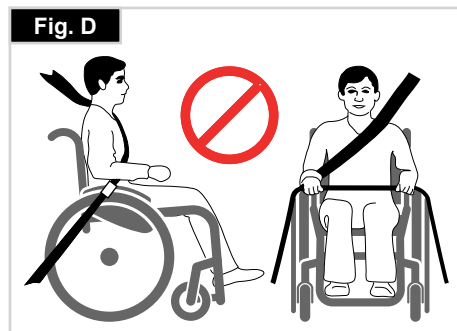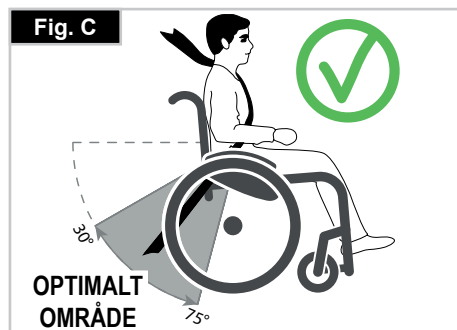

Håndtering

SÅDAN FOLDES KØRESTOLEN SAMMEN

Start med at fjerne sædehynden og den bageste sædeskal (gælder kun for komfort-modellen), og slå så fodpladen (i ét stykke) eller de individuelle fodstøtter op. Tag fat bagfra i den midterste del af sædepolstringen eller sæderørene, og træk dem opad. Tag fat bagfra i den midterste del af sædepolstringen eller sæderørene, og træk dem opad. Hvis kørestolen skal foldes sammen, så den fylder mindst muligt, f.eks. så den kan være i en bil, kan fodstøtterne også tages af (afhængigt af den enkelte model). I så fald skal man åbne låseklemmen udefra og dreje fodstøtten til side. Derefter trækkes fodstøtten ganske enkelt ud af holderen (Fig. 1).



TRANSPORT

Når kørestolen bæres i sammenfoldet stand, skal den altid løftes i tværstivermontagen og skubbehåndtagene.

SÅDAN FOLDES KØRESTOLEN UD

Tryk ned på sæderørene (se illustrationen.) Dermed er kørestolen foldet ud. Sæderørene skal nu klikkes på plads i plaatsadlen. Det kan gøres lettere ved, at man vipper kørestolen en anelse for at tage vægten af det ene baghjul. Pas på, at du ikke får fingrene i klemme i tværstivermontagen. Genmonter sædet og den bageste sædeskal. (Fig. 2).




⚠ VIGTIGT!

Sørg for, at den bageste sædeskal skubbes forsvarligt på plads med et klik.

SÅDAN SÆTTER DU DIG I KØRESTOLEN UDEN HJÆLP (FIG. 3)

- Kørestolen skal skubbes op imod en væg eller et fast stykke møbel;
- Bremsene skal være slået til;
- Fodpladen skal være låst fast;
- Brugeren kan nu sænke sig selv ned i kørestolen;
- Fodpladerne skal derefter skubbes ned, og fødderne skal hvile på dem foran hælstopperne.

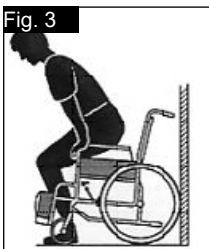

SÅDAN REJSER DU DIG FRA KØRESTOLEN UDEN HJÆLP (FIG. 4)

- Bremsene skal være slået til;
- De låste fodplader skal være låst fast;
- Med en hånd på hvert armlæn, skal personen bøje sig en smule fremad for at bringe kropsvægten foran sædet, og med begge fødder fast på jorden, og den ene fod et godt stykke tilbage, skub den ind i opretstående position.




⚠ ADVARSEL!

- Når du er i stående position, må du ikke stå på fodpladerne, da kørestolen ellers tipper forover. Det er lettere og mere forsvarligt at sætte dig i kørestolen, hvis du vender fodpladerne op og ud af vejen, eller hvis du tager dem af kørestolen.
- Du skal altid sætte hjulbremsene i indgreb når du stiger ind eller ud af kørestolen.

QUICK-RELEASE-AKSLER PÅ BAGHJULENE

Baghjulene er forsynet med quick-release-aksler. Hjulene kan derfor monteres eller afmonteres uden brug af værktøj. Hjulet afmonteres ganske enkelt ved et tryk på knappen til quick-release på akslen (1), hvorefter hjulet trækkes af akslen (Fig. 5).

Fig. 5

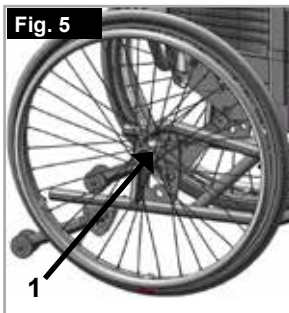

⚠ VIGTIGT!

Hurtig-udløser-knappen på akslen skal holdes nede, mens akslen skubbes på plads i stellet, for at montere baghjulene. Slip knappen for at låse hjulet på plads. Quick-release-knappen fastlåses igen i udgangspositionen.

Indstillinger - Tippepedaler

TIPPEPEDALER

Tippepedaler bruges af ledsagere til at en kørestol over en forhindring. Der skal simpelthen trædes på røret for at skubbe kørestolen, for eksempel over en kantsten eller et trin (Fig. 6).

Fig. 6



⚠ VIGTIGT!


Sunrise Medical anbefaler kraftigt at tippepedalen bruges ved transport af kørende modeller, og også på alle modeller hvor ledsageren er den fremherskende tilsigtede brug, da der kan opstå skade af ryglænsrør, hvis du trækker dem tilbage for at tippe kørestolen, ved kørsel over forhindringer.

Indstilling - Brems

BREMSE

Din kørestol er udstyret med to sæt brems. De aktiveres med direkte kontakt til dækkene. Bremsene aktiveres ved at skubbe begge bremsehåndtag fremad. Bremsene frigøres ved at skubbe bremsehåndtagene tilbage til udgangspositionen.

Fig. 7

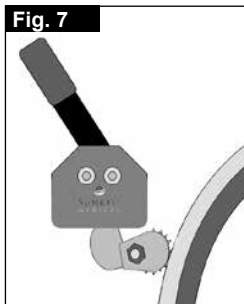


Følgende medfører nedsat bremsefunktion:

- Slidte dæk
- For lavt dæktryk
- Våde dæk
- Forkert indstilling af bremsene

Bremsene er ikke beregnet til at bremse en kørestol i bevægelse. Bremsene må derfor aldrig bruges til at bremse kørestolen, mens den er i bevægelse. Brug altid drivringene til at bremse kørestolen. Sørg for, at afstanden mellem bremsene og dækkene overholder de angivne mål. Afstanden justeres ved at løsne skruen, hvorefter den passende afstand kan indstilles. Spænd derefter skruen (Fig. 7-8).

Fig. 8

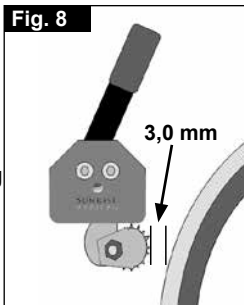

⚠ VIGTIGT!

Efter justering af baghjulene bør afstanden til bremsene kontrolleres og om nødvendigt justeres.

Forlænger til bremsehåndtaget

Forlænger til bremsehåndtaget kan afmonteres eller slås ned. Ved brug af forlænger kræves der kun et minimum af kræfter til betjening af bremsene (Fig. 9).

Fig. 9




VIGTIGT!

Hvis bremsen monteres for tæt på hjulet, bliver kørestolen sværere at betjene. Dette kan medføre, at forlængerens til bremsehåndtaget knækker!

Hvis brugeren overbelaster forlængerens ved at støtte sig til den, vil håndtaget knække! Vandsprøjt fra dækkene kan medføre nedsat bremseeffekt.

TROMLEBREMSE

Tromlebremser gør det muligt for en ledsager at bremse sikkert og bekvemt. De kan også aktiveres ved hjælp af en bremsearm (1) for at forhindre, at kørestolen kører af sig selv. Det skal kunne høres, når bremsehåndtaget klikker på plads. Tromlebremsernes funktion er ikke afhængig af lufttrykket i dækkene. (Fig. 10).

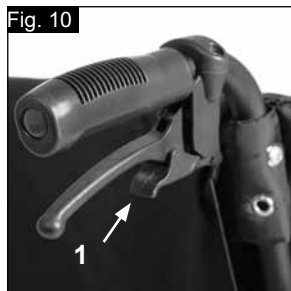

VIGTIGT!

- Tromlebremserne bør kun justeres af autoriserede forhandlere.
- De 2 tromlebremser skal altid betjenes samtidigt, for at kontrollere køreretningen!
- Skivebremser kan kun bruges som en dynamisk bremse til at stoppe kørestolen under kørslen.
- Hjullåsen skal altid sættes i indgreb, for at sikre kørestolen under et kort eller langt stop, eller for overførsel.

BETJENING MED ÉN HÅND

Din kørestol er udstyret med to sæt bremser, der kan betjenes på én gang fra enten højre eller venstre side. De aktiveres med direkte kontakt til dækkene. Bremserne slås til ved at skubbe bremsehåndtaget fremad, så det støder mod stopklodserne (Fig. 11). Bremserne frigøres ved at trække bremsehåndtaget tilbage til udgangspositionen.



Følgende medfører nedsat bremsefunktion:

- Slidte dæk
- For lavt dæktryk
- Våde dæk
- Forkert indstilling af bremserne.

Bremserne er ikke beregnet til at bremse en kørestol i bevægelse. Bremserne må derfor aldrig bruges til at bremse kørestolen, mens den er i bevægelse. Brug altid drivringene til at bremse kørestolen. Sørg for, at afstanden mellem bremserne og dækkene overholder de angivne mål. Afstanden justeres ved at løsne skruen, hvorefter den passende afstand kan indstilles. Spænd derefter skruen (se siden vedrørende tilspændingsmomenter) (Fig. 12).



VIGTIGT!

- Efter justering af baghjulene bør afstanden til bremserne kontrolleres og om nødvendigt justeres.
- Hvis bremsen monteres for tæt på hjulet, bliver kørestolen sværere at betjene. Dette kan medføre, at forlængerens til bremsehåndtaget knækker! Hvis brugeren overbelaster forlængerens ved at støtte sig til den, vil håndtaget knække! Vandsprøjt fra dækkene kan medføre nedsat bremseeffekt.


Indstillinger - Fodplader

FODPLADER:

Fodpladerne kan løftes ud for at gøre det lettere at stige ud/sætte sig ind i stolen.

Underbenslængde:

For brugere med lange ben kan benstøtten sænkes til en passende højde ved hjælp af skruerne (1). Skruerne løsnes, og rørene rykkes, til benstøtten har den ønskede højde, hvorefter skruerne spændes igen (se siden vedrørende tilspændingsmomenter). Der skal altid være mindst 2,5 cm fri luft mellem fodpladerne og kørselsfladen, (Fig. 13).

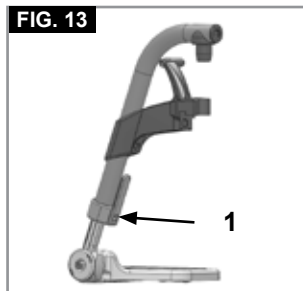


Vinkeljusterbar fodplade

Dette kan justeres for at ændre vinklen til overfladen. Skruen løsnes, og fodpladen trækkes indad, indstilles i den ønskede vinkel og skubbes på plads. Når justeringen er foretaget, spændes skruen forsvarligt fast igen. Efter justeringen, skal det sikres at alle skruer er strammet korrekt (se siden vedr. tilspændingsmoment). Sørg for, at der fortsat er tilstrækkelig afstand til gulvet (minimum 2,5 cm) (Fig. 14).



FODSTØTTERNE OG LÅSEMEKANISMEN

Benstøtterne kan svinges indad, så de sidder gemt under sædepolstringen, eller udad. Ved montering af benstøtterne skal man sørge for, at fodstøtterne enten vender indad eller udad. Derefter drejes benstøtten indad, til den låses på plads. Benstøtten afmonteres ved, at man trækker i håndtaget (1) og svinger fodpladen indad eller udad, hvorefter benstøtten løftes af. Sørg for, at benstøtten låses forsvarligt på plads ved montering, (Fig. 15).

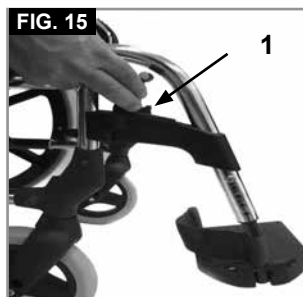

VIGTIGT!

- Benstøtterne må ikke bruges til at løfte eller bære kørestolen.
- Undgå brug af fodpladerne ved ind- og udstigning af kørestolen. Disse skal løftes op på forhånd, eller fodstøtten skal svinges så langt som muligt udad.

INDSTILLING FOR BENSTØTTENS HÆVEFUNKTION

(Fig. 16-18)
For at fjerne den, træk stangen (1), sving fodpladen udad og løft derefter benstøtten ud.

HØJDEJUSTERING:




Underbenslængden kan justeres uendeligt ved at udløse skruen (2). Juster den passende højde og spænd skruen igen.

VIGTIGT!

Afstanden mellem fodpladen og overfladen skal mindst være 40 mm.

VINKELJUSTERING:

Tryk stangen (3) nedad med en hånd mens du støtter benstøtten med den anden hånd for at lette belastningen. Når du har opnået en passende vinkel, slip stangen, hvorefter benstøtten bliver låst fast i en af de forindstillede positioner.

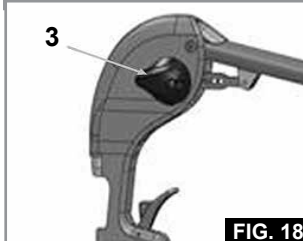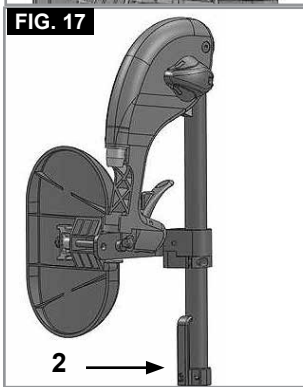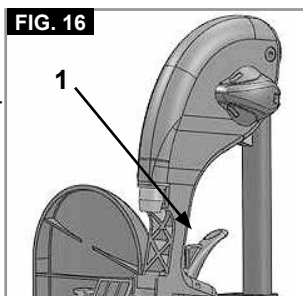

JUSTERING AF LÆGPUDEN


(Fig. 19).

Lægspuden kan justeres som følger:

Højde: Åbn bolt (4) og flyt spændestykket til den ønskede position. Hvis spændestykket drejes, kan vinklen også justeres.

Dybde: Åbn bolt (5) og flyt lægpuden til den ønskede position.

Bredde: Åbn bolt (5) og placer afstandsstykkerne (6) bagved puden for at få den ønskede position.

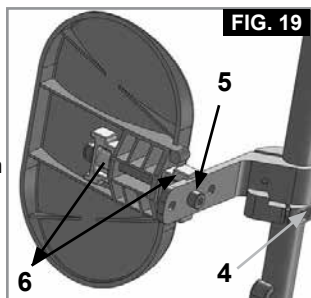
**FIG. 19****⚠ ADVARSEL!**

- Hold hænderne væk fra den justerbare mekanisme mellem stellet og fodstøttens bevægelige dele, mens du løfter eller sænker fodstøtten.
- Sørg altid for at fastspændingerne er forsvarligt fastspændte.
- Fodstøtterne må ikke bruges til at løfte eller bære kørestolen.
- Pas på fingrene! Når fodstøtten flyttes op eller ned, må du ikke sætte dine fingre i justeringsmekanismen mellem fodstøttens bevægende dele.

STØTTE FOR BENAMPUTEREDE

(Fig. 20).

Støtten for benamputerede kan justeres i alle retninger efter behov.

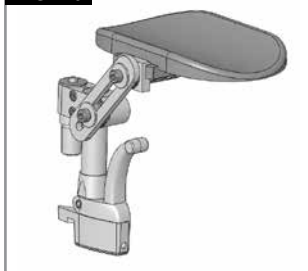FIG. 20**Indstillinger - Svinghjul****SVINGHJUL, SVINGHJULSOPHÆNG, FORGAFLER**

Det kan ske, at kørestolen trækker en anelse mod højre eller venstre, eller at svinghjulene slingrer. Dette kan skyldes følgende:


- Hjulenes forlæns og/eller baglæns bevægelse er ikke indstillet korrekt.
- Svinghjulsvinklen er ikke indstillet korrekt.
- Svinghjulene og/eller baghjulene har forkert dæktryk; hjulene drejer ikke, som de skal.

Kørestolen kan ikke køre ligeud, hvis svinghjulene ikke er justeret korrekt. Svinghjulene bør altid justeres af en autoriseret forhandler. Bremsene skal kontrolleres hver gang baghjulets position er blevet ændret.

Sædehøjden afgøres af svinghjulets og baghjulets position. Sædehøjden kan justeres ved at ændre baghjulets og svinghjulets position ved hjælp af afstandsstykkerne, (Fig. 21).

Indstillinger – Svinghjulsadapter**⚠ VIGTIGT!**


Når sædehøjden er justeret, skal alle skruerne strammes igen, og bremsen skal justeres igen.

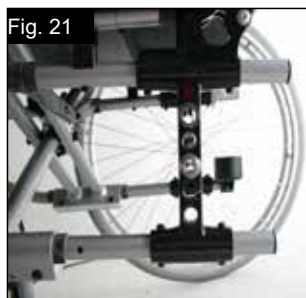**Fig. 21****BEMÆRK:**

Svinghjulsakslens vinkel kan justeres ved, at man ændrer på svinghjulets/baghjulets position. Vinklen bør altid være ca. 90°.

JUSTERING AF SVINGHJULSAKSLENS VINKEL:

Skruerne (1) løsnes. Svinghjulsadapteren trækkes udad og indstilles i en 90°-vinkel, hvorefter skruerne spændes igen (Fig. 22-24).


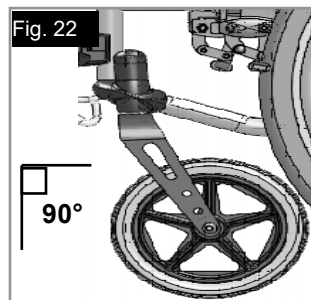
**Fig. 22****⚠ VIGTIGT!**

Svinghjulsakslens vinkel skal være indstillet ens i begge sider af kørestolen (kontroller dette ved at markere indstillingerne).

VANDRET AKSELPOSITION

Akselpladen kan justeres, så den sidder længere fremme for at give større manøvrerdygtighed eller længere bagud for at give øget stabilitet (Fig. 22).

Jo større hjulafstanden er, desto større er du sikker på at din kørestol ikke tipper bagover.

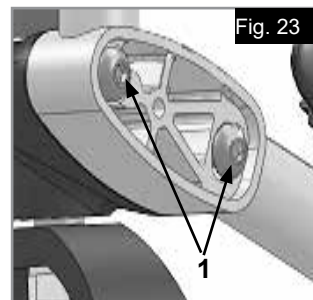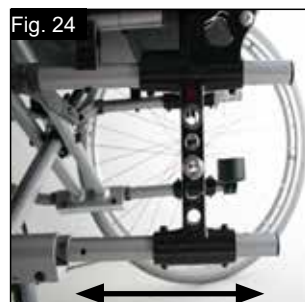**Fig. 23****Fig. 24****0°/3°-CAMBRING:**

Ved at dreje akseladapteren 180° kan man indstille cambringen til 3° eller 0°.

BEMÆRK:


Hvis man udfører denne justering, skal hjulafstanden justeres tilsvarende derefter.

⚠ VIGTIGT!

Bremsene skal justeres, så de passer til den nye position!

Indstillinger - Ryglæn**Vinkeljusterbare ryglæn**

Ryglænsenhøjden kan justeres fra 35-50 cm (afhængigt af ryglænsindstillingen). Boltene (1) + (2) løsnes, og ryglænsrøret skubbes på plads i den ønskede position. Derefter spændes boltene igen (Fig. 25).

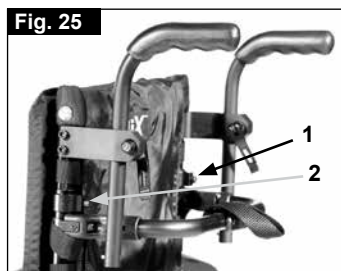
**Fig. 25**

Indstillinger - Ryglæn

VINKELJUSTERBART RYGLÆN

Ryglænsvinklen kan indstilles i 6 forskellige positioner (-5° fremad samt 0°, 5°, 10°, 15° og 20° bagud). Justeringen udføres ved, at skruen (1) fjernes, ryglænet indstilles i den ønskede vinkel, og skruen spændes igen (Fig. 26).

Ved at udløse spændehåndtaget (1) kan man indstille ryglæns højden trinløst fra 35–50 cm.

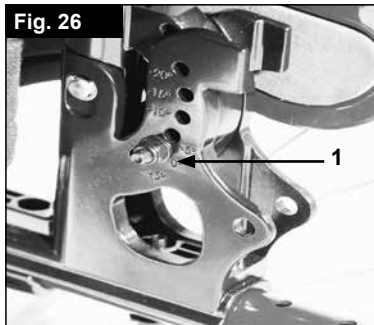

NEDFÆLDELIGT RYGLÆN

Sådan slås ryglænet op: For at slå ryglænet op skal du skubbe håndtagene opad og fremad, indtil de glider på plads med et klik.

⚠ ADVARSEL!

Pas på, at du ikke får fingrene eller dele af kørestolen i klemme i foldemekanismen, når du slår ryglænet op, da dette medfører risiko for personskader eller skader på kørestolen.

Sådan slås ryglænet ned: Ryglænet kan slås ned, så kørestolen bliver lettere at transportere.

⚠ VIGTIGT!

Ryglænet må ikke slås ned, mens det er under nogen form for belastning, da der dermed er risiko for, at håndtaget knækker.

For at slå ryglænet ned skal du skubbe de to små håndtag (Fig. 27 + 28) ned på hver side af ryglænet.



RYGLÆNSVINKEL VED TILBAGELÆNING (7° - 30°)

Du kan udløse ryglænet og derefter placere det i den ønskede position ved at trække i begge greb (1) samtidig.

Når du giver slip på de to greb (1), låses ryglænet automatisk på plads (Fig. 29).

⚠ ADVARSEL!

Ryglænet med tilbagelæning kan kun bruges i kombination med en forlængelse af hjulafstanden.

⚠ ADVARSEL!

Det anbefales, at der også bruges antitipstøtter (maks. 3-5 cm afstand fra kørselsfladen), når ryglænet med tilbagelæning anvendes.

⚠ ADVARSEL!

Det anbefales, at der også bruges stabiliseringsstang, når ryglænet med vinkling anvendes.




JUSTERBAR RYG POLSTRING

Rygpolstringen kan gøres mere eller mindre stram ved at justere flere remme ad gangen (Fig. 30).

⚠ VIGTIGT!

Undgå at stramme rygpolstringsremmene for hårdt, da dette kan medføre, at kørestolen ikke kan foldes ordentligt sammen.

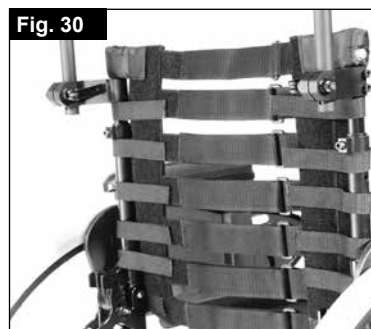

Indstillinger – Comfort-ryglæn

COMFORT-RYGLÆN

Comfort-ryglænet støtter kroppen i oprejst stilling og gør det derfor muligt at sidde bekvemt i kørestolen gennem længere tid. Man kan justere ryglænets højde, dybde og vinkel.

Ryglænet afmonteres ved, at hvert udløsergreb (1) skubbes fremad for at åbne det. Når begge greb er skubbet fremad, kan ryglænet nemt løftes lige op og tages af.

Ved genmontering af ryglænet skal stifterne bringes på linje med beslagene og skubbes på plads. Stifterne sidder korrekt, når de låses fast med et klik.

Når de to låsestifter fastgøres, hindrer de ryglænet i at løsne sig fra stolen. De låses, når man sætter dem ind i monteringsbeslag. Hvis man ønsker at bruge quick release-udløseren i stedet, skal man ganske enkelt fjerne stifterne. (Fig. 31-32).



Indstilling – Kropsstøtte

KROPSSTØTTE

Kropsstøttens vinkel, dybde og højde er alle justerbare. Støtten er svingbar og drejes til side ved, at man løfter den opad, (Fig. 33).

DYBDEJUSTERING:

Fjern de 2 skruer, og indstil kropsstøtten i den nye position. Derefter spændes skruerne igen.

VINKELJUSTERING:

Skruen løsnes, kropsstøtten indstilles i den ønskede vinkel, og skruen spændes igen.

HØJDEJUSTERING:


Tag monteringskruerne ud af beslaget, og indstil beslaget i den ønskede position. Derefter spændes skruerne igen.



Indstillinger – Sidestykker

SIDESTYKKE, KAN SLÅS OP, AFTAGELIGT MED KORTE ELLER LANGE ARMLÆN

Sidestykkerne forreste kanter er afrundet, så du lettere kan køre helt hen til et bord. For at vippe armlænet op, skub håndtaget (1) indtil sidestykket bliver udløst (Fig. 34-35).

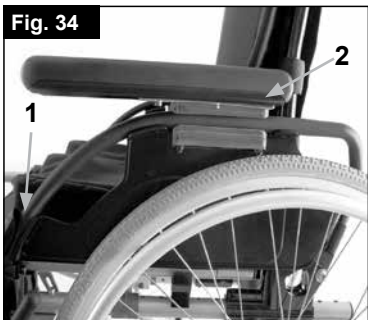

Armlænets højde (2) kan justeres ved at montere afstandsbeslaget i forskellige positioner. Det gør man ved at løsne skruerne og rykke afstandsbeslaget, hvorefter skruerne spændes igen. Man kan justere armlænets længde ved at løsne skruerne (3) og rykke armlænet, til det sidder som ønsket, hvorefter skruerne spændes igen (Fig. 32).

⚠ ADVARSEL!

Hverken sidestykkerne eller armlænene må bruges til at løfte eller bære kørestolen i.

⚠ ADVARSEL!

Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du justerer armlænets højde.

SIDESTYKKE, KAN SLÅS OP, AFTAGELIGT MED KORTE ELLER LANGE ARMLÆN, HØJDEJUSTERBART

Armlænets højde kan justeres på følgende måde:

Skub håndtaget (1) nedad, og ryk armlænet, til det har den ønskede højde. Giv slip på håndtaget, og tryk ned på armlænet, indtil det glider på plads med et klik. Kontroller altid om sidestykkerne sidder korrekt.

For at løfte armlænet op, skub håndtaget (2) således at sideskærmen udløses.

Man kan justere armlænets længde ved at løsne skruerne (3) og rykke armlænet, til det sidder som ønsket, hvorefter skruerne spændes igen. (Fig. 36).



⚠ RISIKO!

Hverken sidestykkerne eller armlænene må bruges til at løfte eller bære kørestolen i.

⚠ VIGTIGT!

Når der anvendes 24"-baghjul, skal armlænsputen rykkes ét trin op.


INDVENDIG PUDE

(1)

Bruges til at mindske sædebredden med 4 cm.

BREDT ARMLÆN, COMFORT-MODEL (2)


Giver mere bekvem placering af armene. (Fig. 37).

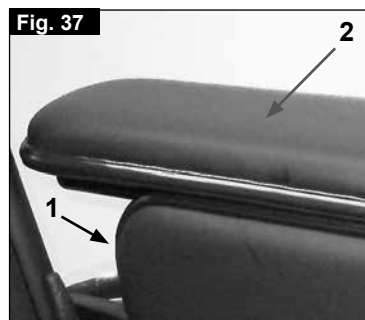

HØJDEJUSTERBARE ARMLÆN

Højden justeres ved, at man trækker i håndtaget (1) og rykker armlænet, til det har den ønskede højde. Sørg altid for, at håndtaget (1) låses fast i udgangspositionen igen efter udført justering. Armlænet kan også tages helt af på denne måde.


Hvis sidestykket skal tages helt af, skal håndtaget (2) skubbes nedad. Ved montering af sidestykket skal man håndtaget (2) ligeledes skubbes nedad. **Sørg altid for, at sidestykket låses forsvarligt på plads i holderen.** (Fig. 38)

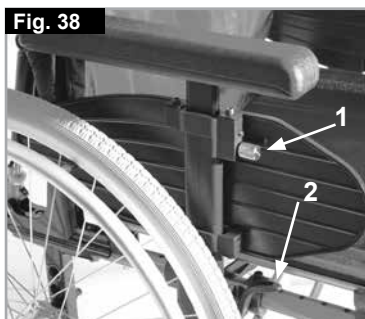

HØJDEJUSTERBARE ARMLÆN (QUICKIE 2)


Armlænet låses på plads i det rør, der fungerer som holder (1). Armlænet er nemt at tage helt af, idet man udløser låsemekanismen og trækker armlænet opad. Ved justering af armlænet skal håndtaget skubbes fremad, hvorefter armlænschynden (2) rykkes på plads i den ønskede højde. Derefter skubbes håndtaget tilbage til udgangspositionen.

Tryk ned på armlænschynden, indtil armlænet glider på plads med et klik (Fig. 39)

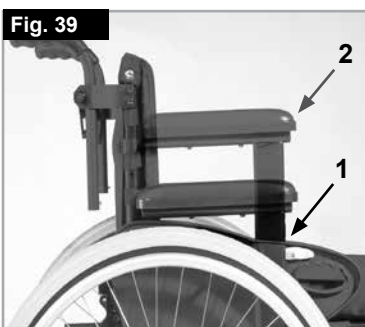

SIDEPLADER OG SIKKERHEDSSTANG

Sidepladerne og sikkerhedsstangen glider på plads i holderen med et klik. De er nemme at tage af igen, idet de blot skal trækkes opad. Begge sideplader kan justeres vandret ved, at boltene i holderen (1) løsnes, sidepladernes position justeres, og boltene spændes igen. (Fig. 40).

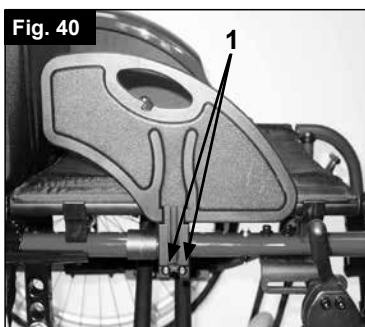

SIDESTYKKER - TØJSKÅNER

Tøjskåneren forhindrer, at dit tøj snarves til af vandstænk fra hjulene. Ved at rykke sidestykket kan man indstille tøjskånerens position i forhold til baghjulet. Det gør man ved at fjerne skruerne (1 og 2). Når tøjskåneren sidder som ønsket, spændes skruerne fast igen (se siden vedrørende spændingsmomenter). (Fig. 41).



Ekstraudstyr – Hemi-armlæn

HEMI-ARMLÆN

Hemi-armlænen kan justeres i både længde og vinkel. Man kan justere længden ved at rykke armlænet efter at have løsnet de 2 drejeskruer (1). Vinklen justeres ved, at knappen 2 holdes nede, så armlænet kan drejes. Når armlænet har den ønskede position, slipper man knappen igen. (Fig. 42).

Fig. 42



Ekstraudstyr/Indstillinger – Antitipstøtter

ANTITIPSTØTTER

Antitipstøtterne giver yderligere sikkerhed for uerfarne brugere, når de er ved at lære, hvordan kørestolen betjenes. Støtterne forhindrer, at kørestolen tipper bagud og vælter. Antitip støtten skal sættes ind i stellets rør, indtil den første af de to fjederknapper går ind i stelrørets første hul, (Fig. 40).

⚠ ADVARSEL!

Hvis anti-tipsikringen monteres forkert, forøges risikoen for at stolen vipper bagud. Du skal svinge antitipstøtterne op eller ned af store forhindringer (f.eks. en kantsten), for at hindre dem fra at røre underlaget, og derefter dreje dem tilbage til den normale position.

⚠ VIGTIGT!

Du må ikke indsætte begge anti-tip sikringer knapper ind i stelrøret, da denne kan skade anti-tip sikringer og forårsage tab af ydeevne.

Ved at trykke på den anden eksponerede udløserknap, kan sikkerhedshjulene sættes opad eller fjernes. Der skal altid være 3-5 cm afstand mellem antitipstøtten og kørselsfladen. Støtthjulene skal altid drejes opad ved kørsel op og ned ad større forhindringer (f.eks. en kantsten) for at undgå, at de støder mod kørselsfladen. Derefter drejes støtthjulene på plads i den normale position igen (Fig. 43).

Fig. 43



⚠ ADVARSEL!

Hvis anti-tip sikringer indstilles forkert, vil det forøge risikoen for at brugeren vælter bagud.

Ekstraudstyr/Indstillinger – Hoftesele

⚠ ADVARSEL!

Inden du bruger kørestolen, skal du sikre dig, at hofteselen er forsvarligt fastspændt og justeret korrekt.

Hofteselen monteres på kørestolen som vist på billedet. Selen består af to dele. Hver del monteres ved hjælp af den eksisterende låsebolt til sædet. Bolten føres gennem selens øsen. Derefter føres selen ned under sidestykkets bageste del (Fig. 44) Sørg for at justere selens placering, så spændet ligger midt på sædet (Fig. 45).

Fig. 44




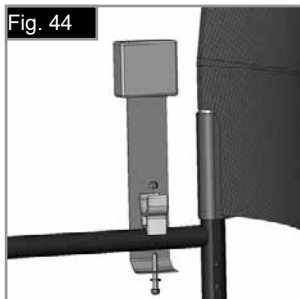


Fig. 45

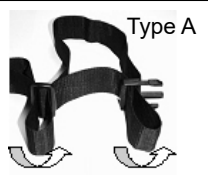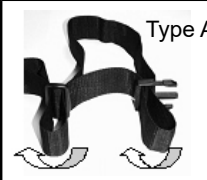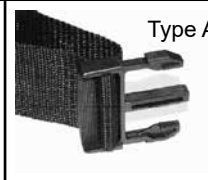

Hofteselen justeres efter brugerens behov på følgende måde:

Sådan gøres selen længere	Sådan gøres selen kortere	✓
		
		
Den løse del af selen føres gennem skydespænderne og spændets han-del, så selen bliver længere.	Den løse del af selen føres tilbage igen gennem spændets han-del og skydespænderne.	Pas på, at selen ikke er snoet ved spændets han-del.

Når hofteselen fastgøres, skal afstanden mellem hofteselen og brugeren; når den er indstillet korrekt, skal det være muligt at indsætte mere end den flade hånd mellem hofteselen og brugeren, (Fig. 46).

Generelt set skal hofteselen fastgøres således at stropperne sidder i en vinkel på omkring 45°, og når den er justeret korrekt, kan brugeren ikke glide ud af sædet. (Fig. 47).

Fig. 46



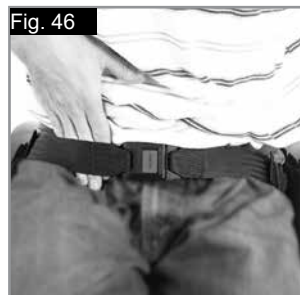


Fig. 47

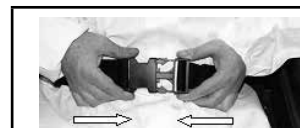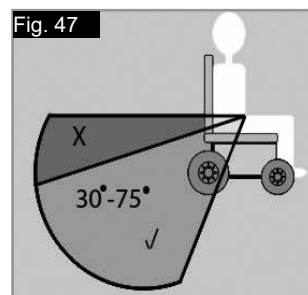

Sådan lukkes spændet:

Han-delen sættes ind i hun-delen og skubbes helt på plads.

Sådan løsnes selen:

Tryk de eksponerede sider af spændets han-del ind mod midten/tryk på udløserknappen på spændets hun-del, og træk forsigtigt spændets to dele fra hinanden imens.

⚠ RISIKO!

- Hofteselen alene yder ikke tilstrækkelig beskyttelse ved transport i et køretøj, hvis brugeren transporteres siddende i kørestolen, sørg altid for at bruge de hofte- og skulderseler, der er monteret i køretøjet.
- Inden brug anbefales det, at man kontrollerer hofteselen for at sikre, at den justeret korrekt, at der ikke findes forhindringer eller slitage, og at spændet lukkes forsvarligt.
- Hvis man ikke sikrer sig, at hofteselen er forsvarligt monteret og justeret inden brug, kan brugeren pådrage sig alvorlige kvæstelser. En sele, der sidder for løst, kan bl.a. medføre kvælningssfare, hvis brugeren glider ned i stolen.

VEDLIGEHOJDELSE:

Hofteselen og fastspændingsanordningerne skal efterses grundigt med jævne mellemrum for tegn på slid eller skader. Udskift i givet fald de slide eller beskadigede dele. Hofteselen rengøres med varmt sæbevand og lufttørres inden næste brug.

⚠ RISIKO!

Hofteselen skal justeres så den passer til slutbrugeren, som beskrevet ovenfor. Sunrise Medical anbefaler også at remmens længde og pasform kontrolleres med jævne mellemrum, for at risikoen for at slutbrugeren ved et uheld genjusterer remmen til en overdreven længde. Hvis du er i tvivl om, hvordan hofteselen bruges og betjenes, skal du rådføre dig med din læge eller terapeut, kørestolsforhandleren, en plejer eller ledsager.


Indstillinger – Ekstra sædedybde

SÆDEDYBDE

Hvis man fjerner klemmerne (1), kan tværstivmontagen (2) skubbes hen ad stellet, hvorved sædedybden ændres (afhængigt af, hvordan ryglænets stelrør er placeret).

Sørg for, at klemmerne (1) glider på plads igen med et klik i de forberede huller i stellet.

For at gøre stellet så kompakt som muligt kan sædedybden også justeres trinvist ved hjælp af ryglænets stelrør (41 – 46 cm med 2,5 cm ad gangen). Justeringen udføres ved at fjerne skruerne (1 og 2) på beslaget til ryglænets stelrør. Tag derefter hjulene og armlænene af, og sørg for, at tværstiveren sidder i den ønskede position (den skubbes på plads som beskrevet ovenfor). Ryk ryglænets stelrør, til de sidder som ønsket, og spænd så alle skruerne igen. Ryk det rør, der holder armlænene, til det sidder som ønsket, (Fig. 50).

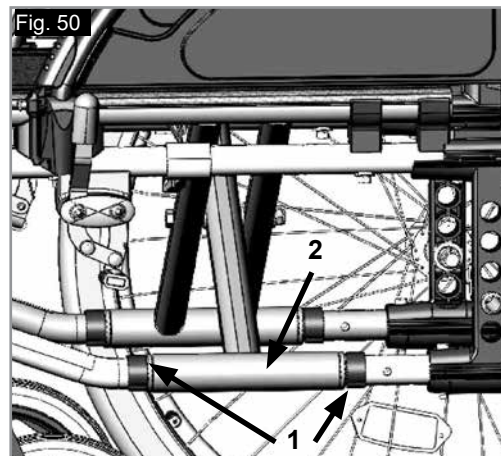

Indstillinger – Sæde

KOMFORT-SÆDE

Komfort-sædet gør det muligt at sidde i længere tid på grund af den indbyggede træplade og sædepudernes anatomiske facon, (Fig. 49).

⚠ ADVARSEL!

Sørg for, at beslagene låses på plads i tværstiverrørene, når sædet monteres.



Indstillinger – skubbehåndtag

HØJDEJUSTERBARE SKUBBEHÅNDTAG

Skubbehåndtagene er fastgjort ved hjælp af stifter, så de ikke uforvarende kan løsne sig. Ved at løsne udløserarmen kan du justere skubbehåndtagenes højde, så de passer til dig. Hver gang, der er foretaget justeringer af skubbehåndtagenes højde, skal du trække udløserarmen på plads igen, til den sidder helt stramt, (Fig. 51).



⚠ ADVARSEL!

Hvis udløserarmen ikke sidder forsvarligt fastspændt, kan du komme til skade, når kørestolen løftes over forhindringer.

Ekstraudstyr – Stokkeholder

STOKKE-/KRYKKEHOLDER

Med denne holder kan albuestokke transporteres direkte på kørestolen. Holderen er forsynet med en velcrostrop til fastgørelse af krykker eller andre hjælpemidler, (Fig. 52).



ADVARSEL!

Stokkene, krykkerne eller andre hjælpemidler må ikke fjernes, når du kører i kørestolen.

Fig. 52



Ekstraudstyr/Indstillinger - Terapibord

TERAPIBORD

Bakken giver en flad overflade for de fleste aktiviteter. Inden en bakke bruges, skal den først indstilles efter sædets bredde af en autoriseret forhandler. Brugeren skal sidde i kørestolen, når indstillingen foretages, (Fig. 53).

Fig. 53




Ekstraudstyr/Indstillinger – Stabiliseringsstang

SVINGBAR STABILISERINGSSTANG

Denne stang bruges til at gøre ryglænet mere stabilt. Hvis kørestolen skal foldes sammen, mens støttestangen er monteret, skal udløsergrebet (1) først skubbes indad, og stabiliseringsstangen skal slås ned.

Når kørestolen foldes ud, skal man sikre sig, at stabiliseringsstangen låses forsvarligt på plads, (Fig. 54).


Fig. 54

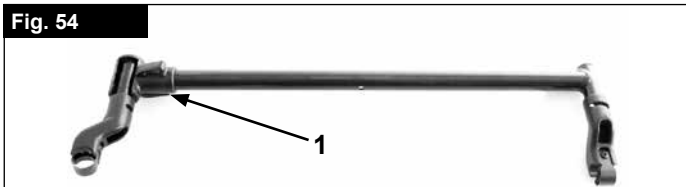

STABILISERINGSSTANG, DER KAN SLÅS NED

Denne stang bruges til at gøre ryglænet mere stabilt. Hvis kørestolen skal foldes sammen, mens stabiliseringsstangen er monteret, skal stabiliseringsstangen først skubbes ned på midten (1). Hvis kørestolen skal foldes helt ud igen, skal bærehåndtaget (2) trækkes opad, (Fig. 55)

Fig. 55

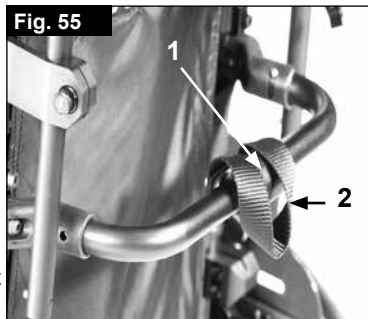


Ekstraudstyr/Indstillinger – Nakkestøtte

HOVEDSTØTTER

Nakkestøtten kan hæves og rykkes både fremad og bagud. Justeringen er ganske nem at udføre: Skruen (1 eller 2) løsnes, hvorefter nakkestøtten justeres, til den sidder som ønsket, og skruen spændes fast igen (se siden vedrørende tilspændingsmomenter), (Fig. 56).

Fig. 56

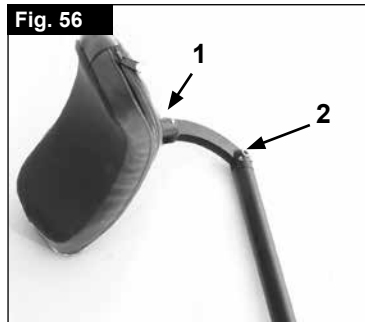

KOMFORT-NAKKESTØTTE

For at justere højden, åbn stjernegrebet (3) og flyt nakkestøtten i den korrekte position. Derefter spændes stjernegrebet fast igen, (Fig. 57).

Fig. 57



Indstillinger – Transithjul

TRANSITHJUL

Transithjul bør anvendes i de tilfælde, hvor kørestolen er for bred, når baghjulene er monteret (f.eks. ombord på fly, busser osv.). Så snart baghjulene er afmonteret ved hjælp af quick-release-akslerne, kan **transithjulene** bruges til fortsat kørsel.

Transithjulene er monteret, så de sidder ca. 3 cm over kørselsfladen, når de ikke er i brug. Derved undgår man, at de er i vejen under kørslen, ved transport eller når kørestolen tippes for at køre over en forhindring (kantsten, trin osv.) (Fig. 58).

Fig. 58



RISIKO!

Kørestolen har ingen bremses, når der anvendes transithjul.

Ekstraudstyr – Betjening med én hånd

BETJENING MED ÉN HÅND

For at kørestolen skal kunne køre ligeud, skal man betjene begge håndhjul. Hvis kørestolen skal foldes sammen, skal man først fjerne den aftagelige stang ved at skubbe den indad, (Fig. 59).

Fig. 59



ADVARSEL!

For at undgå risiko for personskade bør man altid sikre sig, at alle komponenter sidder forsvarligt på plads.

Mærkeplade

NAVNEMÆRKATER

Navnemærkatet sidder enten på tværstiveren eller det tværgående stelrør samt på en etiket i brugervejledningen. Mærkepladen angiver den nøjagtige modelbetegnelse såvel som andre tekniske specifikationer. Ved bestilling af reservedele eller ved reklamation skal følgende oplyses:

[MODEL]

		 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		 2021-05-05	
TYPE: Helix2		ROLLSTUHL		SN 230211733494769	
		ISO 7176-19:2008			
 125 kg	 max 10°	 40,5 mm	 43,5 mm		
					

TYPE: Produktnavn/SKU-nummer.



Maksimal sikker hældning med tipsikringer monteret, afhænger af kørestolens indstilling, holdning og brugerens fysiske evner.



Sædebredde.



Sædedybde.



Maksimal belastning.



UKCA-mærke.



CE-mærkat.



Se brugsanvisningen.



Fremstillingsdato.



Serienummer.



Dette symbol betyder medicinsk udstyr.



Producentens adresse.



Kollisionstestet i henhold til ISO 7176-19:2008.



Importørens adresse



Ansvarlig person i Storbritannien



Adresse på repræsentant i Schweiz



ISO 7010-M002
Brugervejledningen/Dette hæfte skal læses! (Blåt ikon)

På grund af vores politik med konstante forbedringer af vores kørestoles design, kan produktspecifikationer variere en smule fra de viste eksempler. Alle oplysninger om vægt/dimensioner og data om ydeevne er omtrentlige og skal udelukkende bruges som en vejledning.



Alle kørestole skal bruges i overensstemmelse med producentens retningslinjer.



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

Daglige eftersyn



VIGTIGT!

Som bruger af kørestolen er du som oftest den, der først lægger mærke til evt. fejl og mangler. Derefter anbefales det inden hver brug, at du kontrollerer delene på den følgende liste:

- Kontrollér, at dæktrykket er korrekt.
- Kontrollér, at bremserne fungerer korrekt.
- Kontrollér, at alle aftagelige dele er forsvarligt fastgjort, f.eks. armlæn, fodstøtte, quick-release-aksel osv.
- Kontrollér, at der ikke er synlige skader på f.eks. stel, ryglæn, hængesæde og rygpulstring, hjul, fodplade osv.
- Ved ethvert tegn på skader eller funktionsfejl bør du kontakte din autoriserede forhandler.

Dæk og montering

DÆK OG MONTERING

Solide dæk er monteret som standard på fabrikken.

Hvis der bruges pneumatiske dæk, skal du sørge for at du bevarer det korrekte dæktryk, da dette kan have en virkning på kørestolens ydeevne. Hvis dæktrykket er for lavt, øges rullemodstanden, og der kræves flere kræfter for at køre stolen fremad. Et lavt dæktryk har også en negativ indvirkning på kørestolens manøvreedygtighed. Hvis dæktrykket er for stort, kan dækket sprænge. Det korrekte dæktryk for et bestemt dæk er trykt på dækkets overflade, (min. 3,5 bar).

Dækkene monteres på samme måde som almindelige cykeldæk. Inden en ny indvendig slange monteres, skal det sikres, at fælgladen og dækkets inderside er fri for fremmedlegemer. Kontrollér dæktrykket efter montering eller reparation af et dæk. Det er meget vigtigt for sikkerheden og kørestolens funktion, at dæktrykket er korrekt, og at dækkene er i god stand.

Vedligeholdelse og rengøring

VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller dæktrykket en gang om måneden. Kontrollér alle dæk for slitage eller beskadigelse.
- Kontrollér bremserne ca. hver 4. uge for at sikre, at de fungerer korrekt og er lette at betjene.
- Dækkene skiftes på samme måde som almindelige cykeldæk.
- Alle de samlinger, der har indvirkning på sikkerheden ved brug af kørestolen, er selvlåsende. Du bedes hver 3. måned, at alle bolte er forsvarligt fastspændt (se siden vedrørende tilspændingsmomenter).
- Sikkerhedsmøtrikker bør kun benyttes én gang og bør straks udskiftes efter brug.
- Rengør kørestolen med et mildt rengøringsmiddel.
- Sædepulstringen må kun rengøres med vand og sæbe.
- Hvis din kørestol bliver våd, skal den rengøres efter brug, for at undgå rust og saltætsning.
- Smør quick-release-akslerne med lidt symaskineolie ca. hver 8. uge. Afhængigt af, hvor ofte og hvordan kørestolen anvendes, anbefales det, at den sendes til eftersyn hos en autoriseret forhandler hver 6. måned for at få den kontrolleret af uddannet personale.



VIGTIGT!

Sand og havvand (eller salt om vinteren) kan ødelægge hjullejerne på både for- og baghjul. Rengør kørestolen grundigt, hvis den har været udsat for ovennævnte.

Følgende enkeltdele er aftagelige og kan sendes til reparation hos producenten eller forhandleren:

Baghjul, armlæn, bøjler, antitipstøttere. Disse komponenter kan også fås som reservedele. Yderligere oplysninger findes i reservedelshåndbogen.

Vedligeholdelse og rengøring

HYGIEJNEPROCESSER VED GENANVENDELSE:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform. Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel. Vær opmærksom på producentens vejledning til desinfektionsmidlet under anvendelsen. Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpulstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.

OPBEVARING

Du bedes opbevare kørestolen på et tørt sted.

Fejlsøgning

Kørestolen trækker til den ene side

- Kontrollér dæktrykket
- Kontrollér, om hjulene drejer frit (lejer, aksel)
- Kontrollér svinghjulsvinklen
- Kontrollér, om begge svinghjul har ordentlig kontakt med kørselsfladen.

Svinghjulene begynder at slingre

- Kontrollér svinghjulsvinklen
- -Kontrollér, om alle bolte er fastspændt, og spænd dem evt. korrekt (se siden vedr. tilspændingsmomenter)
- Kontrollér, om begge svinghjul har ordentlig kontakt med kørselsfladen.

Kørestolen/tværstiveren klikker ikke i låsestilling i sædestøtten

- Kørestolen er stadig ny, og derfor er polstringen i sæde og ryg stadig meget stram. Polstringen bliver mere smidig, når den har været i brug et stykke tid.

Kørestolen er svær at folde sammen

- Den justerbare ryglæns polstring er for stram. Sørg for at løsne den tilstrækkeligt.

Kørestolen knirker og rasler

- -Kontrollér, om alle bolte er fastspændt, og spænd dem evt. korrekt (se siden vedr. tilspændingsmomenter)
- Smør de steder, hvor bevægelige dele kommer i kontakt med hinanden, med lidt olie

Kørestolen slingrer

- Kontrollér den vinkel, svinghjulene er indstillet i
- Kontrollér dæktrykket
- Kontrollér, om baghjulene er indstillet forskelligt

Tilspændingsmomenter

TILSPÆNDINGSMOMENTER

For nærmere oplysninger, se side 5. Hvis intet andet er angivet, er M6-skruernes tilspændingsmoment 7 Nm.

Bortskaffelse/Genbrug af materialer

BEMÆRK: Hvis kørestolen er blevet leveret til dig uden beregning, tilhører den muligvis ikke dig. Hvis du ikke længere har brug for den, skal du følge instruktionerne fra den organisation/myndighed som har leveret kørestolen, således at den kan returneres til dem.

De følgende oplysninger beskriver de materialer, der er brugt i kørestolen i forbindelse med bortskaffelse eller genbrug af kørestolen og dens emballage. Specifik lovgivninger for bortskaffelse af affald eller genbrug kan være gældende lokalt, og der bør tages hensyn til disse, når der arrangeres bortskaffelse. (Disse kan inkludere rengøring og desinfektion af kørestolen inden bortskaffelsen).

Stål: Fastgøringer, QR-aksel, siderammer, armlæn, ramme, benstøtter, skubbehåndtag.

Plast: Håndgreb, svinghjulsgafler, rørpropper, svinghjul, fodplader, armpuder og 12" hjul/dæk, hjul, sidestykker.

Emballage: Tynd polyethen indpakning, papkasse

Polstring: Vævet polyester med PVC-beskyttelseslag og ekspanderet forbrændingsmodificeret skum.

Bortskaffelse eller genbrug skal foretages gennem en autoriseret agent eller et autoriseret bortskaffelsessted. Alternativt kan din kørestol returneres til din forhandler for bortskaffelse.



Tekniske data

Fuld bredde:

- Med standardhjul inkl. drivringe, tæt monteret:
HeliX² / HeliX² Comfort: SB +20 cm
- Med tromlebremsehjul inkl. drivringe, monteret tæt: HeliX² / HeliX² Comfort: SB +21 cm

Mål i sammenfoldet stand: (3°-cambring)

- Med standardhjul: HeliX² / HeliX² Comfort: 40 cm

Vægt i kg:

Maks. brugervægt:

HeliX² / HeliX² Comfort: op til 125 kg belastning
Forstærket model, HeliX² XL / HeliX² Comfort XL: op til 170 kg belastning

Vægt i kg:

min. transportvægt: 8,2 kg

Ved transport, HeliX² / HeliX² Comfort SB 52 cm
(uden fodstøtte, hjul, sidestykke) 9,0 kg
(afhængigt af påmonterede dele)

maks. Transport HeliX² XL / HeliX² Comfort XL SB 60 cm
(uden fodstøtte, hjul, sidestykke): 11,0 kg
(afhængigt af påmonterede dele)

Fodstøtte (1 stk.): 0,8 kg
Standard sidestykke (1 stk.): 0,9 kg
24"-baghjul (massivt) (1 stk.): 2,0 kg

Minimums-/maksimumsværdierne gælder for standardmodeller af HeliX², SB 52 cm/HeliX² XL, SB 60 cm.

For yderligere oplysninger, se side 5.

MULIGE JUSTERINGER AF SÆDEHØJDE

Tabellerne for sædehøjde viser de justeringer af sædehøjden, der kan foretages, inklusive mulighederne for justering ved hjælp af svinghjul, baghjul og afstandsstykker samt monteringspositionerne. For nærmere oplysninger, se side 5.

**VIGTIGT:**

De angivne mål er uden sædehynder.

DYNAMISK SIKKER HÆLDNING

Den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel på skrån timer er dynamisk, dvs. den afhænger af kørestolskonfigurationen, brugerens fysiske evner samt den måde, brugeren kører på. Eftersom brugerens fysiske evner og måde at køre på er forskellige fra person til person, kan den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel ikke angives her. Denne hældningsgrad skal derfor fastslås af brugeren selv med hjælp fra en ledsager for at undgå, at kørestolen tipper på skrån timer.

**ADVARSEL!**

Det anbefales på det kraftigste, at uerfarne brugere får monteret anti-tipsikringer på kørestolen.

I overensstemmelse med EN12183: 2014, er alle de angivne dele (sæde - ryglæns polstring, armpude, sidepanel...) brandmodstandsdygtige i henhold til EN1021-2.

Kørestolen overholder følgende standarder:

- a) Krav og prøvningsmetoder til statisk, slag- og udmattelsesstyrke (ISO 7176-8).
- b) Krav til modstandsevne over for antændelse i henhold til ISO 7176-16 (EN 1021-1).





Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr

