

Elektrisk høyderegulerbare armlener



Beskrivelse

Artikkelnummer

Armlener elektrisk høyderegulerbare, par, grått stoff

12775030

Armlener elektrisk høyderegulerbare, par, sort hud

12785030



NOVA


1




Armlenene betjenes med bryterne som sitter på sidene

- Pil til forover = armlene ned
- Pil til bakover = armlene opp

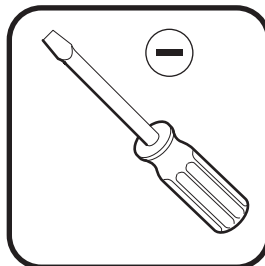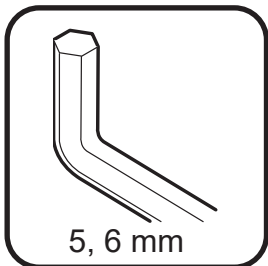

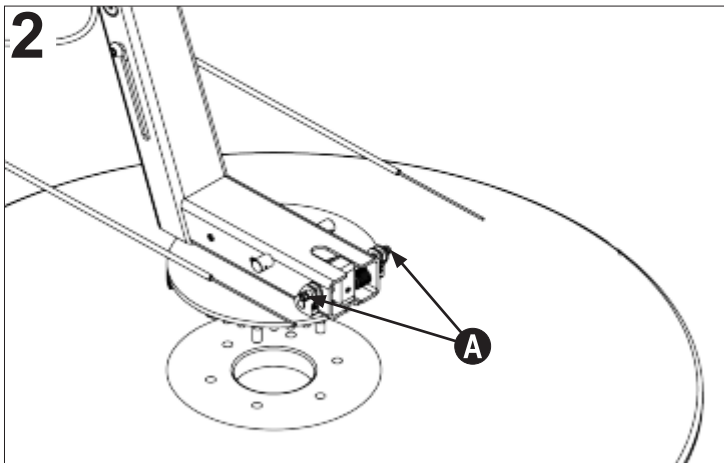

Løsne de to skruene **A** som holder vaierne nede på svingfoten med fastnøkkel 6 mm og 7 mm.

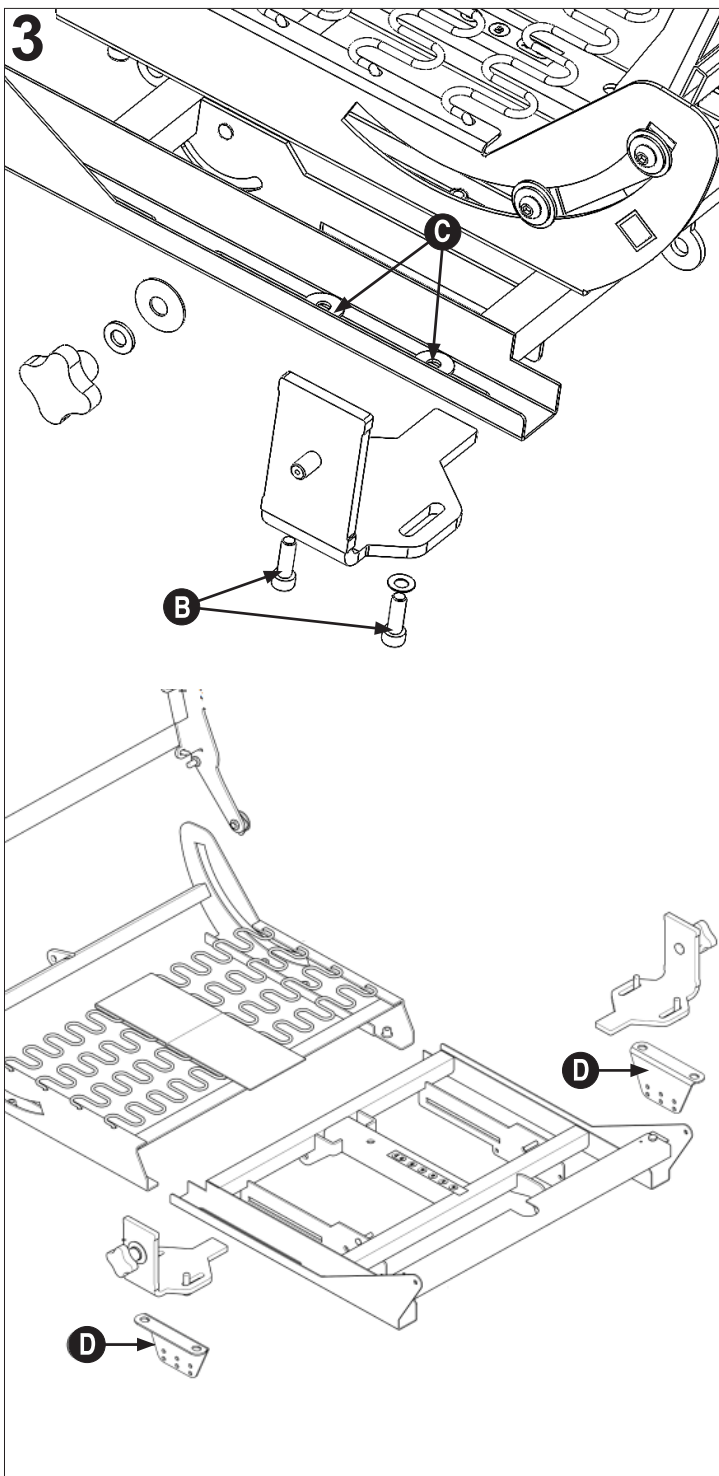


Demonter de opprinnelige armlenene som sitter på stolen.

- Skru ut skruene **B** ved hjelp av 6 mm unbrakonøkkel og trekk armlenene ut.
- Påse at skivene **C** som ligger mellom løftemodul og setet ikke forskyver seg.
- Ta vare på vaierfestene **D**. Disse skal benyttes ved montering.


Monter de elektrisk høyderegulerbare armlenene ved å skyve disse på plass der de opprinnelige armlenene satt, fest ved hjelp av skruene **B**.

- Påse at skivene **C** mellom øvre og nedre seteramme blir liggende riktig i forhold til skruene.
- Husk å ta med vaierfestene.
- Juster setebredden og stram til skruene.

4

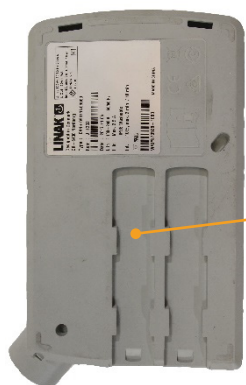

Elektronikkboks som tilhører el.armlene

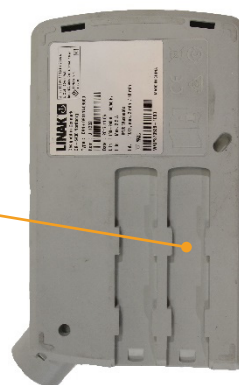

Elektronikkboks som sitter på stolen

5



Monter elektronikkboksen bak på opprinnelig elektronikkboks ved hjelp av den medfølgende platen.

6



Benytt en flat skrutrekker og press ned låsehakene på toppen for å frigjøre lokket på elektronikkboksen.



Plugg i strømkabelen **E** som forbinder de to elektronikkboksene.



Plugg i motorledningen (Høyre og Venstre) fra armlenene.

Y-splitten **F** festes til ryggmotoren med borrelås.




Plugg i spiralkablene **G** som kommer fra el.armlenene inn i Y-splitten **F** og klem inn låseskivene.

Sett lokken på elektronikkboksene.


Strips opp alle kabler og prøvekjøre alle funksjoner og påse at ingen kabler kommer i klem eller blir strekt.

10

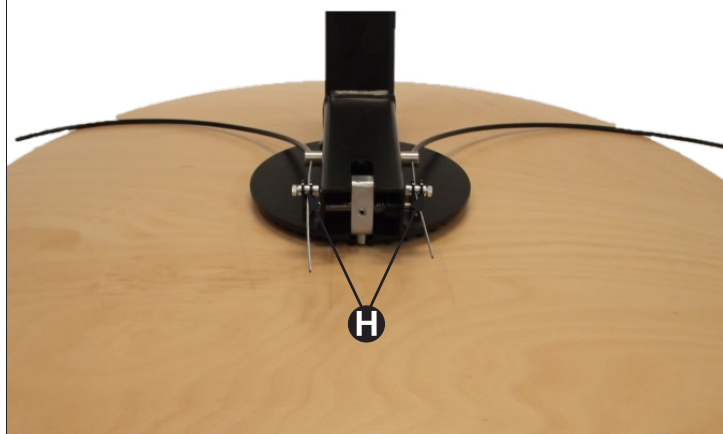

Monter vaierne **H** som følger el.armlenene på same måte som original vaierne var festet.

11

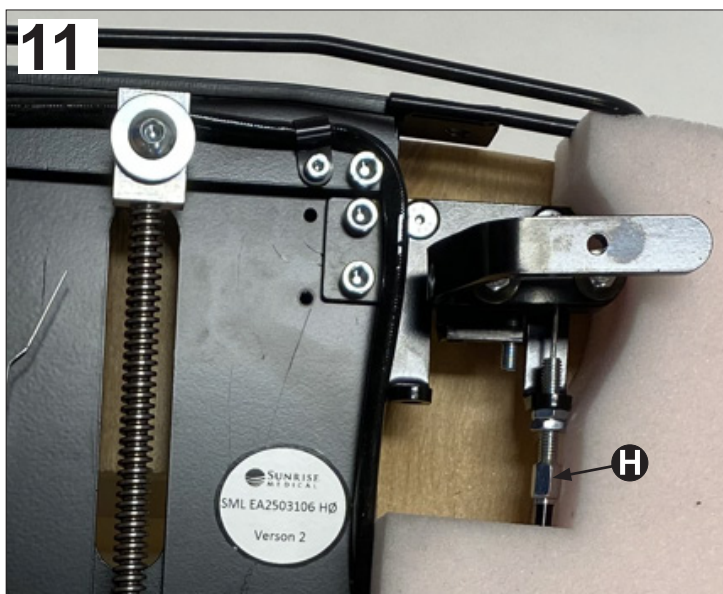


Se til at vaierstrømpene er inn i setene på stillskruene **H** som sitter innenfor trekket på armlenene før du trekker til låseskruene.

Juster vaierlengden slik at stolen låses i rotasjonsretningen. Fastnøkkel 8 mm og 10 mm.

12



Det er klemfare mellom armlenesiden og festevinkelen når armlenene kjøres ned.

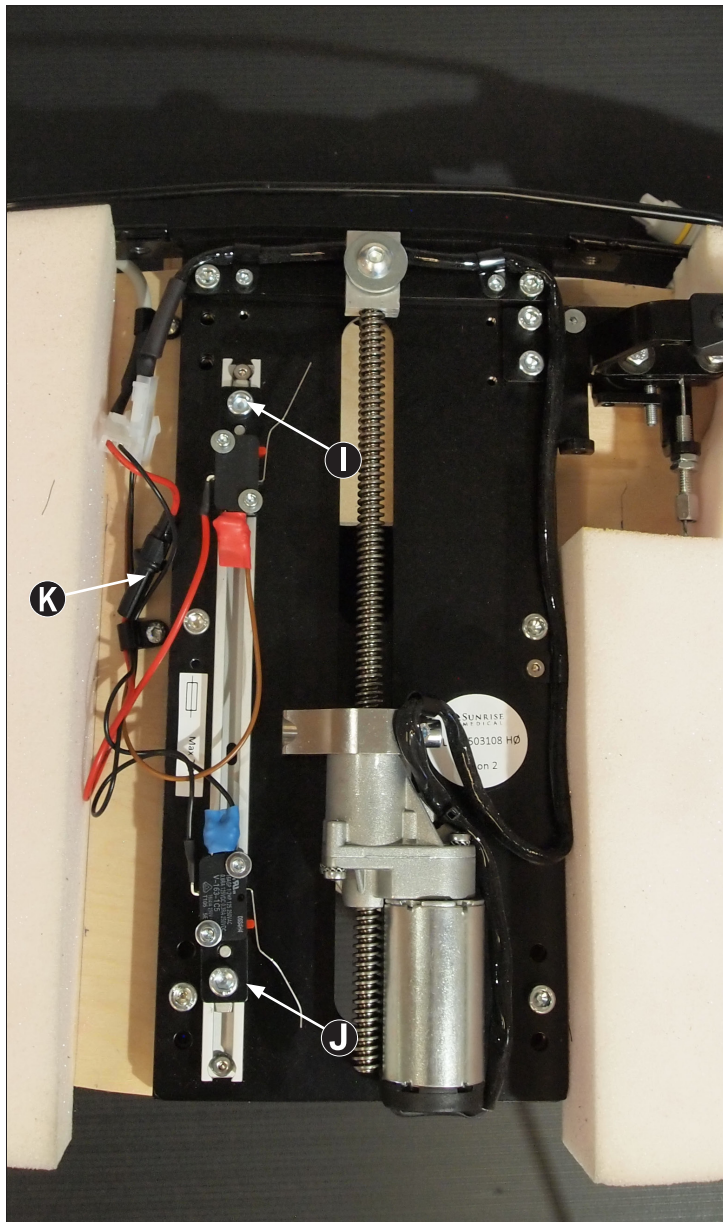

For å justere armlenehøyden, benytt en 5 mm unbrakonøkkel for å løsne mikrobryterne.

- Kontroller at mikrobryteren stopper bevegelsen etter justering.
- Kontroller at ingenting kommer i klem.
- Kontroller at det er frigang mellom bunnen av armlenet og trefoten.

❶ Justering av armlene i laveste posisjon

❷ Justering av armlene i høyeste posisjon

❸ 2,5 A sikring

Ikke juster armlenene for langt ned, da går de i klem på baksiden mellom festevinkelen og treverket.

Juster heller ikke for langt opp, da går armlenesiden og festevinkelen fra hverandre.

OBS! Når stolen er satt i lav posisjon, kontroller at armlenene i nederste posisjon ikke kolliderer med transporthjulene.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no