

INSTRUKSJON

Scooter Stopper - programmering av ny fjernkontroll



Beskrivelse


Scooterstopper

Artikkelnummer

MM-05959

magic
Mobility™

Because the world's not flat

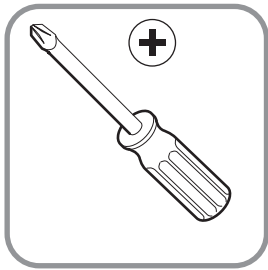

Scooter Stopper - programmering av ny fjernkontroll

1. Skru ut de to skruene **A** som holder bakløkket.
2. Fest Scooter Stopper til mobilitetsenheten og sørg for at den står på en fast overflate.
LED-lampen som indikerer strøm
'Program 2'-knappen skal lyse (merket med gult).
3. Finn 'Program 1'-knappen. (merket med blå)
4. Trykk og hold knappen **B** på den nye fjernkontrollen, og trykk deretter og hold 'Program 1'-knappen på Scooter Stopper (merket med blå).
LED-lampe (merket med grønn) vil blinke tre ganger.
5. Slipp både programknappen og fjernkontroll knappen.
LED lampen (merket med grønn) skal bli grønn.
6. Når LED-lampen slukker, trykk på fjernkontroll knappen for å teste.
LED lampen (merket med grønn) skal bli rød.
7. Hvis Fjernkontrollen ikke ble kodet riktig, kortslutt 'Code Reset-pinnene' (merket med oransje) i 10 sekunder til LED-lampene blinker, og gjenta deretter kodingsprosessen.
8. Monter bakdekselet forsiktig og sørg for at skruene er sikre.

2





Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no