

Lårstöd avtagbart 120x120

Passar på sittsystem SEDEO LITE



Benämning	Artikelnummer
Lårstöd avtagbart 120 x 120 hö/vä	22509175-001



MONTERINGSANVISNING

Montering av lårstöd

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.


Verktyg som krävs: 5 mm insexnyckel

Instruktioner

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ illustrerade anvisningar för montering

1. Demontera plastplugg framtill på sidoskena, trä in fäste i skena och dra fast på rätt position.
2. Montera lårstödet i fästet och justera in till önskat läge, dra åt.
3. Montera tillbaka plastplugg

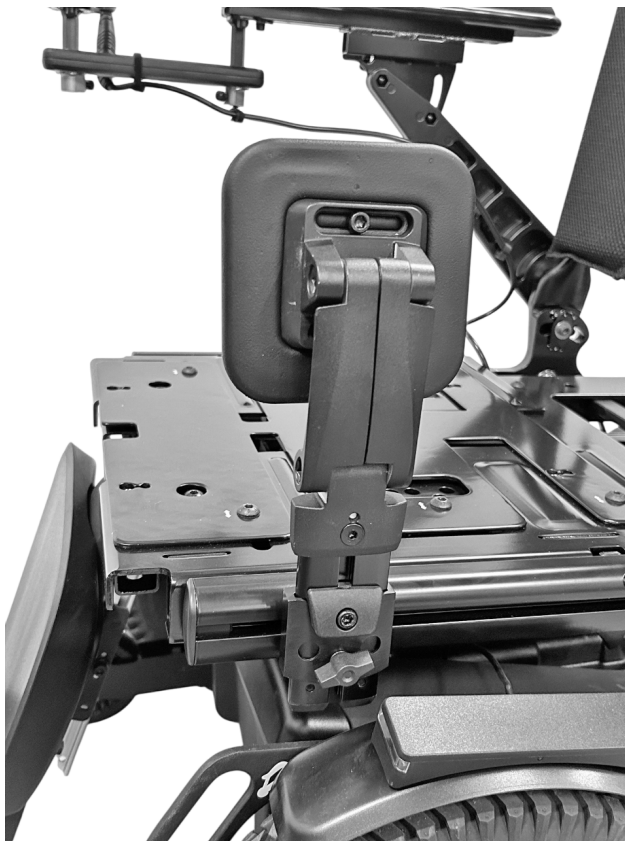



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

031 748 37 00
post@sunrisemedical.se