

Bålstöd SEDEO LITE, LITET 90x120 mm



Benämning	Artikelnummer
Bålstöd avtagbart 120 x 120 hö/vä	22809020-002



MONTERINGSANVISNING

Montering av bålstöd

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Verktyg som krävs: 5 mm insexnyckel, 6mm insexnyckel

Instruktioner


Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ illustrerade anvisningar för montering

Montera klämmor runt ryggröret, först det inre sedan skjut i den yttre klämman:



Montera bålstödetets bläck i klämmorna och dra åt med 6 mm insexnyckel:

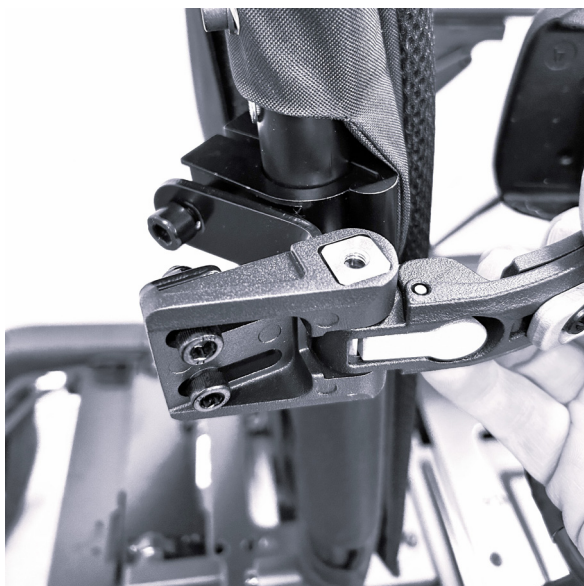

Justera om nödvändigt längd och vinkel med 5 mm insexnyckel:





Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

031 748 37 00
post@sunrisemedical.se