



Empulse®



Empulse | m90

SLANK, STILFULD POWER TIL DIN
MANUELLE KØRESTOL

DIN KØRESTOL + POWER. INGEN KOMPROMISER

Empulse M90 hjælpemotor reducerer belastningen af manuel fremdrift, og hjælper dig med at spare din energi til det, der betyder mest for dig.

Let og alsidig, og den **integreres problemfrit** på din kørestol - ingen ledninger eller ekstra komponenter, der fylder. Behold dine foretrukne dæk og drivringe, og du kan samtidig vælge at køre med eller uden strøm ved hjælp af et aftageligt joystick eller styre med drivringene.

Som **den letteste i sin klasse** tilføjer M90 slank, stilfuld power til dit liv.



Skan QR koden med din telefons kamera for at se video.



LET I VÆGT

Den letteste af sin slags

Både kompakt og let i vægt - den komplette M90 enhed **vejer kun 12 kg alt inklusiv** - hvert hjul vejer kun 5,9 kg inklusiv batteri, hvilket gør transport **nemt og effektivt**. M90 tilføjer minimal vægt til kørestolen og bevarer dens manøvredegtighed og brugervenlighed under de daglige aktiviteter.



1



BETJENINGSMULIGHEDER FOR ENHVER PRÆFERENCE

Uanset om du foretrækker lethed ved et joystick eller det familiære ved drivringe, giver M90s betjeningsmulighederne dig kontrol over din rejse - dette inkluderer personer med begrænset håndfunktion eller dem, der foretrækker forenklede betjeningsmuligheder.

1 Joystick:

- Naviger M90 ubesværet med præcis joystick-kontrol indendørs og udendørs.
- Skift mellem Indendørs og Udendørs køreindstillinger for optimal hastighed og effekt - indstillingerne kan justeres for at matche personlige kørselspræferencer.
- Aktiver Joystick Cruise Control ved at trykke Joysticket ned, for at opretholde hastigheden, mens du styrer.
- Lad M90 gøre arbejdet - ingen grund til manuel fremdrift, hvilket sparer din energi og belastningen af dine skuldre.

2 Two-Way toggle med drivringe:

- Intuitiv drivingsstyring sikrer præcis kontrol, og er ideel til trange pladser og travle miljøer.
- Tryk togglen fremad for at øge hastigheden eller tilbage for at sænke farten.
- Reducer dit energiforbrug, mens du beholder din manuelle kørestol - intet behov for en klodset el-stol.
- Ideel til dem som foretrækker at styre med drivringe, men som har behov for power i løbet af dagen.

Fjern og placer nemt den trådløse controller, hvor det er mest bekvemt - uanset om du bruger quick release rammebeslaget på en af M90-monteringsmulighederne, er transport og opsætning af M90 ubesværet.



2



Kør på din måde >

Benyt **dine foretrukne dæk og drivringe:**
Har du brug for en drivring, der fungerer med reduceret håndfunktion eller greb? Vi har løsningen.
Leder du efter dæk, der fungerer på både glatte gulve indendørs og ujævnt udendørs terræn? Valget er dit.



Quick-release hjulene fastgøres og afmonteres ligesom standard drivhjul, hvilket gør transport nemt og problemfrit.



Du skal blot dreje M90-navet for at aktivere hjælpemotoren eller skifte til free mode tilstand for manuel kørsel uden modstand.

DYNAMISK YDEEVNE

Sikker, nem og intelligent

Fartpilot og hastighedskontrol ned ad bakke gør kørsel med M90 sikker, enkel og intuitiv. Komponenter centreret om navet betyder en bedre manøvrerbarhed og en bedre kørsel.

Op til 15 km rækkevidde

M90 er drevet af et letvægtsbatteri (0,6 kg), som tilbyder en rækkevidde på op til 15 km* – så du kan rejse ubesværet uden at skulle lade op mellem turene.

*Rækkevidden afhænger af kørefladen, brugerens vægt, køreadfærd, temperatur og terræn.



OPLADNING

Oplad væk fra stolen, behold M90 på stolen

Udskift eller erstat nemt batterier for uafbrudt mobilitet. Oplad på eller væk fra enheden, og øg din rækkevidde ved at bære et ekstra batteri - perfekt til at forblive på farten.

TRANSPORT

Ubesværet rejse, når som helst og hvor som helst

Designet til at være let at transportere. M90-hjulene har en standard quick release aksel og vejer kun 5,9 kg, så de vil passe fint ind i bagagerummet på selv små biler.

Takket være det IATA-certificerede batteri er M90 ideel til brugere, der søger en bekvem løsning til lange og korte afstande.

* De enkelte flyselskaber har forskellige krav i forhold til transport af produkter med Li-Ion-batterier. Inden du arrangerer flyrejser med kørestolen, bedes du bekræfte med dit flyselskab eller luftfartsselskab, at de accepterer batteridrevne køretøjer under UN-klassificering: UN3171. Se venligst brugervejledningen for yderligere detaljer



Den holdbare rejsetaske i super kvalitet er designet til at holde hjulene med batterier beskyttet og holde alt organiseret i en praktisk taske, som er nem at bære.

Rejsetasken er ikke tilgængelig på alle markeder.

TEKNISK DATA

Vægtkapacitet	100 kg
Kørestolens drivhjulsstørrelse	540 mm (24")
Batteriets rækkevidde ¹	15 km
Maks. hældning	6°
Total vægt på enhed	12 kg
Hvert hjul med batteri	5,9 kg
Hvert hjul uden batteri	5.3 kg
Batterivægt	0.6 kg
Kompabilitet	Krydsrammestole Fastrammestole
Maks. hastighed	6 km/t
Elektronik	Bluetooth / Wireless
Batterier Flyvevenlige ²	Lithium Ion (<100Wh farligt gods begrænsning)
Motor	150 W / 24 V

1. Rækkevidden er afhængig af underlaget, brugerens vægt, kørefærd, temperatur og terræn.

2. Bekræft altid med dit flyselskab for gældende regler.

⚠ ADVARSEL

Anvendelse af en hjælpemotor-enhed kan ændre dit tyngdepunkt eller den måde, din stol kører på. For at mindske risikoen for at vælte eller falde, skal du kontakte din sundhedsfaglige behandler om korrekt kørestolskonfiguration, herunder brug af tipsikringer og andre nødvendige justeringer.



Ubesværet integrering på din stol og i dit liv

Fuldt integreret navdesign giver problemfri power og holder din stol smal og kompakt uden ekstra komponenter eller ledninger, der fylder.



M90 Website



M90 Order Form

Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Danmark
Tlf: +45 70 22 43 49
E-mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om specifikationer, muligheder og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical med eventuelle spørgsmål, du måtte have.



Hvis du er svagtseende, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.