

MONTERINGSANVISNING

Kryckhållare

Passar på sittsystem SEDEO LITE



Benämning

Kryckhållare

Artikelnummer

22809030



MONTERINGSANVISNING

Montering av lårstöd

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Instruktioner

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ illustrerade anvisningar för montering

Verktyg som krävs:

4 mm insexnyckel

5 mm insexnyckel

Vad som ingår:



1. Montera koppen på bläcket med skruvbricka och kupolmutter, dra åt med 4mm insexnyckel.

3. Montera bläcket på vänstra sidans rygginfästning med medföljande 8mm skruv samt brickor. Dra åt med 5mm insexnyckel.



3. Montera kardborrbandet runt ryggröret innanför rygglädseln:





Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

031 748 37 00
post@sunrisemedical.se