

MONTERINGSANVISNING

Armstödsplatta

Passar på sittsystem SEDEO LITE



Benämning

Armstödsplatta



MONTERINGSANVISNING

Montering av lårstöd

Förberedelser

Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Instruktioner

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ anvisningar för montering

Verktyg som krävs:

- 3 eller 4 mm insexnyckel beroende på modell av armstödsplatta
- 5 mm insexnyckel

1. Fäll upp armstödet och lossa skruvarna undertill som håller fast skenan ett par varv och dra av skenan från stolen:



2. Lossa skenan från armstödsplattan med insexnyckel, 3 eller 4 mm beroende på modell:



3. Flytta över skenan till nya armstödsplattan och montera skruvar. Om skenan är infälld i armstödsplattan så dra inte åt hela vägen, detta för att T-spårsmuttrarna skall kunna föras in i skenan:



4. Trä på skenan med den nya armstödsplattan på infästningen och dra åt de skruvar som håller armstödsplattan på skenan:



5. Justera position och dra åt de skruvar som håller skenan på infästningen:





Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

031 748 37 00
post@sunrisemedical.se