

MONTERINGSANVISNING

Krykkeholder Q50R Carbon



Beskrivelse


Krykkeholder

Art. nr




MM-05276Q



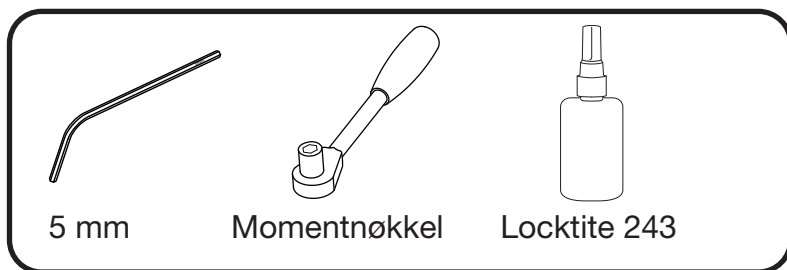


1. Skru ut M8 bolten **A** med en 5 mm unbrakonøkkel.

Når bolten er ute, fjern skiven **B** før montering av feste til krykkeholderen.

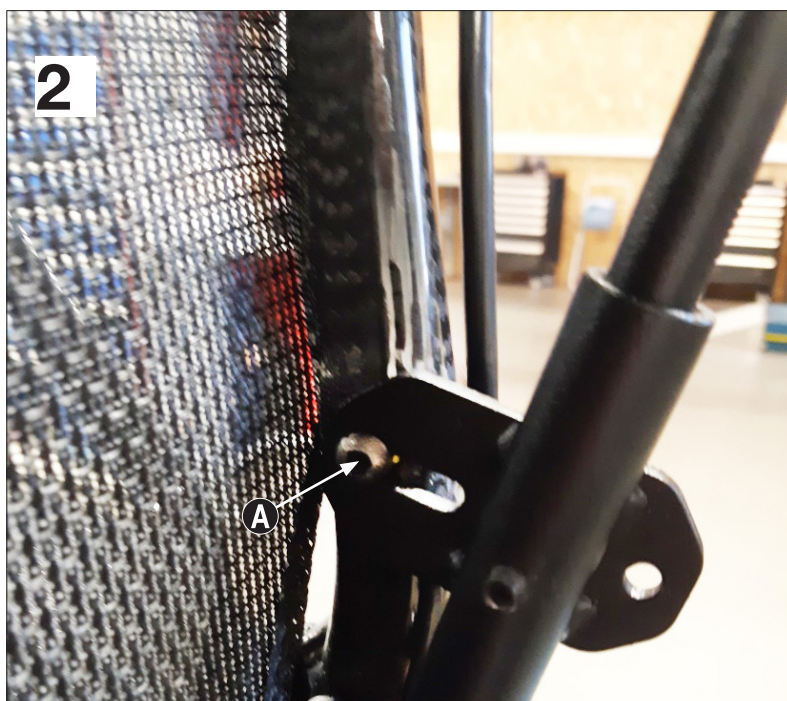

2. Benytt litt locktite 243 på bolten **A**.
Bruk en momentnøkkel og trekk til bolten med 10Nm.

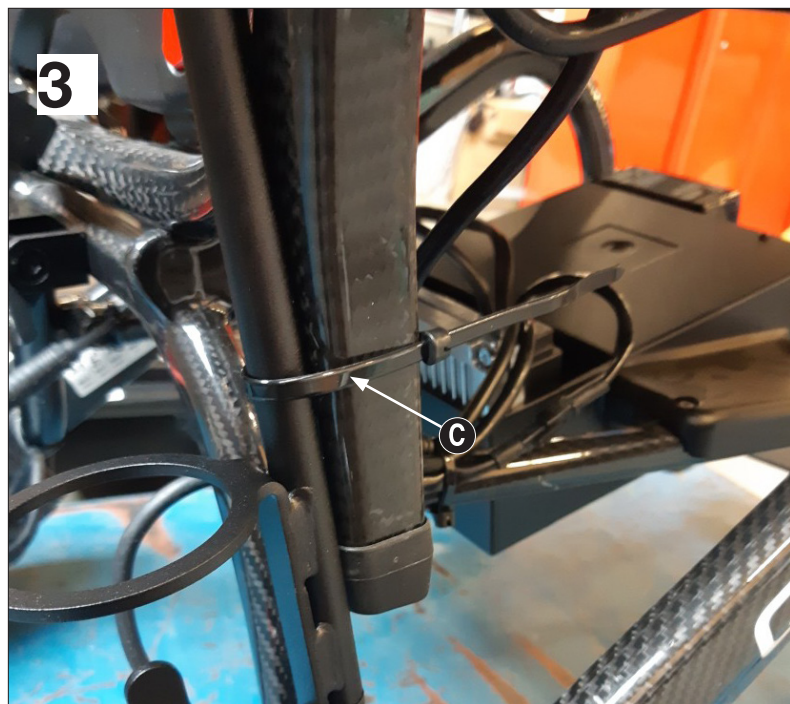

3. Monter en strips **c** nederst på krykkeholderen som ekstra sikring.



Sunrise Medical AS
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no