

Empulse M90

Guide de Compatibilité



Guide compatibilité_M90_FR_Rev-062025

Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Montage
Sunrise Medical	
IRIS	6
QS5 X	4
Neon ²	14
Xenon ²	14
SR45	6
Helium	2
Nitrum	2
Easy 200	4
Easy 300	4
Easy Life R	4
Easy Life T	4
Easy Life	4
Argon ²	15
Youngster 3	4
Style X	4
Style X Ultra	4

Remarque : La liste ci-dessus est une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels la M90 peut être montée. Toutefois, la forme du cadre, le centre de gravité, la taille des roues et la profondeur d'assise ont une influence. Il est donc essentiel d'essayer et de tester pour être sûr à 100% ! Ou demandez conseil à votre fournisseur. Le guide de compatibilité n'indique que les fauteuils roulants pour lesquels un accord de combinaison a été signé. Vous trouverez des informations sur le montage à la page suivante.

Empulse M90



Information sur le montage

- Deux plaques seront fixées de manière permanente sur le support d'axe, permettant toujours l'utilisation des roues manuellement.
- La plaque pour le côté gauche du fauteuil contient un aimant qui doit être orienté vers l'avant ou vers le haut du fauteuil.



- La plaque pour le côté droit du fauteuil ne contient pas d'aimant et doit être orientée vers l'arrière ou vers le bas du fauteuil.

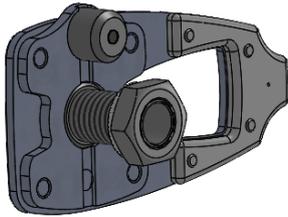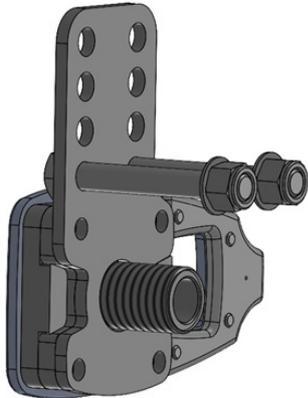

Fauteuils pliants avec plaques d'axe	Fauteuils rigides avec tube d'axe
<p>Exemple de kits - Le kit exact dépend du modèle de fauteuil roulant</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Montage avec goupille de support de couple • Diamètre et forme adaptés à la plaque d'axe spécifique du fauteuil roulant • Kits: 4, 5, 12 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de support de couple avec goupilles ou vis, possiblement tube d'axe • Forme et conception adaptées au fauteuil roulant • Kits: 2, 6, 13, 14, 15

Exigences techniques :

- Taille des roues : 24"
- Carrossage des roues : 0°
- Roulettes anti-bascule obligatoires pour des raisons de sécurité

Incompatibilités techniques :

- Si le diamètre de l'axe de la roue manuelle existante n'est pas de 12.7 mm, il est possible de commander une roue manuelle compatible auprès de Sunrise Medical pour l'adapter au nouvel ensemble d'axe.
- La combinaison de la M90 avec un frein tambour n'est pas possible.