

# LET'S GO! GUIDE



Ce guide vous aidera à vous familiariser rapidement avec votre M90, pour en profiter pleinement au quotidien. Veuillez consulter votre notice d'utilisation pour des instructions détaillées ou contacter votre revendeur local.

**E** | m90

**SUNRISE MEDICAL SE SOUCIE DE VOTRE SÉCURITÉ.**  
Veuillez lire votre notice d'utilisation pour obtenir des instructions de sécurité et d'entretien.

# SCANNEZ POUR ACCÉDER AUX VIDÉOS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



## MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Lorsque les batteries sont installées, les roues sont mises sous tension. Les roues recherchent automatiquement la commande via une connexion sans fil.

**NOTE** Les boutons sur les roues de la M90 sont utilisées comme des indicateurs et pour le dépannage, et non comme des boutons marche/arrêt.

## CONNECTER LE BOÎTIER DE COMMANDE

Appuyer une fois sur le bouton d'alimentation de la commande.

Le voyant d'alimentation LED (2) clignote en blanc pendant la connexion. (Cela peut prendre jusqu'à 5 secondes.)

Une fois la connexion établie, vous entendrez un bip, et le voyant d'alimentation LED (2) devient fixe et vert.

Lorsque les roues sont engagées, maintenez le joystick vers l'avant pour entrer en mode conduite. Les deux roues se verrouillent en position avec un clic, et le voyant d'état s'allume en vert lorsqu'elles sont prêtes.

## CONSEILS POUR UNE CONDUITE SÛRE

**Commencez lentement.** Des roulettes anti-bascule sont vivement conseillées lors de l'utilisation de la M90. Commencez en mode intérieur dans un environnement sûr et ouvert. Entraînez-vous à vous arrêter à des points spécifiques, à tourner à l'arrêt et à tourner en mouvement.

### PENTES

Commencez par une montée modérée avec une pente graduelle et une sortie dégagée, en évitant les virages immédiats au bas de la pente. La M90 assure le freinage et le contrôle de la descente.

Ajustez la position de votre corps pour maintenir l'équilibre et éviter de basculer – penchez-vous vers l'avant pour monter ou vers l'arrière pour descendre.

Assurez-vous que votre buste soit correctement soutenu, si nécessaire.

Scan the QR Code to view this document in Spanish, French, German, Italian, or Dutch.

Escanea para ver este documento en ESPAÑOL.

Scannez pour afficher ce document en FRANÇAIS.

Scannen, um dieses Dokument auf DEUTSCH angezeigt zu bekommen.

Inquadra qui per vedere il documento in ITALIANO.

Scan om dit document in het NEDERLANDS te bekijken.



# BOÎTIER DE COMMANDE

## ALIMENTATION DE LA COMMANDE

APPUI RAPIDE POUR VERROUILLER OU DÉVERROUILLER



## 2- INDICATEUR ALIMENTATION COMMANDE

- CONNECTÉE, VERROUILLÉE  
Clignotant = en attente de connexion
- COMMANDE ACTIVE  
Charge = >15%
- CHARGE < 15%  
Clignotant = charge < 5%
- CHARGE FAIBLE  
Ne peut pas être utilisée
- CHARGÉE  
Clignotant = en charge


## 3- INDICATEUR DE STATUT

- MOYEURS DE ROUE NON ENGAGÉS
- MOYEURS DE ROUE ENGAGÉS  
Clignotant = régulateur de vitesse engagé
- Protection thermique 1 –  
Verrouillage en mode extérieur
- Protection thermique 2 – Commande  
verrouillée. Freinage actif pendant 5  
secondes
- Protection thermique 3 –  
Système verrouillé
- CHARGE  
Clignotant = en charge

## 4- INDICATEUR DE PROFIL

- JOYSTICK  
Fixe = profil intérieur  
Clignotant = profil extérieur
- MAIN-COURANTE / TWO-WAY TOGGLE  
Fixe = profil intérieur  
Clignotant = profil extérieur

## 1- INDICATEURS DE BATTERIE DES ROUES

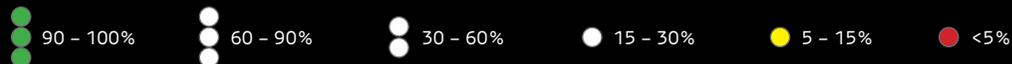



[www.SunriseMedical.fr/Empulse](http://www.SunriseMedical.fr/Empulse)



Distribué par: Sunrise Medical  
 ZAC de la Vrillonnerie, 37170 Chambray-Lès-Tours  
 MK-130227 Rev. A ©04.2025

