

DUALE STEUERUNG

Fahrmodus wechseln – mit einem Knopfdruck.

Dank der intelligenten dualen Steuerung kannst du blitzschnell zwischen dem **Joystick- und dem Speed-Controller-Modus mit Greifreifen-Steuerung** umschalten – ganz einfach über die Mode/Profile-Taste. Passe deinen Fahrstil flexibel an deine Energie, deine Umgebung und deine persönlichen Vorlieben an – ganz ohne Hardwarewechsel.

Ein Rollstuhl, zwei Fahrweisen – maximale Freiheit auf Knopfdruck.

Der **kabellose Joystick** lässt sich ganz einfach abnehmen und genau dort platzieren, wo es für dich am bequemsten ist.



Fahrmodus	JOYSTICK <input type="radio"/>	SPEED CONTROLLER MIT GREIFREIFEN STEUERUNG <input checked="" type="radio"/>
Start/Stop	Drücke den Joystick nach vorne, um loszufahren. Lass den Joystick los, um anzuhalten. Die Greifreifen beeinflussen die Geschwindigkeit nicht.	Tippe den Joystick/Geschwindigkeitsregler an, um zu starten. Drücke den Joystick/Geschwindigkeitsregler nach unten oder nutze die Greifreifen, um allmählich zu stoppen.
Geschwindigkeitskontrolle	Drücke den Joystick nach vorne oder hinten, um proportional zu beschleunigen oder langsamer zu werden.	Tippe den Joystick/Geschwindigkeitsregler an, um die Geschwindigkeit schrittweise zu erhöhen oder zu verringern – bis Stufe 5 in beiden Profilen.
Lenkung	Bewege den Joystick in eine beliebige Richtung, um zu steuern.	Steuere manuell über die Greifreifen.
Tempomat	Drücke den Joystick bei gewünschter Geschwindigkeit nach unten , um den Tempomat zu aktivieren. Steuere mit dem Joystick. Stoppe durch Bewegen des Joysticks oder erneutes Drücken nach unten.	Tippe den Joystick / Geschwindigkeitsregler an, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Steuere manuell mit den Greifreifen. Stoppe, indem du den Joystick/ Geschwindigkeitsregler nach unten drückst, rückwärts tippst, bis die Geschwindigkeit auf Stufe null ist, oder indem du die Greifreifen greifst und hältst.
Manueller Assistent	-	Ein leichter Schub, der nach dem Anhalten über die Greifreifen aktiviert wird und das Neupositionieren ermöglicht.
Fahrprofile	Auswahl per App oder Duale-Steuereinheit (Indoor/Outdoor)	Auswahl per App oder Duale-Steuereinheit (Indoor/Outdoor)
Fahreinstellung	Wähle den Geschwindigkeitsbereich (Basis / Standard / Max) über die App aus	Wähle den Geschwindigkeitsbereich (Basis / Standard / Max) über die App

Einige Funktionen können je nach gewähltem Fahrmodus – Joystick oder Speed-Controller mit Greifreifensteuerung – unterschiedlich funktionieren. Wir empfehlen Nutzern, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um die Bedienung der Funktionen im gewählten Fahrmodus kennenzulernen, für eine sichere und komfortable Fahrt.



Mit der Modus-/Profil-Taste steuerst du nicht nur den Fahrmodus, sondern auch die Fahrprofile, um die Leistung des M90 optimal an deine Vorlieben anzupassen. Die Modus-/Profilanzeige zeigt den gewählten Modus oder das gewählte Profil an.

Drücke und halte die Taste, um die Steuerungsart deines M90 zu wechseln (Fahrmodus):

- **Joystick-Modus** (weiße LED)
- **Speed-Controller mit Greifreifensteuerung** (blaue LED)

Tippe auf die Taste, um zwischen den Indoor- und Outdoor-Fahrprofilen zu wechseln:

- **Indoor (dauerhaft leuchtende LED)** – für enge Wendungen und sanfte Navigation innen
- **Outdoor (blinkende LED)** – für reaktionsschnelle Leistung auf unterschiedlichem Gelände