

Kombinationsübersicht M90



Hersteller / Model	Docking
Sunrise Medical	
Argon ²	15
Easy 200	4
Easy 300	4
Easy Life	4
Easy Life R	4
Easy Life RT	4
Easy Life T	4
Helium	2
Neon ²	14
Nitrum	2
QS5 X	4
Xenon ² / Xenon ² Hybrid	14
Xenon ² SA	14
Zippie IRIS	6
Simba	15
Youngster 3	4
BasiX ²	4
RubiX ²	4

Bitte beachten Sie: Diese Liste gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, an welche Rollstühle der M90 angebaut werden kann. Rahmenform, Schwerpunkteinstellung, Radgrösse und Sitztiefe spielen jedoch eine wichtige Rolle. Daher empfehlen wir, die Kombination unbedingt zu testen, um 100% sicher zu sein! Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Übersicht zeigt nur Rollstühle, für die eine verbindliche Kombinationsvereinbarung vorliegt. Weitere Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite.

M90



Docking Information

- Zwei Aufnahmehalterungen werden fest an der Achshalterung montiert, so dass die Verwendung von manuellen Antriebsrädern weiterhin möglich ist.
- Die Aufnahmehalterungen für die linke Seite des Rollstuhls enthält einen Magneten, der in Richtung der Vorderseite oder der Oberseite des Rollstuhls angebracht werden muss.



- Die Aufnahmehalterungen für die rechte Seite wird ohne Magnet geliefert und muss in Richtung der Rückseite oder des Bodens des Rollstuhls montiert werden.

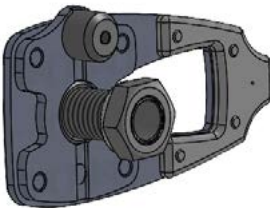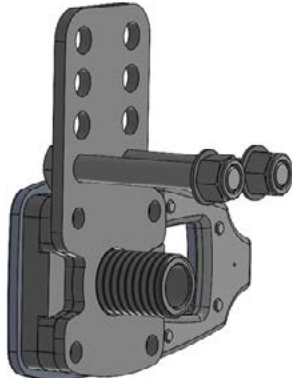

Faltrollstühle mit Achsplatten	Starrrahmenrollstühle mit Achsplatten
Beispiel für Kits – das genaue Kit hängt vom Rollstuhlmodell ab.  • Montagelösung mit Drehmomentstütze • Durchmesser und Formschluss zur rollstuhlspezifischen Achsplatte • Kits: 4, 5, 12	 • Drehmoment-Stützplatte mit Stiften oder Schrauben, eventuell Achsmanschette • Form und Design passend zum jeweiligen Rollstuhl • Kits: 2, 6, 13, 14, 15

Technische Anforderungen:

- Antriebsradgrösse 24"
- Radsturz 0°
- Sicherheitsräder aus Sicherheitsgründen immer empfohlen

Technische No-Gos:

- Wenn der Achsdurchmesser des vorhandenen manuellen Rades nicht 12,7 mm beträgt, besteht die Möglichkeit, ein manuelles Antriebsrad von Sunrise Medical zu bestellen, das mit der neuen Achseinheit kompatibel ist.
- Kombination von M90 und Trommelbremse nicht möglich