

M90

Aperçu des combinaisons



Fabricant / modèle	Amarrage
Sunrise Medical	
Argon ²	15
Easy 200	4
Easy 300	4
Easy Life	4
Easy Life R	4
Easy Life RT	4
Easy Life T	4
Helium	2
Neon ²	14
Nitrum	2
QS5 X	4
Xenon ² / Xenon ² Hybrid	14
Xenon ² SA	14
Zippie IRIS	6
Simba	15
Youngster 3	4
BasiX ²	4
RubiX ²	4

Veuillez noter svp : la liste ci-dessus est une indication des modèles sur lesquels peut être montée la M90. La forme du châssis, le réglage du centre de gravité, la taille des roues et la profondeur d'assise ont toutefois une influence. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire un essai pour être sûr à 100% ! En cas de doute, demandez à votre détaillant. Cet aperçu des combinaisons ne concerne que les fauteuils disposant d'un accord de combinaison signé. Vous trouverez des informations sur le montage à la page suivante.

M90



Information sur le montage

- Deux fixations de réception sont fixées de manière permanente sur le support d'axe, permettant l'activation manuelle des roues avant.
- La fixation de réception pour la partie gauche du fauteuil dispose d'un aimant qui doit être orienté vers l'avant ou le haut du fauteuil roulant.



- La fixation de réception pour la partie droite est livrée sans aimant et doit être orientée vers l'arrière ou du bas du fauteuil roulant.

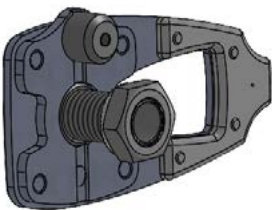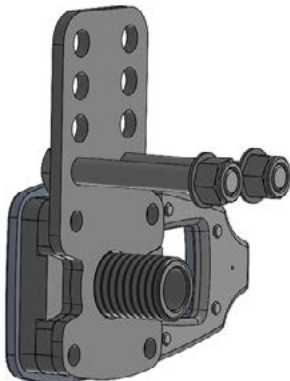

Fauteuils roulants pliables avec plaques d'axe	Fauteuils roulants à cadre fixe avec plaques d'axe
Exemples de kits, le kit exact dépend du modèle de fauteuil roulant  • Montage avec goupille de support de couple • Diamètre et forme complémentaires avec la plaque d'axe spécifique du fauteuil roulant • Kits : 4, 5, 12	 • Plaque de support de couple avec des goupilles ou des vis, éventuellement un tube d'axe • Forme et design adaptés au fauteuil roulant • Kits : 2, 6, 13, 14, 15

Exigences techniques :

- Taille de la roue arrière 24"
- Angle de carrossage 0°
- Roulettes anti-bascule toujours recommandées pour raisons de sécurité

No-gos techniques :

- Lorsque le diamètre de l'axe de la roue manuelle existante ne mesure pas 12,7 mm, on peut commander à Sunrise Medical une roue manuelle compatible avec la nouvelle unité d'axe.
- La combinaison de la M90 avec un frein à tambour est impossible.