

# DUALE STEUERUNG

## Fahrmodus wechseln – mit einem Tastendruck.

Dank der intelligenten dualen Steuerung können Sie blitzschnell zwischen dem **Joystick- und dem Speed-Controller-Modus mit Greifreifensteuerung** umschalten – ganz einfach über die Mode/Profile-Taste. Passen Sie Ihren Fahrstil flexibel an Ihre Energie, Ihre Umgebung und Ihren persönlichen Vorlieben an – ganz ohne Hardwarewechsel.

Ein Rollstuhl, zwei Fahrweisen – maximale Freiheit auf Knopfdruck.

Der **kabellose Joystick** lässt sich ganz einfach abnehmen und genau dort platzieren, wo es für Sie am bequemsten ist.



| Fahrmodus                 | JOYSTICK                                                                                                                                                             | SPEED CONTROLLER MIT GREIFREIFENSTEUERUNG                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/Stop                | Drücken Sie den Joystick nach vorne, um loszufahren. Lassen Sie den Joystick los, um anzuhalten. Die Greifreifen beeinflussen die Geschwindigkeit nicht.                                                                                               | Tippen Sie den Joystick/Geschwindigkeitsregler an, um zu starten. Drücken Sie den Joystick/Geschwindigkeitsregler nach unten oder nutzen Sie die Greifreifen, um allmählich zu stoppen.                                                                                                                                                                         |
| Geschwindigkeitskontrolle | Drücken Sie den Joystick nach vorne oder hinten, um proportional zu beschleunigen oder langsamer zu werden.                                                                                                                                            | Tippen Sie den Joystick/Geschwindigkeitsregler an, um die Geschwindigkeit schrittweise zu erhöhen oder zu verringern – bis Stufe 5 in beiden Profilen.                                                                                                                                                                                                          |
| Lenkung                   | Bewegen Sie den Joystick in eine beliebige Richtung, um zu steuern.                                                                                                                                                                                    | <b>Steuern Sie manuell</b> über die Greifreifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempomat                  | <b>Drücken Sie den Joystick</b> bei gewünschter Geschwindigkeit <b>nach unten</b> , um den Tempomat zu aktivieren.<br><br><b>Steuern Sie mit dem Joystick.</b><br><br><b>Stoppen Sie durch Bewegen des Joysticks</b> oder erneutes Drücken nach unten. | Tippen Sie den Joystick/Geschwindigkeitsregler an, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.<br><br>Steuern Sie manuell mit den Greifreifen.<br><br>Stoppen Sie, indem Sie den Joystick/Geschwindigkeitsregler nach unten drücken, rückwärts tippen, bis die Geschwindigkeit auf Stufe null ist, oder indem Sie die Greifreifen greifen und halten. |
| Manueller Assistent       | –                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein leichter Schub, der nach dem Anhalten über die Greifreifen aktiviert wird und das Neupositionieren ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fahrprofile               | Auswahl per App oder Dual-Steuer-einheit (Indoor/Outdoor)                                                                                                                                                                                              | Auswahl per App oder Dual-Steuereinheit (Indoor/Outdoor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fahreinstellung           | Wählen Sie den Geschwindigkeitsbereich (Basis / Standard / Max) über die App aus.                                                                                                                                                                      | Wählen Sie den Geschwindigkeitsbereich (Basis / Standard / Max) über die App                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Einige Funktionen können je nach gewähltem Fahrmodus – Joystick oder Speed-Controller mit Greifreifensteuerung – unterschiedlich funktionieren. Wir empfehlen Nutzern, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um die Bedienung der Funktionen im gewählten Fahrmodus kennenzulernen, für eine sichere und komfortable Fahrt.



Mit der Modus-/Profil-Taste steuern Sie nicht nur den Fahrmodus, sondern auch die Fahrprofile, um die Leistung des M90 optimal an Ihre Vorlieben anzupassen. Die Modus-/Profilanzeige zeigt den gewählten Modus oder das gewählte Profil an.

Drücken und halten Sie die Taste, um die Steuerungsart Ihres M90 zu wechseln (Fahrmodus):

- **Joystick-Modus** (weisses LED)
- **Speed-Controller mit Greifreifensteuerung** (blaues LED)

Tippen Sie auf die Taste, um zwischen den Indoor- und Outdoor-Fahrprofilen zu wechseln:

- **Indoor (dauerhaft leuchtendes LED)** – für enges Wenden und sanfte Navigation in Innenräumen
- **Outdoor (blinkendes LED)** – für reaktionsschnelle Leistung auf unterschiedlichem Gelände