

Attende AS
Forusskogen 9
4033 Stavanger

Postboks 6
4064 Stavanger

www.attende.no


Telefon sentralbord 51 70 71 00
Telefaks 51 57 00 09



LYFT ELLER LUTA EJ
RULLSTOLEN MED HJÄLP
AV KÖRHANDTAGET!



Snabbkoppling
för justering av
körhandtagen.

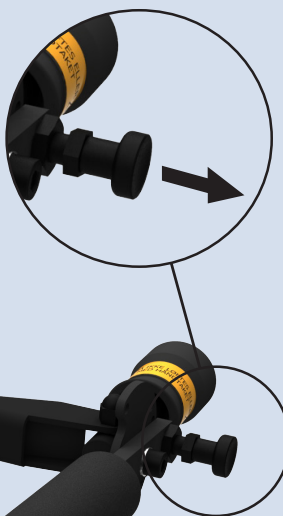

BAKÅT
FRAMÅT
HÖGER
VÄNSTER

BRUKSANVISNING LEDSAGARSTYRNING 51451

attende°

TEKNISK INFORMATION

Denna produkt är ett tillbehör avsett för elrullstolar och manuella rullstolar som är utrustade med ett drivaggregat. Syftet är att underlätta en ergonomisk och bekväm styrning för ledsagaren.

Enheten är robust konstruerad med komponenter av stål, aluminium och plast. Alla delar som riskerar att utsättas för korrosion är pulverlackerade för att ge en slitstark och tålig yta.

ANVÄNDNING AV LEDSAGARSTYRNINGEN

Körhandtagens funktion

Körhandtagen fungerar som en förlängning av styrenheten:


- Tryck handtagen nedåt för att köra framåt.
- Lyft handtagen uppåt för att köra bakåt.
- För handtagen åt vänster för att svänga höger, och åt höger för att svänga vänster.
- När handtagen släpps återgår de automatiskt till mittläget och rullstolen stannar.

Justerings av körhandtag

Styrningen är utrustad med snabbkoppling som gör det enkelt att justera körhandtagens höjd för optimal körkomfort. Körhandtagen kan även fällas ned i ett "parkeringsläge" för att spara utrymme vid transport eller förvaring. Detta minskar risken för skador.

Nödstopp

Nödstoppet ska alltid vara anslutet till laddningsuttaget när rullstolen används. Vid en nödsituation, tryck på nödstoppsknappen för att omedelbart bryta strömförsörjningen och stoppa rullstolen. För att återuppta körning, vrid nödstoppsknappen så att den återgår till sitt ursprungliga läge.

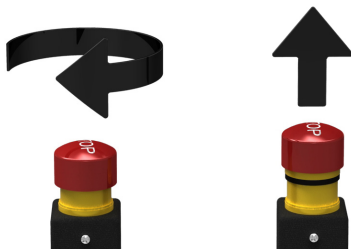

UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Kontrollera regelbundet att ledsagstyrningen fungerar korrekt.

VIKTIGT! Om styrningen inte fungerar som den ska, använd den inte! Kontakta din Hjälpmedelscentral/leverantör omedelbart.

- Kontrollera regelbundet att styrningen är ordentligt fastsatt på rullstolen.
- Kontrollera att alla skruvar på monteringsplattan, fästdetaljer och nödstopp är åtdragna.
- Byt ut skumgummit på körhandtagen om det är skadat.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI

Attende AS intygar att denna ledsagstyrning uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- EMC-direktiv 89/336/EEG och 92/31/EEG
- Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter
- Maskindirektiv 89/392/EEG
- Föreskrifter för elektrisk utrustning

CE-märkningen på enheten bekräftar att dessa krav är uppfyllda. Produkten omfattas av 2 års garanti mot tillverkningsfel, under förutsättning att:

- Monteringen sker med originalfästen från Attende AS.
- Nödstoppsbrytaren är korrekt installerad.

Vid onormalt slitage, exempelvis överbelastning om körhandtagen används som lyfthandtag, måste fjäderhuset (artikelnummer 41984) bytas ut.

VARNING! Använd aldrig körhandtagen/spak för att lyfta eller luta rullstolen över trottoarkanter eller liknande hinder. Detta kan skada interna komponenter och försämra enhetens funktion.