

MANDO DE CONTROL DUAL

Cambia el modo de conducción al instante

Gracias al **mando de control dual** inteligente, podrás cambiar sin esfuerzo entre los **2 modos de conducción** disponibles.

Presionando el botón de Modo/Perfil del mando, podrás decidir si quieres manejar la silla mediante el **Joystick multidireccional** o prefieres el **Controlador de Velocidad** con conducción mediante los aros, según tu energía, entorno y preferencias, y sin necesidad de modificar el hardware.

Retira y coloca fácilmente el **mando de control inalámbrico** allá donde te resulte más cómodo.



FUNCIÓN DEL MANDO DE CONTROL	JOYSTICK multidireccional 	CONTROLADOR DE VELOCIDAD con conducción mediante los AROS 
Start/Stop	Desplaza el joystick hacia adelante para iniciar. Suéltalo para detenerte. Los aros de empuje no afectan la velocidad.	Toca el controlador de velocidad para comenzar. Desliza hacia abajo el joystick bidireccional o usa los aros de empuje para detenerte gradualmente.
Control de velocidad	Desplaza el joystick hacia adelante o hacia atrás para acelerar o desacelerar de forma proporcional .	Toca el controlador de velocidad para aumentar o disminuir la velocidad por niveles, hasta el nivel 5 en ambos perfiles.
Dirección	Desliza el joystick en la dirección deseada para desplazarte.	Dirige la silla manualmente, usando los aros de empuje.
Control de Crucero	<p>Presiona el joystick hacia abajo a la velocidad deseada para activarlo.</p> <p>Dirige la silla moviendo el joystick a la derecha o izquierda.</p> <p>Para salir, desplaza el joystick hacia adelante/atrás o presiónalo nuevamente.</p>	<p>Toca el controlador de velocidad para ajustar el nivel de velocidad.</p> <p>Dirige manualmente con los aros de empuje.</p> <p>Detente presionando hacia abajo hasta reducir la velocidad a cero, o sujetando los aros de empuje.</p>
Asistencia manual	-	Un impulso suave que se activa tras detenerse, mediante los aros, facilitando el reajuste de posición.
Perfil de conducción Interiores/Exteriores	Seleccionable mediante la App del Empulse M90 o el mando de control .	Seleccionable mediante la App del Empulse M90 o el mando de control .
Configuración de velocidad	Elige el rango de velocidad (Básico / Estándar / Máx.) desde la App del Empulse M90 .	Elige el rango de velocidad (Básico / Estándar / Máx.) desde la App del Empulse M90 .

Algunas funciones pueden variar en función del modo de conducción seleccionado: Joystick multidireccional o Controlador de Velocidad con conducción manual mediante los aros. Recomendamos que los usuarios se tomen un momento para familiarizarse con el funcionamiento del modo de conducción elegido, para lograr un viaje fluido y seguro.



Con el botón de **Modo / Perfil**, puedes controlar tanto el **Modo de Conducción** como los **Perfiles de Conducción**, para optimizar el rendimiento del Empulse M90 según tus preferencias. El indicador LED de **Modo/Perfil** muestra el modo o perfil seleccionado.

Mantén pulsado para cambiar la forma en que controlas tu silla de ruedas (**Modo de Conducción**):

- **Modo Joystick Multidireccional** (LED blanco)
- **Modo Controlador de velocidad con conducción mediante los aros de empuje** (LED azul)

Toca para cambiar entre los **Perfiles de Conducción** de Interior y Exterior:

- **Interior (LED fijo)** – para giros más cerrados y una conducción fluida en interiores.
- **Exterior (LED intermitente)** – para un rendimiento ágil en terrenos variados.