

CONTROLO DUPLO

Alterne instantaneamente os modos de condução

Graças ao **controlo duplo inteligente**, pode alternar sem esforço entre os **2 modos de condução** disponíveis. Ao premir o botão Mode/Profile (Modo/Perfil) no controlador, pode decidir se pretende utilizar a cadeira de rodas com o **Joystick multidirecional** ou com o **Speed Controller** (controlador de velocidade) com direção em arco, dependendo da sua energia, ambiente e preferências, e sem necessidade de modificar o hardware.

Retire e coloque facilmente o **comando sem fios onde** lhe for mais conveniente.



FUNÇÃO DO BOTÃO DE CONTROLO	JOYSTICK multidirecional 	CONTROLADOR DE VELOCIDADE com condução por meio dos AROS 
Ligar/Desligar	Empurre o joystick para frente para iniciar. Solte-o para parar. Os aros de propulsão não afetam a velocidade.	Toque o controlador de velocidade para começar. Deslize o joystick bidirecional para baixo ou use os aros de propulsão para parar gradualmente.
Controle de velocidade	Deslize o joystick para frente ou para trás para acelerar ou desacelerar de forma proporcional .	Toque o controlador de velocidade para aumentar ou diminuir a velocidade por níveis, até o nível 5 em ambos os perfis.
Direção	Deslize o joystick na direção desejada para se deslocar.	Direcione a cadeira manualmente , usando os aros de propulsão.
Controle de Cruzeiro	Pressione o joystick para baixo na velocidade desejada para ativar.	Toque o controlador de velocidade para ajustar o nível de velocidade.
	Direcione a cadeira movendo o joystick para a direita ou para a esquerda.	Direcione manualmente com os aros de propulsão.
	Para sair, mova o joystick para frente/trás ou pressione-o novamente.	Pare pressionando para baixo até reduzir a velocidade a zero, ou segurando os aros de propulsão.
Assistência manual	-	Um impulso suave que é ativado após a parada, por meio dos aros, facilitando o reajuste de posição.
Perfil de condução Interiores/Exteriores	Selecionável através do App do Empulse M90 ou do controle remoto .	Selecionável através do App do Empulse M90 ou do controle remoto .
Configuração de velocidade	Escolha o modo de velocidade (Básico / Standard / Máx.) pella App do Empulse M90 .	Escolha o modo de velocidade (Básico / Standard / Máx.) pella App do Empulse M90 .

Algumas funções podem variar conforme o modo de condução selecionado: joystick multidirecional ou controlador de velocidade com condução manual pelos aros. Recomendamos que os usuários reservem um momento para se familiarizarem com o funcionamento do modo de condução escolhido, a fim de garantir uma viagem suave e segura.



◀ Com o botão de Modo / Perfil, você pode controlar tanto o Modo de Condução quanto os Perfis de Condução, para otimizar o desempenho do Empulse M90 de acordo com suas preferências. O indicador LED de Modo/Perfil mostra o modo ou perfil selecionado.

Mantenha pressionado para mudar a forma como você controla sua cadeira de rodas (Modo de Condução):

- **Modo Joystick Multidirecional (LED branco)**
- **Modo Controlador de velocidade com condução pelos aros de propulsão (LED azul)**

Toque para alternar entre os Perfis de Condução Interno e Externo:

- **Interno (LED fixo)** – para curvas mais fechadas e condução suave em ambientes internos.
- **Externo (LED intermitente)** – para desempenho ágil em terrenos variados.