

GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO



Este guia vai ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu Empulse M90 nas suas aventuras diárias. Para mais detalhes e um guia completo de instalação, consulte o manual do utilizador.



Na SUNRISE MEDICAL nos preocupamos com a sua segurança. Recomendamos que leia o manual de instruções detalhadas sobre o uso seguro e as orientações de manutenção do Empulse M90.

CALIBRAÇÃO DO EMPULSE M90

As rodas devem ser calibradas durante a instalação inicial ou ao serem colocadas em uma cadeira de rodas diferente.

O processo de calibração ajusta automaticamente os níveis de inclinação e subida do Empulse M90 de acordo com as características da cadeira de rodas, garantindo um desempenho ideal e uma experiência de condução personalizada para o usuário.

INSTRUÇÕES DE CALIBRAÇÃO

IMPORTANTE: Não mova a cadeira durante o processo.

1. Certifique-se de que a cadeira de rodas está travada ativando os travões e remova a bateria da roda Empulse M90.
2. Mantenha pressionado qualquer um dos dois botões da roda enquanto reinserir a bateria.
3. Quando as luzes ficarem **LARANJAS**, solte o botão.
4. Espere até que as luzes mudem para branco e depois para **VERDE**.
5. Quando as luzes estiverem **VERDES**, remova e reinsira a bateria. A roda emitirá um bip.
6. Repita os passos de 1 a 5 na outra roda.
7. Remova ambas as rodas, troque-as de lado e **repita os passos de 1 a 6**.

NOTA

Recalibrar as rodas é o primeiro passo recomendado diante de qualquer problema com o Empulse M90.

PASO 3



PASO 5



PASO 7



INICIAR / PARAR

Ao instalar as baterias, as rodas ligam-se automaticamente e começam a procurar o comando através de uma conexão Bluetooth (BTE).

NOTA

Os botões nas rodas Empulse M90 são utilizados como indicadores e para diagnóstico de falhas, não como botão de ligar/desligar (On/Off).

CONTROLE REMOTO DUAL

O Empulse M90 incorpora **dois modos de condução**:



CONTROLADOR DE VELOCIDADE

Um joystick bidirecional que permite controlar apenas a velocidade. O controle da direção é feito pelos aros.



JOYSTICK MULTIDIRECCIONAL

Controle total de direção e velocidade (como em uma cadeira de rodas elétrica).

CONECTANDO O COMANDO DE CONTROLE

Pressione uma vez o botão de ligar do comando de controle.

O indicador LED de alimentação (2) piscará em branco enquanto estiver conectando (isso pode levar até 5 segundos).

Um vez conectado vai ouvir um sinal sonoro e o LED de alimentação (2) ficará aceso em verde fixo, sem piscar.

Com as rodas conectadas, mova o joystick para frente para entrar no modo de condução. Ambas as rodas se travarão na posição com um clique, e o LED de status (3) ficará verde quando o sistema estiver pronto para uso.



2- INDICADOR LED DE LIGAÇÃO

- CONECTADO, BLOQUEADO
Piscando = Aguardando conexão
- CONTROLE REMOTO ATIVO
Carga = >15%
- CARGA <15%
Piscando = Carga <5%
- BATERIA BAIXA
Carregue dispositivo
- CARREGADO
Piscando = Carregando

3- INDICADOR LED DE STATUS

- EIXOS DAS RODAS NÃO CONECTADOS
- EIXOS DAS RODAS CONECTADOS
Piscando = Controle de cruiseiro ativado
- Proteção térmica 1 –
Bloqueio modo exterior
- Proteção térmica 2 – Controle remoto
bloqueado. Travão ativo por 5 seg.
- Proteção térmica 3 –
Bloqueio do sistema.
- CARREGADO
Piscando = Carregando

4- INDICADOR LED DE MODO / PERFIL

- JOYSTICK MULTIDIRECIONAL
Fixo = Perfil para ambientes internos
Piscando = Perfil para ambientes externos
- CONTROLADOR DE VELOCIDADE COM CONDUÇÃO PELOS AROS
Fixo = Perfil para ambientes internos
Piscando = Perfil para ambientes externos

FUNÇÃO	JOYSTICK multidirecional	CONTROLADOR DE VELOCIDADE com condução pelos AROS
INICIAR / PARAR	Deslize o joystick para frente para iniciar. Solte-o para parar. Os aros de empurrar não afetam a velocidade.	Toque no controlador de velocidade para começar. Deslize o joystick bidirecional para baixo ou use os aros de empurrar para parar gradualmente.
CONTROLE DE VELOCIDADE	Deslize o joystick para frente ou para trás para acelerar ou desacelerar proporcionalmente .	Toque no controlador de velocidade para aumentar ou diminuir a velocidade por níveis, até o nível 5 em ambos os perfis.
DIREÇÃO	Deslize o joystick na direção desejada para se mover.	Direcione a cadeira manualmente, usando os aros de empurrar.
CONTROLE DE CRUZEIRO	Pressione o joystick para frente até atingir a velocidade desejada e, em seguida, pressione-o para baixo para ativar o controle de cruzeiro. Direcione a cadeira movendo o joystick para a direita ou esquerda. Para sair, deslize o joystick para frente/para trás ou pressione-o novamente.	Deslize o joystick do controlador de velocidade para frente ou para trás para ajustar o nível de velocidade. Direcione manualmente com os aros de empurrar. Saia da função pressionando para baixo o joystick do controlador de velocidade ou segurando os aros de empurrar.
ASSISTÊNCIA MANUAL	N/A	Um impulso suave que é ativado após a paragem através dos aros, facilitando o reajuste da posição.
PERFIL DE CONDUÇÃO Interiores/ Exteriores	Selecionável através do app do Empulse M90 ou do controle remoto .	Selecionável através do app do Empulse M90 ou do controle remoto .
CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADE	Escolha a faixa de velocidade (Básico / Standard / Máximo) pelo app do Empulse M90 .	Escolha a faixa de velocidade (Básico / Standard / Máximo) pelo app do Empulse M90 .

RECOMENDAÇÕES PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA


Comece devagar. Recomendamos as rodas anti volteio ao utilizar o Empulse M90.

Inicie o uso em ambientes internos, em um espaço amplo e seguro. Pratique travar em pontos específicos, fazer curvas parado e fazer curvas em movimento.

INCLINAÇÕES

Comece em numa inclinação moderada, com um grau suave e espaço suficiente no final para parar com segurança. Evite fazer curvas logo após terminar a descida. O Empulse M90 garante uma travagem eficaz e controle seguro durante a descida.

Ajuste sua postura para manter o equilíbrio e evitar o risco de capotamento. Para subir uma inclinação, incline-se para frente; para descer, incline-se para trás. Certifique-se de que seu tronco esteja bem apoiado.

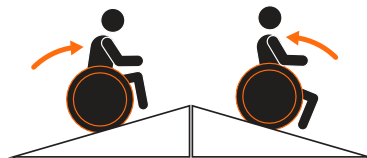

FAÇA UM SCANNER PARA VER VÍDEOS DE CONFIGURAÇÃO E USO

Ou descarregue para ver este documento em OUTROS IDIOMAS



Escanear para ver este documento em **ESPAÑOL**.

Scannez pour afficher ce document en **FRANÇAIS**.

Scannen, um dieses Dokument auf **DEUTSCH** angezeigt zu bekommen.

Inquadra qui per vedere il documento in **ITALIANO**.

Scan om dit document in het **NEDERLANDS** te bekijken.



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola 4 I
48498, Arrankudiaga, Vizcaya, ESPANHA
Tel: +34 902 14 24 34
Fax: +34 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

Empulse