

Empulse M90

Guia de compatibilidade



04/2025

Modelo de cadeira de rodas	Kit de Acoplamento
Sunrise Medical	
IRIS	6
QS5 X	4
Neon ²	14
Xenon ²	14
SR45	6
Helium	2
Nitrum	2
Easy 300	4
Life R	4
Life	4
Argon ²	15
Zippie IRIS	6
Simba	15
Youngster 3	4
Helix ²	12
Rubix ²	4
Basix ²	4
Parix ²	5
Style X	4
Style X Ultra	4

Nota: Esta lista enumera os modelos de cadeiras de rodas em que o Empulse M90 pode ser montado. No entanto, factores como a forma do quadro, o centro de gravidade da cadeira de rodas, o tamanho das rodas e a profundidade do assento podem influenciar a montagem. Por conseguinte, é essencial testá-la e ter 100% de certeza. Procure aconselhamento junto do seu fornecedor (o fornecedor ortopédico) se tiver dúvidas.

Empulse M90



Informação de montagem

- Duas placas devem ser fixadas de forma permanente ao suporte do eixo, sem afetar a utilização da cadeira de rodas manual.
- A placa do lado esquerdo da cadeira de rodas contém um íman e deve ser montada apontando para a frente ou para o topo da cadeira de rodas.



- A placa do lado direito não contém um íman e deve ser instalada virada para a parte traseira ou inferior da cadeira.

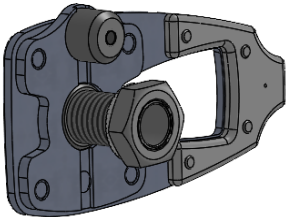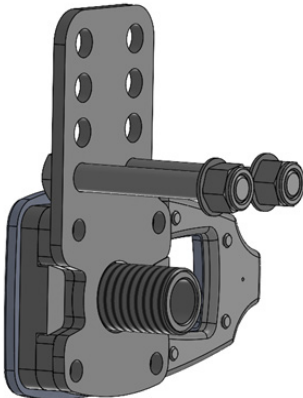

Cadeiras dobráveis com placas de eixo	Cadeiras rígidas com tubo de eixo
Kits de exemplo, kit exato de acordo com o modelo da cadeira de rodas  • Solução de fixação com pino para suporte de binário. • Diâmetro e forma adaptados à placa de eixo específica de cada cadeira de rodas. • Kits: 4, 5, 12.	 • Suporte de apoio com cavilhas ou parafusos, eventualmente com casquilho de eixo. • Forma e desenho adaptados à cadeira de rodas específica. • Kits: 2, 6, 13, 14, 15

Requisitos técnicos:

- Tamanho da roda 24"
- Camber 0°
- Rodas anti volteio de segurança

Restrições técnicas:

- Se o diâmetro do eixo da roda não for igual a 12,7 mm, existe a possibilidade de encomendar uma roda manual à Sunrise Medical que será compatível com o novo conjunto de eixos.
- Não é possível combinar o Empulse M90 com travão de acompanhante / tambor.