



PRIMO

Il Mio Primo Sistema di Postura



Sistema di Posizionamento Notturno

Per la gestione della postura e delle attività nelle 24h

Non è mai troppo presto per iniziare: il posizionamento nei primi anni di vita

Le equipe riabilitative sostengono l'importanza dell'intervento precoce coinvolgendo le famiglie nell'addestramento al posizionamento di bambini molto piccoli, con stimoli sensoriali positivi e con il gioco.

Primo offre una soluzione per la posizione sdraiata sia di giorno che di notte.

Perchè dare supporto in posizione sdraiata?

Nei primi anni di vita imparare a contrastare la forza di gravità in posizione sdraiata può rappresentare una sfida. Un supporto nel mantenere una postura simmetrica può essere di grande aiuto per imparare ad assumere la posizione sdraiata corretta. Un corretto posizionamento posturale è sempre più riconosciuto come parte di un processo riabilitativo, volto a rendere più facile la movimentazione manuale, a migliorare le abilità e le funzionalità del bambino, aiutando la terapia e il gioco.

Risultati di successo

Lavoriamo in stretta collaborazione con terapeuti, famiglie e neonati, fornendo con successo i nostri sistemi Symmetrisleep®. Con una grande esperienza alle spalle, i nostri sistemi di supporto per il posizionamento a letto ci mettono in contatto ogni giorno con persone che ricercano miglioramenti nel comfort, nella postura, nel range di movimento e nella riduzione del tono.

Dove posso usare il mio Primo?

Symmetrisleep® Primo può essere usato in un lettino, in una culla, in una culla portatile o anche sul pavimento per la terapia diurna e per giocare.





SEMPLICE

Il sistema Primo è semplice e facile da usare: aprite la cerniera della borsa e potrete iniziare a utilizzarlo immediatamente. Applicatelo su qualunque superficie piana dalla quale il bambino non rischi di cadere. E' sufficiente che adagiate il vostro bambino sul lenzuolo CoolOver e siete pronti ad utilizzarlo.



CONFORTEVOLE

Abbiamo utilizzato la nostra esclusiva tecnologia per la regolazione della temperatura, CoolOver, e materiali per la riduzione della pressione, per essere sicuri che il sistema Primo sia davvero confortevole per un bimbo molto piccolo.



PORTATILE

Primo è compatto, leggero e viene fornito in una borsa tutto in uno, pronto per essere portato ovunque desideriate.



IGIENICO

Il sistema Primo è facile da tenere pulito. Tutti i tessuti possono essere lavati in lavatrice e asciugati a bassa temperatura. La base, i cuscini e i cunei sono facili da pulire.




SICURO

Infiammabilità, traspirabilità, compattezza e materiale Airflow

Conforme alla normativa Furniture and Furnishings (FIRE SAFETY) regulations 2010.

Conforme alle norme EN597-2, BS1877-8 1974, BS7177, BS6807 e BS4578.



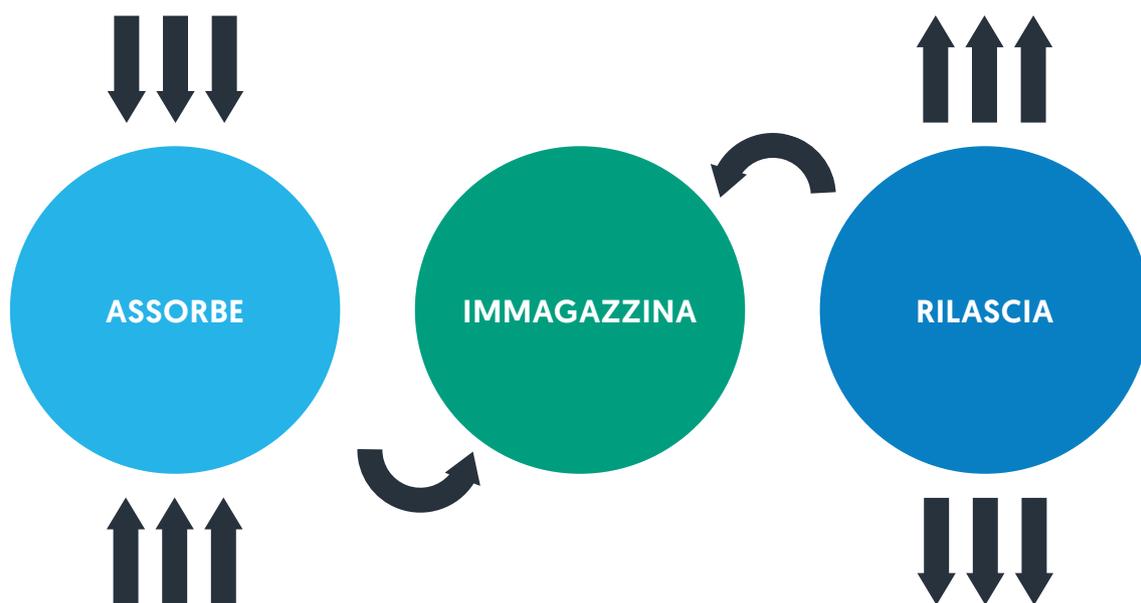

Primo e la regolazione della temperatura

Se la temperatura della pelle inizia a salire, le minuscole capsule delle nostre lenzuola Coolover TR3 iniziano ad assorbire il calore, raffreddando il bambino; se la temperatura della pelle inizia a scendere troppo, il calore viene rilasciato nuovamente al bambino, offrendo una regolazione attiva della temperatura.


Se il bambino continua a sudare anche a temperatura normale, la nostra speciale trama allontana l'umidità dalla pelle e la disperde per favorirne l'evaporazione: questo sistema di traspirazione superiore aiuta a mantenere la pelle asciutta per il massimo comfort.


Che cosa c'è nella borsa?

Primo si presenta con una borsa che, aprendosi, diventa il materassino di base del sistema. Può essere fissato a una culla o a un lettino con le cinghie di fissaggio in dotazione. Sulla parte superiore del materasso è fissato un lenzuolo in velcro, sopra il quale viene posizionato il lenzuolo Coolover TR3.

Nella borsa si trovano anche diversi accessori morbidi per il supporto. Questi possono essere aggiunti o rimossi quando il bambino è sdraiato sul sistema per posizionarlo nel modo desiderato, offrendogli un supporto morbido e stabile, ma non costrittivo.

Poiché i supporti sono tenuti in posizione dal velcro, non si spostano e non è necessario riposizionarli finché non lo si desidera, riducendo così i motivi di disturbo.

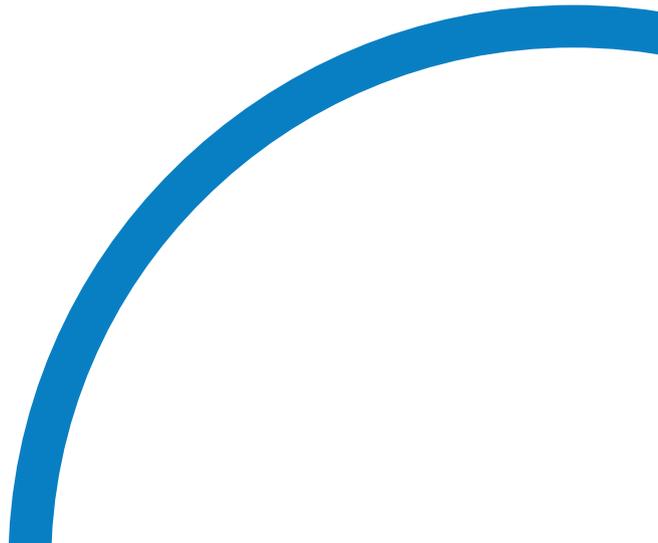

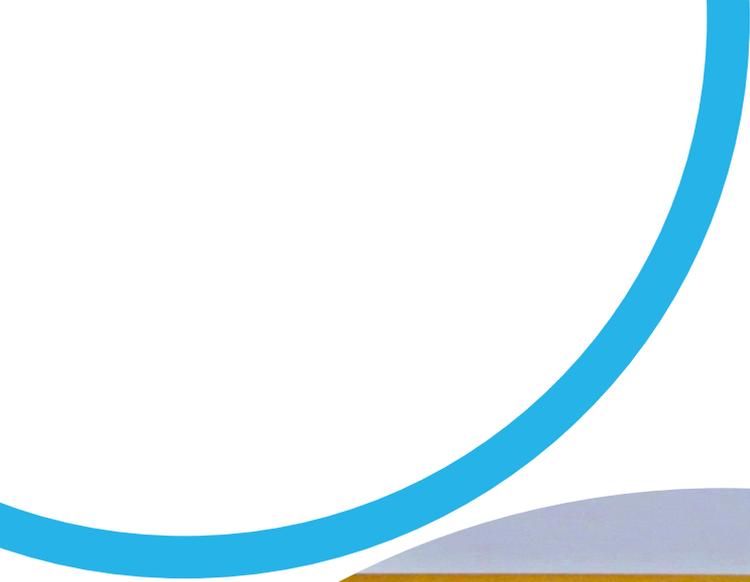

CONTINUITÀ - IL PASSAGGIO A SYMMETRISLEEP

“

Mio figlio Jason ora ha quasi 19 anni e ha iniziato a usare Sleep System fin dai primi momenti. Sleep System è stato l'unico dispositivo posturale che abbiamo potuto utilizzare per lui, sia che fosse tranquillo o agitato, che si sentisse bene o no. Posso dire sinceramente che Sleep System è stato il miglior sistema posturale che abbiamo avuto per Jason, senza eccezioni.

”

TESTIMONIANZA DI UN GENITORE



“

Preparai uno Sleep System per un bambino di 8 mesi. I suoi problemi erano dovuti a ischemia cerebrale ipossica perinatale, ritardo nello sviluppo con crisi epilettiche neonatali e più tardi fu fatta una diagnosi di paralisi cerebrale grave con tetraplegia asimmetrica.

Presentava una grave ipertonìa in tutti e quattro gli arti. Presentava una marcata postura asimmetrica e un notevole ATNR (riflesso tonico asimmetrico del collo), oltre a una forte spinta in estensione.

Lo Sleep System venne inserito in un programma per la gestione della postura nelle 24 ore. Attualmente, all'età di quattro anni, il bimbo frequenta una scuola per bambini con gravi difficoltà nell'apprendimento. Non presenta più un ATNR nè una spinta in estensione.

Sono davvero molto soddisfatta di questo sistema di posizionamento notturno. Ritengo che averlo introdotto così precocemente abbia avuto una grande influenza nel rendere simmetrica la postura di questo bimbo. Sicuramente continuerà ad utilizzare questo sistema di posizionamento notturno e speriamo che continui a mantenere una postura simmetrica.

”

CYNTHIA TILLEY

Fisioterapista per bambini

Servizio Clienti Sunrise Medical

Tel: +39 0523 573111



www.SunriseMedical.it



info@sunrisemedical.it

www.sunrisemedical-group.com

Helping Hand ha a cuore la vostra sicurezza. Leggere il manuale d'uso per conoscere le istruzioni d'uso e le linee guida per la sicurezza. In linea con la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, Helping Hand si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Per informazioni aggiornate, visitare il sito www.SunriseMedical.it.

**Per richiedere una prova, una dimostrazione gratuita
o per maggiori informazioni, contattare:**

info@sunrisemedical.it
+39 0523 573111

James Leckey Design Limited ha compiuto ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo documento siano accurate e aggiornate. Al momento della stampa, le informazioni presentate sono accurate al meglio delle conoscenze dell'azienda. Tuttavia, James Leckey Design Limited non può assumersi la responsabilità di eventuali modifiche alle informazioni sui prodotti dopo la stampa.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
www.SunriseMedical.it



Rev1