

QUICK START

KALIBRATIEPROCES AANDRIJFWIELEN

Deze **QUICK START** helpt bij het **kalibratieproces** van de M90.
Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de gebruikershandleiding.



SUNRISE MEDICAL STELT VEILIGHEID VOOROP
Lees daarom altijd de gebruikershandleiding voor de
veiligheidsinstructies en onderhoudsrichtlijnen.

KALIBREREN VAN DE M90

Kalibreer de aandrijfwielen tijdens de eerste installatie of wanneer je de aandrijfwielen op een andere rolstoel monteert.

Tijdens het kalibratieproces wordt de hellingswaarden van de M90 ingesteld op de specifieke rolstoelconfiguratie. Dit zorgt voor optimale rijprestaties voor de rolstoelgebruiker.


KALIBRATIEPROCES

BELANGRIJK: Verplaats de rolstoel niet tijdens het kalibratieproces.

1. Zet de rolstoel vast op de rem en verwijder de accu uit het aandrijfwiel van de M90.
2. Houd een van de knoppen op het aandrijfwiel ingedrukt terwijl je de accu opnieuw plaatst.
3. Laat de knop los zodra de lampjes **ORANJE** worden.
4. Wacht tot de lampjes eerst **WIT** en daarna **GROEN** worden.
5. Wanneer de lampjes **GROEN** zijn, verwijder en plaats de accu opnieuw. Het aandrijfwiel geeft een piepton.
6. **Herhaal stap 1 t/m 5** voor het andere aandrijfwiel.
7. Verwijder beide aandrijfwielen, verwissel ze van kant en **herhaal stap 1 t/m 6**.
8. Het kalibratieproces is succesvol afgerond. Dankzij deze kalibratie maakt het niet uit aan welke zijde (links of rechts) het aandrijfwiel wordt (terug)geplaatst.

OPMERKING

De eerste stap bij het oplossen van problemen met de M90 is altijd het opnieuw kalibreren van de aandrijfwielen.

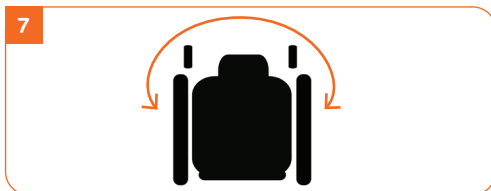



Scan de code met de camera van je smartphone om de service video's te bekijken.