

M90

COMBINATIEOVERZICHT



VOUWFRAME ROLSTOELN	VASTFRAME ROLSTOELN
BREEZY BasiX ²	QUICKIE Argon ²
BREEZY RubiX ²	QUICKIE Helium
BREEZY Ibis	QUICKIE Nitrum
QUICKIE Life	QUICKIE Nitrum Hybrid
QUICKIE Life R	RGK*
QUICKIE Life T	ZIPPIE Simba
QUICKIE Life RT	
QUICKIE Neon ²	
QUICKIE QS5 X	
QUICKIE Xenon ²	
QUICKIE Xenon ² Hybrid	
QUICKIE Xenon ² SA	
ZIPPIE Youngster 3	

Opmerking: Bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de M90 gemonteerd kan worden. Echter de vorm van het frame, de zwaartepuntinstelling, wielmaat zijn van invloed. Daarnaast is ook een recht stuk framebuis van minimaal 30 mm nodig voor het bevestigen van de joystickhouder. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het combinatieoverzicht toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant. Op de volgende pagina staat informatie m.b.t. de montage en combinatiecheck. Zie prijslijst voor alle no-go's met de rolstoelen van Sunrise Medical.

***De M90 is allen mogelijk met nieuwe RGK rolstoelen die besteld moeten worden, neem hiervoor contact met ons op.**


M90

MONTAGE

De M90 past op de meest voorkomende handbewogen rolstoelen met speciaal ontworpen montageplaten.

MONTAGEPLATEN

Twee montageplaten worden blijvend op de rolstoel gemonteerd, waarbij het nog steeds mogelijk is om de standaard achterwielen te gebruiken.

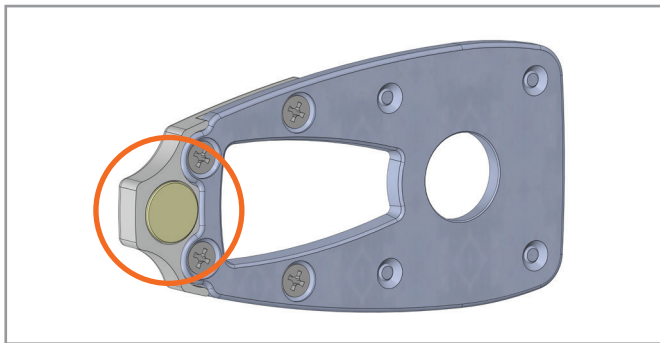

MONTAGEPLAAT LINKERZIJDE ROLSTOEL

De montageplaat aan de linkerzijde bevat een magneet die zo gemonteerd moet worden dat deze naar de voorkant of naar boven wijst.




MONTAGEPLAAT RECHTERZIJDE ROLSTOEL

De montageplaat aan de rechterzijde bevat geen magneet en moet zo gemonteerd worden dat deze naar de achterkant of naar beneden wijst.

MONTAGE OP ASPLAAT


VOORBEELDSET MONTAGEPLAAT

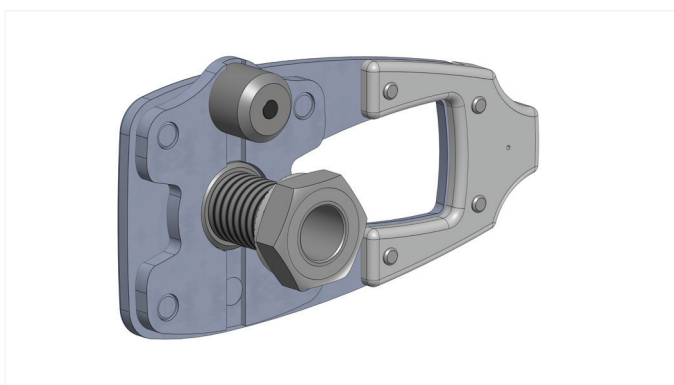

- » Montage oplossing met steunpen
- » Diameter en vorm afgestemd op de rolstoel specifieke asplaat

MONTAGE OP ASBUIS

VOORBEELDSET MONTAGEPLAAT

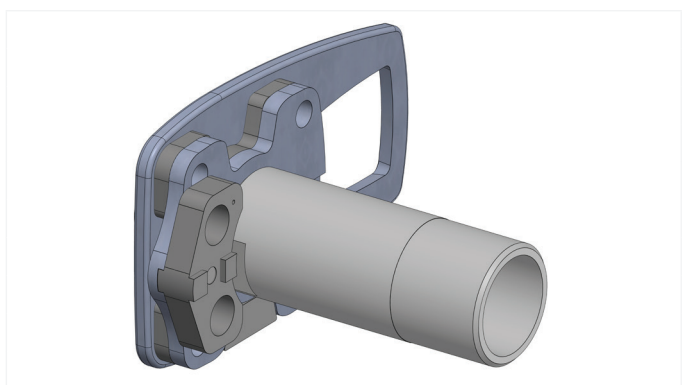

- » Steunplaat met steunpen of bouten, eventueel met ashuls
- » Vorm en ontwerp afgestemd op specifieke rolstoel

M90

VASTFRAME EN VOUWFRAME

COMBINATIECHECK IN 5 STAPPEN

De Empulse M90 is mogelijk met vastframe en vouwframe rolstoelen met een vast voorframe of wegzwenkbare beensteunen. Om de compatibiliteit van de Empulse M90 met je rolstoel te garanderen, volg dan onderstaande stappen.

1: COMBINATIEOVEREENKOMST

Controleer op de website van [sunrisemedical.be](https://www.sunrisemedical.be), onder **professional support » combinatieovereenkomst** of de combinatie tussen de M90 en de rolstoel is goedgekeurd.

2: MAAT ACHTERWIELEN

De M90 is mogelijk op rolstoelen met een 24" wielmaat.

3: CAMBER-INSTELLING

De M90 is mogelijk op rolstoelen met een camber van 0°.

4: TECHNISCHE AANBEVELINGEN

De volgende rolstoelinstellingen en opties zijn vereist:

- » Wielmaat 24"
- » Wielcamber 0°
- » Anti-tipsysteem voor de veiligheid
- » Zorg voor voldoende ruimte, tenminste 30 mm, aan de voorkant van het rolstoelframe om de joystickhouder op het frame te kunnen bevestigen.

5: ALGEMENE NOGO'S


Controleer de rolstoel of deze is uitgerust is met een van de volgende onderdelen, omdat ze voor een NoGo zorgen:

- » Carbon asbuis
- » Achtervering
- » Kantelverstelling (QUICKIE Life i Sedeo Tilt)
- » Als de asdiameter van de bestaande achterwielen niet gelijk zijn aan 12,7 mm, kan er een nieuw achterwiel besteld worden dat mogelijk is met de nieuwe asplaatmontage om de bestaande achterwielen te gebruiken.
- » Combinatie van trommelremmen met de M90 is niet mogelijk
- » Lichtgewicht asadapters (QUICKIE Xenon², QUICKIE Xenon² SA, QUICKIE Neon²)
- » Bestaande rolstoelmodellen van RGK
- » Specifieke zijkanten en armsteunen, zie tabellen

M90


I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

QUICKIE QS5 X DESKZIJKANTEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT				
		25 MM	40 MM	50 MM	60 MM	75 MM
	370					
	380					
	390					
	400					
	410					
	420					
	430					
	440					
	450					
	460					
	470					
	480					
	490					
500						
» Desk zijkanen met armlegger (250 mm)	QSC040002					
» Desk zijkanen met armlegger (310 mm)	QSC040004					


QUICKIE QS5 X US-STYLE ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT				
		25 MM	40 MM	50 MM	60 MM	75 MM
	370					
	380					
	390					
	400					
	410					
	420					
	430					
	440					
	450					
	460					
	470					
	480					
	490					
500						
» US-style armsteunen met armlegger (250 mm)	QSC040050					
» US-style armsteunen met armlegger (360 mm)	QSC040051					

M90

I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

QUICKIE QS5 X SINGLE POST ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT				
		25 MM	40 MM	50 MM	60 MM	75 MM
	370					
	380					
	390					
	400					
	410					
	420					
	430					
	440					
	450					
	460					
	470					
	480					
	490					
	500					


» Single Post armsteunen met armlegger (330 mm) QSC040052

QUICKIE QS5 X ALUMINIUM ZIJKANTEN	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT				
		25 MM	40 MM	50 MM	60 MM	75 MM
	370					
	380					
	390					
	400					
	410					
	420					
	430					
	440					
	450					
	460					
	470					
	480					
	490					
	500					


» Aluminium zijkant zonder spatbord QSC040102
 » Aluminium zijkant met spatbord QSC040103

M90

I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

QUICKIE QS5 X CARBON ZIJKANTEN	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT				
		25 MM	40 MM	50 MM	60 MM	75 MM
	370					
	380					
	390					
	400					
	410					
	420					
	430					
	440					
	450					
	460					
	470					
	480					
	490					
	500					


» Carbon zijkant met spatbord QSC040104


QUICKIE QS5 X KUNSTSTOF ZIJKANTEN	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT				
		25 MM	40 MM	50 MM	60 MM	75 MM
	370					
	380					
	390					
	400					
	410					
	420					
	430					
	440					
	450					
	460					
	470					
	480					
	490					
	500					

» Kunststof zijkant QSC040107

M90


I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

QUICKIE LIFE DESKZIJKANTEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	430				
	440				
	460				
	470				
	480				
	490				
	490				
	500				
» Desk zijkant met armlegger (250 mm)	LFE040002				
» Desk zijkant met armlegger (310 mm)	LFE040004				

QUICKIE LIFE US-STYLE ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	430				
	440				
	460				
	470				
	480				
	490				
	490				
	500				
» US-style armsteunen met armlegger (250 mm)	LFE040050				
» US-style armsteunen met armlegger (360 mm)	LFE040051				

M90


I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

QUICKIE LIFE SINGLE POST ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	430				
	440				
	460				
	470				
	480				
	490				
	500				


» Single Post armsteunen met armlegger (330 mm) LFE040052

M90

I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

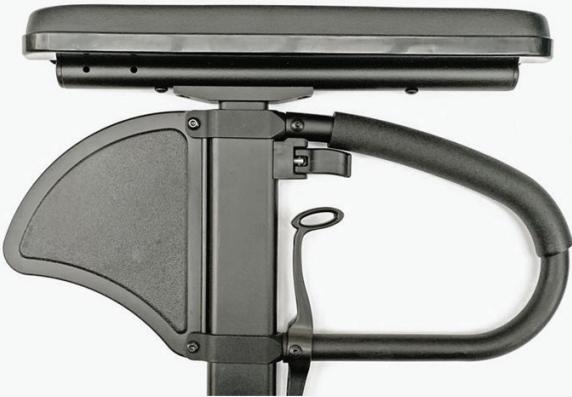QUICKIE LIFE R US-STYLE ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	390				
	400				
	420				
	430				
	440				
	450				
	460				


» US-style armsteunen met armlegger (250 mm)	LRF040050
» US-style armsteunen met armlegger (360 mm)	LRF040051


QUICKIE LIFE R SINGLE POST ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	390				
	400				
	420				
	430				
	440				
	450				
	460				

» Single Post armsteunen met armlegger (330 mm)	LRF040052
---	-----------

M90


I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

QUICKIE LIFE T DESKZIJKANTEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	430				
	440				
	460				
	470				
	480				
	490				
	490				
	500				
» Desk zijkant met armlegger (250 mm)	LFT040002				
» Desk zijkant met armlegger (310 mm)	LFT040004				

QUICKIE LIFE T US-STYLE ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	430				
	440				
	460				
	470				
	480				
	490				
	490				
	500				
» US-style armsteunen met armlegger (250 mm)	LFT040050				
» US-style armsteunen met armlegger (360 mm)	LFT040051				

M90

I.C.M. ZIJKANTEN EN ARMLEGGERS

QUICKIE LIFE T SINGLE POST ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS	ZITHOOGTE- ACHTER (MM)	ZWAARTEPUNT			
		23 MM	43 MM	63 MM	83 MM
	430				
	440				
	460				
	470				
	480				
	490				
	500				

» Single Post armsteunen met armlegger (330 mm) LFT040052