

QUICK START GUIDE



Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at nyde din M90. Se din brugervejledning for mere detaljerede instruktioner, installations-guide eller lokale kontaktoplysninger.

E | m90

SUNRISE MEDICAL BEKYMRER SIG OM DIN SIKKERHED.
Læs venligst din brugervejledning for at få instruktioner om sikker betjening og vedligeholdelse. Læs venligst din brugervejledning for at få instruktioner om sikker betjening og vedligeholdelse.

SCAN HER FOR INDSTILLINGS- OG BRUGER-VIDEOER



POWER ON/OFF

Når batterierne er sat i, tændes hjulene. Hjulene vil automatisk søge efter controlleren via en BTE-forbindelse.

OBS Knapperne på M90-hjulene bruges som indikatorer og til fejlfinding, ikke som tænd/sluk.

TILSLUTNING AF CONTROLLEREN

Tryk én gang på controllerens tænd/sluk-knap.

Power indikator-LED'en (2) blinker hvidt, mens der oprettes forbindelse. (Det kan tage op til 5 sekunder.)

Når forbindelsen er oprettet, høres et bip, og power indikatoren (2) lyser grønt.

Når hjulene er tilkoblet, skal du holde joysticket fremad for at gå i køretilstand. Begge hjul låses på plads med et klik og statuslampen lyser grønt, når den er klar.

TIPS TIL SIKKER KØRSEL

Start langsomt. Vi anbefaler anti-tip, når man bruger M90.

Start i indendørs køretilstand i sikre, åbne omgivelser. Øv dig i at stoppe ved bestemte punkter, dreje mens du står stille og dreje mens du er i bevægelse.

BAKKER

Begynd på en moderat bakke med en gradvis hældning og en sikkert afkørselsareal uden skarpe sving. M90 sørger for bremsekontrol og kontrol gennem hele kørslen.

Juster din kropspostion for at bevare balancen og undgå at tippe - læn dig fremad for at komme op eller bagud for at komme ned. Sørg for, at din overkrop er ordentligt understøttet, hvis det er nødvendigt.

Scan QR-koden for at se dette dokument på spansk, fransk, tysk, italiensk eller hollandsk.


Escanea para ver este documento en ESPAÑOL.

Scannez pour afficher ce document en FRANÇAIS.

Scannen, um dieses Dokument auf DEUTSCH angezeigt zu bekommen.

Inquadra qui per vedere il documento in ITALIANO.

Scan om dit document in het NEDERLANDS te bekijken.

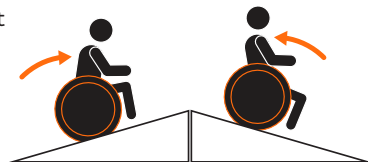

DIN CONTROLLER

CONTROLLER POWER

QUICK-PRESS TIL AT
LÅSE OP OG I



2- CONTROLLER STRØMINDIKATOR

- TILSLUTTET, LÅST
Blinkende = Afventer forbindelse
- CONTROLLER AKTIV
Opladning = > 15%
- OPLAD < 15%
Blinkende = Opladning < 5%
- LAVT BATTERI
Kan ikke benyttes
- OPLADET
Blinkende = Oplader


3- STATUSINDIKATOR

- HJULNAV ER IKKE AKTIVERET
- HJULNAV AKTIVERET
Blinkende = Cruise Control aktiveret
- Termisk Beskyttelse 1 -
Låsning af udendørs tilstand
- Termisk Beskyttelse 2 - Controller
Låst. Aktiv bremsning i 5 sekunder
- Termisk Beskyttelse 3 -
Systemspærring
- OPLADET
Blinkende = Oplader

4- PROFIL INDIKATOR

- JOYSTICK-CONTROLLER (4-VEJS)
Lysende = Indendørsprofil
Blinkende = Udendørsprofil
- DRIVRINGE / SPEED CONTROLLER (2)
Lysende = Indendørsprofil
Blinkende = Udendørsprofil

1- HJULBATTERI-INDIKATOR

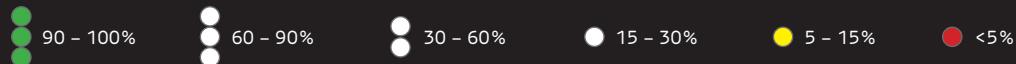



www.SunriseMedical.dk



Distributed by: Sunrise Medical (US) LLC, Mount Juliet, TN 37122
 MK-130227 Rev.A ©04.2025

