



**"HELLO,  
SUNRISE"**



**CTRL+5**

POWER SEATING MADE SIMPLE -  
JUST SAY THE WORD

# POWER SEATING MADE SIMPLE – JUST SAY THE WORD!

## RÖSTSTYRD SITTKOMFORT - FÖRST I SIST SLAG

**Tryckavlastning. Hållning. Bekvämlighet.** Designad för alla sittsystem från SEDEO på elrullstolar från QUICKIE och Magic Mobility. Den ger enkel åtkomst till sitsjusteringar för personer som har behov av positionsförändringar för bland annat tryckavlastning och smärtlindring, som hjälp i vardagen och vid överförflyttningar. Med CTRL+5 styrs de elektriska sitsfunktionerna via knappsatsen (flata knappar eller vippströmbrytare beroende på modell) eller med röstkommandon.

Att använda sig av röstkommandon kan för många vara en enklare och snabbare metod att nå önskad sitsposition.

- **Hands-free kontroll** av upp till 10 sitspositioner
- Activera genom att säga: **“Hello Sunrise”**
- **Enkla röskommandon** som “Sunrise one (1)”, “Sunrise two 2)” etc.
- Säg **“Stopp (stop)”**, eller tryck på valfri knapp på CTRL+5 för att stanna
- Kompatibel med vanlig knappsats



# MÅLGRUPP

Röststyrning öppnar upp för nya möjligheter för brukare med fysiska begränsningar. Oavsett om man har en progressiv sjukdom, skada eller ett neurologiskt tillstånd kan det vara besvärligt för många att hantera knappar eller en traditionell joystick. Med röststyrning får man en pålitlig, handsfree-lösning för att styra sina elektriska sitsfunktioner.

Röststyrning ger självständig kontroll över viktiga funktioner vilket är särskilt fördelaktigt för personer med:

- Ryggmärgsskada (C1–C4) – med ofrivilliga arm- eller handrörelser
- Multipel skleros (MS) – styrka och finmotorik kan fluktuera under dagen
- Muskeldystrofi / Spinal muskelatrofi – då progressiv svaghet begränsar räckvidd och finmotorik
- Cerebral pares (kvadriplegi) – med dålig koordination eller ofrivilliga rörelser
- Stroke med hemiplegi – med begränsad användning av ena sidan av kroppen och svårigheter att utföra rörelser som kräver finmotorik
- Amyotrofisk lateralskleros (ALS) – kontrollen över övre extremiteterna minskar med tiden
- Bilateral amputation av övre extremiteter – utan handfunktion. Använd röststyrning ensamt eller i kombination med huvudkontroll






Vippströmbrytare



Knappar



Skanna QR-koden för instruktionsvideo.

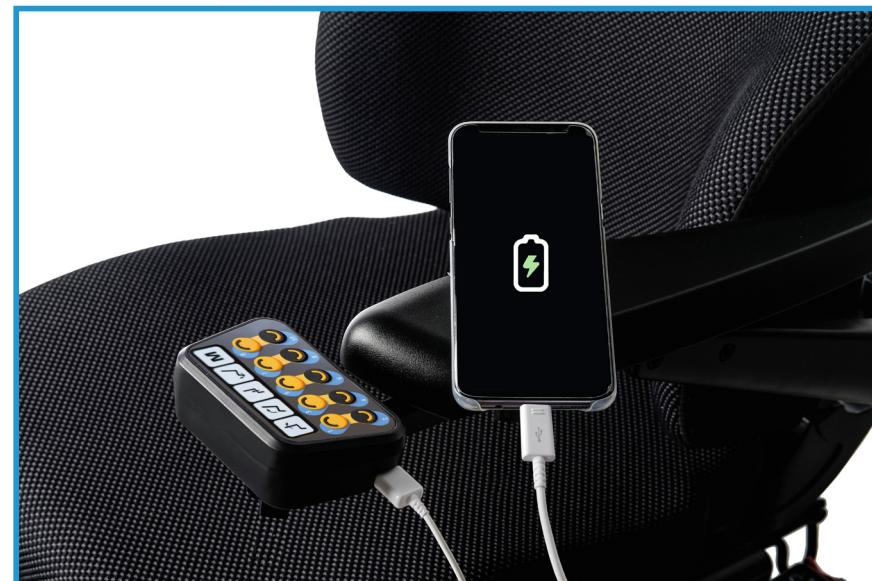

## USB-anslutning

CTRL+5 är utrustad med en USB-port som är avsedd för att ladda din telefon eller surfplatta. Kan monteras på valfri sida för personlig preferens.

## Knappsatser

Välj mellan två knappsatsmodeller: med knappar eller med vippströmbrytare. Båda är kompatibla med PG Drives R-Net system.

Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Tel.: 031-748 37 00  
E-Mail: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)

För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.



Om du har en synnedsättning kan detta dokument visas i PDF-format på [SunriseMedical.se](http://SunriseMedical.se)



09.2025



**SWITCH-IT**  
SMART TECHNOLOGIES

