

## Sidestøtter for Jay® J3-rygg

## Monteringsanvisning

### Nødvendig verktøy

3 mm sekskantnøkkel (leveres med sidestøtten)

**MERK:** Sidestøtter kan ikke brukes på alle J3-rygger. Kontroller om ryggen på rullestolen din er egnet for montering av sidestøtter ved å finne åpningene for sidestøttene.

1. Ta av trekket på J3-ryggen fra aluminiumsskallet for å unngå at det skades under montering.

**MERK:** Du behøver ikke fjerne eventuelle skuminnsetser for å montere sidestøtter.


2. Fest sidestøttene i åpningene (A) slik vist i illustrasjonen. Ikke stram mutrene (D) på sidestøtten før den har blitt justert til brukeren, slik beskrevet i punkt 4.
3. Når sidestøttene er montert, sett tilbake J3-trekket på aluminiumsskallet.

**MERK:** Når du setter tilbake trekket, må du plassere kantene på trekket foran aluminiumsskallet, slik at sidestøtten er i fullstendig kontakt med skallet.


4. La brukeren sitte i rullestolen, og juster høyden på sidestøtten ved å løsne på boltene (D) og skyve sidestøtten opp eller ned i sporet (A).
5. Juster lengden på sidestøtten ved å skyve den horisontalt i brakettsporet (B).
6. Juster vinkelen på braketten ved å dreie sidestøtten i brakettsporet (B).  
Når sidestøttens høyde, lengde og vinkel er justert, bruk den medfølgende 3 mm sekskantnøgkelen for å stramme mutrene (D) i henhold til tiltrekkingsmomentet spesifisert nedenfor.
7. Juster vinkelen på sidestøtteputen ved å løsne på boltene (E) og vri puten i sporet (C).  
Stram mutrene i henhold til tiltrekkingsmomentet spesifisert nedenfor.

### Vedlikehold og tiltrekkingsmoment


Sunrise Medical anbefaler at alle festeanordninger kontrolleres hver måned for slitasje, løse bolter eller skadde komponenter. Løse festeanordninger skal strammes i henhold til monteringsinstruksjonene. Alle festeanordninger skal strammes til 2,3 Nm. Ta kontakt med Sunrise Medical umiddelbart for å skifte ut eventuelt skadde komponenter. Du må ikke fortsette å bruke utstyret dersom du oppdager løse eller skadde komponenter.

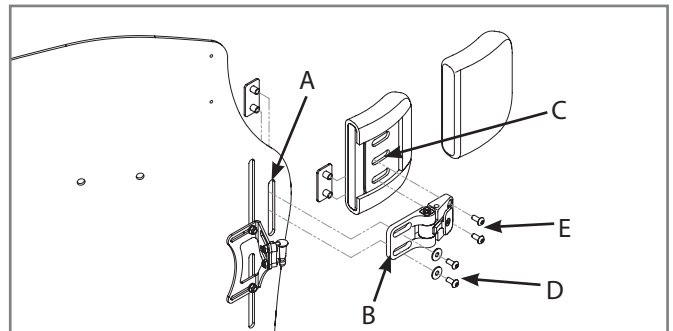

Utsvingbar sidestøtte

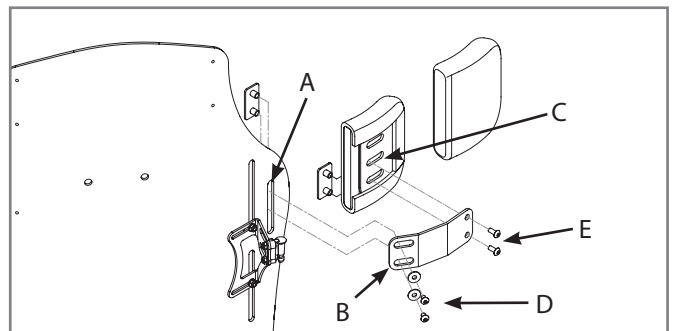


Fast sidestøtte

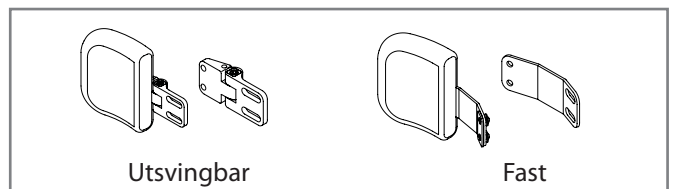

Utsvingbar

Fast

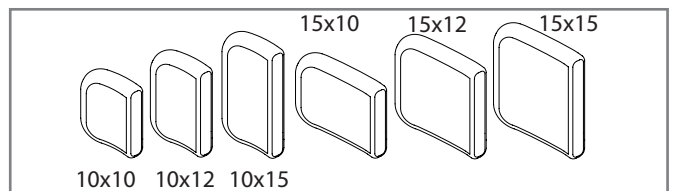

Putestørrelser

Hvis du har spørsmål om justering eller montering, vennligst ta kontakt med Sunrise Medical.