

Brystbelte for Jay® J3-rygg

Monteringsanvisning

MERK: Ikke alle J3-rygger kan utstyres med brystbelte. Kontroller at ryggen på rullestolen din er egnet for montering av et brystbelte, slik vist på J3-bestillingsskjemaet.

Nødvendig verktøy

4 mm sekskantnøkkel (levert med J3-ryggen)

10 mm kombinasjonsskiftenøkkel (levert med J3-ryggen)

1. Ta av trekket på J3-ryggen fra aluminiumsskallet, for å unngå at det skades under montering.

MERK: Du behøver ikke å fjerne eventuelle skuminnsetser for å montere brystbeltet.

2. Finn og velg de riktige monteringssporene. Se figur 1.
3. Fest brystbeltet ved å trekke det gjennom monteringssporene (A) og braketten (B), slik vist i Figur 2.

MERK: Det kan være nødvendig å feste brystbeltet over eller under festebrakettene, avhengig av plasseringen deres.

4. Stram boltene i henhold til det spesifiserte tiltrekkingsmomentet.

5. Sett trekket tilbake på plass.

MERK: Flikene på trekket kan plasseres på innsiden av aluminiumsskallet for å unngå ytterligere slitasje.

⚠ ADVARSEL

Brystbeltet for Jay® J3-ryggen er IKKE egnet å bruke som et sikkerhetsbelte under transport i bil. Dette beltet er ikke i samsvar med SAE-standard J2249. Hvis rullestolen skal transporteres i et kjøretøy, må et belte som overholder kravene i SAE J2249 brukes.

For mer informasjon, gå til nettsiden Ride Safe på <http://www.travelsafer.org>.

⚠ ADVARSEL: KVELNINGSFARE


Pass på at brukeren ikke sklir ned i setet på rullestolen. Brukerens brystkasse kan da klemmes sammen eller vedkommende kan kveles av brystbeltet.

Beltene skal sitte tett inntil brukeren, men må ikke være så stramme at de påvirker brukerens pusteevne. Du skal kunne få plass til en flat hånd mellom beltet og brukeren.


Posisjoneringsbelter skal ALDRI brukes til å holde en bruker ufrivillig på plass i stolen, eller på en bruker som er bevisstløs eller opprørt.

Hvis disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Figur 1: Riktige monteringsåpninger for brystbelte

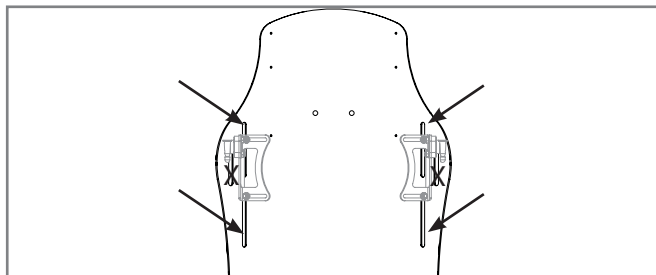

Figur 2: Montering av brystbelte

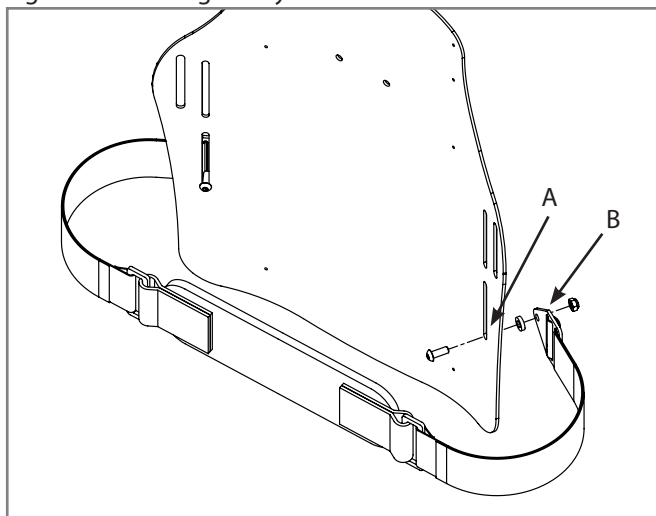

Vedlikehold og tiltrekkingsmoment

Sunrise Medical anbefaler at alle festeanordninger kontrolleres hver måned for slitasje, løse bolter eller skadde komponenter. Løse festeanordninger skal strammes i henhold til monteringsinstruksjonene.

Alle festeanordninger skal strammes til 2,3 Nm.

Kontroller brystbeltet hver måned for frynser, raknede sømmer eller andre indikasjoner på slitasje eller skade. Ikke bruk beltet dersom det er antydning til feil eller slitasje. Brystbelter må skiftes ut ved første antydning til skade og/eller slitasje.

Hvis du oppdager en skadd eller løsnet komponent, må du umiddelbart slutte å bruke utstyret og kontakte din lokale Sunrise Medical-forhandler for å få komponenten skiftet ut.

Hvis du har spørsmål angående montering eller justering, vennligst ta kontakt med Sunrise Medicals kundeservice.