

Sele for Jay® J3-rygg

Monteringsanvisning

MERK: Ikke alle J3-rygger kan utstyres med sele. Kontroller om ryggen på rullestolen din er egnet for montering av en sele på J3-bestillingskjemaet.

1. Ta av trekket og eventuelle skuminnsatser på J3-ryggen fra aluminiumsskallet for å unngå skade under montering.

MERK: Noter deg hvor skuminnsatsene er festet, slik at du kan sette dem riktig tilbake på plass når selen er montert.

2. Finn de 8 laserkuttete starthullene (A, B) (fire på hver side) som skal brukes for å feste selen til skallet.
3. Bruk et 6,5mm bor, og bor gjennom de 8 starthullene.

MERK: Når hullene er boret, bruk en fil til å glatte over eventuelt skarpe kanter, for å forhindre at metallfragmenter setter seg fast i trekket.

4. Fest styreskinnene for selen (C) til den øvre delen bak på aluminiumsskallet. Stram festeanordningene i henhold til det spesifiserte tiltrekkingsmomentet.
5. Fest de fire selepunktene (D) til skallet. Stram mutrene i henhold til det spesifiserte tiltrekkingsmomentet.
6. Sett skuminnsatsene tilbake i sin opprinnelige stilling og fest trekket til aluminiumsskallet.
7. Trekk de to selestroppene (E) gjennom åpningen på selens styreskinne.
8. Be brukeren lene seg bakover i stolen, og juster stroppene til brukerens behov.

MERK: De nedre stroppene skal ligge i 45° vinkel over brukerens hofter.

⚠ ADVARSEL

ComfortFit-seler egner seg IKKE som sikkerhetsbelte under transport i bil. Denne selen er ikke i samsvar med SAE-standarden J2249. Hvis rullestolen skal transporteres i et kjøretøy, må et belte som overholder kravene i SAE J2249 brukes.

For mer informasjon, gå til nettsiden Ride Safe på <http://www.travelsafer.org>.


⚠ ADVARSEL: KVELNINGSFARE

Pass på at brukeren ikke sklir ned i setet på rullestolen. Brukerens brystkasse kan da klemmes sammen eller vedkommende kan kveles av selen.

Selene skal sitte tett inntil brukeren, men ikke så stramt at de påvirker brukerens pusteevne. Du skal kunne få plass til en flat hånd mellom beltet og brukeren.

Bruk aldri plasseringsbelter for å holde en bruker ufrivillig på plass i stolen, eller på en bruker som er bevisstløs eller opprørt.

Hvis disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

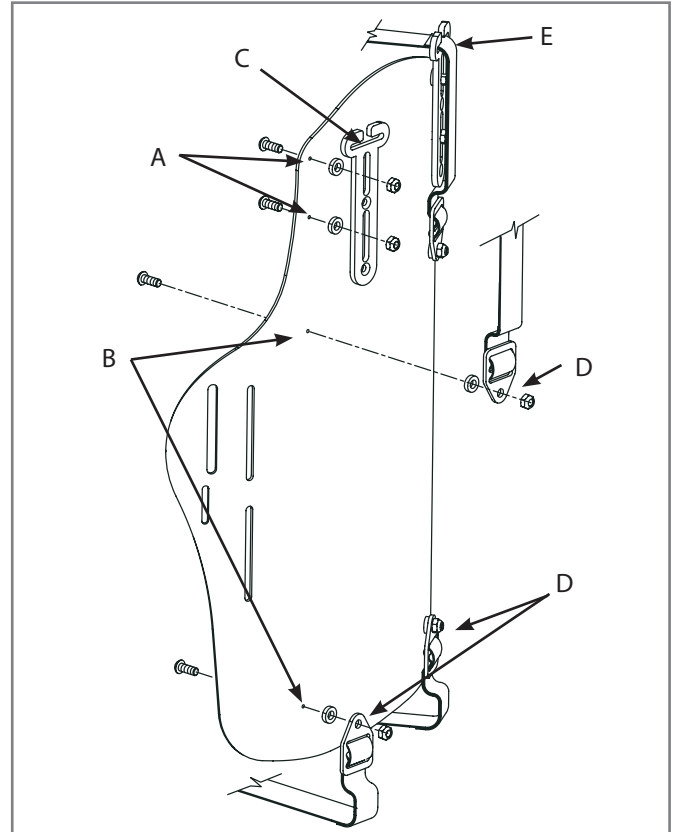

Nødvendig verktøy

- 4 mm sekskantnøkkel (levert med J3 Back)
- 10 mm kombinasjonskiftesnøkkel (levert med J3-ryggen)

Vedlikehold og tiltrekkingsmoment

Sunrise Medical anbefaler at alle festeanordninger kontrolleres hver måned for slitasje, løse bolter eller skadde komponenter. Løse festeanordninger skal strammes i henhold til monteringsinstruksjonene.

Alle festeanordninger skal strammes til 2,3 Nm.

Kontroller selen månedlig for frynser, raknede sømmer eller andre indikasjoner på slitasje eller skade. Ikke bruk selen dersom den viser tegn til skade. Brystbelter skal skiftes ut ved første antydning til skade og/eller slitasje.

Hvis du oppdager en skadd eller løsnet komponent, må du umiddelbart slutte å bruke utstyret og ta kontakt med din Sunrise Medical-representant for å få komponenten skiftet ut.

Hvis du har spørsmål om justering eller montering, vennligst ta kontakt med Sunrise Medical.