

improving people's lives



Sapphire 2

Gran maniobrabilidad
con la máxima estabilidad



STERLING
SAPPHIRE 

- DESMONTABLE en 2 partes de fácil manejo
- Baterías de fácil instalación
- Doble asa en el tren trasero que facilita su manejo
- Mayor espacio para los pies
- Manillar ajustable en infinitas posiciones
- Mandos muy accesibles y cómodos
- Luces de LED's
- Modelo sólo de 4 ruedas
- Color: Gris (desde Junio 2015. Anterior a esa fecha color rojo)

Desmontable

Se desmonta en dos partes de fácil manejo

- Sencillo sistema de desmontaje:
 1. Retirar el asiento
 2. Sacar las baterías
 3. Tirar hacia arriba de la palanca de desmontaje
- Con una sola mano
- Sin incómodos cables ni conexiones



Fácil, rápido y seguro!

Desmontable

Para volver a colocar el tren trasero...

1. Tirar de la palanca hacia arriba y mantenerla pulsada
2. Encajar la pieza negra redondeada de la parte delantera...
3. ...en la pieza hueca que queda señalada entre las pegatinas amarillas con flechas negras
4. Soltar la palanca



Manillar ajustable en infinitas posiciones



El manillar se libera al girar la palanca hacia la derecha, y se bloquea en posición al soltar la palanca (regulación mediante actuador de gas)

Transportable



El manillar se pliega totalmente hasta abajo

Las empuñaduras quedan encajadas en la parte superior de la cesta, y evita que se salgan los objetos que están guardados dentro

Baterías muy fáciles de instalar



Sin cables ni conexiones, las baterías quedan encajadas cada una en su alojamiento, y conectadas entre si



Baterías muy fáciles de instalar

Las baterías y los huecos tienen unas pegatinas con unas letras (A y B) que indican el orden correcto en el que colocarlas.



Para instalar las baterías, primero se coloca la B y luego la A.

Para desmontarlas, primero se saca la A y luego la B

Baterías muy fáciles de instalar

Una de las cajas dispone de un pasador de bloqueo que evita que las baterías se muevan y puedan llegar a desconectarse al pasar por ejemplo por un bache



Manejo muy cómodo




Gracias a su doble asa, el usuario podrá levantar más cómodamente el tren trasero si quiere meterlo por ejemplo en el maletero del coche

Manejo muy cómodo



Las baterías tienen también amplias asas para poder levantarlas mucho más fácil y cómodamente

Manejo muy cómodo

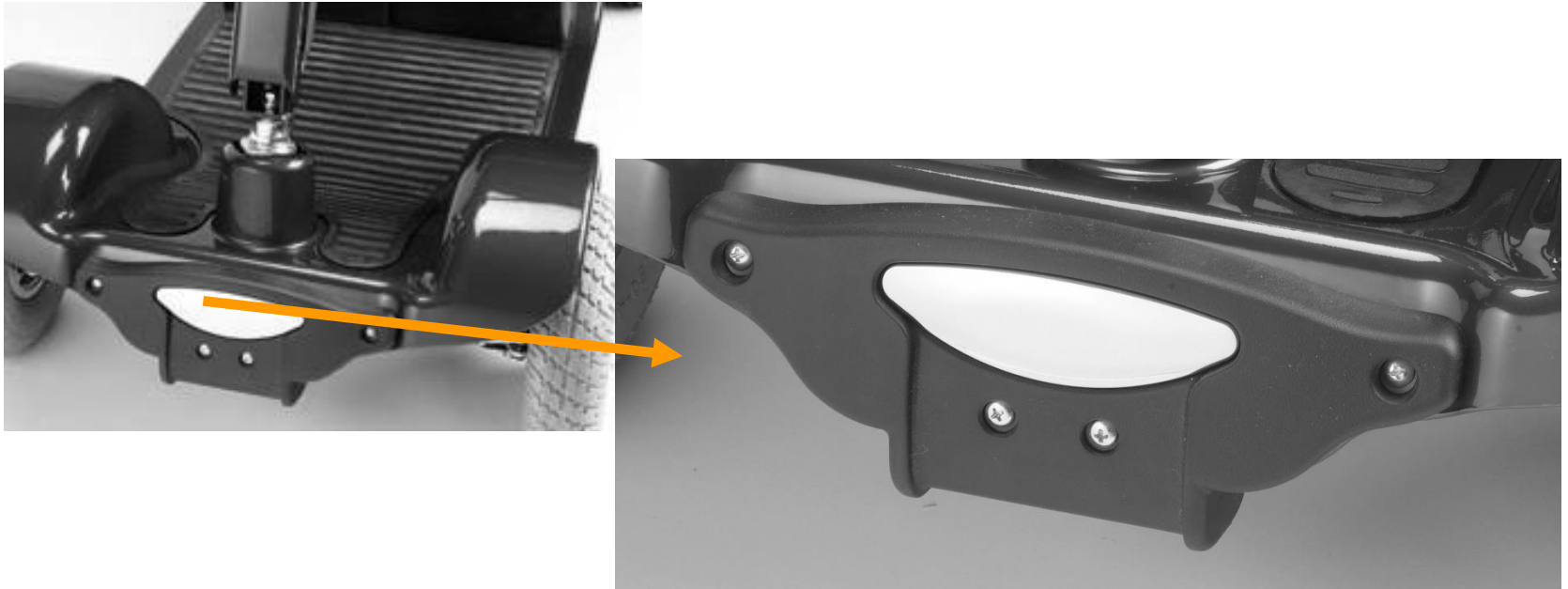

En la parte inferior del chasis hay una agarradera de goma, para evitar tener que agarrar de la carcasa

Más espacio para los pies

Sapphire2




Anterior modelo Sapphire

En la Sapphire 2 se pueden estirar los pies hacia delante, queda un amplio hueco entre las ruedas delanteras



=

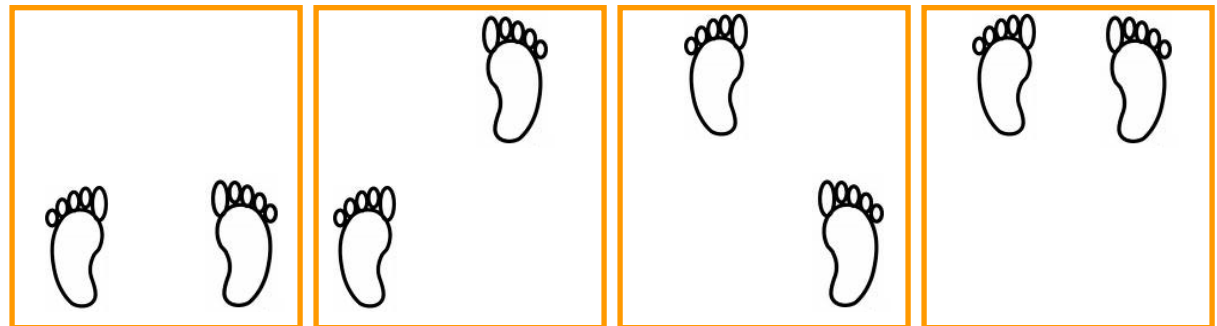

1

2

3

4



Mandos accesibles y cómodos



...y un excelente confort



...y un excelente confort



Altura de asiento a la base
ajustable de 42 a 55 cm

(Realizar el ajuste en
altura antes de colocar
las baterías, porque si no
el pasador de bloqueo de
la posición en altura
choca con el asa de la
batería y no entra bien)

Luces e indicadores



- Nuevas luces con LED's
- Mayor visibilidad: 12 LED's en la luz delantera y 10 en la trasera
- Si un Led se funde los otros siguen funcionando
- Con una duración notablemente mayor que las bombillas halógenas



Accesorios

- Cinturón de seguridad
- Soporte de bastones – montado en la parte trasera
- Soporte de bastones – montado en el reposabrazos
- Cesta trasera
- Soporte para botella de oxígeno
- Retrovisor

Especificaciones técnicas

Versión	4 ruedas	Peso de la parte mínima más pesada (tren delantero)	22,5 kg
Anchura total	590 mm	Peso del asiento	12,5 kg
Longitud total	1210 mm	Peso de la unidad tractora	19,5 kg
Altura total	960 mm	Peso de las baterías (unidad)	12 kg
Altura de asiento	Ajustable 420 a 550 mm	Radio de giro	1400 mm
Velocidad	6,5 km/h	Pendiente máxima de seguridad	
Baterías	35 Amp		14° (peso usuario 113 kg) ó 10° (peso usuario 150kg)
Cargador (Incorporado)	5 Amp	Distancia del suelo a la base	95 mm
Autonomía máxima*	30 km	Cubiertas	Neumáticas
Color	Rojo	Ruedas delanteras	225 mm (9")
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	150 kg	Ruedas traseras	265 mm (10.5")
Peso total	79 kg	Luces	SI

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Nota: Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Todas las imágenes, medidas y capacidades aquí mostradas son aproximadas y no constituyen especificaciones

