

Artikelnummer ryggförlängare Bambino: 4380300

Jay J3 rygg på rullstol Panthera S2, S3, S3 Swing, U2 & U3

1

Ta bort ryggklädseln från rullstolen. Lossa även på eventuella bakomliggande körhandtag. Låsklossarna till körhandtagen inne i ryggrören tas bort eftersom de ersätts av ryggförlängarna.

2

Ta bort plasthatten från toppen av ryggröret. Stick ner ryggförlängaren så att de sticker upp 5 cm. Skruva fast ryggförlängaren med medföljande bult. Sätt en bit tejp i botten på ryggförlängaren så faller inte låsklossen ned.

3

2 st "Ryggförlängare Bambino" köps av Panthera AB. Art nr: 4380300. Sunrise Medical AB kommer även att tillhandahålla ryggförlängare med samma artikelnummer.

Montera fästet för J3 ryggen på ryggförlängaren enl. anvisningarna i bruksanvisningen för J3 ryggen.

4**5**

Eftersom J3 ryggens fästen monteras på ryggförlängaren som sitter i toppen av ryggrören kommer J3 ryggen att hamna relativt högt upp. För att kompensera detta behöver man ofta välja en ganska låg ryggstomme från Panthera. Se punkt 6, på nästa sida, för rekommendationer angående lagom höjd på Pantherarullstolens ryggstomme.

6

		Panthera					
		RH 20 cm med adapter	RH 25 cm med adapter	RH 30 cm med adapter	RH 35 cm med adapter	RH 40 cm med adapter	RH 45 cm med adapter
J3 rygg	Rygghöjd (Rh)						
Låg rygg	Rh 17, 20, 24 cm	Ok	Ok	För högt	För högt	För högt	För högt
Mellanrygg	Rh 30, 34, 38 cm	Ok	Ok	Ok	För högt	För högt	För högt
Hög rygg	Rh 42, 46, 50	Ok	Ok	Ok	Ok	För högt	För högt
Skulderhög	Rh 53, 57, 61	Ok	Ok	Ok	Ok	För högt	För högt

		Panthera					
		SB 33	SB 36	SB 39	SB 42	SB 45	SB 50
Ryggbredd på J3 rygg *							
Rygg 31		Ok	Ok	Nej	Nej	Nej	Nej
Rygg 36		Ok	Ok	Ok	Nej	Nej	Nej
Rygg 41		Nej	Nej	Ok	Ok	Ok	Nej
Rygg 46		Nej	Nej	Nej	Nej	Ok	Ok
Rygg 51		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ok

* Ryggbredden är angiven i artikelnumret

Exempel: J3SCMTS36 är ett 36 cm ryggstöd. Denna rygg kan monteras på Pantherastolar med sittbredd (SB) 33, 36 alternativt 36 cm enligt tabellen

Rekommenderade höjder och bredder

7

Monteringsanvisning J3 rygg på Panthera U2 light.

Ta bort rygglädseln från rullstolen. På U2 light behövs inte bambinofästen för att montera J3 ryggen. Montera J3 ryggen ovanför ryggbågen enl anvisningarna i bruksanvisningen för J3 ryggen.