


J2 PLUS RYGGDYNA

För den tyngre brukaren.

Att sitta upprätt, ha kontakt med omgivningen och inte minst sitta bekvämt är en nödvändighet och en självklar rättighet även för den överviktige brukaren. J2 Plus ryggdyna är justerbar i bredd och finns i två storlekar: 510 - 580 mm samt 580 - 660 mm. Ryggen ger dessutom, genom en enkel men smart lösning, plats för den övervikt som ofta uppträder runt nedre höftpartiet.

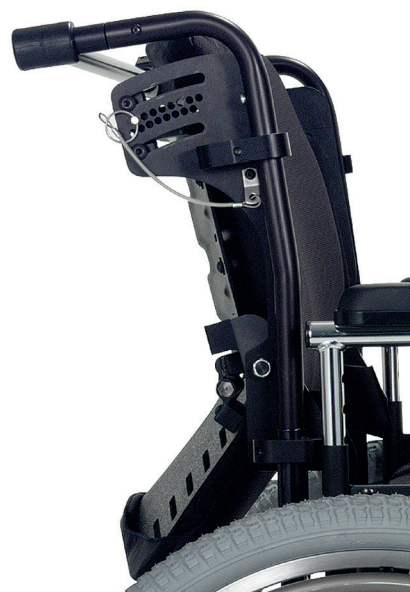

J2 Plus ryggdyna kombineras gärna med J2 Plus sittdyna i rullstolen Quickie M6. J2 Plus sittdyna och Quickie M6 klarar brukarvikter upp till 295 kg.

10 egenskaper som utmärker J2 Plus rygg som ett bra ryggstöd för överviktiga brukare.

1. Justerbar i bredd 510-570 mm och 580-660 mm – breddjusterbara glidfästen på ryggskal
2. Justerbar ryggvinkel i intervaller om 1°
3. Anatomiskt riktig ryggvinkel
4. Justerbar nedre ryggplatta
5. Värmeavledning i överdrag och ryggskal
6. Ryggstödsfäste till raka ryggrör och ryggrör 8°, fästbeslag passar ryggrör 22-31 mm
7. Flolite remsa kan specialbeställas
8. Positioneringsinlägg ger stöd åt bäckenet
9. Ryggöverdrag, fästes med kardborreband
10. Lätt att ta av med quickrelease



Tillväxtplattor samt breddjusterbara glidfästen tillåter breddning av J2 Plus rygg (1).



Justerbar ryggvinkel, 12° bakåt och 3° framåt (2). Övre fäste med sidoplatlor väljs efter ryggrörstyp.



Anatomiskt riktig ryggvinkel. Justerbar nedre ryggplatta.



Dra ut de övre låspinnarna, luta ryggstödet framåt, lyft av.

STORLEKAR & SPECIFIKATIONER

Sittbredd: justerbar 510-570 mm samt 580-660 mm.