

improving people's lives

We are a
G R O W T H
Company.

Quickie SR45

Silla de **posicionamiento** con
basculación rotacional
hasta 45°



 **SUNRISE**
MEDICAL.

Puntos claves

- 1 Tecnología de basculación rotacional – beneficios clínicos y funcionales
- 2 Ajustabilidad
- 3 Opciones
- 4 Durabilidad



1 Basculación rotacional



Beneficios funcionales de la basculación rotacional

Base compacta:

Mejora la maniobrabilidad y el manejo en espacios pequeños, favoreciendo el desarrollo de las actividades de la vida diaria del usuario



Vs



Beneficios funcionales de la basculación rotacional

- Minimiza el esfuerzo que tiene que realizar el cuidador para realizar la basculación del usuario debido a que el **centro de gravedad del usuario se mantiene alineado con el centro de rotación de la silla**
 - Otros mecanismos tipo cilindros de gas, requieren cierto esfuerzo a lo largo de todo el arco de basculación
- Se minimiza el riesgo de desajustes o fallos
 - Los cilindros de gas suelen ser susceptibles de dañarse tras cierto tiempo de uso




El centro de gravedad del usuario se mantiene alineado con el centro de rotación de la silla



Basculación mediante cilindros de gas

Beneficios funcionales de la basculación rotacional

- Se mantiene el centro de gravedad sobre las ruedas traseras, favoreciendo la máxima maniobrabilidad
- Esto supone un beneficio para los usuarios que se autopropulsan y para los cuidadores que empujan o tiran de la silla

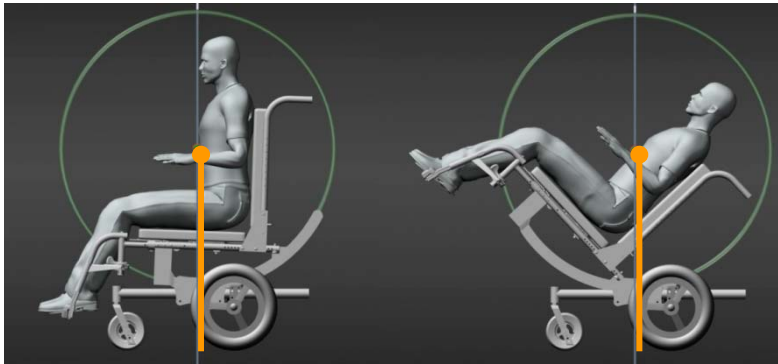

Misma posición del centro de gravedad con respecto a la base en las diferentes posiciones

Mala posición sobre la base
Difícil de empujar




Posición óptima sobre la base
Fácil de empujar




Beneficios funcionales de la basculación rotacional

- El carril rotacional mejora el **control de la basculación**, previniendo la basculación “desenfrenada” que en ocasiones tiene lugar con algunos usuarios (especialmente los muy ligeros o muy pesados)
- La posibilidad de ajustar la posición del carril de basculación nos asegura que el punto de basculación no quede muy adelantado, evitando así que la silla vuelque hacia delante

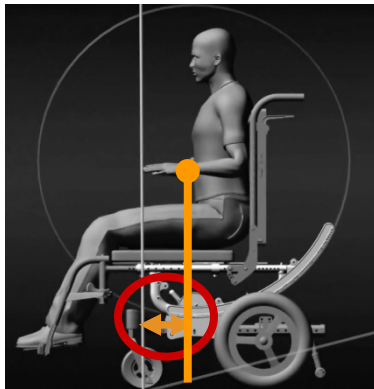

Centro de gravedad adelantado

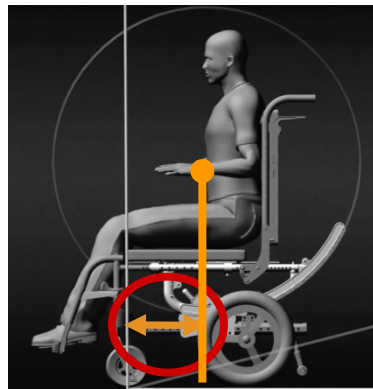

Centro de gravedad óptimo



Beneficios clínicos de la basculación rotacional

El centro de gravedad constante minimiza

- la agitación
- las reacciones de extensión
- el incremento de tono/espasticidad del paciente como respuesta a la basculación




2 Ajustabilidad



Ajuste de la profundidad de asiento

Disponibles 3 tipos de armazón (corto, mediano y largo) que permiten 10 cm de ajuste en profundidad cada uno


- Armazón corto: 36 – 46 cm
- Armazón mediano: 41- 51 cm
- Armazón largo: 46 – 56 cm

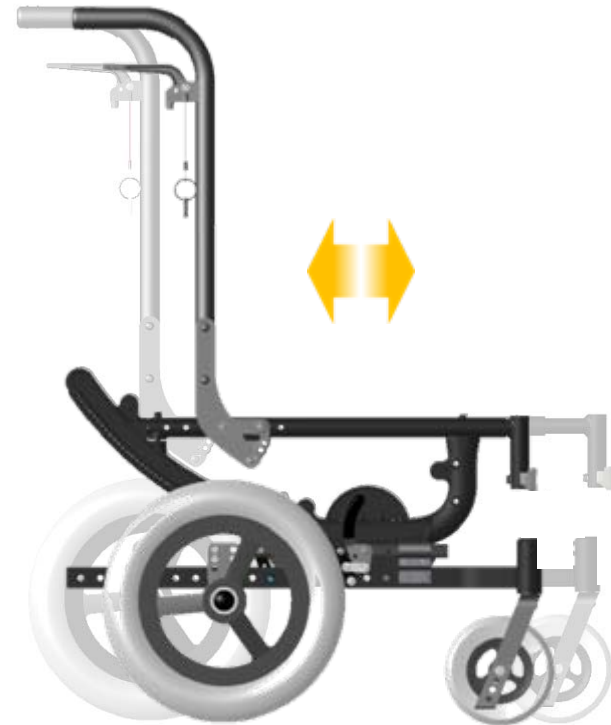


Ajuste del centro de gravedad – Centro de rotación

Si el centro de gravedad y el centro de rotación no están perfectamente alineados, se puede desplazar la posición de los reposapiés y los tubos del respaldo

Esto elimina la reacción de extensión característica de las basculaciones tradicionales

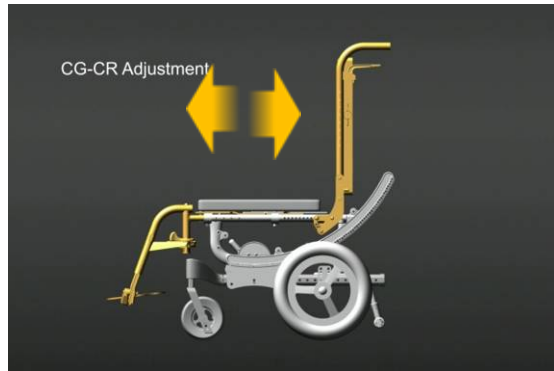


Ajuste centro de gravedad – centro de rotación

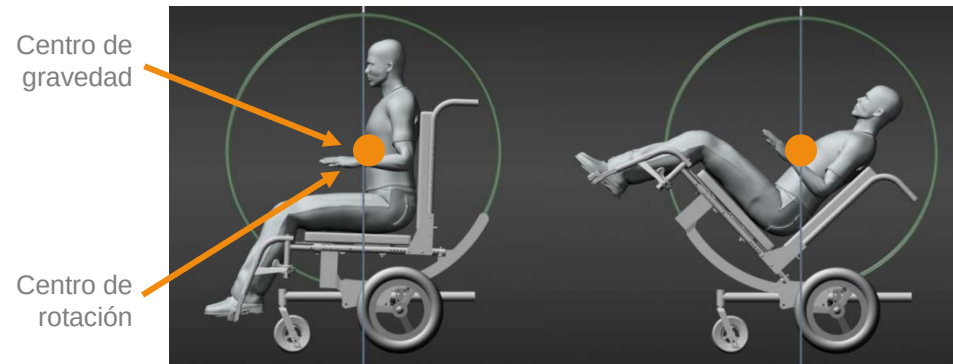


Centro de gravedad y centro de rotación alineados

Ajuste de la estabilidad frontal

Desplazando el carril horizontalmente hacia atrás, optimizamos la estabilidad delantera

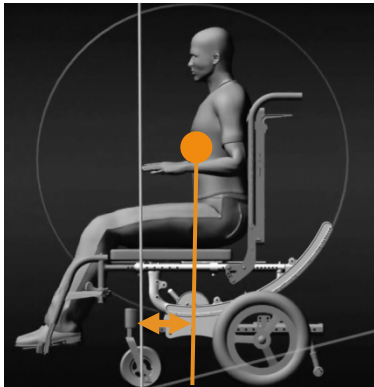


Centro de gravedad adelantado
(menos estable)

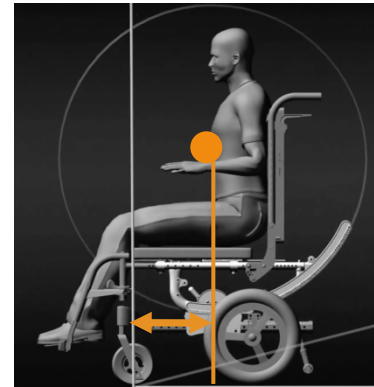


Centro de gravedad óptimo
(más estable)

Ajuste de la estabilidad trasera

Desplazando las ruedas traseras y los antivuelcos hacia atrás (las ruedas se alejan del centro de gravedad) optimizamos la estabilidad trasera

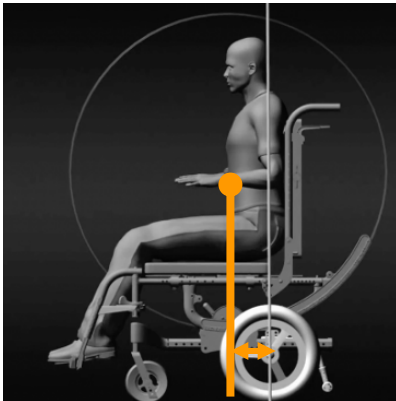


Estabilidad reducida
Mejor maniobrabilidad

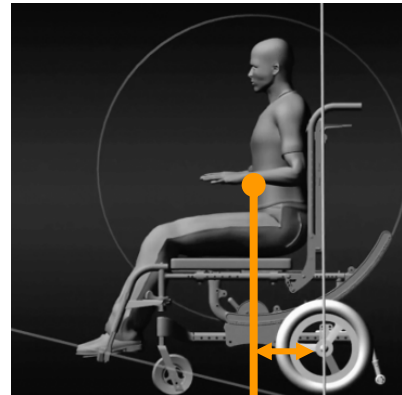


Mayor estabilidad
Maniobrabilidad comprometida

3 Opciones disponibles

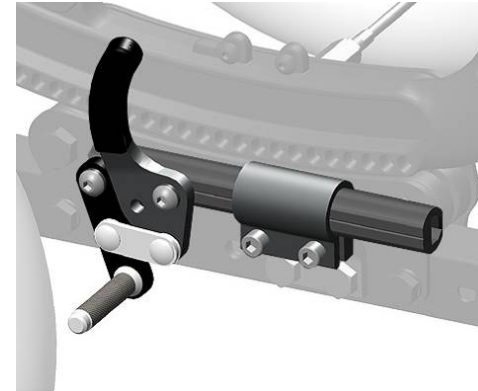

Opciones - Anclajes para el transporte en vehículos

El usuario sentado en su propia silla durante el transporte asegura su confort, protección de la piel y posicionamiento

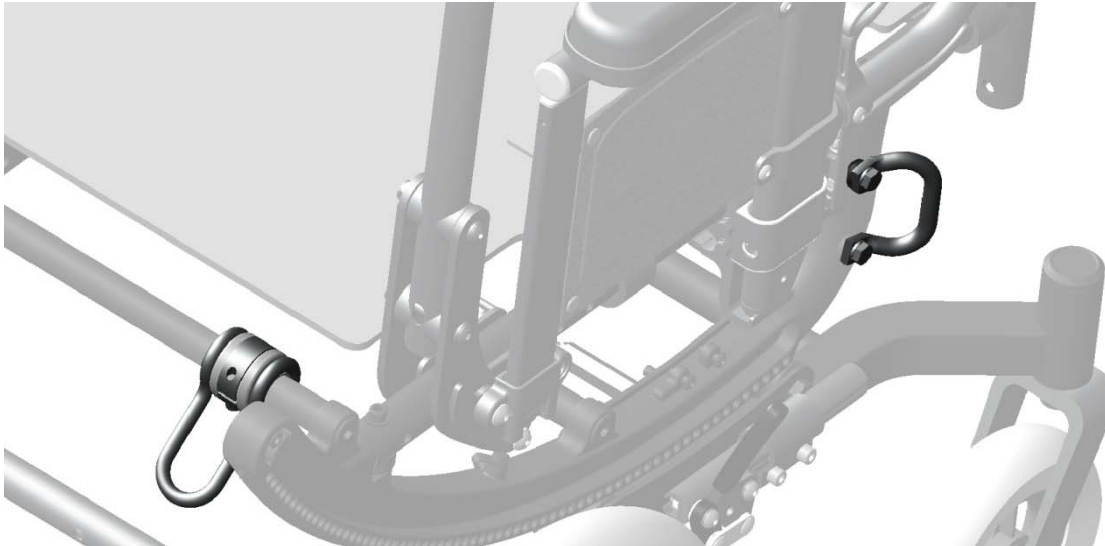

Anclajes delanteros



Anclajes traseros



Opciones - Sistema de basculación

- Mediante pedal
- Mediante gatillos (standard)



Opciones - Respaldo reclinable

- La combinación de basculación y reclinación incrementa la descarga de las tuberosidades isquiáticas para una mayor protección de la piel
- El respaldo reclinable puede ser también útil para una mejora de la postura en el paciente cifótico, facilitar la alimentación, abrir la vía aérea...



Opciones

Múltiples opciones de respaldos y reposabrazos con diversos ajustes (altura, ángulo)...para dar respuesta a las necesidades específicas de cada usuario



Reposabrazos ajustables en altura



Reposabrazos con anclaje de doble tubo y apoyo transfer




Asas de empuje ajustables en altura




Tubos de respaldo con empuñaduras fijas

Reposabrazos de doble tubo, ajustables en altura

- Fácil de usar, reducción de holguras
- Con apoyo transfer o sin apoyo transfer
- Muchos usuarios de sillas basculantes no requieren el apoyo transfer ya que normalmente son asistidos en las transferencias a/desde la silla
- Si el usuario puede realizar transferencias independientemente, puede ayudarse con el apoyo transfer
- También disponibles con función abatible
- Y con almohadillado corto (26 cms) o largo (35 cms)

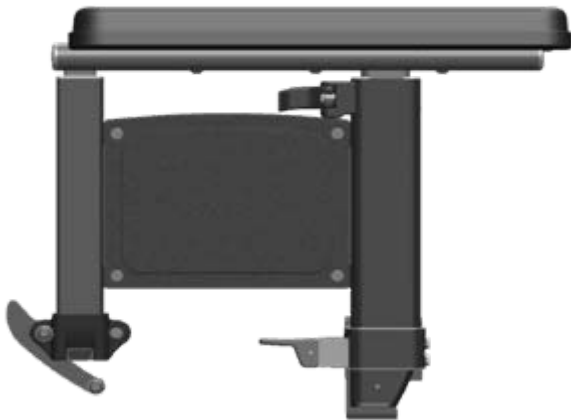

Reposabrazos con anclaje de doble tubo

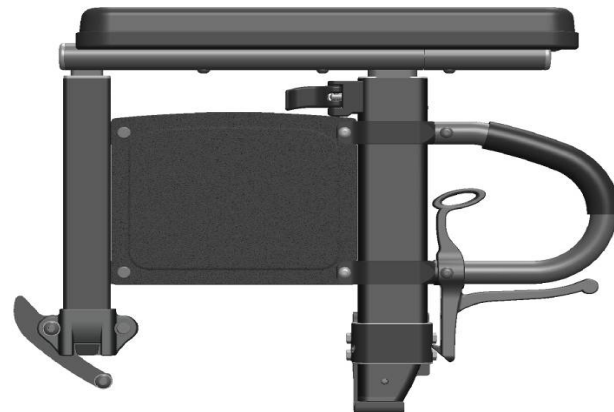

Reposabrazos con anclaje de doble tubo y apoyo transfer

Reposapiés



Reposapiés con **montaje alto** para usuarios con piernas cortas



Reposapiés Std para usuarios con longitudes de piernas más largas

Reposapiés- Nuevo sistema de desenclavamiento

- Diseñado para reducir el juego del hanger y evitar posibles holguras a largo plazo
- Está diseñado para aguantar temperaturas extremas de calor/frío y tiene gran resistencia frente a los impactos



Nueva palanca de desenclavamiento


- Muy fácil de alcanzar
- Muy ergonómica, sigue el movimiento natural para abatir el hanger, necesitando mínima destreza en la mano




5 colores disponibles



Negro

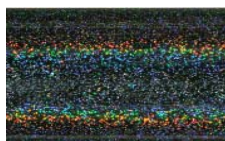

Negro c/purpurina

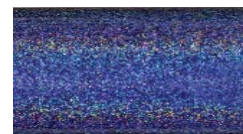

Azul mate c/purpurina



Azulón brillante



Rojo brillante



4

Durabilidad

Todas las sillas Quickie son sometidas a rigurosos test que avalan la calidad de todos sus componentes y su excelente rendimiento

Quickie garantiza el armazón de la Quickie SR45 contra defectos de materiales o de fabricación durante toda la vida útil de la silla (estimada en 5 años)

