

OXFORD DIGITAL VEKT

Pasient Vekt

MODELL 1200

BRUKERVEILEDNING



INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	2
OM DIN DIGITALE VEKT.....	3
BRUK AV VEKTEN.....	4
VEDLIKEHOLD	4
TEKNISKE SPESIFIKASJONER.....	5
VEKTENS FUNKSJONER.....	5
VEDLIKEHOLD, INSPEKSJON OG TEST	6
VIKTIG.....	6
SERVICE, REPARASJONER OG TESTING	6
GARANTI.....	7
KONTAKTE OSS:	8

OXFORD DIGITAL VEKT

OM DIN DIGITALE VEKT

Oxford Digital Vekt er en teknisk avansert, mikroprosessorstyrt vekt.

Den har et stort vindu (Liquid Crystal Display /LCD) som programmeres til å vise pasientens vekt i kilo.

Kontrollknappene er meget enkle i bruk. Oxford Digital Vekt får strøm via batterier som har meget lang holdbarhetstid og er svært rimelige i bruk.

Oxford Digital Vekt kan brukes sammen med de fleste **Oxford** gulvgående løftere og **Oxford Voyager** takheis fra Sunrise Medical AS.

Unntakene er:

- Oxford Arise
- Oxford Ascend
- Oxford Standard 140
- Oxford Advance (pga. Sammenleggbar mekanisme)
- Oxford Voyager Bærbar.

Oxford Digital Vekt kan benyttes til følgende kategorier av løft:

Kategori A - Rullestol

Kategori B - Seng

Kategori C - Bad

Kategori D - Toalett-/Dusjstol

Kategori E - Gulv

Kategori F - 90 graders rotasjon

Vekten kan benyttes fra de aller fleste posisjoner bruker befinner seg i.

Produktet er CE merket:

Oxford Digital Vekt er CE merket og tilfredsstillende kravene i følgende standarder:

Medical Device Directive (93/42/EEC)

EMC Directive (89/336/EEC)

Low Voltage Directive (73/23/EEC)

NAWI Directive (90/384/EEC)

BRUK AV VEKTEN

Vekten kan løfte inntil **200 kg**, og viser vekten i **0.2 kg** intervaller. Den er testet for nøyaktighet i temperaturer mellom **5°C og 35°C**. Dersom vekten brukes utenfor dette intervallet av temperatur kan det forekomme unøyaktighet.



For å veie en pasient må du følge disse prosedyrene:

- 1) Monter seilet på løftebøylen og trykk på **ON/ZERO** knappen. Displayet viser **0.0** og ordet **HOLD** i nedre venstre hjørnet. Dette viser at vekten er nullstilt og klar til bruk. Fjern seilet fra vekten og plasser dette på bruker.
- 2) Når seilet er plassert og festet til løftebøylen, kan brukeren løftes. Pass på at brukeren ikke er nær noe/støttes av for eksempel sengen, slik at vekten blir unøyaktig.
- 3) Vekten er programmert til å slukke etter **1 minutt** for å sørge for lang levetid på batteriet. For å restarte vekten trykkes på knappen **ON/ZERO** kun en gang. Displayet viser oppstartbildet for så å vise brukers vekt. Det kan vises **KG** i nedre høyre hjørne, og dette viser at vekten ikke er helt stabil. Når KG forsvinner kan vekten leses av korrekt. (**OBS – Dersom vekten slukker og du vil restarte den, er det meget viktig at du trykker kun en gang på knappen ON/ZERO. Dersom du trykker flere ganger kan det medføre at du nullstiller vekten med bruker i, og du må løfte av brukeren for å nullstille vekten (med kun seilet) på nytt.**)
- 4) **RECALL** funksjonen er laget for å gjenkalle fra hukommelsen siste registrerte vekt på over 10 kg. For å få frem denne, må vekten være på og du må trykke inn **RECALL** knappen. Displayet vil vekse mellom RECL og den siste målte vekten.

VEDLIKEHOLD

Det anbefales jevnlig inspeksjon av koblingene til vekten for å sørge for stabil og problemfri bruk. Se spesielt etter slitasje og eventuelle skader.

OXFORD DIGITAL VEKT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- **Elektronikk.** Mikroprosessor styrt.
- **Strøm.** 9 volt alkaline batteri PP3.
- **Batteriets levetid.** Mer enn 70 timers kontinuerlig bruk.
- **Display.** LCD (liquid crystal display) 63 X 18 mm
Karakterene er 15 mm høye.
- **Vektenhet.** Kilogram (KG)
- **Maks brukervekt.** 200kg
- **Materiale.** Pulverlakkert stål eller rustfritt stål.

VEKTENS FUNKSJONER

- Alle funksjoner er tilgjengelig uten å åpne selve boksen.
- Starte eller nullstille vekten gjøres ved et enkelt trykk på knappen foran på vekten.
- Stabil avlesning oppnås ved hjelp av et digitalt gjennomsnitt. **HOLD** beskjeden aktiveres når vektvariasjoner er mindre enn et forhåndsdefinert nivå. Vekten vil da "låses" og den aktiveres igjen så snart variasjonene øker. Vekte som ble registrert under HOLD funksjonen vil bli lagret i et minne som kan tas frem igjen om ønskelig.
- Displayet slås av etter 60 sekunder uten aktivitet for å spare batteriet.
- Visning av siste registrerte vekt under HOLD-posisjonen gjøres ved å trykke på den skjulte knappen foran på vekten. Her kan vekten til den siste veide bruker leses av etter at brukeren har blitt veiet.
- Bytte av batteri gjøres enkelt ved at åpningen for batteriet er tilgjengelig uten å måtte åpne selve vekten.

VEDLIKEHOLD, INSPEKSJON OG TEST

Sunrise Medical anbefaler at vekten kontrolleres ca 1 gang pr år, slik at man er sikret et korrekt resultat.

De som bruker utstyret skal også ved hver bruk kontrollere at fester, koblinger og seil ikke er slitt eller skadet.

Dersom noe er skadet eller slitt skal dette skiftes ut/repareres før bruk!

VIKTIG

Oxford Vekt er en Class 3 kompatibel vekt og tilfredsstillende kravene i NAWI Directive 90/384/EEC . Den har blitt kalibrert og testet av National Weights and Measures Laboratory i England.

Dette garanterer korrekt vekt i 12 måneder.

SERVICE, REPARASJONER OG TESTING

Sunrise Medical har et etablert nettverk av Servicepartnere i hele landet. Kontakt oss enten via din lokale salgsrepresentant, vår Kundeservice (66963810) eller vår Servicepartner direkte.

GARANTI

Sunrise Medical AS garanterer at produktene de leverer ikke har materialfeil under normal bruk og service, innen perioden som er oppgitt nedenfor fra datoen da produktet ble kjøpt. Dersom ethvert slik produkt viser seg å være defekt innen garantiperioden, vil produktet bli reparert eller erstattet etter Sunrise Medical's skjønn. Denne garantien inkluderer ikke kostnader for å sende eller installere erstattede deler eller reparasjon av slike produkter. Sunrise Medical's eneste forpliktelse og ditt eneste rettsmiddel under denne garantien skal være begrenset til slik reparasjon og/eller erstatning av deler.

Personløfter	2 år
Veieutstyr	2 år
Seil	2 år
Batterier – Bærbar Voyager	6 måneder
Batterier – Alle andre heiser	1 år

For garantiservice, vennligst ta kontakt med Sunrise Medical AS.

Du skal ikke returnere produkter til oss uten å ha mottatt forhåndstillatelse til å gjøre dette. Ved krav om utskiftning eller reparasjon av deler må vedkommende som kjøpte utstyret legge fram kjøpsbevis i form av kvittering/faktura, for at denne garantien skal være gyldig. Den defekte enheten, monteringen eller delen må returneres til Sunrise Medical for å bli undersøkt. Delen eller komponenten som repareres eller skiftes ut vil være garantert for den gjenstående perioden av den opprinnelige garantien.

Begrensninger og utelukkelse:

Garantien ovenfor gjelder ikke for serienummererte produkter dersom serienummeret har blitt fjernet eller er gjort uleselig. Ingen garanti skal gjelde dersom produktet eller en del av produktet har blitt endret, justert, modifisert eller skadet; verken ved et uhell eller på grunn av ukorrekt eller skjodesløs bruk og oppbevaring. Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt modifisert uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Sunrise Medical AS. Produkter som er skadet på grunn av reparasjoner av komponenter uten spesielt samtykke fra Sunrise Medical, eller produkter som er skadet av forhold som er utenfor Sunrise Medicals kontroll. Sunrise Medical vil utelukkende avgjøre vurderingen av garantikravet. Denne garantien gjelder ikke for problemer som oppstår på grunn av normal slitasje eller unnlattelse av å overholde instruksjonene i denne brukerveiledningen.

Sunrise Medical skal ikke være ansvarlig for skadetap eller uleiligheter som er forårsaket av transportøren.

Denne garantien erstatter enhver annen uttrykt eller underforstått garanti, og utgjør den eneste forpliktelsen Sunrise Medical AS har overfor kjøperen. Sunrise Medical skal på ingen måte være ansvarlig for eventuelle indirekte eller utilsiktede skader.

KONTAKTE OSS:

Sunrise Medical AS
Rehabsenteret
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 38 00 / 66 96 38 10 (kundeservice)
Fax: 66 96 38 80
E-mail : post@sunrisemedical.no
Internett : www.sunrisemedical.no

