

Respaldo Jay Easy

*Fácil de Seleccionar,
Fácil de Pedir,
Fácil de Instalar*



2. Respaldo Jay Easy



1 Diseñado para atender las necesidades de los usuarios semi-activos

- Soporte de Tronco leve→moderado
- Alto Confort debido a la calidad y grosor de su espuma
- Hemiplejias, EM, ELA, Geriatria, etc.

2 Anclajes: Sólo un paso para retirar el respaldo

- Fácil de instalar y ajustar
- Fácil de acoplar y retirar
- Ajustable en anchura, profundidad, altura y ángulo

3 Tecnología Innovadora en la funda

- Excelente ventilación debido al tejido microclimatico3DX™
- Lavable a máquina (60°) y de secado rápido



1. Respaldo Jay Easy

1 *Diseñado para atender las necesidades del Usuario Semi-Activo*



Contornos



SC -Contorno Standard

Soporte Lateral Leve-Moderado



PDC -Contorno Profundo Pélvico

Soporte Lateral Alto

Niveles de Soporte

- Torácico Medio (38 cm)
- Torácico Superior (46 cm)
- Altura Hombros (53 cm)

Las alturas disponibles están enfocadas a usuarios semi-activos con necesidad moderada de soporte torácico



Altura 38 cm



Altura 46 cm



Altura 53 cm



1. Respaldo Jay Easy - Anclajes

2 Anclajes: Sólo un paso para retirar el respaldo

Desmontar el respaldo Jay Easy es fácil y rápido, incluso con una sola mano

- 2 sencillos pasos:
 - Tirando de la cuerda hacia abajo se libera el mecanismo de bloqueo
 - Inclinar el respaldo y deslizarlo hacia arriba para extraerlo de los anclajes

El diseño de abrazadera de doble pin elimina holguras una vez instalado el respaldo



El mecanismo de retirar el respaldo es similar al del Respaldo Jay Zip

1. Respaldo Jay Easy - Instalación

Compatible con todos los diámetros de tubos

- Tubos de 19 mm (acoplar tubo de relleno incluido de serie)
- 22-23 mm (acoplar tubo de relleno incluido de serie)
- 25 mm (sin necesidad de añadido)



La compatibilidad del respaldo con el tubo de la silla es generalmente el primer desafío que cualquier respaldo debe superar



1. Respaldo Jay Easy- Ajustes

Ajustes

- **Profundidad** 4.5 cm
- **Anchura**
 - ✓ 3.7 cms a cada lado, 7.4 cms en total
- **Angulo**
 - ✓ Ajustable en ángulo +/- 12° sin comprometer la profundidad del asiento
- **Altura**
 - Los anclajes ofrecen una buena solución cuando elementos como las barras rigidizadores y reposabrazos interfieren
 - Ajuste Vertical sobre la carcasa con el usuario sentado

→ **Herramienta**

- Una única herramienta (10 mm) necesaria para realizar todos los ajustes
- Incluida de serie con el respaldo



1. Respaldo Jay Easy - Funda


3 Tecnología Innovadora en la Funda

Funda: Capa de Tejido Microclimatico

- Confort
- Ventilación superior. El tejido 3DX™ optimiza la ventilación (paso del aire), minimizando el calor y la humedad en la piel del usuario
- Lavable a máquina a 60°C
- Secado rápido, el tejido no retiene agua




**Microclimatic
Material**

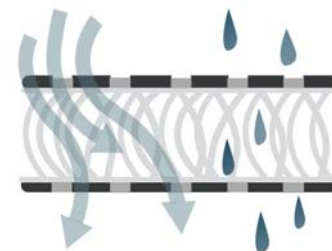

2. Respaldo Jay Easy- *Posicionamiento*

Cuñas para posicionamiento de columna lumbar


- El respaldo Jay Easy viene de serie con dos cuñas de soporte lumbar
- Adicionalmente se pueden acoplar otras cuñas de diferentes formas y tamaños para un óptimo posicionamiento del paciente

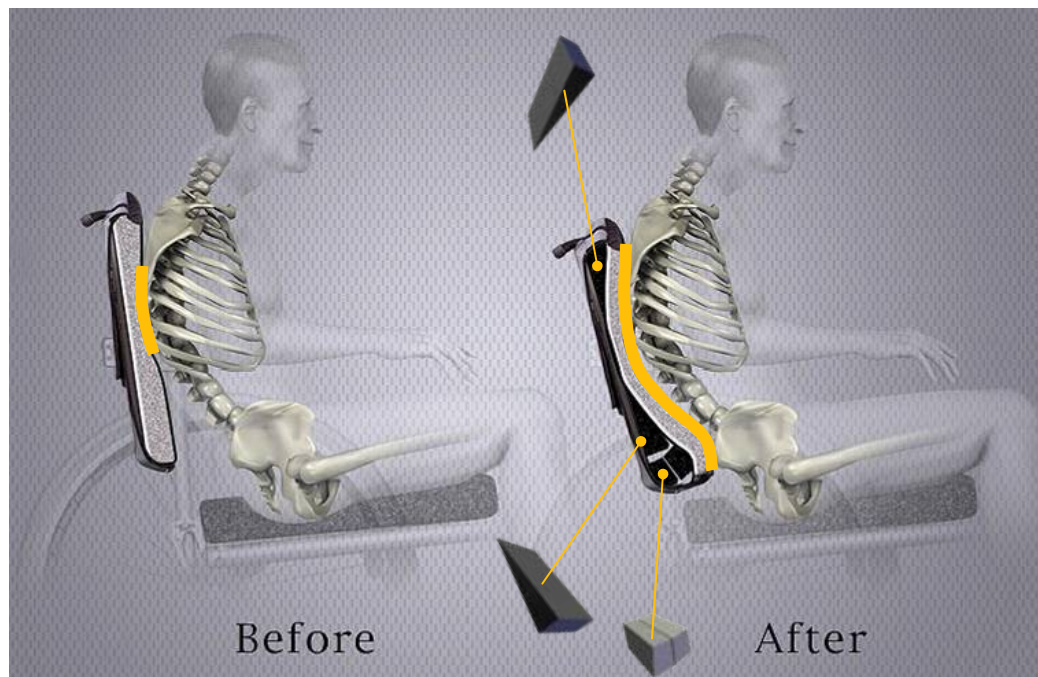

2. Respaldo Jay Easy- Accesorios

Soportes Laterales, Reposacabezas y Petos

Los niveles Torácico Superior y Altura de Hombros permiten la instalación fácil y rápida de accesorios en pacientes con mayor necesidad de soporte postural

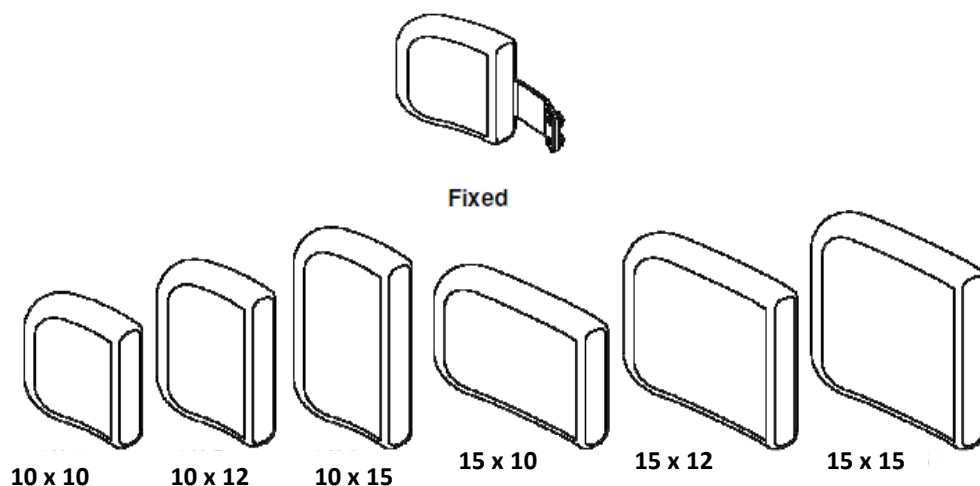

Arnés Torácico



Cinturón Torácico



2. Respaldo Jay Easy- *Test de Transporte*

El respaldo JAY Easy ha sido testado dinámicamente para su uso en vehículos de transporte, habiendo superado las pruebas con éxito.

Por tanto, cumple la normativa para su uso en vehículos de transporte de acuerdo a la ISO 7176.



IV. Respaldo Jay Easy Vs Respaldo J3



	Respaldo Jay3	Respaldo Jay Easy
Características generales	Amplia gama con multitud de formas y tallas para proporcionar el soporte óptimo de la columna y su alineación anatómica	Facil de elegir, pedir e instalar
Puntos clave	Altamente ajustable y customizable, proporciona óptima estabilidad, posicionamiento y distribución de presión para las necesidades del paciente complejo	Fácil de seleccionar y pedir, diseñado para maximizar el confort y la tolerancia a la sedestación
Necesidad de posicionamiento	Alto	Leve a Moderado
Peso máximo de usuario	136 kg	136 kg
Ajustes		
Ajuste en ángulo	+/- 22°	+/- 12°
Ajuste en anchura	5 cm a cada lado	3.7 cm a cada lado
Adaptación a diámetro de tubo	1.9 cm a 2.8 cm	1.9 cm a 2.5 cm



IV. Respaldo Jay Easy Vs Respaldo J3



Nivel de customización		
Profundidad de contorno (soporte lateral)	4	2
Alturas	12	3
Cuñas de posicionamiento columna	Si	No
Soportes Laterales	Fijos y abatibles	Fijos
Espuma y Funda		
Tejido Microclimatico	Si	Si
Grosor de espuma	30.2 +/-3 mm	42.9 +/-3mm
Otros		
Test de transporte en vehículos	Si	Si

