

DELUXE STÅSELE OG TRANSPORTSELE




MONTERINGSINSTRUKSJONER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
RENGJØRINGSINSTRUKSER




BRUKSANVISNING FOR DELUXE STÅSELE/TRANSPORTSELE

DELUXE STÅSELE er lett å montere og passer for stående og støttende stillinger (aktive brukere). Det er ikke et seil for generell bruk, og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om det passer for brukeren. Deluxe Transport sele er lett å montere, egner seg for generell bruk og gir brukerne full støtte. Det passer ikke til dobbeltamputerte eller til løfting fra horisontal stilling.

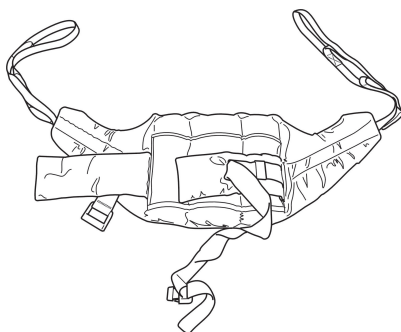

Deluxe Standing Sling

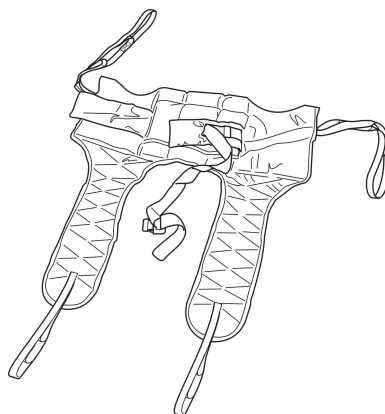


Deluxe Transport Sling


FLERE SELER ER TILGJENGELIGE FOR INDIVIDUELLE BEHOV. HUSK AT DU ALLTID BØR RÅDFØRE DEG MED EN SALGSREPRESENTANT FØR DU GÅR TIL INNKJØP AV EN AKTIV SELE.



MONTERING AV DELUXE STÅSELE

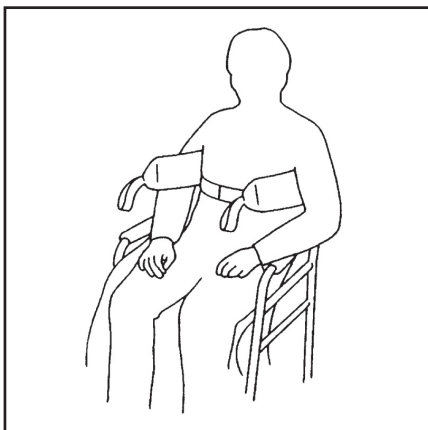

Plasser seilet bak brukers ryg mellom den nederste delen av skulderbladene og brystkassen. Fest stroppen rundt brukers brystkasse. Denne stroppen bør ikke være for stram. Stroppen brukes til å holde seilet på plass mens det festes til Løfteutstyret. Pass på at brukers armer er plassert på utsiden av seilet.

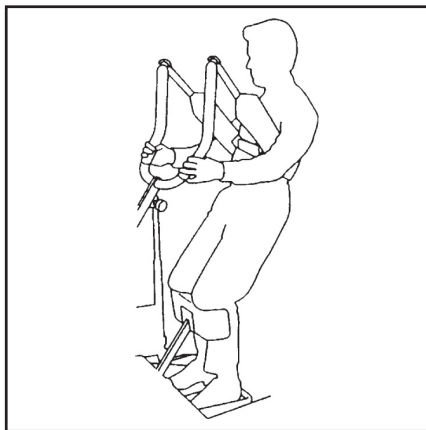

Plasser løfteren slik at brukers føtter hviler på fotbrettet og knærne hviler på kneputen. Fest de lange løkkene på seilet til de hvite krokene på enden av Standard-håndgrepene. Brukers hender bør plasseres på de sorte håndgrepene eller støttehåndtakene. (Når brukeren har vendt seg til løfteren, kan en mer oppreist stilling oppnås ved bruk av de korteste løkkene). Trykk på knappen på håndkontrollen for å løfte brukeren i oppreist stilling.

NB! Denne selen egner seg ikke for generell bruk og egner seg ikke for alle brukere!


BRUKSTIPS

BRUKEREN BØR BES OM Å LENE SEG BAKOVER OG INN MOT SELEN MENS HUN ELLER HAN LØFTES.


HØYE BRUKERE TRENGER KANSKJE Å BRUKE KORTERE LØKKER PÅ SELEN FRA BEGYNNELSEN AV.

SKULLE BRUKEREN BEGYNNE Å GLI, SLIK AT LØFTET FOREGÅR ETTER UNDERSIDEN AV VEDKOMMENDES ARMHULER, BØR TRANSPORTSELEN BRUKES.


MONTERING AV DELUXE TRANSPORTSELE

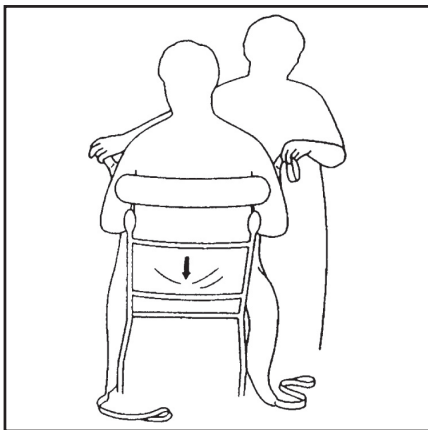


Skyv seilet ned bak ryggen på brukeren, med toppen på åpningen plassert nederst langs ryggraden. Kontroller at selen sitter rett over setepartiet.

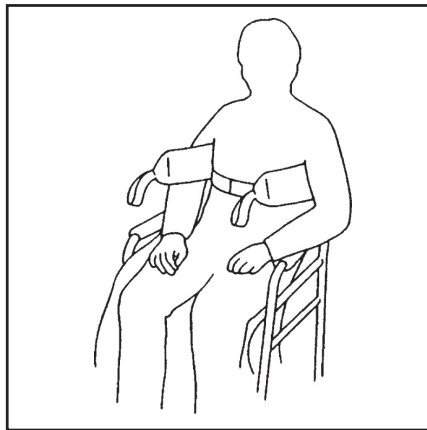

Fest stroppen rundt brukersens brystkasse. Denne stroppen trenger ikke være stram, den brukes til å holde seilet på plass mens det festes til Løfteutstyret. Pass på at brukersens armer er plassert på utsiden av seilet.

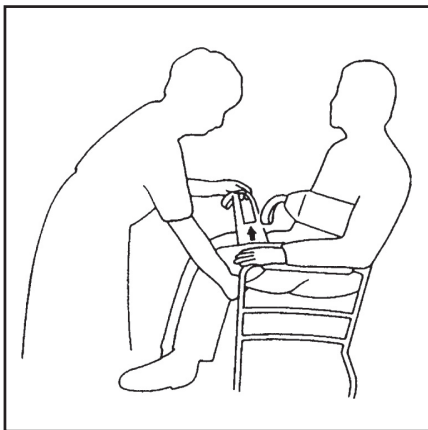

Hev brukersens bein og før stroppen under og opp mellom beina. Pass på at selen ikke er vridd eller brettet under pasientens lår. Gjenta prosessen med det andre benet. Fest stroppene på toppen av seilet til de hvite krokene på enden av håndgrepene.

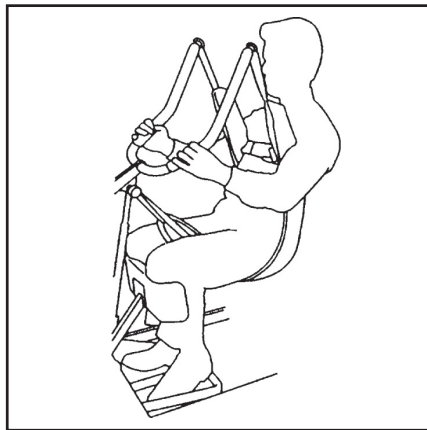

Uten å krysse løkkene på benstroppene, fest stroppene til de sorte krokene på høyre og venstre side av opphenget. Du vil i de fleste tilfeller kunne bruke den midterste av de tre løkkene. Da vil du være klar til å løfte brukeren fra setet og transportere vedkommende. Når brukeren er løftet opp fra setet, kan vedkommende gjøres mer komfortabelt ved å lenes tilbake i sittende stilling.

PASS PÅ AT BRUKERENS HODE ALLTID ER STØTTET GODT OPP.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR STANDAID DELUXE-SELEN

STANDARD	NS EN ISO 10535
MAKS BRUKERVEKT	170kg

STØRRELSER

Dette er en sele med én størrelse. Hvis du skulle få behov for tilpassede størrelser, bør du rådføre deg med en salgsrepresentant.

RENGJØRINGSINSTRUKSER

Hvert seil er markert med følgende rengjøringsinstrukser:

IKKE VASK MED BLEKEMIDDEL

Bleking vil ødelegge materialet. Selene kan bli ødelagt under vasking og tørking. Kontroller selen før hver gangs bruk. Blekede, opprevde, delvis kuttete, opprevlede eller slitte seler er usikre og kan medføre alvorlige helseskader eller livsfare for pasienten.

Ødelegg og kasser utslitte seler. Ikke foreta endringer på selene. Maskinvask varmt. Tørkes på lav temperatur i tørketrommel, lufttørkes eller tørkes ved meget lav temperatur.



BESTILLINGSKODE

DELUXE STÅSELE

13500N (Polyester)

DELUXE TRANSPORTELE

13501N (Polyester)

DISSE SELENE EGNER SEG TIL BRUK MED OXFORD AKTIVE LØFTERE



Sunrise Medical AS
Dynamitvn. 14B, 1400 Ski

Tlf: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80
www.sunrisemedical.no



Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS England
Tel: 01384 44 66 88
Fax: 01384 44 66 99
www.sunrisemedical.com

Part no. 374-90025N
Rev A