

KOMFORTSEIL


INKL. KOMFORTPUTE OG SECURI3-FESTESYSTEM
MONTERINGSINSTRUKSJONER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
RENGJØRINGSINSTRUKSER



BRUKSANVISNING FOR KOMFORTSEILET

Komfortseilet er en formet sele som er enkel å montere og som er konstruert for å passe til 85-90 % av brukerne. Det brukes sammen med firepunkts løftebøyle vugge som er konstruert for å posisjonere pasientene fra sittende eller tilbakelent stilling.


Seilet er tilgjengelig i fem størrelser - extra large, large, medium, small og barn.

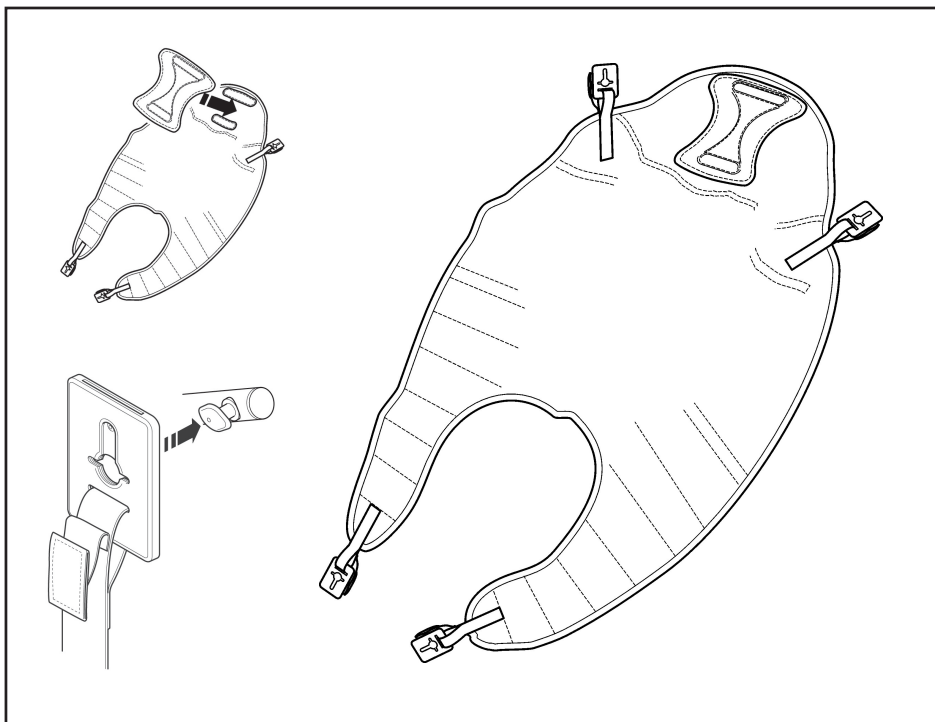

ANDRE SEIL KAN FÅS FOR Å DEKKE INDIVIDUELLE BEHOV. HUSK AT DU ALLTID BØR RÅDFØRE DEG MED EN SALGSREPRESENTANT FØR INNKJØP.




MONTERING I SITTEDE STILLING

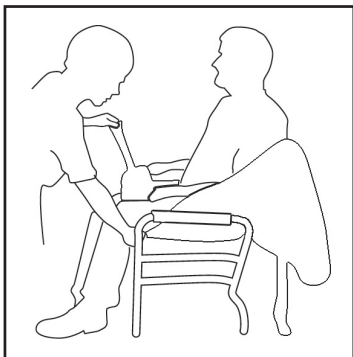

Komfortseilet monteres på brukeren på tradisjonelt vis. Montering fra sittende stilling krever at pleieren hever pasientens ben og fører benstøttedelen under og opp mellom bena på pasienten. Gjenta prosessen med det andre benet. Pass på at seilet ikke krølles eller brettes under brukerens lår. Før begge benstroppene sammen og før dem gjennom samlestroppen.

Plasser den bakre delen av seilet oppe ved og rundt skuldre og hode. Brukeren er nå klar til å løftes.

MONTERING AV SEILET FRA LIGGENDE STILLING

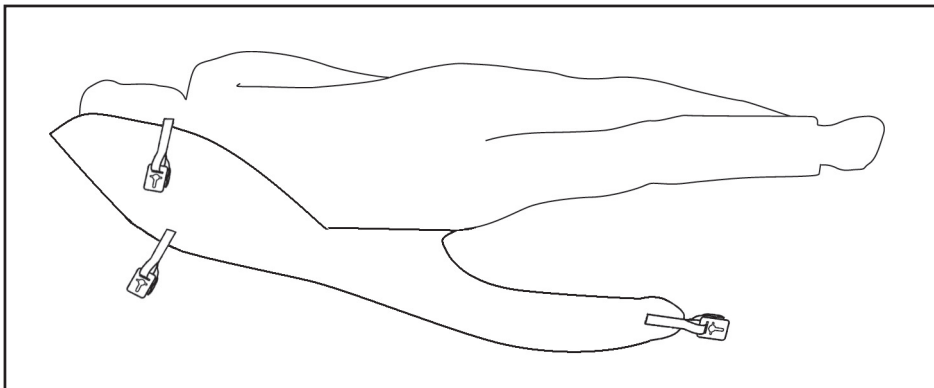


Flytt brukeren opp på seilet ved bruk av et stikklaken. Pass på at toalettstolåpningen er nederst langs ryggraden. Plasser løftebøylen som vist på motsatt side, og brukeren er klar for å løftes.



NYTTIGE RÅD

- 1. BRUKERENS STILLING KAN ENDRES DERSOM DREIEHÅNDTAKET PÅ LØFTEBØYLEN TRYKKES NED (SE MOTSAIT SIDE).**
- 2. FEST SECURI3-FESTENE TIL LØFTEBØYLEN SOM BESKREVET PÅ MOTSAIT SIDE.**
- 3. FORVISS DEG OM AT ALLE GRØNNE SIKKERHETSLØKKER ER SYNLIGE FØR LØFTING.**

FESTE SEILET TIL FIREPUNKTS LØFTEBØYLE

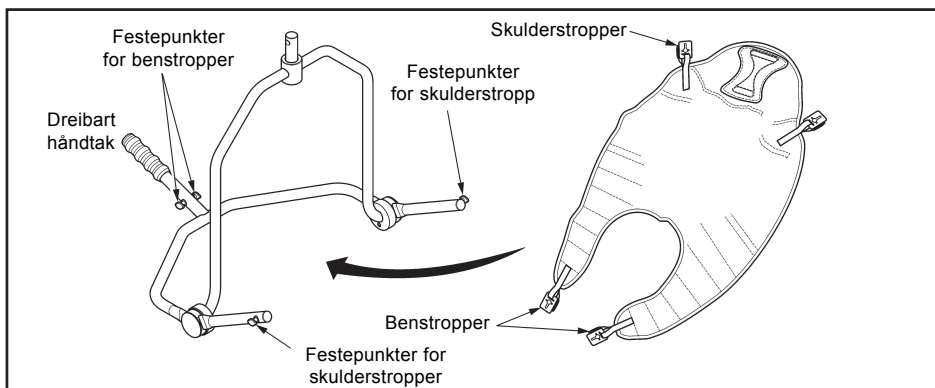

Når seilet er montert på brukeren, festes det til løftebøylen ved hjelp av festesystemet Securi3 (trinnvis veiledning følger). Ta av ved å følge denne fremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

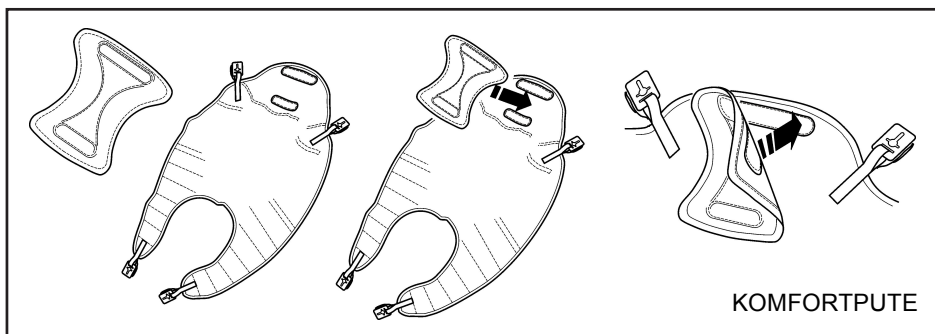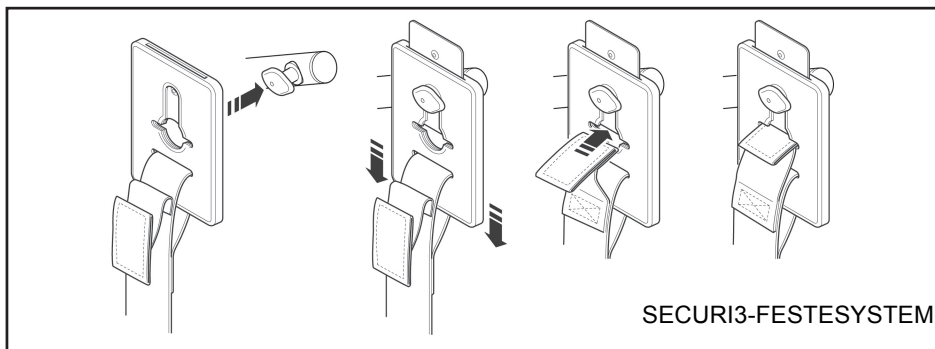


Komfortputen må brukes, da den gir brukeren ekstra komfort og støtte. Ikke løft uten at Komfortputen er i riktig stilling. Komfortputen fås i ulike tykkelser med økende støtte/komfort-nivå.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR KOMFORTSEILET

TEST STANDARD	NS-EN ISO 10535
MAKS. BRUKERVEKT	227kg

STØRRELSER

Hvert seil er markert med følgende fargekodede symboler, hvorav fire vil være strøket ut. Seilet din er den størrelsen som ikke er strøket ut; i dette eksempelet er det Small (Rød).

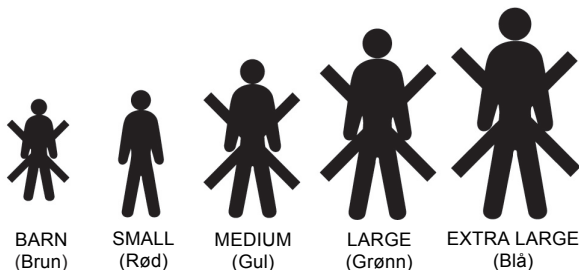

RENGJØRINGSINSTRUKSER

Hvert seil er merket med følgende rengjøringsinstrukser.

IKKE VASK MED BLEKEMIDDEL

Bleking vil ødelegge materialet. Seilet kan bli ødelagt under vasking og tørking. Kontroller seilet før hver gangs bruk. Blekede, opprevde, delvis kuttete, opptrevlede eller slitte seler er usikre og kan medføre alvorlige helseskader eller livsfare for pasienten.

Ødelegg og kasser utslitte seil. Ikke foreta endringer på seilet. Maskinvask varmt. Tørkes på lav temperatur i tørketrommel, lufttørkes eller tørkes ved meget lav temperatur.



BESTILL- NGSKODE		NO	Komfort (Polyester)	Komfort (Net)	Komfort Polstret (Polyester)
	BARN (BRUN)	SL	25501	25511	25506
	SMALL (RØD)	SL	25502	25512	25507
	MEDIUM (GUL)	SL	25503	25513	25508
	LARGE (GRØNN)	SL	25504	25514	25509
	EXTRA LARGE (BLÅ)	SL	25505	25515	25510



Sunrise Medical AS
Dynamitvn. 14 b, 1400 Ski

Tlf: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80
www.sunrisemedical.no



Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS England
Tel: 01384 44 66 88
Fax: 01384 44 66 99
www.sunrisemedical.com

Part no. 374-90055N
Rev A