


LØFTESEIL M/HODESTØTTE

MONTERINGSINSTRUKSJONER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
RENGJØRINGSINSTRUKSER

BRUKSANVISNING FOR LØFTESEIL M/HODESTØTTE


Løfteseil m/hodestøtte er et formet seil som er enkel å montere og som er konstruert for å passe til 85-90 % av brukerne. Det er konstruert for bruk som det tradisjonelle Løfteseilet, men det gir mer komfort og fjerner behovet for sidestropper. Det er utstyrt med en hel, stivet nakkestøtte og beinpolstring som standard. Seilet finnes i fem størrelser - extra large, large, medium, small og barn.

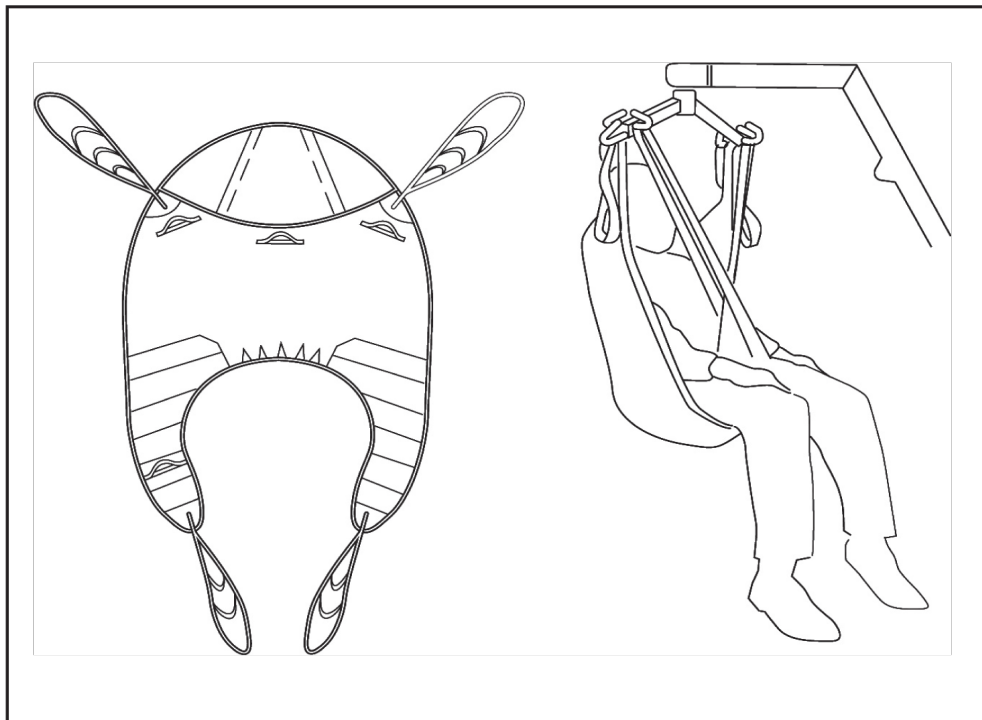


ANDRE SEIL KAN FÅS FOR Å DEKKE INDIVIDUELLE BEHOV. HUSK AT DU ALLTID BØR RÅDFØRE DEG MED EN SALGSREPRESENTANT FØR INNKJØP.




MONTERING I SITTEDE STILLING

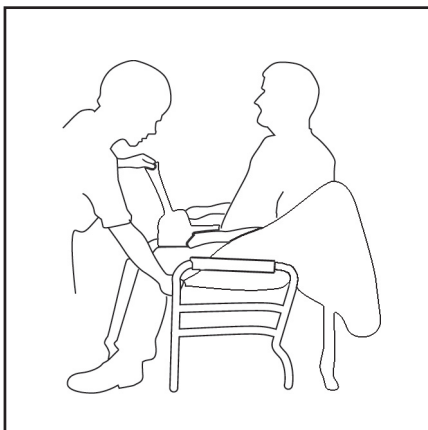

Løft brukerens bein og trekk den polstrede beinstroppen under og opp mellom beina. Pass på at seilet ikke er vridd eller brettet under pasientens lår. Gjenta prosessen med det andre benet.

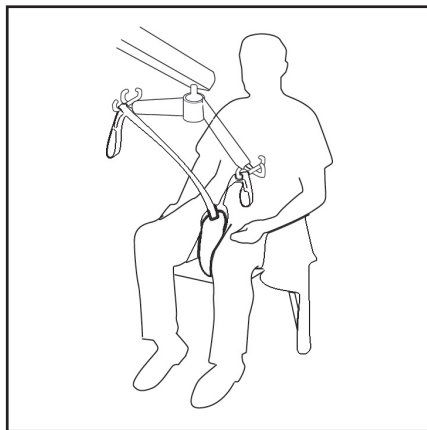

Trekk den høyre beinstøtten gjennom stroppen på den venstre beinstøtten. Kryss beinstroppene ved å trekke den ene beinstroppen gjennom den andre, og fest dem deretter til krokene foran på heisen.

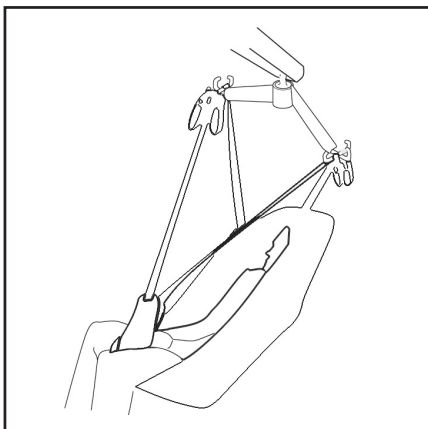


Hev heisen til passende høyde og fest skulderstroppene slik vist. Brukeren kan nå heises til ønsket høyde. Når brukeren settes ned igjen, kan håndtaket bak på seilet brukes for å gi en god sittestilling.

NYTTIGE RÅD


- 1. SETT IKKE PÅ BREMSENE PÅ HEISEN MED MINDRE GULVET HELLER.**
- 2. BRUKERENS STILLING KAN ENDRES VED Å JUSTERE BEGGE SKULDERSTROPPENE.**
- 3. HVIS DU ER I TVIL, FEST SKULDERSTROPPENE TIL DE FARGEDE LØKKENE.**
- 4. LA BEGGE SKULDERSTROPPENE VÆRE LIKE LANGE.**

MONTERING AV SEILET FRA LIGGENDE STILLING

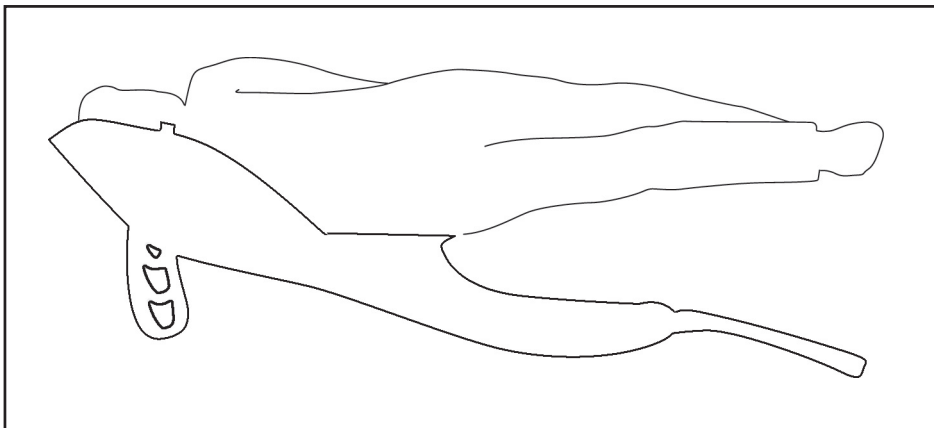

Flytt brukeren opp på seilet ved bruk av et stikkklaken. Pass på at toalettstolåpningen er sentrert nederst langs ryggraden.

Trekk stroppene for beinstøtten opp og mellom brukerens bein, og fest de korteste løkkene slik som i fremgangsmåten for sittende stilling. NB: Hvis brukeren skal heises opp på en høy seng, kan det være nødvendig å sette brukeren ned på et mellomtrinn for å justere lengden på stroppene.

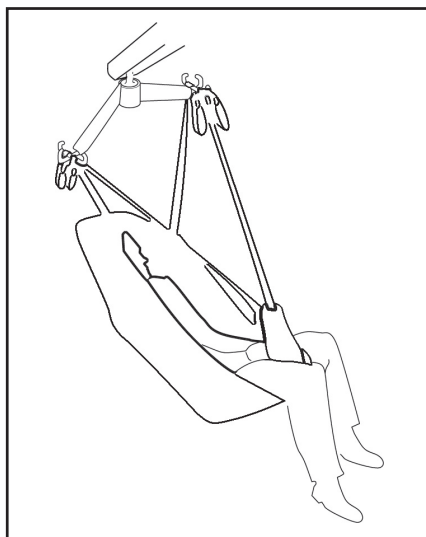

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR LØFTESEIL M/HODESTØTTE

TEST STANDARD	NS-EN ISO 10535
MAKS. BRUKERVEKT	227kg

STØRRELSER

Hvert seil er markert med følgende fargekodede symboler, hvorav fire vil være strøket ut. Seilet din er den størrelsen som ikke er strøket ut; i dette eksempelet er det Small (rød).



BARN
(Brun)

SMALL
(Rød)

MEDIUM
(Gul)

LARGE
(Grønn)

EXTRA LARGE
(Blå)

RENGJØRINGSINSTRUKSER

Hvert seil er merket med følgende rengjøringsinstrukser.

IKKE VASK MED BLEKEMIDDEL

Bleking vil ødelegge materialet. Seilet kan bli ødelagt under vasking og tørking. Kontroller seilet før hver gangs bruk. Blekede, opprevde, delvis kuttete, opptrevlede eller slitte seler er usikre og kan medføre alvorlige helseskader eller livsfare for pasienten.

Ødelegg og kasser utslitte seil. Ikke foreta endringer på seilet. Maskinvask varmt. Tørkes på lav temperatur i tørketrommel, lufttørkes eller tørkes ved meget lav temperatur.



		NO	
BESTILLINGSKODE	BARN (BRUN)	SL	1067 (Polyester)
	SMALL (RØD)	SL	1068 (Polyester)
	MEDIUM (GUL)	SL	1069 (Polyester)
	LARGE (GRØNN)	SL	1070 (Polyester)
	EXTRA LARGE (BLÅ)	SL	1071 (Polyester)



Sunrise Medical AS¹
Dynamitvn.14 b
1400 Ski

T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no



Part no. 374-90060N
Rev A