

LØFTESEIL U/HODESTØTTE




MONTERINGSINSTRUKSJONER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
RENGJØRINGSINSTRUKSER



BRUKSANVISNING FOR LØFTESEIL U/HODESTØTTE


LØFTESEIL U/HODESTØTTE er enkel å montere, egnet for generell bruk og som er konstruert for å passe til ca. 85 % av brukerne. Den fås også med hodestøtte og kan fores med filt for å være enda mer komfortabel. Den finnes i fem størrelser, pediatric, small, medium, large og extra large. For å oppnå større komfort anbefaler vi å bruke sidebøyler, som vist i illustrasjonene på side 2.

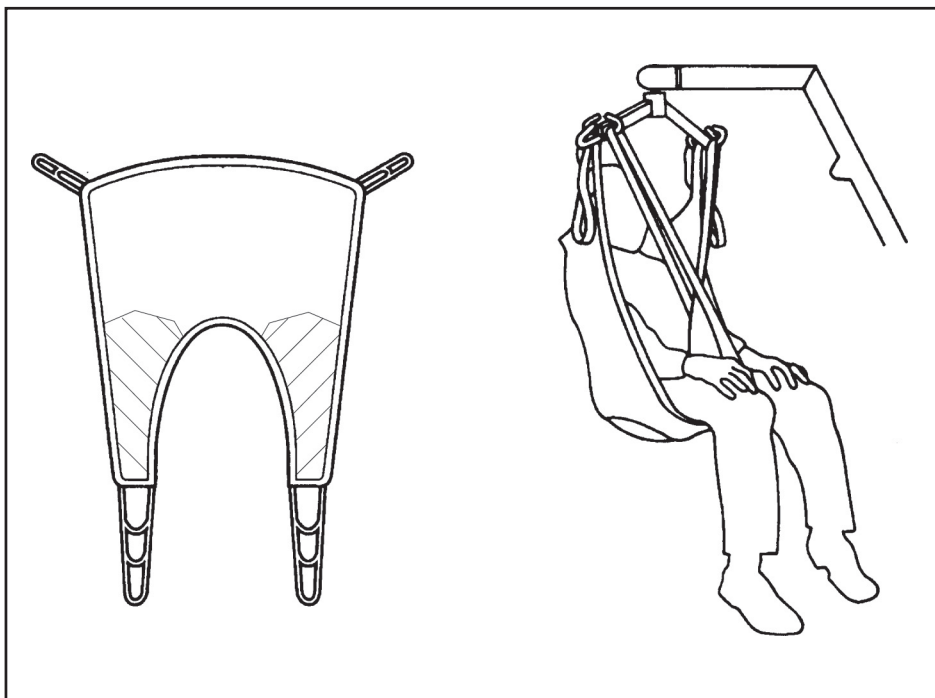


ANDRE SEIL KAN FÅS FOR Å DEKKE INDIVIDUELLE BEHOV. HUSK AT DU ALLTID BØR RÅDFØRE DEG MED EN SALGSREPRESENTANT FØR INNKJØP.




MONTERING I SITTEDE STILLING

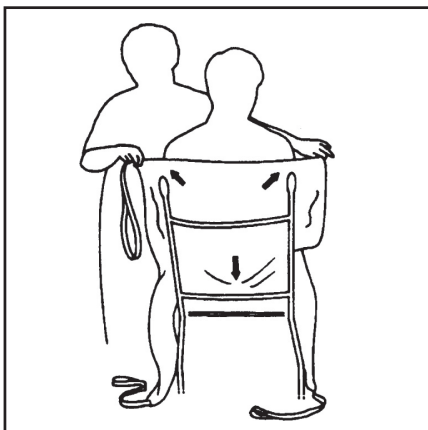


Pass på at håndtakene og sømmene på seilet peker utover. Før seilet ned langs ryggen til pasienten, slik at den øverste delen av toalettåpningen befinner seg ved nedre del av ryggraden. Kontroller at seilet sitter rett over skuldrene.

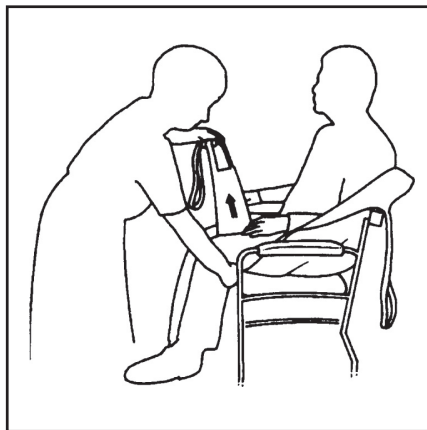

Hev brukerens bein og før stroppen under og opp mellom beina. Pass på at seilet ikke er vridd eller brettet under pasientens lår. Gjenta prosessen med det andre benet.

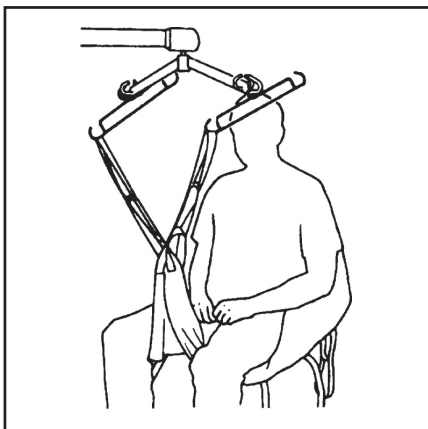


Kryss beinstroppene og fest dem til løfteren på krokene foran med den lengste løkken. For å oppnå større komfort anbefaler vi å bruke sidebøyler, som vist.

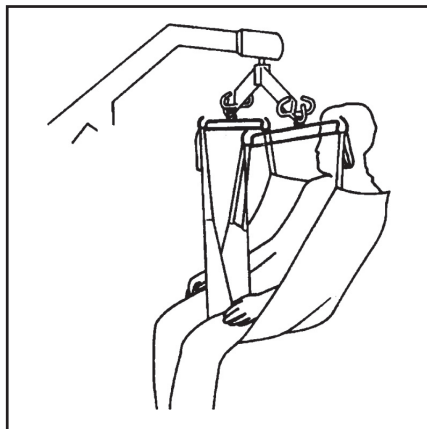


Kontroller at seilet ligger glatt under pasienten og at stillingen er komfortabel. Flytt løfteren til riktig stilling og fest beinstroppene ved den nest sistes løkken. Hev løfteren og fest de korte løkkene ved skulderen for å holde brukeren i en oppreist sittestilling. Det kan være at løfteren flytter seg mot brukeren når du gjør dette. Når brukeren settes ned på nytt, kan håndtakene brukes for å oppnå en god stilling.

GYLDEN REGEL: LANGT VED BEINA, KORT VED SKULDRENE

ALTERNATIV SITTEDE STILLING

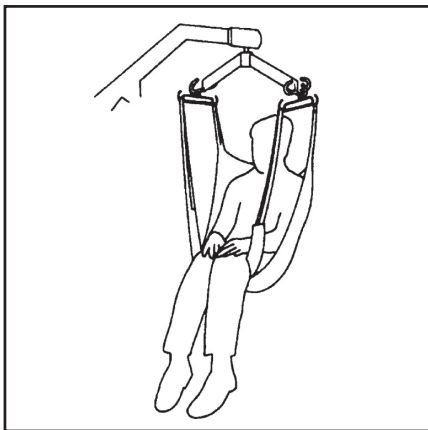


Hvis pasienten sitter med beina sammen, kan stroppene krysses under begge beina og festes slik som vist i diagrammet. Dette vil gi ekstra komfort og kan brukes på enkelte amputerte.

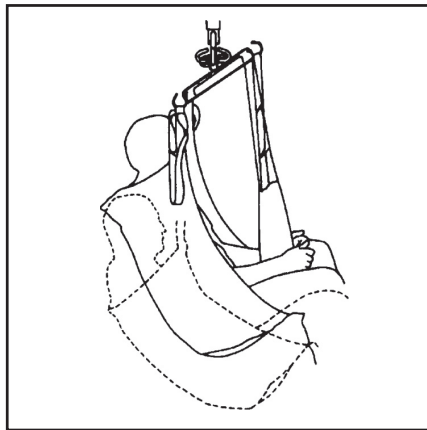


Lengre skulderstropper vil gjøre at brukeren sitter mer tilbakelent.

MONTERING I LIGGENDE STILLING

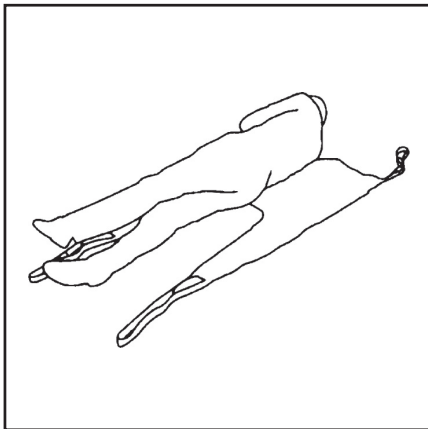

Flytt brukeren opp på seilet ved bruk av et stikkklaken. Pass på at toalettåpningen er nederst langs ryggraden.

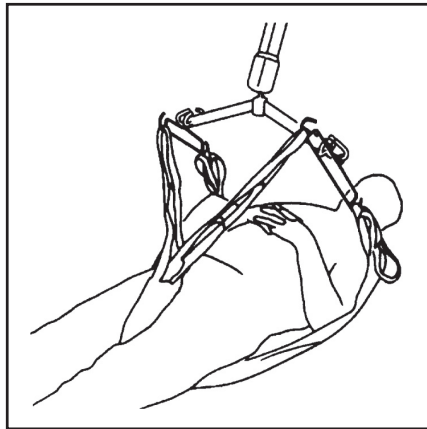

Kryss beinstroppene mellom beina og fortsett med å feste seilet som ved sittende stilling, med en så kort skulderstropp som mulig. Lengre skulderstropper vil gjøre at brukeren sitter mer tilbakelent.


PASS PÅ AT BRUKERENS HODE ALLTID ER STØTTET GODT OPP

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR LØFTESEIL U/HODESTØTTE

TEST STANDARD	NS-EN ISO 10535
MAKS. BRUKERVEKT	227kg

STØRRELSER

Hvert seil er markert med følgende fargekodede symboler, hvorav fire vil være strøket ut. Seilet din er den størrelsen som ikke er strøket ut; i dette eksempelet er det Small (rød).

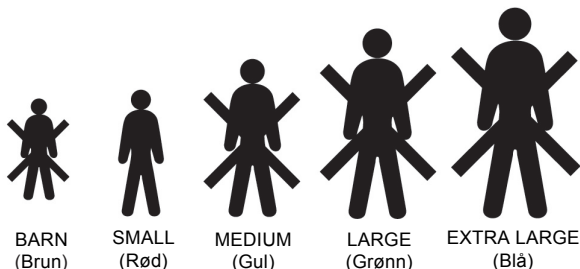

RENGJØRINGSINSTRUKSER

Hvert seil er merket med følgende rengjøringsinstrukser.

IKKE VASK MED BLEKEMIDDEL

Bleking vil ødelegge materialet. Seilet kan bli ødelagt under vasking og tørking. Kontroller seilet før hver gangs bruk. Blekede, opprevde, delvis kuttete, opptrevlede eller slitte seler er usikre og kan medføre alvorlige helseskader eller livsfare for pasienten.

Ødelegg og kasser utslitte seil. Ikke foreta endringer på seilet. Maskinvask varmt. Tørkes på lav temperatur i tørketrommel, lufttørkes eller tørkes ved meget lav temperatur.



BESTILL- NGSKODE		NO	Løfteseil (polyester)	Løfteseil (bad/dusj)	Løfteseil polstret (polyester)
	BARN (BRUN)	SL	Spesial	Spesial	1002P
	SMALL (RØD)	SL	1000	1001	1000P
	MEDIUM (GUL)	SL	1003	1004	1003P
	LARGE (GRØNN)	SL	1006	1007	1006P
	EXTRA LARGE (BLÅ)	SL	Spesial	Spesial	1008P

HVIS DU TRENGER SIDEBØYLER, MÅ DU FØYE TIL EN "C" TIL VARENUMMERET



Sunrise Medical AS
Dynamitvn. 14B, 1400 Ski

Tlf: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80
www.sunrisemedical.no



Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands DY8 4PS England
Tel: 01384 44 66 88
Fax: 01384 44 66 99
www.sunrisemedical.com

Part no. 374-90006N
Rev A